

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ОТТО БОКК Сервис»

О. Якоби

2009 г.

М.П.

Техническое средство реабилитации инвалидов

**Система ортопедических подушек для раннего развития
двигательной активности и сидения «Ирли активити систем»,
«Ирли ситтинг систем»**

Руководство по эксплуатации



Назначение


Технические средства реабилитации инвалидов: система ортопедических подушек для раннего развития двигательной активности и сидения детей-инвалидов «Ирли активити систем», «Ирли ситтинг систем» предназначены для раннего развития двигательной активности детей-инвалидов и детей с задержкой психического и моторного развития в возрасте до 36 месяцев. Служит для фиксации, поддержки и тренировки ребенка в разных положениях (лежа на спине, животе, боку, сидя с вытянутыми ногами, стоя на четвереньках), что обеспечивает ребенку осуществление игровой деятельности и проведение реабилитационных мероприятий.

Сертификат соответствия

Как изготовитель фирма Джеймс Леки Дизайн Лтд» заявляет со всей ответственностью, что система ортопедических подушек для раннего развития двигательной активности и сидения детей-инвалидов «Ирли активити систем», «Ирли ситтинг систем» соответствует всем требованиям EWG 93/42.

Описание изделия и принцип действия

В комплект системы ортопедических подушек для раннего развития двигательной активности и сидения детей-инвалидов «Ирли активити систем», «Ирли ситтинг систем» входят: напольный коврик или пластиковое основание с мягкой обивкой, подушка для сидения под спину, подушка под голову, подушки-ролики разной длины, абдуктор, подушка под грудной отдел, учебное пособие по использованию. Для приведения изделия в рабочее состояние достаточно удалить упаковку и закрепить соответствующие подушки с застежками из липкой ленты Велькро на коврике в зависимости от вида двигательной активности, которую собирается предпринять ребенок (см. фото).

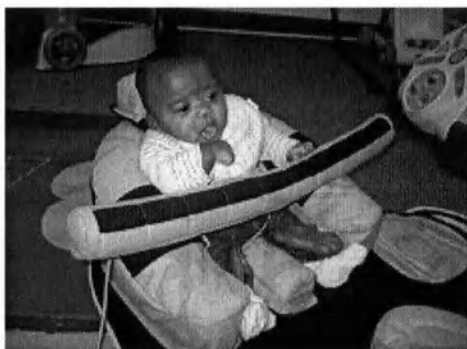



Комплекс упражнений, рекомендованных детскими врачами-специалистами, который можно осуществлять при помощи данного вида технического средства реабилитации, приведен в учебном пособии, входящим в комплект поставки.

Уход за изделием

Система ортопедических подушек для раннего развития двигательной активности и сидения детей-инвалидов «Ирли активити систем», «Ирли ситтинг систем» состоит из высококачественного текстиля (100% Polyester PU Nylon) с антибактериальной пропиткой и пластиковых ребер жесткости.

При чистке рекомендуется использовать теплую воду 40 °С с неабразивными чистящими средствами. Если Вы хотите отстирать биологические жидкости (кровь, моча и т.д.) рекомендуется использовать холодную воду. Если ткань сильно загрязнена, обработайте ее чистящими средствами за некоторое время до стирки.

Никогда не используйте органические растворители или жидкости химической чистки.

Во время стирки выньте пластиковые ребра жесткости.

Для дезинфекции данного изделия рекомендуется использовать дезинфицирующие вещества с содержанием хлора, не превышающим 10%.

Технические характеристики:

Возраст (макс)	36 месяцев
Вес (макс)	15 кг
Рост ребенка (макс)	100 см
Размер напольного основания	76 см x 95 см
Подушка для сидения под спину	19 см x 30 см x 20-25 см
Подушки-ролики	60 см, 70 см
Подушка под грудной отдел	27 см x 20 см x 7,5°

Условия гарантии

- 1) Гарантия на изделие на производственные дефекты предоставляется на 2 года.
- 2) Во время действия гарантии некондиционные или бракованные детали ремонтируются или заменяются при предоставлении товарных документов и письменной рекламации бесплатно (согласно п.1).
- 3) Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами без предварительного согласия фирмы-изготовителя.
- 4) Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования коляски.
- 5) Гарантия прекращает свое действие, если при ремонте использовались не оригинальные запасные части.
- 6) Гарантия также прекращает свое действие, если монтирование оригинальных деталей или конструктивные изменения проводились не уполномоченной изготовителем фирмой или не самим изготовителем.
- 7) Во время действия гарантии заменяемые детали являются собственностью фирмы-изготовителя.

Производитель: компания «Джеймс Леки Дизайн Лтд»,
Великобритания, BT17 0HD Белфаст, Данмарри, Килви Бизнес Парк
Телефон: +44(0)28 9060 2277
Факс: +44 (0)28 9060 0795
e-mail: info@leckey.com
Internet: www.leckey.com

Поставщик: ООО «ОТТО БОКК Сервис»
119334 Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр. 16
Тел.: (495) 564 83 60
Факс: (499) 564 83 63
E-mail: info@ottobock.ru
[http:// www.ottobock.ru](http://www.ottobock.ru)