




SEELER & DR. FELLMETH
NOTARE

NOTARE SEELER & DR. FELLMETH - Q7 23 - 68161 MANNHEIM

Beglaubigte Abschrift

Die Übereinstimmung nachstehender Fotokopie mit der vorgelegten Urschrift wird hiermit beglaubigt.

Mannheim 26.09.2018

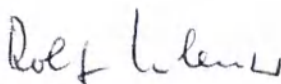

Rolf Glenz
Notarvertreter der Notarin
Claudia Seeler





T1101122.0

CARDIAC POC Troponin T Control

Roche CARDIAC POC Troponin T Control



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

(INSTRUCTION FOR USE)

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения сердечного тропонина Т в крови для экспресс-анализатора иммунохимического «Кобас h 232» (Cobas h 232) (Roche CARDIAC POC Troponin T Control)

производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany

РАЗРАБОТЧИК:

Roche Diagnostics GmbH, "Рох Диагностикс ГмбХ", Германия.
Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany

Approved by

Roche Diagnostics GmbH

Date: 25 September 2018

Dr. Manfred Böhm

Manager Global Regulatory Affairs

Roche Diagnostics GmbH
Stamp Sandhofer Straße 116
D-68305 Mannheim

2018

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany; Telefon +49-621-759-0; Telefax +49-621-759-2890

Sitz der Gesellschaft, Mannheim - Registergericht: AG Mannheim HRB 3962 - Geschäftsführung: Dr. Ursula Redeker, Sprecherin; Edgar Vieth -
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Severin Schwan



07001923

Roche CARDIAC POC Troponin T Control cobas®

Roche CARDIAC POC Troponin T Control

REF 07089643 190

2 x → 1.0 мл

[SYSTEM] cobas h 232

Русский

Значение

Roche CARDIAC POC Troponin T Control используется для контроля качества теста Roche CARDIAC POC Troponin T на приборе cobas h 232.

Общая информация

Roche CARDIAC POC Troponin T Control используется для контроля достоверности и точности. Каждый набор Roche CARDIAC POC Troponin T Control состоит из двух флаконов с лиофилизированными контролями на основе сыворотки крови человека, содержащей повышенные количества тропонина T.

Реагенты - рабочие растворы

- 2 флакона лиофилизированной контрольной сыворотки, для приготовления 1.0 мл
- Раствор, приготовленный на основе сыворотки крови человека, содержащий компоненты человеческого происхождения
- Активные ингредиенты: тропонин T крупного рогатого скота. Концентрации компонентов определяются отдельно для каждой партии товара.

Точные целевые значения и диапазоны концентраций компонентов приведены в предоставленном кодовом чипе.

Меры предосторожности и предупреждения

Только для диагностики in vitro.

Соблюдайте обычные меры предосторожности, необходимые для работы со всеми лабораторными реагентами.

Утилизация использованных материалов должна проводиться в соответствии с локальными правилами ликвидации отходов. Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.

Этот набор содержит компоненты, классифицируемые следующим образом в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008:

2-метил-2Н-изотиазол-3-один гидрохлорид.

EUN208 Может вызывать аллергическую реакцию.

Маркировка о безопасности продукта соответствует руководству EU GHS.

Все материалы человеческого происхождения должны рассматриваться как потенциально инфицированные. Все материалы, полученные из крови человека, изготовлены исключительно из крови доноров, тестированных в индивидуальном порядке, у которых не были обнаружены поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), антитела к вирусу гепатита С и к ВИЧ. Методы тестирования, используемые анализами, были одобрены Управлением США по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA) или уточнены в соответствии с Директивой ЕС 98/79/ЕС, Приложение II, Список А.

Однако, так как ни один метод тестирования не позволяет полностью исключить потенциальный риск инфицирования, с материалом следует обращаться так же осторожно, как и с взятым у пациента образцом. В случае контакта с источником возможного инфицирования необходимо следовать директивам ответственных органов здравоохранения.^{1,2}

Приготовление рабочего раствора

Растворите содержимое одного флакона, добавив ровно 1.0 мл дистиллированной или деионизированной воды. Закройте флакон и оставьте его на 15 минут для растворения. Осторожно перемешайте, избегая образования пены.

Хранение и стабильность

Хранить при 2-8 °C.

Стабильность лиофилизированной контрольной сыворотки при 2-8 °C: до конца срока годности.

Стабильность компонентов растворенной контрольной сыворотки:

- при 15-25 °C: до 24 часов
- при 2-8 °C: 3 дня
- при -20 °C: 8 недель (может быть заморожен до 4 раз в оригинальной пробирке)

Храните контрольные компоненты в плотно закупоренных емкостях, когда они не используются.

Предоставляемые материалы

- Roche CARDIAC POC Troponin T Control
- 1 чип с кодом

Необходимые материалы (не предоставляемые с тест-системой)

- [REF] 07007302190, Roche CARDIAC POC Troponin T
- [REF] 11622889190, Roche CARDIAC Pipettes, 20 одноразовых шприцев (150 мкл)
- [REF] 04901126190, прибор cobas h 232, версия программного обеспечения ≥ 03.00.02, серийный номер ≥ KQ0120000
- [REF] 04901142190, прибор cobas h 232 со сканером, версия программного обеспечения ≥ 03.00.02, серийный номер ≥ KS0210000
- Общее лабораторное оборудование
- Дистиллированная или деионизированная вода

Анализ

Для проведения теста Roche CARDIAC POC Troponin T внесите необходимый объем контроля в тестовую зону и проанализируйте таким же образом, как образец цельной крови.

Объем образцов: 150 мкл

Следуйте инструкциям к тесту, приведенным в инструкции по проведению теста Roche CARDIAC POC Troponin T.

Перед использованием замороженный или хранившийся в холодильной камере восстановленный контрольный материал должен быть доведен до комнатной температуры.

Целевые значения и диапазоны

Процедура определения целевого значения: Серии со значительным числом определений анализируются на различных приборах cobas h 232.

В качестве целевого значения рассчитывается медиана.

Соответствующий диапазон для контрольных значений основан на уровне достоверности 95 %.

Контрольные интервалы должны быть адаптированы в соответствии с требованиями конкретной лаборатории. При этом полученные величины должны находиться в пределах допустимых отклонений. Каждая лаборатория должна выработать правила, позволяющие принять корректирующие меры в случае, если значения выходят за установленные пределы.

Калибровка

Каждый набор Roche CARDIAC POC Troponin T Control содержит специфичный для серии чип с кодом.

Для каждой новой серии кодовый чип должен быть прочитан прибором один раз. Запрос на вставление данного кодового чипа выводится на дисплей прибора. Соответствие кодового чипа и серии контроля может быть проверено путем сравнения номера серии на дисплее с данными, напечатанными на кодовом чипе. Кодовый чип содержит всю зависящую от серии информацию, необходимую для прибора cobas h 232, а также целевые диапазоны значений, необходимые для оценки. В случае, если в прибор вставлен не соответствующий обсуждаемой серии контроля кодовый чип, на дисплее появляется сообщение об ошибке.

Список литературы

- 1 Occupational Safety and Health Standards: Bloodborne pathogens. (29 CFR Part 1910.1030). Fed. Register.
- 2 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work.

Для получения дальнейшей информации смотрите, пожалуйста, соответствующее руководство по эксплуатации инструмента и руководства по использованию всех необходимых компонентов. Точка в данной инструкции всегда используется для разделения десятичных разрядов, чтобы отметить границу между целыми и

08/2017 V2.0

CARDIAC POC Troponin T Control cobas®

Roche CARDIAC POC Troponin T Control

робными частями десятичного числа. Разделители для групп разрядов не используются.

Символы

В дополнение к перечисленным в стандарте ISO 15223-1, Roche Diagnostics применяет следующие символы и знаки (для США: см. <https://usdiagnostics.roche.com> для определения используемых символов)

CONTENT

Состав набора

SYSTEM

Анализаторы/приборы, на которых могут быть использованы реагенты



Объем после восстановления или смешивания

GTN

Номер в системе международной торговли

Дополнения, удаления или изменения информации на индикаторе изменений в тексте.

© 2017 Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Grenzach-Wyhlen 78165, D-68305, Мангейм
www.roche.com



CARDIAC POC Troponin T Control cobas®

Roche CARDIAC POC Troponin T Control

Приложение 1 (Раздел специально предназначен для инструкции по применению на русском языке.)

Roche CARDIAC POC Troponin T Control, Level 2: 5,5 - 6,4 (в виде водного раствора)

Стабильность

Набор контрольных материалов при 2-8 °C стабилен до конца срока годности, (максимально 18 мес. с даты производства. Дату производства см в сертификате анализа). Срок годности см на упаковке.

Комплект поставки

Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения сердечного тропонина Т в крови для экспресс-анализатора иммунохимического «Кобас h 232» (Cobas h 232) (Roche CARDIAC POC Troponin T Control)

Состав:

1. Контрольная сыворотка, уровень 2 (Level 2), объем 1,0 мл (2 шт.).
2. Чип с кодом.
3. Инструкция по применению.

Упаковка

Упаковка с набором контрольных материалов Roche CARDIAC POC Troponin T Control представляет собой картонную коробку, содержащую:

- контрольную сыворотку, уровень 2 (Level 2), флакон объемом 1,0 мл (2 шт.)
- кодовый чип
- инструкцию по применению

Первичная упаковка: флакон

Объем пустого флакона: не более 3 мл.

Параметры флакона с контрольной сывороткой:

Материал: стекло (флакон), полипропилен (крышка), резина (пробка).

Контрольная сыворотка, уровень 2 (Level 2) (Roche CARDIAC POC Troponin T Control), объем сыворотки после восстановления 1,0 мл, во флаконе (2 шт.) – крышка флакона красного цвета

Габаритные размеры флакона (ширина x высота): не более 17,5±0,2 мм x 39,5±0,5 мм.

Толщина стенки: не менее 0,5 мм.

Габаритные размеры крышек флаконов:

Внешний диаметр: 16,4 мм

Высота: 12,0 ± 0,15 мм

Габаритные размеры пробки флакона (длина x ширина): не более 12,0±0,2 мм x 12,0±0,2 мм.

Параметры кодового чипа:

Размеры (длина x ширина x высота): не более 23 x 13 x 3 мм.

Упаковка: пакет (размеры (длина x ширина): не более 77 x 69 мм.

Вторичная упаковка: картонная коробка (размеры (длина x ширина x высота): не более 139 x 60 x 85 мм.

Вес: не более 110 г.

Все размерные допуски выполнены согласно ISO 2768-mk, ISO 8015 и DIN 16901-150.

Упаковка изделий обеспечивает достаточную защиту от механических, климатических воздействий при условии

соблюдения правил транспортировки. Изделие упаковано герметично.

Маркировка

В соответствии с ДИРЕКТИВАМИ ЕС Roche Diagnostics использует следующие символы и знаки:

Символ	Определение	Символ	Определение
	Внимание, см. инструкцию по применению		Только для диагностики in vitro
	Номер по каталогу		Номер лота
	Производитель		Срок годности
	Знак CE		Состав
	Температурные ограничения		Знак биологической опасности
	Контроль		Глобальный номер предмета торговли
	Объем после восстановления или смешивания		

Маркировка картонной упаковки

1. Наименование изделия
2. Наименование аналитической системы
3. Номер по каталогу
4. Название и адрес производителя
5. Страна происхождения
6. Логотип производителя
7. Состав
8. Контроль
9. Только для диагностики in vitro
10. CE-маркировка
11. Знак биологической опасности
12. Температурные ограничения
13. Внимание, см. инструкцию по применению
14. Внимание, см. инструкцию по применению, ссылка на электронную инструкцию на русском языке
15. Штрих-код
16. Глобальный номер предмета торговли (GTIN)
17. Номер лота
18. Срок годности
19. QR – код

Маркировка флакона с контрольным материалом

1. Наименование изделия
2. Номер по каталогу
3. Штрих-код
4. Объем после восстановления или смешивания
5. Знак биологической опасности
6. Только для диагностики in vitro
7. Логотип производителя
8. Температурные ограничения
9. Номер лота
10. Срок годности

CARDIAC POC Troponin T Control cobas®

Roche CARDIAC POC Troponin T Control

Приложение 1 (Раздел специально предназначен для инструкции по применению на русском языке.)

Макет маркировки на русском языке:

Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения сердечного тропонина Т в крови для экспресс-анализатора иммунохимического «Кобас h 232» (Cobas h 232) (Roche CARDIAC POC Troponin T Control)

Состав:

1. Контрольная сыворотка, уровень 2 (Level 2), объем 1,0 мл (2 шт.).
2. Чип с кодом.
3. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно максимально 18 мес. с момента производства, дату изготовления см. в сертификате анализа)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031 Москва, Трубная площадь, д. 2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62 64 E-mail: moscow.esser@roche_dia@roche.com

Кат. номер 07089641190

Требования к маркировке групповой упаковки (транспортной тары), установленные изготовителем

Товар с транспортной (групповой) маркировкой упаковки используется только для перемещения изделия с производственной площадки до собственного склада производителя на территории страны изготовителя. Т.о. товар с транспортной маркировкой не поставляется на территорию РФ. На транспортной маркировке указаны сведения, имеющиеся на регулярной маркировке, в том числе дата производства продукта фиксирована.

Условия транспортировки

Перед отправкой с завода продукт проходит контрольные проверки. Международные символы на упаковке и специальные инструкции по обращению указывают транспортировщику, как следует обращаться с этим продуктом. При получении продукта внимательно осмотрите упаковку. При наличии любых следов неправильного обращения или повреждения немедленно обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ") или к региональному поставщику. Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Температура при транспортировке 2-8 °C.

Стерилизация

Изделие поставляется нестерильным. Не подлежит повторному использованию и/или стерилизации пользователем.

Требования к охране окружающей среды

Медицинское изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду при соблюдении условий применения и мер предосторожности, указанных в инструкции.

Утилизация

Во избежание возможного загрязнения окружающей среды Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения сердечного тропонина Т в крови для экспресс-анализатора иммунохимического «Кобас h 232» (Cobas h 232) (Roche CARDIAC POC Troponin T Control) с истекшим сроком годности, а также отходы

использованных реагентов, контрольных материалов должны утилизироваться в соответствии с местными государственными и / или больничными нормативными требованиями.

Правильное уничтожение и утилизация будет поддерживать сохранение природных ресурсов и содействовать защите здоровья человека и окружающей среды.

Утилизация отходов упаковки.

Упаковка продукции «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ") разработана с целью сведения к минимуму загрязнения окружающей среды при сохранении целостности продукта во время транспортировки и хранения. Упаковочные отходы должны утилизироваться в местных пунктах сбора упаковки, в специализированные контейнеры, расположенные в муниципалитетах.

Утилизация изделия с истекшим сроком годности и отходов, использованных реагентов.

При утилизации и уничтожении изделий с истекшим сроком годности, а также отходов, использованных реагентов, необходимо действовать в соответствии с гигиеническими нормативами и следовать официальным инструкциям по утилизации и уничтожению потенциально инфекционного и химического материала, принятым на территории Российской Федерации и в данном ЛПУ.

Ключевыми вопросами в стратегии управления отходами является оптимизация тактик и подходов к конечным продуктам, а также минимизация возможного загрязнения окружающей среды.

Более подробную информацию можно получить у производителя / уполномоченного представителя производителя.

Утилизация должна проводиться в соответствии с местными нормами законодательства, а также в соответствии с протоколами медицинского учреждения, где используются данные медицинские изделия.

Не утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Гарантийные обязательства

Производитель (компания «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ")) гарантирует, что Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения сердечного тропонина Т в крови для экспресс-анализатора иммунохимического «Кобас h 232» (Cobas h 232) (Roche CARDIAC POC Troponin T Control) соответствует спецификациям, заявленным на этикетке. Производитель несет ответственность за работу изделий только в случае их правильного использования в соответствии с инструкцией, а также соблюдения правил хранения и транспортировки.

Изделия должны использоваться только до истечения срока годности, который указан на упаковке.

НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ИНЫЕ ГАРАНТИИ, ОДНОЗНАЧНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИ ОДНОСТИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДЛЯ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ ROCHE DIAGNOSTICS GmbH НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.

По вопросам, связанным с качеством изделий, а также с их работой, нужно обращаться к Уполномоченному представителю производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031.

CARDIAC POC Troponin T Control cobas®

Roche CARDIAC POC Troponin T Control

Приложение 1 (Раздел специально предназначен для инструкции по применению на русском языке.)

Москва, Трубная площадь, д.2, тел.: +7 (495) 229-69-99, факс:
+7 (495) 229-62-64.

Претензии по качеству (рекламация)

Порядок предъявления рекламаций и ответов на них регулируется гражданским правом. Рекламация может предъявляться только по таким вопросам, которые не являлись предметом приемки товара, произведенной в соответствии с условиями договора.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием изделия, необходимо обратиться к Уполномоченному представителю производителя.

В случае рекламации обращаться к производителю и / или уполномоченному представителю производителя.

*Примечание:

Используется совместно с:

- Экспресс-анализатор иммунохимический "Кобас h 232" (cobas h 232) с принадлежностями, производитель Рош Диагностика ГмбХ, Германия (Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse, 116 D-68305 Mannheim, Germany), регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00474 от 19.09.2017 (далее по тексту Кобас h 232).

- Набор реагентов для количественного определения сердечного тропонина Т в крови для экспресс-анализатора иммунохимического «Кобас h 232» (Cobas h 232) (Roche CARDIAC POC Troponin T), производства "Рош Диагностика ГмбХ", Германия, Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany.

Зеелер энд Др. Феллмет (Seeler & Dr. Fellmeth)
Нотариальная контора

Нотариальная контора Зеелер энд Др. Феллмет (Seeler & Dr. Fellmeth) Q7* 23*68161 Маннхайм

Удостоверение копии

Настоящим сегодня подтверждается верность копии с представленного оригинала документа.

г. Маннхайм, 26.09.2018 г.

[Подпись]
Рольф Гленц
(Rolf Glenz)
ВРИО нотариуса Клаудии Зеелер (Claudia Seeler)

[Гербовая печать: Клаудия Зеелер (Claudia Seeler)
Нотариус в г. Маннхайм]

[Гербовая печать: Клаудия Зеелер (Claudia Seeler)
Нотариус в г. Маннхайм]

Нотариальная контора Зеелер энд Др. Феллмет (Seeler & Dr. Fellmeth)*Q7, 23*68161 Маннхайм * Идентификационный номер
плательщика НДС DE308834223
Тел. +49621860862-0 * Факс +49 621 860 862-89 * KANZLEI@NOTARIAT-Q7.DE * WWW.NOTARIAT-Q7.DE

CARDIAC POC TROPONIN T CONTROL
Roche CARDIAC POC Troponin T Control

[Логотип: «Рош»]

Текст на русском языке Инструкции по применению на медицинское изделие: **Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения сердечного тропонина Т в крови для экспресс-анализатора иммунохимического «Кобас h 232» (Cobas h 232) (Roche CARDIAC POC Troponin T Control)**

производства «Рош Диагностикс ГмбХ» (Roche Diagnostics GmbH), Сандхофер Штрассе 116, D-68305 Маннхайм, Германия (Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany)

РАЗРАБОТЧИК

**«Рош Диагностикс ГмбХ» (Roche Diagnostics GmbH), Германия.
Сандхофер Штрассе 116, 68305 Маннхайм, Германия
(Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)**

Утверждено

«Рош Диагностикс ГмбХ» (Roche Diagnostics GmbH)

Дата: 25 сентября 2018 года

[подпись]

Д-р Манфред Бём (Manfred Böhm)

Менеджер отдела международного нормативно-правового регулирования

[Штамп: «Рош Диагностикс ГмбХ» (Roche Diagnostics GmbH)

Сандхофер Штрассе 116

D-68305 Маннхайм

(Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim)]

2018

«Рош Диагностикс ГмбХ»; Сандхофер Штрассе 116; D-68305 Маннхайм, Германия (Roche Diagnostics GmbH; Sandhofer Strasse 116; D-68305 Mannheim, Germany); тел.: +49 621 759 0; факс: +49 621 759 2890

Место нахождения органа управления: г. Маннхайм – Регистрационный суд: суд первой инстанции г. Маннхайма, № в торговом реестре: 3962 – Правление: д-р Урсула Редекер, председатель; Эдгар Фит

Председатель наблюдательного совета: д-р Северин Шван

Список литературы

- 1 Стандарты безопасности и гигиены труда: "Патогенные микроорганизмы крови". (Предписание 29 Свода федеральных предписаний Часть 1910.1030). Фед. Реестр.
- 2 Директива 2000/54/ЕС Европейского парламента и Совета от 18 сентября 2000 года о защите работников от рисков, связанных с воздействием биологических веществ на рабочем месте.

Перевод выполнил переводчик
Мелин Александр Владимирович

Александр Владимирович
Мелин Александр Владимирович

Российская Федерация

Город Москва

Восемнадцатого октября две тысячи восемнадцатого года

Я, Микадзе Манана Рамазовна, нотариус города Москвы, свидетельствую личность
подписи переводчика Мелина Александра Владимировича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/823-н/77-2018- 8-2946

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.



Прошнуровано, пронумеровано и склеено
печатью 10 (десять) листов.

Нотариус