

Обзор

Ручка

При переноске всегда пользуйтесь ручкой

Экран

Отображает все важные характеристики
Зеленая подсветка горит только при работе от сети или при нажатии кнопок при работе от аккумулятора

дверцы

Клавиши для ввода данных

Кнопка сброса данных

тантам

Красная кнопка загорается
цифры SF

при сигнале тревоги на экране дополнительно мигает AAA.A

кнопки
Причины тревоги: тревога по каплям, воздуху, давлению, дверца насоса открыта, тревога батареи, по паузе

тревоги

Индикатор работы обеспечивает дополнительный контроль инфузии

Кнопка открывания

Алюминиевый корпус
брызгозащищенный,
стойкий к дезинфек-

Специальные функ-

Функциональные

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Отключение сигнала

на 2 минуты


СТАРТ/СТОП

Начало/прерывание инфузии

Держатель для капельницы жим


Предотвращает непреднамеренное движение капельницы (качание)

нажмите

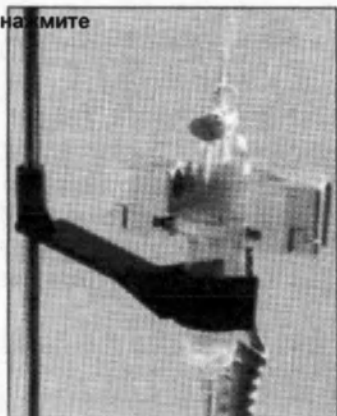

Адаптер для датчика капель

Заменяемый в зависимости от размера капельницы. Для снятия нажмите сбоку

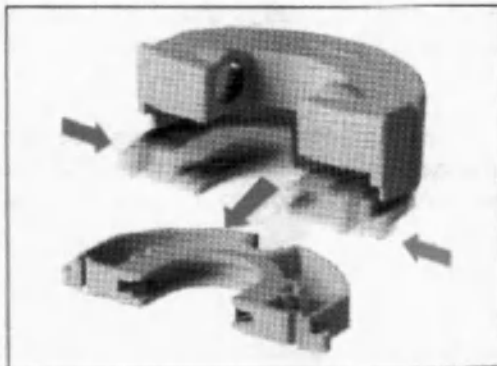

Универсальный за-

для стойки

Вставьте прибор сверху и закрепите. Для снятия

черную кнопку

