

5. Включение и отключение аппарата

Источник питания Устройство работает от сети:

100 - 115 В +10% / 60 Гц / 1.2 А / переменный ток

220 - 230 В +10% / 50 Гц / 0.6 А / переменный ток

Присоединение сетевого шнура Коннектор для сетевого шнура расположен в левой задней части аппарата

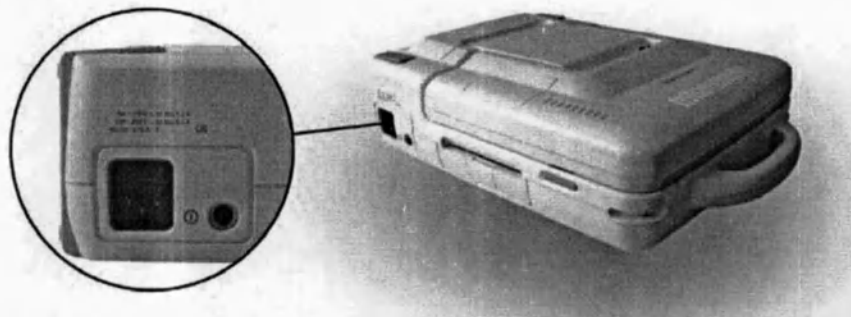


Рис. 9: Позиция сетевого коннектора

- Соедините входящий в комплект сетевой шнур с соответствующим коннектором, а затем в розетку электропитания.

Включение аппарата Кнопка вкл/выкл расположена в левой задней части аппарата

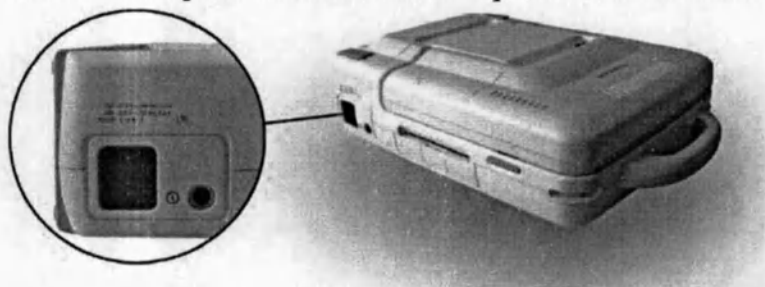


Рис. 10: Кнопка вкл/выкл. Расположена рядом с сетевым коннектором.

Включение и отключение аппарата

Чтобы включить устройство, необходимо нажать на кнопку вкл/выкл один раз до щелчка.

Индикатор вкл/выкл в левом переднем углу устройства загорится.

Примечание: Устройство может включаться как в рабочей позиции (экран открыт), так и в позиции транспортировки (экран закрыт). Индикатор вкл/выкл виден в обеих позициях.

Запуск операционной системы. После включения устройства начинается загрузка системы. Во время загрузки нельзя управлять устройством

Тем временем, на дисплее будет отображаться экран запуска.

Статус «Готов к работе», начальный экран. После успешного запуска операционной системы на дисплее будет отображаться начальный экран, который обозначает готовность к работе.

В зависимости от того, присоединена ли программирующая головка, имеется ли телеметрический контакт с активным имплантированным устройством, используются ли другие порты, на начальном экране будет отображаться дополнительная информация.