

НПЦ «Антей ЛТД»

КРЕСЛО КОЛЕСНОЕ (КОЛЯСКА) РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (КДР1030-1, КДР1030-2, КДР1030-3)

ПАСПОРТ

(Руководство по эксплуатации)

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Кресло колесное (коляска) реабилитационное КДР1030-3 (Рис.1,2) предназначено для передвижения при помощи сопровождающей особы детей со значительными и тяжелыми нарушениями функций опорно-двигательного аппарата при разных неврологических заболеваниях, гиперкинезах, внутренней ротации бедер, не фиксированном положении головы, вялым параличем с контрактурами в больших суставах. Каркас изготовлен из алюминиевых труб, чехол сиденья – капроновая ткань. Коляска складывается, а также имеет регулируемую по высоте подножку.

Рост ребенка от ____ до ____ см, вес до 60 кг.



Рис.1

Транспортное положение



Рис.2

Рабочее положение

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полная длина с подножкой мм.	1100	Эффективная глубина сиденья мм.	340-380
Полная ширина мм.	570	Эффективная ширина сиденья мм.	340
Длина сложенной коляски мм.	440	Высота сиденья мм.	280-400
Ширина сложенной коляски мм.	370	Угол наклона спинки	97-130
Высота сложенной коляски мм.	940	Высота спинки мм.	630
Общая масса коляски кг.	112,5	Длина подножки мм.	180
Масса самой тяжелой части, кг.	42	Угол наклона подножки,	12
Стат. устойчивость при спуске	10	Высота полукотника мм.	200
Стат. устойчивость при подъеме	10	Мин. радиус разворота мм.	570
Боковая стат. устойчивость,	10		
Угол наклона сиденья,			

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Коляска, в т.ч.	1 шт.
абдуктор	1 шт.
поручень	1 шт.
фиксаторы для стоп	1 шт.
сумка	1 шт.
подголовник	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время эксплуатации не допускается:

- оставлять коляску с ребенком, поставленную на тормоз;
- оставлять ребенка без присмотра;
- выпускать коляску из рук во время движения, особенно на участках с уклоном;
- превышать допустимую нагрузку;
- нагружать коляску несвойственными грузами.

5. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой трубчатый каркас с установленными на него сидением, спинкой, подголовником, подножкой, поручнем, абдуктором и сумкой. Подножка имеет фиксаторы стоп. Шасси коляски двухосное. Задние колеса имеют тормоз и пружинную амортизацию. Чехлы закреплены кнопками. Все они легко снимаются.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Достаньте коляску из упаковки и снимите фиксирующий ремешок (1) (Рис.1). Отведите рукоятку (2) от передней части до закрытия фиксатора 11 (Рис.8). Установите абдуктор (3) (Рис.2). Вставьте поручень (4) (Рис.3) до момента когда сработают фиксаторы (5).

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для изменения угла наклона спинки нажмите толкатель (6) (Рис.4) вниз и отведите спинку назад до момента когда фиксирующие зубья попадут в один из пазов пластины (7) (Рис.5).

Для торможения и снятия с тормоза необходимо нажатием ноги на рычаг (8) (Рис. 6) установить тормоз в желаемое положение (на рисунке колеса заторможены).

Высота подножки (9) (Рис. 7) может регулироваться благодаря телескопической конструкции и наличия ряда отверстий. Для изменения высоты необходимо выкрутить винты крепления (10), установить желаемую высоту подножки, после чего установить винты в предыдущее положение. Есть также возможность установить подножку горизонтально. Для этого в конструкции предусмотрены специальные упоры и рамочный фиксатор.

Для того чтобы сложить коляску в транспортное положение необходимо установить спинку в вертикальное положение. После этого, путем нажатия на рычаг механизма стопорения, снимите фиксатор (11) (Рис. 8) с упора

Наклонив спинку вперед, сложите коляску. Зафиксируйте коляску в сложенном положении ремешком (1).



Рис.3

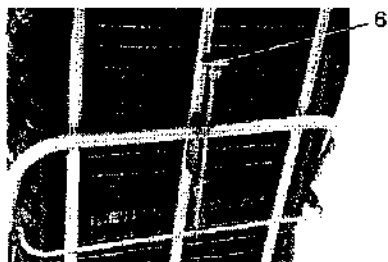


Рис.4

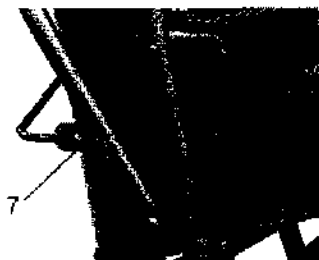


Рис.5



Рис.6

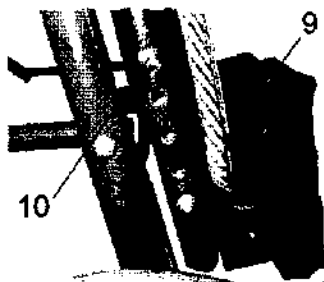


Рис.7



Рис.8

