



«I certify»
«Утверждаю»

«Anthogyr SAS»
«Антожир САС»

Managing Director
Управляющий директор

Eric Geneve
Эрик Женева

Le soussigné, M^e grange associé de
la SCP Alban ROLLET, Benoit GRANGE, Hervé PLANTEVIN
notaires à SALLANCHES (Haute-Savoie), atteste
que la signature ci-dessus a été apposée devant
moi par H. Geneve Eric

(Signature/Подпись)

30.08.2019

Anthogyr
SAS au Capital de 1.254.040 €
2237, Avenue André Lasquin
74700 SALLANCHES
Tél. (33) 04 50 58 02 37 - Fax (33) 04 50 93 78 60
Siret 605 620 442 00034 APE 3250A

INSTRUCTION FOR USE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

DENTAL IMPLANTS WITH ACCESSORIES

ИМПЛАНТАТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

"L'apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République Française approuve son contenu."

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République Française

RUSSIE

Le présent acte public :

2. a été signé par **Me Benoît GRANGE**

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau de **Me Benoît GRANGE**, Notaire * 333 rue
Pellissier 74700 SALLANCHES *

Attesté

5. à **CHAMBÉRY**

6. le **1 octobre 2019**

7. par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Chambéry

8. sous le n° **2425**

9. Sceau

10. Signature




Nathalie PAROT
Substitut Général

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ КАТАЛОЖНЫХ НОМЕРОВ.

Имплантаты стоматологические с принадлежностями:

1. Имплантат конический AXIOM PX, включая винт заглушку AXIOM: PX34080; PX34100; PX34120; PX34140; PX34160; PX34180; PX40080; PX40100; PX40120; PX40140; PX40160; PX40180; PX46060; PX46080; PX46100; PX46120; PX46140; PX52060; PX52080; PX52100; PX52120.

2. Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG, включая винт заглушку AXIOM: OP34080; OP34100; OP34120; OP34140; OP34160; OP34180; OP40060; OP40080; OP40100; OP40120; OP40140; OP40160; OP40180; OP46060; OP46080; OP46100; OP46120; OP46140; OP52060; OP52080; OP52100; OP52120; OP52140.

3. Имплантат цилиндрически-конический AXIOM 2.8, включая винт заглушку AXIOM 2.8: OP28100; OP28120; OP28140.

Принадлежности:

1. Абатмент (опора).

1.1. Абатмент временный AXIOM, с винтом: OPTP310; OPTP320; OPTP330; OPTP340; OPTP400; OPTP410; OPTP420; OPTP430; OPTP440; OPTP500; OPTP510; OPTP520; OPTP530; OPTP540; OPTP610; OPTP620; OPTP630; OPTP640.

1.2. Абатмент временный AXIOM 2.8: OPTP210; OPTP220; OPTP240; OPTP250.

1.3. Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом: OPAT410; OPAT420; OPAT400; OPAT430; OPAT440; OPAT500; OPAT510; OPAT520; OPAT530; OPAT540; OPAT610; OPAT620; OPAT630; OPAT640; OPAT31-7; OPAT32-7; OPAT33-7; OPAT34-7; OPAT40-7; OPAT41-7; OPAT42-7; OPAT43-7; OPAT44-7; OPAT50-7; OPAT51-7; OPAT52-7; OPAT53-7; OPAT54-7; OPAT311; OPAT321; OPAT331; OPAT341; OPAT401; OPAT411; OPAT421; OPAT431; OPAT441; OPAT501; OPAT511; OPAT521; OPAT531; OPAT541; OPAT611; OPAT621; OPAT631; OPAT641; OPAT402; OPAT412; OPAT422; OPAT432; OPAT442; OPAT502; OPAT512; OPAT522; OPAT532; OPAT542.

1.4. Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8: OPAT210; OPAT220; OPAT240; OPAT250; OPAT211; OPAT221; OPAT241; OPAT251; OPAT212; OPAT222; OPAT242; OPAT252; OPAT213; OPAT223; OPAT243; OPAT253.

1.5. Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом: OPST314; OPST316; OPST324; OPST326; OPST334; OPST336; OPST414; OPST416; OPST424; OPST426; OPST434; OPST436; OPST514; OPST516; OPST524; OPST526; OPST534; OPST536; OPST614; OPST616; OPST624; OPST626; OPST634; OPST636.

1.6. Абатмент стандартный угловой титановый AXIOM, с винтом: OPST416-15; OPST416-23; OPST426-15; OPST426-23; OPST436-15; OPST436-23; OPST516-15; OPST516-23; OPST526-15; OPST526-23; OPST536-15; OPST536-23.

1.7. Абатмент AXIOM MU, с держателем: OPMU0-0; OPMU0-1; OPMU0-2; OPMU0-3; OPMU0-4.

1.8. Абатмент AXIOM MU NO IN, с держателем и винтом: OPMU18-1; OPMU18-2; OPMU18-3; OPMU30-0; OPMU30-1; OPMU30-2; OPMU30-3.

1.9. Абатмент AXIOM MU IN, с держателем и винтом: OPMU18-1-IN; OPMU18-2-IN; OPMU18-3-IN; OPMU30-0-IN; OPMU30-1-IN; OPMU30-2-IN; OPMU30-3-IN.

- 1.10. Абатмент AXIOM MUN, с держателем: OPMUN0-0; OPMUN0-1; OPMUN0-2; OPMUN0-3; OPMUN0-4.
- 1.11. Абатмент AXIOM FLEXIBASE, с винтом: OPFLEX413; OPFLEX423; OPFLEX433; OPFLEX513; OPFLEX523; OPFLEX533.
- 1.12. Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом: OPBASE-C501-L; OPBASE-C502-L; OPBASE-C503-L.
- 1.13. Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом: OPFS100.
2. Винт:
- 2.1. Винт заглушка AXIOM 2.8: OPIM028.
- 2.2. Винт заглушка AXIOM: OPIM100.
- 2.3. Винт заживляющий AXIOM: OPHS310; OPHS320; OPHS330; OPHS340; OPHS400; OPHS410; OPHS420; OPHS430; OPHS440; OPHS500; OPHS510; OPHS520; OPHS530; OPHS540; OPHS610; OPHS620; OPHS630; OPHS640.
- 2.4. Винт заживляющий AXIOM 2.8: OPHS210; OPHS220; OPHS240; OPHS250.
- 2.5. Винт заживляющий плоский AXIOM: OPHSF310; OPHSF320; OPHSF330; OPHSF340; OPHSF400; OPHSF410; OPHSF420; OPHSF430; OPHSF440; OPHSF500; OPHSF510; OPHSF520; OPHSF530; OPHSF540; OPHSF610; OPHSF620; OPHSF630; OPHSF640.
- 2.6. Винт для абатмента (опоры) AXIOM: OPTS160; OPMU160; MU140.
- 2.7. Винт лабораторный AXIOM: OPTS161; OPMU161; OPMU161-4; MUT101; MUT102; OPTS162; OPPU101; OPPU102; OPPU 102L; MU141.
3. Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR: OPLA010; OPLA020; OPLA030; OPLA040; OPLA050.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ.

Производитель: АНТОЖИР САС (ANTHOGYR SAS), 2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, Франция. Тел.: +33(0)4 50 58 02 37. Факс: +33 (0)4 50 93 78 60. www.anthogyr.com

Уполномоченный представитель: Общество с ограниченной ответственностью «Штрауманн» (ООО «Штрауманн»), 119571, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 119А. Тел.: +7 (495) 139-74-74. Эл. почта: info.ru@straumann.com.

3. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Имплантаты стоматологические с принадлежностями предназначены для замещения отсутствующих зубов. Позволяют установить один или несколько имплантатов, на которые будут фиксированы и/или стабилизированы протезы. Возможно изготовление одиночных, мостовидных и полных съемных протезов на имплантатах.

Имплантаты стоматологические AXIOM REG/PX/2.8 предназначены для замены отсутствующих зубов, обеспечения опоры съемных зубных протезов или фиксации одиночных или мостовидных ортопедических реставраций.

Принадлежности, включающие в себя абатменты, винты для абатментов, аттачмент, предназначены для ортопедических конструкций с опорой на остеоинтегрированные дентальные имплантаты.

Винты заглушки и винты, заживляющие используются для предварительного формирования десны в фазе заживления, для защиты соединения имплантата во время периода интеграции.

Область применения: стоматология.

Имплантаты с принадлежностями могут быть использованы в государственных или частных стоматологических клиниках и только хирургами и ортопедами, которые прошли обучение и имеют достаточный опыт в этой области.

Основными потребителями медицинского изделия являются пациенты, которым необходима функциональная и эстетическая реабилитация при полном или частичном отсутствии зубов.

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Каждый вид имплантата, абатмента, винта разработан для особенного применения.

№	Наименование	Изображение	Назначение
1	Имплантат конический AXIOM PX, включая винт заглушку AXIOM		Для одномоментной установки имплантата сразу после экстракции зуба, а также в кость низкой плотности.
2	Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG, включая винт заглушку AXIOM		Для большинства клинических случаев, при любом типе костной ткани.
3	Имплантат цилиндрически-конический AXIOM 2.8, включая винт заглушку AXIOM		В случаях ограниченного мезиодистального пространства, при одиночной реставрации в области резцов для всех типов кости.
Принадлежности			
1.1	Абатмент временный AXIOM, с винтом		Для временного одиночного или мостовидного протезирования на имплантатах AXIOM REG/PX с целью формирования идеального профиля выхода коронки. Немедленная нагрузка. Винтовая фиксация

1.2.	Абатмент временный AXIOM 2.8		Для временного одиночного протезирования на имплантатах AXIOM 2.8 с целью формирования идеального профиля выхода коронки. Немедленная нагрузка. Винтовая фиксация.
1.3.	Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом		Для одиночных реставраций и мостовидного протезирования на имплантатах AXIOM REG/PX с целью высокой эстетики. Цементная фиксация.
1.4.	Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8		Для одиночного протезирования на имплантатах AXIOM 2.8. Цементная фиксация.
1.5.	Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом		Для одиночных реставраций и мостовидного протезирования на имплантатах AXIOM REG/PX. Немедленная или отложенная нагрузка. Цементная фиксация.
1.6.	Абатмент стандартный угловой титановый AXIOM, с винтом		Для одиночных реставраций и мостовидного протезирования на имплантатах AXIOM REG/PX. Цементная фиксация.
1.7.	Абатмент AXIOM MU, с держателем		Для комбинированных или полных реставраций на имплантатах AXIOM REG/PX. Винтовая фиксация.
1.8.	Абатмент AXIOM MU NO IN, с держателем и винтом		Для мостовидных реставраций на имплантатах AXIOM REG/PX. Винтовая фиксация.
1.9.	Абатмент AXIOM MU IN, с держателем и винтом		Для мостовидных реставраций на имплантатах AXIOM REG/PX. Винтовая фиксация.

1.10.	Абатмент AXIOM MUN, с держателем		Для мостовидных реставраций на имплантатах AXIOM REG/PX у пациентов с ограниченным расстоянием между имплантатами. Винтовая фиксация.
1.11.	Абатмент AXIOM FLEXIBASE, с винтом		Для индивидуальных одиночных или мостовидных реставраций на имплантатах AXIOM REG/PX. Цементная фиксация.
1.12.	Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом		Для одиночного или мостовидного протезирования на имплантатах AXIOM REG/PX. Совместимы со скан-адаптерами Sirona для интраорального сканера SIRONA CEREC, с блоками SIRONA CEREC размером L. Цементная фиксация.
1.13.	Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом		Для одиночных или мостовидных реставраций на имплантатах AXIOM REG/PX. Цементная фиксация.
2.1.	Винт заглушка AXIOM 2.8		Предназначен для имплантата AXIOM 2.8 с целью формирования десны в фазе заживления.
2.2.	Винт заглушка AXIOM		Предназначен для имплантатов AXIOM REG/PX с целью формирования и поддержания мягких тканей.
2.3.	Винт заживляющий AXIOM		Предназначен для имплантатов AXIOM REG/PX с целью формирования и поддержания мягких тканей.
2.4.	Винт заживляющий AXIOM 2.8		Предназначен для имплантата AXIOM 2.8 с целью предварительного формирования десны в фазе заживления.

2.5.	Винт заживляющий плоский AXIOM		Предназначен для имплантатов AXIOM REG/PX с целью формирования и поддержания мягких тканей.
2.6.	Винт для абатмента (опоры) AXIOM		Для фиксации абатмента к имплантату
2.7.	Винт лабораторный AXIOM		Для окончательной фиксации абатментов AXIOM MU, фиксации многокомпонентной конструкции на этапе планирования, моделирования, изготовления ортопедической конструкции.
3.	Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR		Для стабилизации условно-съемного протезов с опорой на слизистую оболочку.

5. ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.

Показания: имплантаты стоматологические с принадлежностями предназначены для восстановления эстетики и функциональности зубов у частично или полностью беззубых пациентов.

Противопоказания: имплантаты стоматологические с принадлежностями имеют общие показания и противопоказания, аналогичные всем имплантатам, используемым для верхней и нижнечелюстной хирургии.

Практикующий врач должен соблюдать рекомендации по установке.

Перед хирургическим этапом необходимо провести общий медицинский осмотр.

Абсолютные: опухоли, сердечно-сосудистые заболевания, метаболические нарушения, некомпенсированные гематологические заболевания, наркотическая зависимость, алкоголизм или курение, психоз, функциональные нарушения, ксеростомия, иммунодефицит, нарушение функции лейкоцитов, местная или системная терапия (прием стероидов, антикоагулянтов, химиотерапия или лучевая терапия).

Относительные: бруксизм, окклюзионная нагрузка, парафункциональные привычки, неблагоприятная анатомия костной ткани, беременность, незавершенный рост, недостаточная гигиена ротовой полости, отсутствие мотивации или содействия, облученная костная ткань, неконтролируемое заболевание пародонта, оральные инфекции или воспалительные процессы.

Локальные: недостаточный объем и/или качество костной ткани, локальные корневые остатки. Аллергия или гиперчувствительность на химические компоненты используемых материалов.

Временные или постоянные нежелательные явления: отек, гематома, гингивит, затруднение речи, постоянная парестезия, дизестезия, потеря костного гребня, локализованная или системная инфекция, эстетические проблемы, послеоперационная боль.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Имплантат конический AXIOM PX, включая винт заглушку AXIOM:

Имплантат конический AXIOM PX 3,4 x 8,0 мм 	Номер по каталогу	PX34080
	Диаметр	3,4 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	8,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM Абатмент эстетический титановый AXIOM Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0,154 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- имплантат конический AXIOM PX– 1 шт.		
- винт заглушка AXIOM– 1 шт.		

- наклейки для карточки пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Имплантат конический AXIOM PX 3,4 x 10,0 мм 	Номер по каталогу	PX34100
	Диаметр	3,4 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	10,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0,206 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- имплантат конический AXIOM PX – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 3,4 x 12,0 мм	Номер по каталогу	PX34120
	Диаметр	3,4 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	12,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM

		Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0,258 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX– 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 3,4 x 14,0 мм 	Номер по каталогу	PX34140
	Диаметр	3,4 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	14,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом

	Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом	
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0,310 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- имплантат конический AXIOM PX– 1 шт.		
- винт заглушка AXIOM– 1 шт.		
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.		
- упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 3,4 x 16,0 мм 	Номер по каталогу	PX34160
	Диаметр	3,4 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	16,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0,362 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм ($\pm 0,15$ мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX– 1 шт. - винт заглушка AXIOM– 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 3,4 x 18,0 мм 	Номер по каталогу	PX34180
	Диаметр	3,4 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	18,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.412 $\pm$ 0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм ($\pm 0,15$ мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

В набор поставки входит:

- имплантат конический AXIOM PX – 1 шт.
- винт заглушка AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Имплантат конический AXIOM PX 4,0 x 8,0 мм 	Номер по каталогу	PX40080
	Диаметр	4,0 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	8,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.342 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- имплантат конический AXIOM PX – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX	Номер по каталогу	PX40100
	Диаметр	4,0 мм (-0.03/0 мм)

4,0 x 10,0 мм 	Длина	10,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.394 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 4,0 x 12,0 мм 	Номер по каталогу	PX40120
	Диаметр	4,0 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	12,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем

		Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.446 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- имплантат конический AXIOM PX – 1 шт.		
- винт заглушка AXIOM – 1 шт.		
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.		
- упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 4,0 x 14,0 мм 	Номер по каталогу	PX40140
	Диаметр	4,0 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	14,0 мм (0/+0.05)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт зажимающий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.498 ±0.001 г

	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входят: - имплантат конический AXIOM PX – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 4,0 x 16,0 мм 	Номер по каталогу	PX40160
	Диаметр	4,0 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	16,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.550 ± 0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое

	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 4,0 x 18,0 мм 	Номер по каталогу	PX40180
	Диаметр	4,0 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	18,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт зажимающий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.602 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Имплантат конический AXIOM PX 4,6 x 6,5 мм 	Номер по каталогу	PX46060
	Диаметр	4,6 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	6,5 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.322 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX– 1 шт. - винт заглушка AXIOM– 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 4,6 x 8,0 мм 	Номер по каталогу	PX46080
	Диаметр	4,6 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	8,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом

	Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом	
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.374 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 4,6 x 10,0 мм 	Номер по каталогу	PX46100
	Диаметр	4,6 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	10,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт зажимляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см

	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.426 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 4,6 x 12,0 мм 	Номер по каталогу	PX46120
	Диаметр	4,6 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	12,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.478 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM

	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (± 0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 4,6 x 14,0 мм 	Номер по каталогу	PX46140
	Диаметр	4,6 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	14,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.530 $\pm$ 0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (± 0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт.		

- упаковка – 1 шт.

Имплантат конический AXIOM PX 5,2 x 6,5 мм 	Номер по каталогу	PX52060
	Диаметр	5,2 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	6,5 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.559 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX– 1 шт. - винт заглушка AXIOM– 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 5,2 x 8,0 мм 	Номер по каталогу	PX52080
	Диаметр	5,2 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	8,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом

	Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом	
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.611 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX– 1 шт. - винт заглушка AXIOM– 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 5,2 x 10,0 мм 	Номер по каталогу	PXS2100
	Диаметр	5,2 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	10,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт зажимающий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см

	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.663 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- имплантат конический AXIOM PX– 1 шт.		
- винт заглушка AXIOM – 1 шт.		
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.		
- упаковка – 1 шт.		

Имплантат конический AXIOM PX 5,2 x 12,0 мм 	Номер по каталогу	PX52120
	Диаметр	5,2 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	12,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM
		Абатмент временный AXIOM, с винтом
		Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом
		Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом
		Абатмент AXIOM MU, с держателем
		Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR
		Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом
		Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.715 ±0.001 г
	Предел прочности	187 Н
	Шаг резьбы	2 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM

	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (± 0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат конический AXIOM PX – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG, включая винт заглушку AXIOM:

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 3,4 x 8 мм 	Номер по каталогу	OP34080
	Диаметр	3,4 мм (0/+0.03 мм)
	Длина	8 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.156 $\pm$ 0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (± 0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Имплантат цилиндрически- конический AXIOM REG 3,4 x 10 мм 	Номер по каталогу	OP34100
	Диаметр	3,4 мм (0/+0.03 мм)
	Длина	10 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.208 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически- конический AXIOM REG 3,4 x 12 мм 	Номер по каталогу	OP34120
	Диаметр	3,4 мм (0/+0.03 мм)
	Длина	12 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR

	Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом	
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.260 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	Винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG– 1 шт.		
- винт заглушка AXIOM– 1 шт.		
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.		
- упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически- конический AXIOM REG 3,4 x 14 мм 	Номер по каталогу	OP34140
	Диаметр	3,4 мм (0/+0.03 мм)
	Длина	14 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.312 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM

	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG– 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 3,4 x 16 мм 	Номер по каталогу	OP34160
	Диаметр	3,4 мм (0/+0.03 мм)
	Длина	16 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.364 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

В набор поставки входит:

- имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG – 1 шт.
- винт заглушка AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 3,4 x 18 мм 	Номер по каталогу	OP34180
	Диаметр	3,4 мм (0/+0.03 мм)
	Длина	18 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.416 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически-	Номер по каталогу	OP40060
--------------------------	-------------------	---------

конический AXIOM REG 4,0 x 6,5 мм 	Диаметр	4,0 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	6,5 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.238 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG– 1 шт. - винт заглушка AXIOM– 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически- конический AXIOM REG 4,0 x 8,0 мм 	Номер по каталогу	OP40080
	Диаметр	4,0 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	8,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом

	Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом	
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.290 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOMREG – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 4,0 x 10,0 мм 	Номер по каталогу	OP40100
	Диаметр	4,0 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	10 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом

		Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.342 ± 0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG – 1 шт.		
- винт заглушка AXIOM – 1 шт.		
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.		
- упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 4,0 x 12,0 мм 	Номер по каталогу	OP40120
	Диаметр	4,0 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	12 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.394 ± 0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм

	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (± 0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 4,0 x 14,0 мм 	Номер по каталогу	OP40140
	Диаметр	4,0 мм ($-0.03/0$ мм)
	Длина	14 мм ($0/+0.05$ мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.446 ± 0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (± 0.15 мм)
	Тип соединения	Винтовое

	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG– 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 4,0 x 16,0 мм 	Номер по каталогу	OP40160
	Диаметр	4,0 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	16,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.498 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG– 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Имплантат цилиндрически- конический AXIOM REG 4,0 x 18,0 мм 	Номер по каталогу	OP40180
	Диаметр	4,0 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	18 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединений
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.550 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG– 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически- конический AXIOM REG 4,6 x 6,5 мм	Номер по каталогу	OP46060
	Диаметр	4,6 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	6,5 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения

	Совместимость		Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см	
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм	
	Масса	0.322 ± 0.001 г	
	Предел прочности	200 Н	
	Шаг резьбы	0,8 мм	
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)	
	С винтом заглушкой AXIOM		
	Номер по каталогу	OPIM100	
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM	
	Диаметр	1,6 мм	
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)	
	Тип соединения	винтовое	
	Крутящий момент	5-10 Н.см	
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм	
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)	
В набор поставки входит:			
- имплантат цилиндрически-конический AXIOMREG – 1 шт.			
- винт заглушка AXIOM – 1 шт.			
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.			
- упаковка – 1 шт.			

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 4,6 x 8,0 мм 	Номер по каталогу	OP46080
	Диаметр	4,6 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	8,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем

		Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.374 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG – 1 шт.		
- винт заглушка AXIOM – 1 шт.		
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.		
- упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 4,6 x 10,0 мм 	Номер по каталогу	OP46100
	Диаметр	4,6 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	10 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм

	Масса	0.426 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	

- имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG– 1 шт.
- винт заглушка AXIOM– 1 шт.
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 4,6 x 12,0 мм 	Номер по каталогу	OP46120
	Диаметр	4,6 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	12,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.478 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM

	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 4,6 x 14,0 мм 	Номер по каталогу	OP46140
	Диаметр	4,6 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	14,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.530 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		

- имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG – 1 шт.
- винт заглушка AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 5,2 x 6,5 мм 	Номер по каталогу	OP52060
	Диаметр	5,2 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	6,5 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.582 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически-	Номер по каталогу	OP52080
--------------------------	-------------------	---------

конический AXIOM REG 5,2 x 8,0 мм 	Диаметр	5,2 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	8,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.634 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически- конический AXIOM REG 5,2 x 10,0 мм	Номер по каталогу	OP52100
	Диаметр	5,2 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	10,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом

	Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом	
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.686 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG – 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 5,2 x 12,0 мм 	Номер по каталогу	OP52120
	Диаметр	5,2 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	12,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR

		Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.738 ±0.001 г
	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм (±0.15 мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG– 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG 5,2 x 14,0 мм 	Номер по каталогу	OP52140
	Диаметр	5,2 мм (-0.03/0 мм)
	Длина	14,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Совместимость	Винт заживляющий AXIOM Абатмент временный AXIOM, с винтом Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом Абатмент AXIOM MU, с держателем Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом
	Крутящий момент	< 80 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.790 ±0.001 г

	Предел прочности	200 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM	
	Номер по каталогу	OPIM100
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	5,95 мм ($\pm 0,15$ мм)
	Тип соединения	винтовое
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	
	- имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG- 1 шт. - винт заглушка AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM 2.8, включая винт заглушку AXIOM

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM 2.8 2,8 x 10,0 мм 	Номер по каталогу	OP28100
	Диаметр	2,8 мм (0/+0.03 мм)
	Длина	10,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Совместимость	Абатмент временный AXIOM 2.8 Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8
	Крутящий момент	< 65 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.135 $\pm$ 0.001 г
	Предел прочности	116 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM 2.8	
	Номер по каталогу	OPIM028
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM 2.8
	Диаметр	2,55 мм ($\pm 0,03$ мм)
	Длина	4,2 мм ($\pm 0,05$ мм)
	Масса	0.015 $\pm$ 0.001 г
	Тип соединения	Вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	ПЭЭК VESTAKEEP 4R
	В набор поставки входит:	
	- имплантат цилиндрически-конический AXIOM 2.8- 1 шт. - винт заглушка AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Имплантат цилиндрически- конический AXIOM 2.8 2,8 x 12,0 мм 	Номер по каталогу	OP28120
	Диаметр	2,8 мм (0/+0.03 мм)
	Длина	12,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Совместимость	Абатмент временный AXIOM 2.8 Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8
	Крутящий момент	< 65 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.179 ±0.001 г
	Предел прочности	116 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM 2.8	
	Номер по каталогу	OPIM028
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM 2.8
	Диаметр	2,55 мм (±0.03 мм)
	Длина	4,2 мм (±0.05 мм)
	Масса	0.015 ±0.001 г
	Тип соединения	Вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	ПЭЭК VESTAKEEP i4R
В набор поставки входит:		
- имплантат цилиндрически-конический AXIOM 2.8 – 1 шт. - винт заглушка AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Имплантат цилиндрически- конический AXIOM 2.8 2,8 x 14,0 мм 	Номер по каталогу	OP28140
	Диаметр	2,8 мм (0/+0.03 мм)
	Длина	14,0 мм (0/+0.05 мм)
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Совместимость	Абатмент временный AXIOM 2.8 Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8
	Крутящий момент	< 65 Н.см
	Шероховатость (Ra)	1,5 – 2 мкм
	Масса	0.222 ±0.001 г
	Предел прочности	116 Н
	Шаг резьбы	0,8 мм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом заглушкой AXIOM 2.8	

	Номер по каталогу	OPIM028
	Обозначение	Винт заглушка AXIOM 2.8
	Диаметр	2,55 (± 0.03) мм
	Длина	4,2 (± 0.05) мм
	Масса	0.015 $\pm$ 0.001 г
	Тип соединения	Вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	ПЭЭК VESTAKEEP MR
В набор поставки входит: - имплантат цилиндрически-конический AXIOM 2.8 – 1 шт. - винт заглушка AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Принадлежности

Абатмент (опора).

Абатмент временный AXIOM, с винтом

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø3,4 H1,5 	Номер по каталогу	OPTP310
	Диаметр	Ø3,4 (± 0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	14.55 (± 0.08) мм
	Масса	0.203 $\pm$ 0.001 мм
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (± 1) мм
	Масса	0.061 $\pm$ 0.001 мм
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент временный AXIOM, с винтом – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø3,4 H2,5	Номер по каталогу	OPTP320
	Диаметр	Ø3,4 (± 0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	15.55 (± 0.08) мм
	Масса	0.219 $\pm$ 0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения

	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø3,4 Н3,5 	Номер по каталогу	ОПТР330
	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	16.55 (±0.08) мм
	Масса	0.232 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
Номер по каталогу	ОПТС161	
Обозначение	Винт лабораторный AXIOM	
Диаметр	1,6 мм	
Длина	7,9 (±1) мм	
Масса	0.061 ±0.001 г	
Крутящий момент	25 Н.см	
Шероховатость (Ra)	0,8 мкм	
Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)	

В набор поставки входит:

- абатмент временный AXIOM – 1 шт.
- винт лабораторный AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø3,4 Н4,5 	Номер по каталогу	ОПТР340
	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	17.55 (±0.08) мм
	Масса	0.262 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
Номер по каталогу	ОПТС161	

	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø4,0 H0,75 	Номер по каталогу	ОПТР400
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	13.8 (±0.08) мм
	Масса	0.215 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	ОПТС161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø4,0 H1,5 	Номер по каталогу	ОПТР410
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	14.55 (±0.08) мм
	Масса	0,228 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	ОПТС161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø4,0 H2,5 	Номер по каталогу	ОТР420
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	15.55 (±0.08) мм
	Масса	0.248 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø4,0 H3,5 	Номер по каталогу	ОТР430
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	16.55 (±0.08) мм
	Масса	0.270 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт.		

- наклейки для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø4,0 H4,5 	Номер по каталогу	ОТРР440
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	17.55 (±0.08) мм
	Масса	0.324 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	ОПТС161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø5,0 H0,75 	Номер по каталогу	ОТРР500
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	13.8 (±0.08) мм
	Масса	0.224 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	ОПТС161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

	Номер по каталогу	ОТРР510
--	-------------------	---------

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø5,0 H1,5 	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	14.55 (±0.08) мм
	Масса	0.250 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Вес	0.061 ±0.001 г
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø5,0 H2,5 	Номер по каталогу	ОПТ520
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	15.55 (±0.08) мм
	Масса	0.286 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø5,0 H3,5	Номер по каталогу	ОПТ530
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	16.55 (±0.08) мм
	Масса	0.319 ±0.001 г

	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	

- абатмент временный AXIOM – 1 шт.
- винт лабораторный AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø5,0 H4,5 	Номер по каталогу	ОПТР540
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	17.55 (±0.08) мм
	Масса	0.415 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторный AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	

- абатмент временный AXIOM – 1 шт.
- винт лабораторный AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø6,0 H1,5	Номер по каталогу	ОПТР610
	Диаметр	Ø6,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	14.55 (±0.08) мм
	Масса	0.286 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø6,0 H2,5 	Номер по каталогу	ОПТР620
	Диаметр	Ø6,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	15.55 (±0.08) мм
	Масса	0.327 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
С винтом лабораторным AXIOM		
	Номер по каталогу	OPTS161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø6,0 H3,5 	Номер по каталогу	ОПТР630
	Диаметр	Ø6,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	16.55 (±0.08) мм
	Масса	0.383 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
С винтом лабораторным AXIOM		
	Номер по каталогу	OPTS161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм

	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM, с винтом Ø6,0 H4,5 	Номер по каталогу	ОПТР640
	Диаметр	Ø6,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	17.55 (±0.08) мм
	Масса	0.547 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом лабораторным AXIOM	
	Номер по каталогу	ОПТС161
	Обозначение	Винт лабораторный AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM – 1 шт. - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный AXIOM 2.8:

Абатмент временный AXIOM 2.8 Ø2,8 H1,0 	Номер по каталогу	ОПТР210
	Диаметр	Ø2,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,0 мм
	Длина	10 (±0.1) мм
	Масса	0.055 ±0.001 г
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	ПЭЭК: VestaKEEP i4R
В набор поставки входит:		
- абатмент временный AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный АХИОМ 2.8 Ø2,8 Н2,5 	Номер по каталогу	ОТР220
	Диаметр	Ø2,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	11.5 (±0.1) мм
	Масса	0.063 ±0.001 г
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	ПЭЭК: VestaKEEP i4R
В набор поставки входит: - абатмент временный АХИОМ 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный АХИОМ 2.8 Ø2,8 Н4,0 	Номер по каталогу	ОТР240
	Диаметр	Ø2,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,0 мм
	Длина	13 (±0.1) мм
	Масса	0.070 ±0.001 г
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	ПЭЭК: VestaKEEP i4R
В набор поставки входит: - абатмент временный АХИОМ 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент временный АХИОМ 2.8 Ø2,8 Н5,5 	Номер по каталогу	ОТР250
	Диаметр	Ø2,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 5,5 мм
	Длина	14.5 (±0.1) мм
	Масса	0.080 ±0.001 г
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	ПЭЭК: VestaKEEP i4R
В набор поставки входит: - абатмент временный АХИОМ 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент эстетический титановый АХИОМ, с винтом

Абатмент эстетический	Номер по каталогу	ОРАТ31-7
	Диаметр	3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм

титановый AXIOM, с винтом 	Длина	10.65 (±0.23) мм
	Масса	0.125 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT32-7
	Диаметр	3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	11.65 (±0.23) мм
	Масса	0.141 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.	

- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT33-7
	Диаметр	3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	12.65 (±0.23) мм
	Масса	0.158 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит: - абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT34-7
	Диаметр	3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	13.65 (±0.23) мм
	Масса	0.167 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT311
	Диаметр	3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	10.18 (±0.23) мм
	Масса	0.137 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT321
	Диаметр	3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	11.18 (±0.23) мм
	Масса	0.151 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры AXIOM)
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT331
	Диаметр	3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	12.18 (±0.23) мм
	Масса	0.166 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT341
	Диаметр	3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	13.18 (±0.23) мм
	Масса	0.193 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм

	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT400
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	10.3 (±0.13) мм
	Масса	0.173 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT410
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Длина	11.05 (±0.13) мм
	Масса	0.191 ±0.001 г
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г

	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT420
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	12.05 (±0.13) мм
	Масса	0.210 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT430
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	13.05 (±0.13) мм
	Масса	0.230 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM

	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT440
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	14.05 (±0.13) мм
	Масса	0.284 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT40-7
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	9.91 (±0.23) мм
	Масса	0.173 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (± 0.1) мм
	Масса	0.061 $\pm$ 0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT41-7
	Диаметр	4,0 (± 0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	10.61 (± 0.23) мм
	Масса	0.187 $\pm$ 0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (± 0.1) мм
	Масса	0.061 $\pm$ 0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT42-7
	Диаметр	4,0 (± 0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	11.61 (± 0.23) мм
	Масса	0.207 $\pm$ 0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT43-7
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	12.61 (±0.23) мм
	Масса	0.231 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT44-7
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	13.61 (±0.23) мм
	Масса	0.281 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT401
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	9.36 (±0.23) мм
	Масса	0.160 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT411
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	10.17 (±0.23) мм
	Масса	0.175 ±0.001 г
	Угол	15°
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT421
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	11.17 (±0.23) мм
	Масса	0.196 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT431
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	12.17 (±0.23) мм
	Масса	0.220 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT441
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	13.17 (±0.23) мм
	Масса	0.270 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT402
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	8.7 (±0.23) мм
	Масса	0.161±0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры)
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT412
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	8.7 (±0.23) мм
	Масса	0.178 ±0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT422
	Диаметр	4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	10.51 (±0.23) мм
	Масса	0.198 ±0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0,1) мм
	Масса	0,061 ±0,001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит: - абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT432
	Диаметр	4,0 (±0,02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	11,51 (±0,23) мм
	Масса	0,221 ±0,001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0,1) мм
	Масса	0,061 ±0,001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит: - абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT442
	Диаметр	4,0 (±0,02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	12,51 (±0,23) мм
	Масса	0,273 ±0,001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT500
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	10.3 (±0.13) мм
	Масса	0.308 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT510
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	11.05 (±0.13) мм
	Масса	0.319 ±0.001 г
	Угол	0°
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT520
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	12.05 (±0.13) мм
	Масса	0.355 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT530
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	13.05 (±0.13) мм
	Масса	0.388 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT540
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	14.05 (±0.13) мм
	Масса	0.492 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT50-7
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	9.78 (±0.23) мм
	Масса	0.238 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT51-7
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	10.58 (±0.23) мм
	Масса	0.257 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT52-7
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	11.58 (±0.23) мм
	Масса	0.310 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT53-7
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	12.58 (±0.23) мм
	Масса	0.321 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT54-7
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	13.58 (±0.23) мм
	Масса	0.440 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	
Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT501
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	9.12 (±0. 23) мм
	Масса	0.242 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT511
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	9.92 (±0.23) мм
	Масса	0.256 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT521
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	10.92 (±0.23) мм
	Масса	0.290 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT531
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	11.92 (±0.23) мм
	Масса	0.324 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT541
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	12.92 (±0.23) мм
	Масса	0.427 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT502
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	8.52 (±0.23) мм
	Масса	0.191 ±0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения

	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT512
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	9.21 (±0.23) мм
	Масса	0.243 ±0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPAT522
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	10.21 (±0.23) мм
	Масса	0.274 ±0.001 г
	Угол	23°

	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT532
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	11.21 (±0.23) мм
	Масса	0.307 ±0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый	Номер по каталогу	OPAT542
	Диаметр	5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	12.21 (±0.23) мм

AXIOM, с винтом 	Масса	0.411 ±0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT610
	Диаметр	6,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	11.05 (±0.13) мм
	Масса	0.410 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент эстетический	Номер по каталогу	OPAT620
	Диаметр	6,0 (±0.02) мм

титановый AXIOM, с винтом 	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	12.05 (±0.13) мм
	Масса	0.456 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM	
Диаметр	1,6 мм	
Длина	7,9 (±0.1) мм	
Масса	0.061 ±0.001 г	
Крутящий момент	25 Н.см	
Предел прочности	> 187 Н	
Шероховатость (Ra)	0,8 мкм	
Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)	
Обработка поверхности	DLC	

В набор поставки входит:

- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу		OPAT630
	Диаметр		6,0 (±0.02) мм
	Высота десны		Hg 3,5 мм
	Длина		13.05 (±0.13) мм
	Масса		0.504 ±0.001 г
	Угол		0°
	Тип соединения		Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент		25 Н.см
	Шероховатость (Ra)		0,4-0,8 мкм
	Материал		Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM		
Номер по каталогу		OPTS160	
Обозначение		Винт для абатмента (опоры) AXIOM	
Диаметр		1,6 мм	
Длина		7,9 (±0.1) мм	
Масса		0.061 ±0.001 г	
Крутящий момент		25 Н.см	
Предел прочности		> 187 Н	
Шероховатость (Ra)		0,8 мкм	
Материал		Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)	
Обработка поверхности		DLC	
В набор поставки входит:			
- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт.			
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.			
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.			
- упаковка – 1 шт.			

	Номер по каталогу	OPAT640
--	--------------------------	----------------

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Диаметр	6,0 (± 0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	14.05 (± 0.13) мм
	Масса	0.667 ± 0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (± 0.1) мм
	Масса	0.061 ± 0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит: - абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT611
	Диаметр	6,0 (± 0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	9.73 (± 0.23) мм
	Масса	0.260 ± 0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (± 0.1) мм
	Масса	0.061 ± 0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит: - абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT621
	Диаметр	6,0 (± 0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	10.73 (± 0.23) мм
	Масса	0.421 ± 0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (± 0.1) мм
	Масса	0.061 ± 0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит: - абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT631
	Диаметр	6,0 (± 0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	11.73 (± 0.23) мм
	Масса	0.469 ± 0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (± 0.1) мм
	Масса	0.061 ± 0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит: - абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.		

- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPAT641
	Диаметр	6,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	12.72 (±0.23) мм
	Масса	0.632 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент эстетический титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT210
	Диаметр	Ø2,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,0 мм
	Длина	5.2 (±0.08) мм (нижняя часть) 5.87 (±0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.166 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8	Номер по каталогу	OPAT220
	Диаметр	Ø2,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	6.6 (±0.05) мм (нижняя часть)

		5.87 (± 0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.190 ± 0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT240
	Диаметр	Ø2,8 (± 0.03) мм
	Высота десны	Hg 4,0 мм
	Длина	6.77 (± 0.08) мм (нижняя часть) 5.87 (± 0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.220 ± 0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT250
	Диаметр	Ø2,8 (± 0.02) мм
	Высота десны	Hg 5,5 мм
	Длина	9.6 (± 0.05) мм (нижняя часть) 5.87 (± 0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.251 ± 0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8	Номер по каталогу	OPAT211
	Диаметр	Ø2,8 (± 0.03) мм
	Высота десны	Hg 1,0 мм
	Длина	5.57 (± 0.08) мм (нижняя часть) 5.87 (± 0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.172 ± 0.001 г

	Угол	7°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT221
	Диаметр	Ø2,8 (±0.03) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	6.77 (±0.08) мм (нижняя часть) 5.87 (±0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.193 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент вколачиваемый абатмент AXIOM 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT241
	Диаметр	Ø2,8 (±0.03) мм
	Высота десны	Hg 4,0 мм
	Длина	8.27 (±0.08) мм (нижняя часть) 5.87 (±0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.223 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT251
	Диаметр	Ø2,8 (±0.03) мм
	Высота десны	Hg 5,5 мм
	Длина	9.77 (±0.08) мм (нижняя часть) 5.87 (±0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.253 ±0.001 г
	Угол	7°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		

- абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8– 1 шт.
- наклейки для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT212
	Диаметр	Ø2,82 (±0.03) мм
	Высота десны	Hg 1,0 мм
	Длина	5.6 (±0.08) мм (нижняя часть) 5.87 (±0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.175 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT222
	Диаметр	Ø2,82 (±0.03) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	6.7 (±0.08) мм (нижняя часть) 5.87 (±0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.200 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT242
	Диаметр	Ø2,82 (±0.03) мм
	Высота десны	Hg 4,0 мм
	Длина	8.2 (±0.08) мм (нижняя часть) 5.87 (±0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.224 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8	Номер по каталогу	OPAT252
	Диаметр	Ø2,82 (±0.03) мм
	Высота десны	Hg 5,5 мм
	Длина	9.7 (±0.08) мм (нижняя часть)

		5.87 (± 0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.257 ± 0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
Материал		Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT213
	Диаметр	Ø2,82 (± 0.03) мм
	Высота десны	Hg 1,0 мм
	Длина	5.8 (± 0.08) мм (нижняя часть) 5.87 (± 0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.183 ± 0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT223
	Диаметр	Ø2,82 (± 0.03) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	6.8 (± 0.08) мм (нижняя часть) 5.87 (± 0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.202 ± 0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT243
	Диаметр	Ø2,82 (± 0.03) мм
	Высота десны	Hg 4,0 мм
	Длина	8.3 (± 0.08) мм (нижняя часть) 5.87 (± 0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0.229 ± 0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входят:		
- абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 	Номер по каталогу	OPAT253
	Диаметр	Ø2,82 (±0.03) мм
	Высота десны	Hg 5,5 мм
	Длина	9,8 (±0.08) мм (нижняя часть) 5,87 (±0.05) мм (верхняя часть)
	Масса	0,258 ±0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	-
	Предел прочности	> 116 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
Материал		Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST314
	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	8,25 (±0.08) мм
	Масса	0,116 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0,061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

	Номер по каталогу	OPST324
--	-------------------	---------

Абатмент стандартный титановый AXIOM, винтом 	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	8.90 (±0.1) мм
	Масса	0.133 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный титановый AXIOM– 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST334
	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	10.25 (±0.1) мм
	Масса	0.149 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный титановый AXIOM– 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST316
	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	10.25 (±0.08) мм
	Масса	0.148 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST326
	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	10.90 (±0.1) мм
	Масса	0.160 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST336
	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	12.25 (±0.1) мм
	Масса	0.176 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST414
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	8.25 (±0.08) мм
	Масса	0.141 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST424
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	9.25 (±0.08) мм
	Масса	0.162 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент стандартный титановый AXIOM– 1 шт.	
	- винт для абатмента (опоры) AXIOM– 1 шт.	
	- наклейки для карты пациента – 1 шт.	
	- упаковка – 1 шт.	

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST434
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	10.25 (±0.08) мм
	Масса	0.180 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт.	
	- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.	
	- наклейки для карты пациента – 1 шт.	

- упаковка – 1 шт.

Абатмент стандартный титановый AXIOM, винтом 	Номер по каталогу	OPST416
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	10.25 (±0.08) мм
	Масса	0.175 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST426
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	11.25 (±0.08) мм
	Масса	0.198 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

В набор поставки входит:

- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST436
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	12.25 (±0.08) мм
	Масса	0.220 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST514
	Диаметр	Ø 4,97 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	8.25 (±0.08) мм
	Масса	0.209 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры)
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм

	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный титановый AXIOM, винтом  с	Номер по каталогу	OPST524
	Диаметр	Ø 4,99 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	9.25 (±0.08) мм
	Масса	0.242 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный титановый AXIOM– 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST534
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	10.25 (±0.08) мм
	Масса	0.276 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный титановый AXIOM, винтом	Номер по каталогу	OPST516
	Диаметр	Ø 4.97 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	10.25 (±0.08) мм
	Масса	0.280 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент стандартный титановый AXIOM, винтом	Номер по каталогу	OPST526
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	11.25 (±0.08) мм
	Масса	0.313 ±0.001 г
	Угол	0°

	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST536
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	12.25 (±0.08) мм
	Масса	0.348 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материала л	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный титановый AXIOM– 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

	Номер по каталогу	OPST614
--	-------------------	---------

Абатмент стандартный титановый AXIOM, винтом с 	Диаметр	Ø 5.96 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	8.25 (±0.08) мм
	Масса	0.269 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент стандартный титановый AXIOM– 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент стандартный титановый AXIOM, винтом с 	Номер по каталогу	OPST624
	Диаметр	Ø 5.99 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	9.25 (±0.08) мм
	Масса	0.317 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт.	

- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST634
	Диаметр	Ø 5.99 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Коронарная высота	Hc 4 мм
	Длина	10.25 (±0.08) мм
	Масса	0.349 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST616
	Диаметр	Ø 5.96 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	10.25 (±0.08) мм
	Масса	0.352 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г

	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST626
	Диаметр	Ø 5.99 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	11.25 (±0.08) мм
	Масса	0.400 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный титановый AXIOM– 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST636
	Диаметр	Ø 5.99 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	12.25 (±0.08) мм
	Масса	0.449 ±0.001 г
	Угол	0°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	

	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент стандартный титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный угловой титановый AXIOM, с винтом

Абатмент стандартный угловой титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST416-15
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	4.35 (±0.06) мм (прямая часть) 5.95 (±0.1) мм (угловая часть)
	Масса	0.185 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент стандартный угловой титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный угловой титановый AXIOM, с винтом	Номер по каталогу	OPST426-15
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	5.25 (±0.1) мм (прямая часть) 5.95 (±0.1) мм (угловая часть)
	Масса	0.200 ±0.001 г

	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный угловой титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный угловой титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST436-15
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	6.18 (±0.06) мм (прямая часть) 5.95 (±0.1) мм (угловая часть)
	Масса	0.218 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный угловой титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный угловой титановый, с винтом 	Номер по каталогу	OPST516-15
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6мм
	Длина	4.68 (±0.1) мм (прямая часть) 5.95 (±0.05) мм (угловая часть)
	Масса	0.328 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент стандартный угловой титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный угловой титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST526-15
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	5.44 (±0.1) мм (прямая часть) 5.95 (±0.05) мм (угловая часть)
	Масса	0.344 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н

	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент стандартный угловой титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный угловой титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST536-15
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	6.32 (±0.1) мм (прямая часть) 5.95 (±0.05) мм (угловая часть)
	Масса	0.370 ±0.001 г
	Угол	15°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент стандартный угловой титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный угловой титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST416-23
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	4.35 (±0.06) мм (прямая часть) 5.95 (±0.05) мм (угловая часть)
	Масса	0.204 ±0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный угловой титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент стандартный угловой титановый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPST516-23
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 6 мм
	Длина	4.68 (±0.1) мм (прямая часть) 5.95 (±0.05) мм (угловая часть)
	Масса	0.360 ±0.001 г
	Угол	23°
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный угловой титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент
стандартный
угловой
титановый
AXIOM,
с винтом



Номер по каталогу	OPST526-23
Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
Высота десны	Hg 2,5 мм
Коронарная высота	Hc 6 мм
Длина	5.44 (±0.1) мм (прямая часть) 5.95 (±0.05) мм (угловая часть)
Масса	0.375 ±0.001 г
Угол	23°
Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
Крутящий момент	25 Н.см
Предел прочности	> 187 Н
Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
Номер по каталогу	OPTS160
Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
Диаметр	1,6 мм
Длина	7,9 (±0.1) мм
Масса	0.061 ±0.001 г
Крутящий момент	25 Н.см
Предел прочности	> 187 Н
Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

В набор поставки входит:

- абатмент стандартный угловой титановый AXIOM – 1 шт.
- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент
стандартный
угловой
титановый
AXIOM,
с винтом



Номер по каталогу	OPST536-23
Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
Высота десны	Hg 3,5 мм
Коронарная высота	Hc 6 мм
Длина	6.32 (±0.1) мм (прямая часть) 5.95 (±0.05) мм (угловая часть)
Масса	0.410 ±0.001 г
Угол	23°
Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
Крутящий момент	25 Н.см
Предел прочности	> 187 Н
Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
Номер по каталогу	OPTS160
Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
Диаметр	1,6 мм
Длина	7,9 (±0.1) мм
Масса	0.061 ±0.001 г
Крутящий момент	25 Н.см
Предел прочности	> 187 Н

	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент стандартный угловой титановый AXIOM – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU, с держателем

Абатмент AXIOM MU, с держателем 	Номер по каталогу	OPMU0-0
	Диаметр	Ø4,8 (0/+0.3) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	8.67 (±0.16) мм
	Масса	0.140 ±0.001 г
	Угол	0°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH102A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø3,0 (±0.05) мм
	Длина	18,7 (±0.1) мм
	Масса	0.210 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Поликарбонат (LSG белый)
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM MU – 1 шт. - держатель – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU, с держателем 	Номер по каталогу	OPMU0-1
	Диаметр	Ø4,8 (0/+0.3) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	9.42 (±0.16) мм
	Масса	0.170 ±0.001 г
	Угол	0°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH102A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø3,0 (±0.05) мм
	Длина	18,7 (±0.1) мм
	Масса	0.210 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Поликарбонат (LSG белый)
В набор поставки входит:		

- абатмент AXIOM MU – 1 шт.
- держатель – 1 шт.
- наклейки для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Абатмент AXIOM MU, с держателем 	Номер по каталогу	OPMU0-2
	Диаметр	Ø4,8 (0/+0.3) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	10.42 (±0.16) мм
	Масса	0.220 ±0.001 г
	Угол	0°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH102A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø3,0 (±0.05) мм
	Длина	18,7 (±0.1) мм
	Масса	0.210 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Поликарбонат (LSG белый)
В набор поставки входит: - абатмент AXIOM MU – 1 шт. - держатель – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU, с держателем 	Номер по каталогу	OPMU0-3
	Диаметр	Ø4,8 (0/+0.3) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	11.42 (±0.16) мм
	Масса	0.260 ±0.001 г
	Угол	0°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH102A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø3,0 (±0.05) мм
	Длина	18,7 (±0.1) мм
	Масса	0.210 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Поликарбонат (LSG белый)
В набор поставки входит: - абатмент AXIOM MU – 1 шт. - держатель – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU, с держателем 	Номер по каталогу	OPMU0-4
	Диаметр	Ø4,8 (0/+0.3) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	12.42 (±0.16) мм
	Масса	0.310 ±0.001 г
	Угол	0°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH102A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø3,0 (±0.05) мм
	Длина	18,7 (±0.1) мм
	Масса	0.210 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Поликарбонат (LSG белый)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент AXIOM MU – 1 шт. - держатель – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент AXIOM MU NO IN, с держателем и винтом

Абатмент AXIOM MU NO IN, с держателем и винтом 	Номер по каталогу	OPMU18-1
	Диаметр	Ø4,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	5.55 (±0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (±0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.162 ±0.001 г
	Угол	18°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø2.0 (±0.05) мм
	Длина	20,75 (±0.13) мм
	Масса	0.520 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм

	Масса	0.048 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM MU NO IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU NO IN, с держателем и винтом 	Номер по каталогу	OPMU18-2
	Диаметр	Ø4,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	6.53 (±0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (±0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.210 ±0.001 г
	Угол	18°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø2.0 (±0.05) мм
	Длина	20,75 (±0.13) мм
	Масса	0.520 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM MU NO IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

	Номер по каталогу	OPMU18-3
--	-------------------	----------

Абатмент AXIOM MU NO IN, с держателем и винтом 	Диаметр	Ø4,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	7.53 (±0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (±0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.245 ±0.001 г
	Угол	18°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø2.0 (±0.05) мм
	Длина	20,75 (±0.13) мм
	Масса	0.520 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент AXIOM MU NO IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU NO IN, с держателем и винтом 	Номер по каталогу	OPMU30-0
	Диаметр	Ø4,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	5.7 (±0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (±0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.148 ±0.001 г
	Угол	30°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость	Ra 0,4
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø2.0 (±0.05) мм

	Длина	20,75 (± 0.13) мм
	Масса	0.520 ± 0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (± 0.1) мм
	Масса	0.048 ± 0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент AXIOM MU NO IN – 1 шт.	
	- держатель – 1 шт.	
	- винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт.	
	- наклейки для карты пациента – 1 шт.	
	- упаковка – 1 шт.	

Абатмент AXIOM MU NO IN, с держателем и винтом 	Номер по каталогу	OPMU30-1
	Диаметр	Ø4,8 (± 0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	6.45 (± 0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (± 0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.170 ± 0.001 г
	Угол	30°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø2.0 (± 0.05) мм
	Длина	20,75 (± 0.13) мм
	Масса	0.520 ± 0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (± 0.1) мм
	Масса	0.048 ± 0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм

	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент AXIOM MU NO IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU NO IN, с держателем и винтом 	Номер по каталогу	OPMU30-2
	Диаметр	Ø4,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	7.45 (±0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (±0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.194 ±0.001 г
	Угол	30°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø2.0 (±0.05) мм
	Длина	20,75 (±0.13) мм
	Масса	0.520 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент AXIOM MU NO IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU NO IN, с держателем и винтом	Номер по каталогу	OPMU30-3
	Диаметр	Ø4,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	8.45 (±0.08) мм (нижняя часть)

		2.47 (± 0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.220 ± 0.001 г
	Угол	30°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	$\varnothing 2.0 (\pm 0.05)$ мм
	Длина	20,75 (± 0.13) мм
	Масса	0.520 ± 0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (± 0.1) мм
	Масса	0.048 ± 0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - абатмент AXIOM MU NO IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU IN, с держателем и винтом

Абатмент AXIOM MU IN, с держателем и винтом 	Номер по каталогу	OPMU18-1-IN
	Диаметр	$\varnothing 4,8 (\pm 0.02)$ мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	5.53 (± 0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (± 0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.175 ± 0.001 г
	Угол	18°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	$\varnothing 2.0 (\pm 0.05)$ мм
	Длина	20,75 (± 0.13) мм
	Масса	0.520 ± 0.001 г
	Крутящий момент	-

	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент AXIOM MU IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент AXIOM MU IN, с держателем и винтом 	Номер по каталогу	OPMU18-2-IN
	Диаметр	Ø4,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	6.53 (±0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (±0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.210 ±0.001 г
	Угол	18°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø2.0 (±0.05) мм
	Длина	20,75 (±0.13) мм
	Масса	0.520 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н

	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM MU IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU IN, с держателем и винтом 	Номер по каталогу	OPMU18-3-IN
	Диаметр	Ø4,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	7.53 (±0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (±0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.250 ±0.001 г
	Угол	18°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø2.0 (±0.05) мм
	Длина	20,75 (±0.13) мм
	Масса	0.520 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM MU IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU IN, с держателем и винтом 	Номер по каталогу	OPMU30-0-IN
	Диаметр	Ø4,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	5.7 (±0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (±0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.155 ±0.001 г
	Угол	30°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм

	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø2.0 (±0.05) мм
	Длина	20,75 (±0.13) мм
	Масса	0.520 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM MU IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU IN, с держателем и винтом 	Номер по каталогу	OPMU30-1-IN
	Диаметр	Ø4,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	6.45 (±0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (±0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.180 ±0.001 г
	Угол	30°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø2.0 (±0.05) мм
	Длина	20,75 (±0.13) мм
	Масса	0.520 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н

	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM MU IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU IN, с держателем и винтом 	Номер по каталогу	OPMU30-2-IN
	Диаметр	Ø4,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	7.45 (±0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (±0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.200 ±0.001 г
	Угол	30°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø2.0 (±0.05) мм
	Длина	20,75 (±0.13) мм
	Масса	0.520 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM MU IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MU IN, с держателем и винтом 	Номер по каталогу	OPMU30-3-IN
	Диаметр	Ø4,8 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	8.45 (±0.08) мм (нижняя часть) 2.47 (±0.03) мм (верхняя часть)
	Масса	0.225 ±0.001 г
	Угол	30°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

	Номер по каталогу	FIXH101A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø2.0 (±0.05) мм
	Длина	20,75 (±0.13) мм
	Масса	0.520 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPMU160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM MU IN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MUN, с держателем

	Абатмент AXIOM MUN, с держателем	Номер по каталогу	OPMUN0-0
		Диаметр	Ø4,0 (0/+0.03) мм
		Высота десны	Hg 0,75 мм
		Длина	7.7 (±0.16) мм
		Масса	0.105 ±0.001 г
		Угол	0°
		Крутящий момент	25 Н.см
		Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
		Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
		Номер по каталогу	FIXH102A
		Обозначение	Держатель
		Диаметр	Ø3,0 (±0.05) мм
		Длина	18,7 (±0.1) мм
		Масса	0.210 ±0.001 г
		Крутящий момент	-
		Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
		Материал	Поликарбонат (LSG белый)
В набор поставки входит:			
- абатмент AXIOM MUN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.			

Абатмент AXIOM MUN, с держателем	Номер по каталогу	OPMUN0-1
	Диаметр	Ø4,0 (0/+0.03) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	8.45 (±0.16) мм
	Масса	0.130 ±0.001 г
	Угол	0°

	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH102A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø3,0 (±0.05) мм
	Длина	18,7 (±0.1) мм
	Масса	0.210 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Поликарбонат (LSG белый)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент AXIOM MUN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент AXIOM MUN, с держателем 	Номер по каталогу	OPMUN0-2
	Диаметр	Ø4,0 (0/+0.03) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	9.45 (±0.16) мм
	Масса	0.156 ±0.001 г
	Угол	0°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH102A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø3,0 (±0.05) мм
	Длина	18,7 (±0.1) мм
	Масса	0.210 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Поликарбонат (LSG белый)
	В набор поставки входит:	
	- абатмент AXIOM MUN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент AXIOM MUN, с держателем 	Номер по каталогу	OPMUN0-3
	Диаметр	Ø4,0 (0/+0.03) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	10.45 (±0.16) мм
	Масса	0.213 ±0.001 г
	Угол	0°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Номер по каталогу	FIXH102A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø3,0 (±0.05) мм
	Длина	18,7 (±0.1) мм
	Масса	0.210 ±0.001 г

	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Поликарбонат (LSG белый)
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM MUN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM MUN, с держателем 	Номер по каталогу	OPMUN0-4
	Диаметр	Ø4,0 (0/+0.03) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	11.45 (±0.16) мм
	Масса	0.250 ±0.001 г
	Угол	0°
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С держателем	
	Номер по каталогу	FIXH102A
	Обозначение	Держатель
	Диаметр	Ø3,0 (±0.05) мм
	Длина	18,7 (±0.1) мм
	Масса	0.210 ±0.001 г
	Крутящий момент	-
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Поликарбонат (LSG белый)
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM MUN – 1 шт. - держатель – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM FLEXIBASE, с винтом

Абатмент AXIOM FLEXIBASE, с винтом 	Номер по каталогу	OPFLEX413
	Диаметр	3.9 (±0.03) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Коронарная высота	Hc 3,5 мм
	Длина	7.55 (-0.11/+0.06) мм
	Масса	0.115 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н

	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM FLEXIBASE – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM FLEXIBASE, с винтом 	Номер по каталогу	OPFLEX423
	Диаметр	3.9 (±0.03) мм
	Высота десны	Нс 3,5 мм
	Коронарная высота	Нг 2,5 мм
	Длина	8.55 (-0.11/+0.06) мм
	Масса	0.133 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM FLEXIBSE – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM FLEXIBASE, с винтом 	Номер по каталогу	OPFLEX433
	Диаметр	3.9 (±0.03) мм
	Высота десны	Нс 3,5 мм
	Коронарная высота	Нг 3,5 мм
	Длина	9.55 (-0.11/+0.06) мм
	Масса	0.154 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160

	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM FLEXIBASE – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM FLEXIBASE, с винтом 	Номер по каталогу	OPFLEX513
	Диаметр	4.9 (±0.03) мм
	Высота десны	Нс 3,5 мм
	Коронарная высота	Нг 1,5 мм
	Длина	7.55 (-0.11/+0.06) мм
	Масса	0.125 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM FLEXIBASE – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM FLEXIBASE, с винтом	Номер по каталогу	OPFLEX523
	Диаметр	4.9 (±0.03) мм
	Высота десны	Нс 3,5 мм
	Коронарная высота	Нг 2,5 мм
	Длина	8.55 (-0.11/+0.06) мм
	Масса	0.151 ±0.001 г

	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM FLEXIBASE – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM FLEXIBASE, с винтом 	Номер по каталогу	OPFLEX533
	Диаметр	4.9 (±0.03) мм
	Высота десны	Hc 3,5 мм
	Коронарная высота	Hg 3,5 мм
	Длина	9.55 (-0.11/+0.06) мм
	Масса	0.183 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит:	
	- абатмент AXIOM FLEXIBASE – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом

Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом 	Номер по каталогу	OPBASE-C501-L
	Диаметр	4,95 (±0.03) мм
	Коронарная высота	Нс 4,65 мм
	Высота десны	Нг 1,5 мм
	Длина	8.70 (-0.11/+0.06) мм
	Масса	0.160 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM Tibase C/L BL – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом 	Номер по каталогу	OPBASE-C502-L
	Диаметр	4,95 (±0.03) мм
	Коронарная высота	Нс 4,65 мм
	Высота десны	Нг 2,5 мм
	Длина	9.70 (-0.11/+0.06) мм
	Масса	0.192 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM Tibase C/L BL – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом 	Номер по каталогу	OPBASE-C503-L
	Диаметр	4,95 (±0.03) мм
	Коронарная высота	Нс 4,65 мм
	Высота десны	Нг 3,5 мм
	Длина	9.70 (-0.11/+0.06) мм
	Масса	0.225 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4-0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160
	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) AXIOM
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит:		
- абатмент AXIOM Tibase C/L BL – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Абатмент модифицируемый AXIOM, с винтом

Абатмент модифицируе- мый AXIOM, с винтом 	Номер по каталогу	OPFS100
	Диаметр	Ø4 (±0.02) мм
	Коронарная высота	Нс 7 мм
	Длина	11.05 (±0.11) мм
	Масса	0.969 ±0.001 г
	Тип соединения	Коническое 12°, система трехгранной индексации соединения
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	С винтом для абатмента (опоры) AXIOM	
	Номер по каталогу	OPTS160

	Обозначение	Винт для абатмента (опоры) АХИОМ
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Предел прочности	> 187 Н
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит: - абатмент модифицируемый АХИОМ – 1 шт. - винт для абатмента (опоры) АХИОМ – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт

Винт заглушка АХИОМ 2.8

Винт заглушка АХИОМ 2.8 	Номер по каталогу	OPIM028
	Диаметр	Ø2,55 (±0.03) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	4.2 (±0.05) мм
	Масса	0.015 ±0.001 г
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколичиваемое
	Крутящий момент	Н/П
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	ПЭЭК: VestaKEEP i4R
В набор поставки входит: - винт заглушка АХИОМ 2.8– 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заглушка АХИОМ

Винт заглушка АХИОМ 	Номер по каталогу	OPIM100
	Диаметр	Ø2,73 (±0.05) мм
	Высота десны	Hg 1,75 мм
	Масса	0.065 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заглушка АХИОМ – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт зажимляющий АХИОМ 2.8

Винт зажимляющий АХИОМ 2.8	Номер по каталогу	OPHS210
	Диаметр	Ø 2.76 мм (±0.02)
	Высота десны	Hg 1,0 мм
	Длина	6 (±0.1) мм

	Масса	0.027 ±0.001 г
	Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
	Крутящий момент	Н/П
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	ПЭЭК: VestaKEEP i4R
В набор поставки входит:		
- винт заживляющий AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

	Винт заживляющий AXIOM 2.8	Номер по каталогу	OPHS220
		Диаметр	Ø 2.79 (±0.02) мм
		Высота десны	Hg 2,5 мм
		Длина	7.5 (±0.1) мм
		Масса	0.040 ±0.001 г
		Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
		Крутящий момент	Н/П
		Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
		Материал	ПЭЭК: VestaKEEP i4R
В набор поставки входит:			
- винт заживляющий AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.			

	Винт заживляющий AXIOM 2.8	Номер по каталогу	OPHS240
		Диаметр	Ø 2.79 mm (±0.02)
		Высота десны	Hg 4,0 мм
		Длина	9 (±0.1) мм
		Масса	0.044 ±0.001 г
		Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
		Крутящий момент	Н/П
		Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
		Материал	ПЭЭК: VestaKEEP i4R
В набор поставки входит:			
- винт заживляющий AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.			

	Винт заживляющий AXIOM 2.8	Номер по каталогу	OPHS250
		Диаметр	Ø 2.79 (±0.02) мм
		Высота десны	Hg 5,5 мм
		Длина	10.5 (±0.1) мм
		Масса	0.053 ±0.001 г
		Тип соединения	Конус Морзе 3°, вколачиваемое
		Крутящий момент	Н/П
		Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
		Материал	ПЭЭК: VestaKEEP i4R
В набор поставки входит:			
- винт заживляющий AXIOM 2.8 – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.			

Винт заживляющий плоский AXIOM

	Номер по каталогу	OPHSF310
--	-------------------	----------

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	7.95 (±0.16) мм
	Масса	0.140 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF320
	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	8.95 (±0.16) мм
	Масса	0.167 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF330
	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	9.95 (±0.16) мм
	Масса	0.205 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF340
	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	10.95 (±0.16) мм
	Масса	0.247 г ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт.		

- упаковка – 1 шт.

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF400
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	7.2 (±0.16) мм
	Масса	0.123 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF410
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	7.95 (±0.16) мм
	Масса	0.153 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF420
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	8.95 (±0.16) мм
	Масса	0.193 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий плоский AXIOM	Номер по каталогу	OPHSF430
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм

	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	9.95 (±0.16) мм
	Масса	0.232 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF440
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	10.95 (±0.16) мм
	Масса	0.302 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF500
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	7.2 (±0.16) мм
	Масса	0.149 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF510
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	7.95 (±0.16) мм
	Масса	0.184 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
Шероховатость (Ra) 0,8 мкм		

	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF520
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	8.95 (±0.16) мм
	Масса	0.239 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF530
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	9.95 (±0.16) мм
	Масса	0.289 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF540
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	10.95 (±0.16) мм
	Масса	0.411 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт закрывающий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF610
	Диаметр	Ø6,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	7.95 (±0.16) мм
	Масса	0.223 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт закрывающий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт закрывающий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF620
	Диаметр	Ø6,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	8.95 (±0.16) мм
	Масса	0.283 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт закрывающий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт закрывающий плоский AXIOM 	Номер по каталогу	OPHSF630
	Диаметр	Ø6,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	9.95 (±0.16) мм
	Масса	0.336 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт закрывающий плоский AXIOM – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт закрывающий плоский AXIOM	Номер по каталогу	OPHSF640
	Диаметр	Ø6,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм

	Длина	10.95 (±0.16) мм
	Масса	0.518 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий плоский АХИОМ – 1 шт. - наклейки для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий АХИОМ

Винт заживляющий АХИОМ 	Номер по каталогу	OPHS310
	Диаметр	Ø 3.38 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	8.95 (±0.16) мм
	Масса	0.170 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий АХИОМ – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий АХИОМ 	Номер по каталогу	OPHS320
	Диаметр	Ø 3.39 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	8.95 (±0.16) мм
	Масса	0.202 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий АХИОМ – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий АХИОМ 	Номер по каталогу	OPHS330
	Диаметр	Ø 3.39 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	10.95 (±0.16) мм
	Масса	0.237 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см

	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS340
	Диаметр	Ø3,4 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	11.95 (±0.16) мм
	Масса	0.286 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS400
	Диаметр	Ø 3.96 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм
	Длина	8.2 (±0.16) мм
	Масса	0.286 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS410
	Диаметр	Ø 3.97 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	8.95 (±0.16) мм
	Масса	0.204 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит:		

- винт заживляющий AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS420
	Диаметр	Ø 3.98 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	9.95 (±0.16) мм
	Масса	0.242 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS430
	Диаметр	Ø 3.98 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	10.95 (±0.16) мм
	Масса	0.285±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS440
	Диаметр	Ø4,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	11.95 (±0.16) мм
	Масса	0.344 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий AXIOM	Номер по каталогу	OPHS500
	Диаметр	Ø 4.94 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 0,75 мм

	Длина	8.2 (± 0.16) мм
	Масса	0.224 ± 0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

В набор поставки входит:

- винт заживляющий AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS510
	Диаметр	$\varnothing 4.95 (\pm 0.02)$ мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	8.95 (± 0.16) мм
	Масса	0.265 ± 0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

В набор поставки входит:

- винт заживляющий AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS520
	Диаметр	$\varnothing 4.96 (\pm 0.02)$ мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	9.95 (± 0.16) мм
	Масса	0.317 ± 0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

В набор поставки входит:

- винт заживляющий AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS530
	Диаметр	$\varnothing 4.97 (\pm 0.02)$ мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	10.95 (± 0.16) мм
	Масса	0.363 ± 0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

В набор поставки входит:

- винт заживляющий AXIOM – 1 шт.
- наклейки для карточки пациента – 1 шт.

- упаковка – 1 шт.

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS540
	Диаметр	Ø5,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	11.95 (±0.16) мм
	Масса	0.490 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS610
	Диаметр	Ø 5.97 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Длина	8.95 (±0.16) мм
	Масса	0.340 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS620
	Диаметр	Ø 5.96 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Длина	9.95 (±0.16) мм
	Масса	0.395 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий AXIOM	Номер по каталогу	OPHS630
---------------------------	-------------------	---------

	Диаметр	Ø 5.96 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Длина	10.95 (±0.16) мм
	Масса	0.457 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт заживляющий AXIOM 	Номер по каталогу	OPHS640
	Диаметр	Ø6,0 (±0.02) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Длина	11.95 (±0.16) мм
	Масса	0.641 ±0.001 г
	Крутящий момент	5-10 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
В набор поставки входит: - винт заживляющий AXIOM – 1 шт. - наклейки для карточки пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт для абатмента (опоры) AXIOM 	Номер по каталогу	OPMU160
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит: - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт для абатмента (опоры) AXIOM	Номер по каталогу	OPTS160
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм

	Предел прочности	> 187 Н
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	DLC
В набор поставки входит: - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт для абатмента (опоры) AXIOM 	Номер по каталогу	MU140
	Диаметр	1,4 мм
	Длина	4,5 (-0.1/0) мм
	Масса	0.036 ±0.001 г
	Крутящий момент	<15 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Предел прочности	200 Н
	Материал	Ti6Al4V-ELI
	Обработка поверхности	DLC
	В набор поставки входит: - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Винт лабораторный AXIOM

Винт для абатмента (опоры) AXIOM 	Номер по каталогу	OPTS161
	Диаметр	1,6 мм
	Длина	7,9 (±0.1) мм
	Масса	0.061 ±0.001 г
	Крутящий момент	<15 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	-
	В набор поставки входит: - винт для абатмента (опоры) AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.	

Винт лабораторный AXIOM 	Номер по каталогу	OPMU161
	Диаметр	1.45 (0/+0.02) мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048г±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	Анодирование (синий цвет)

В набор поставки входит:

- винт лабораторный AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Винт лабораторный AXIOM 	Номер по каталогу	OPMU161-4
	Диаметр	1.45 (0/+0.02) мм
	Длина	6,7 (±0.1) мм
	Масса	0.048г±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	Анодирование (синий цвет)
В набор поставки входит: - винт лабораторный AXIOM – 4 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт лабораторный AXIOM 	Номер по каталогу	OPTS162
	Диаметр	2 (±0.05) мм
	Длина	26,3 (±0.13) мм
	Масса	0.361г±0.001 г
	Крутящий момент	<15 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,4 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	-
В набор поставки входит: - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт		

Винт лабораторный AXIOM 	Номер по каталогу	MU141
	Диаметр	1.4 мм
	Длина	4,5 (-0.1/0) мм
	Масса	0.036 ±0.001 г
	Крутящий момент	<15 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Ti6Al4V-ELI
	Обработка поверхности	Анодирование (синий цвет)
В набор поставки входит:		

- винт лабораторный AXIOM – 1 шт.
- набор наклеек для карты пациента – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Винт лабораторный AXIOM 	Номер по каталогу	MUT101
	Диаметр	1.85 (± 0.05) мм
	Длина	14 ($-0.15/+0.1$) мм
	Масса	0.178 $\pm$ 0.001 г
	Крутящий момент	Затягивание вручную (5-10 Н.см)
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	Анодирование (синий цвет)
В набор поставки входит: - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт лабораторный AXIOM 	Номер по каталогу	OPPU101
	Диаметр	2 (± 0.05) мм
	Длина	18,05 (± 0.15) мм
	Масса	0.204 $\pm$ 0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	-
В набор поставки входит: - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт лабораторный AXIOM	Номер по каталогу	MUT102
	Диаметр	1.4 мм
	Длина	21 ($-0.15/+0.1$) мм

	Масса	0.039 ±0.001 г
	Крутящий момент	Затягивание вручную (5-10 Н.см)
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	Анодирование (синий цвет)
В набор поставки входит: - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт лабораторный AXIOM 	Номер по каталогу	OPPU102
	Диаметр	2 (±0.05) мм
	Длина	21,05 (±0.15) мм
	Масса	0.250 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	-
В набор поставки входит: - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Винт лабораторный AXIOM 	Номер по каталогу	OPPU102L
	Диаметр	2 (±0.05) мм
	Длина	24,05 (±0.15) мм
	Масса	0.303 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Шероховатость (Ra)	0,8 мкм
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	-
В набор поставки входит: - винт лабораторный AXIOM – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR

Аттачмент (замковое)	Номер по каталогу	OPLA010
-------------------------	-------------------	---------

крепление) AXIOM LOCATOR 	Диаметр	Ø4,0 (0/+0.03) мм
	Высота десны	Hg 1,5 мм
	Масса	0.194 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	Нитрид титана (цвет покрытия золотисто-жёлтый)
В набор поставки входит: - Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR 	Номер по каталогу	OPLA020
	Диаметр	Ø4,0 (0/+0.03) мм
	Высота десны	Hg 2,5 мм
	Масса	0.230 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	Нитрид титана (цвет покрытия золотисто-жёлтый)
В набор поставки входит: - Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR 	Номер по каталогу	OPLA030
	Диаметр	Ø4,0 (0/+0.03) мм
	Высота десны	Hg 3,5 мм
	Масса	0.264 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	Нитрид титана (цвет покрытия золотисто-жёлтый)
В набор поставки входит: - Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR	Номер по каталогу	OPLA040
	Диаметр	Ø4,0 (0/+0.03) мм
	Высота десны	Hg 4,5 мм
	Масса	0.315 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)

	Обработка поверхности	Нитрид титана (цвет покрытия золотисто-жёлтый)
В набор поставки входит: - Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR 	Номер по каталогу	OPLA050
	Диаметр	Ø4,0 (0/+0.03) мм
	Высота десны	Hg 5,5 мм
	Масса	0.368 ±0.001 г
	Крутящий момент	25 Н.см
	Материал	Титановый сплав (Ti6Al4V-ELI)
	Обработка поверхности	Нитрид титана (цвет покрытия золотисто-жёлтый)
В набор поставки входит: - Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR – 1 шт. - набор наклеек для карты пациента – 1 шт. - упаковка – 1 шт.		

7. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Все этапы лечения необходимо спланировать до начала хирургического вмешательства, включая этап заживления. Тем не менее, по ходу операции, в случае необходимости, можно скорректировать длительность восстановления.

Хирургический протокол AXIOM предполагает субкрестальную установку имплантата с погружением сверла на 0,5мм относительно кромки альвеолярного гребня. Обработка поверхности имплантата двухфазным фосфатом кальция (BCP) позволяет улучшить процесс восстановления кости в области имплантации.

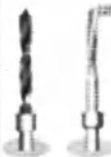
Для удобства определения диаметра имплантата и соответствующего хирургического инструментария используется цветовая кодировка. Сверла необходимо использовать в указанной последовательности и в соответствии с протоколом.

Имплантат конический AXIOM, включая винт заглушку AXIOM

Имплантат конический AXIOM PX, включая винт заглушку AXIOM, применяется для имплантации после экстракции зуба при наличии кости с низкой плотностью.

Маркировка		Маркировка кости в месте, где будет установлен имплантат
------------	---	--

Сверление		Стартовое сверло (Ø2,0)
Сверление		Сверление в соответствии с диаметром и длиной имплантата. Последовательность сверления зависит от диаметра имплантата (см. последовательность сверления ниже). При установке в кость низкой или средней плотности мы рекомендуем перебур в диаметре.
Измерение глубины		Глубиномер используется для проверки глубины отверстия, а последовательность сверления зависит от диаметра имплантата (см. последовательность сверления ниже).
Сверление		Продолжайте сверлить в соответствии с последовательностью сверления (см. ниже).
Затяжка		Имплантат можно завинтить вручную или с помощью контрглового наконечника.

Forets	Ø2.0	Ø2.0 / 2.4	Ø2.4 / 3.0	Ø3.0 / 3.6	Ø3.6 / 4.2
Implants					
Axiom® PX Ø 3.4 mm	→				
Axiom® PX Ø 4.0 mm	→	→	→		
Axiom® PX Ø 4.6 mm	→	→	→	→	
Axiom® PX Ø 5.2 mm	→	→	→	→	→

Последовательность сверления

Каждый заключительный инструмент, соответствующий диаметру имплантата конического AXIOM PX, можно идентифицировать с помощью цветовой кодировки.

Инструменты должны использоваться в хронологическом порядке, представленном выше.

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG, включая винт заглушку AXIOM

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM REG, включая винт заглушку AXIOM, применяется в большинстве клинических случаев и любом типе кости. Подходит для операции синуслифтинга.

Маркировка		Маркировка кости в месте, где будет установлен имплантат
Сверление		Стартовое сверло
Сверление		Сверление в соответствии с диаметром и длиной имплантата. Последовательность сверления зависит от диаметра имплантата (см. последовательность сверления ниже).
Измерение глубины		Глубиномер используется для проверки глубины отверстия.
Сверление		Продолжайте сверлить в соответствии с последовательностью сверления (см. ниже).

Нарезание резьбы		Нарезание резьбы с целью создания резьбы, чтобы помочь завинтить имплантат.
Затяжка		Имплантат можно завинтить вручную или с помощью контрглового наконечника.

Drills \ Implants	Drills				
	Ø2.0	Ø2.4 / 3.0	Ø3.0 / 3.6	Ø3.6 / 4.2	Ø4.2 / 4.8
Axiom® REG Ø 3.4 mm					
Axiom® REG Ø 4.0 mm					
Axiom® REG Ø 4.6 mm					
Axiom® REG Ø 5.2 mm					

Последовательность сверления

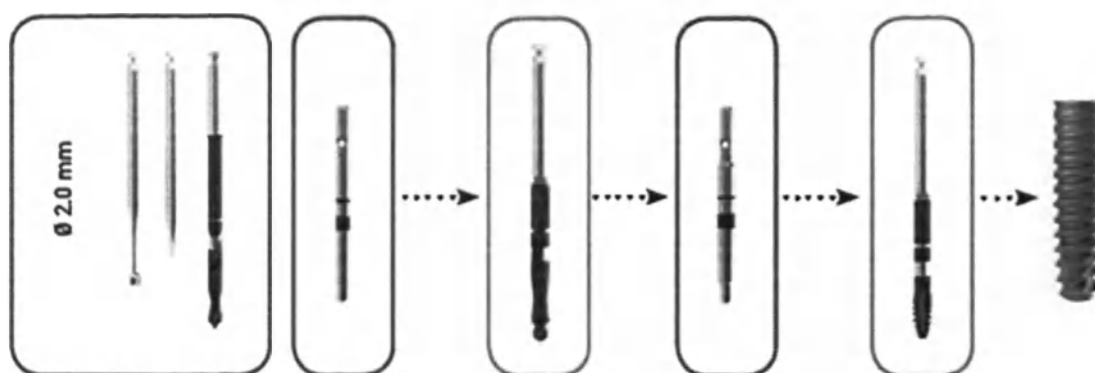
Каждый заключительный инструмент, соответствующий диаметру имплантата цилиндрически-конического AXIOM REG, можно идентифицировать с помощью цветовой кодировки.

Инструменты должны использоваться в хронологическом порядке, представленном выше.

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM 2.8, включая винт заглушку AXIOM

Имплантат цилиндрически-конический AXIOM 2.8, включая винт заглушку AXIOM, применяется в области резцов, в случаях ограниченного мезиодистального пространства.

Маркировка		Маркировка кости в месте, где будет установлен имплантат
Сверление		Стартовое сверло
Сверление		Сверление в соответствии с длиной имплантата.
Измерение глубины		Глубиномер используется для проверки глубины отверстия.
Нарезание резьбы		Нарезание резьбы с целью создания резьбы, чтобы помочь завинтить имплантат.
Затяжка		Имплантат можно завинтить вручную или с помощью контрглового наконечника.



Последовательность сверления

Существуют следующие установки имплантата:

- с отслаиванием лоскута, что позволяет увидеть альвеолярную кость и анатомические препятствия, контролировать глубину сверления с помощью маркировки на сверлах (считывается на уровне края костного гребня), оценить 0,5 мм субкрестального размещение имплантата. Максимальная безопасность оперативного вмешательства.
- без отслаивания лоскута, что позволяет сохранить надкостницу, определить имеющийся объем кости рентгенологически.

Требуется оценка толщины мягких тканей с помощью зонда для определения клинических параметров гребня.

Для адекватной подготовки костного ложа к глубине погружения сверла необходимо прибавлять толщину десны.

Абатмент временный AXIOM, с винтом

Используется для временного одиночного или мостовидного протезирования с винтовой фиксацией на имплантатах конических AXIOM PX и имплантатах цилиндрически-конических AXIOM REG.

При необходимости возможна фрезировка.

Соедините абатмент временный с имплантатом коротким винтом для абатмента (опоры) при помощи длинного шестигранного ключа (закручивать вращательную умеренным усилием). Затяните с помощью шестигранных ключей и динамометрического ключа с храповым механизмом, или с помощью шестигранных мандрелей и приспособления для регулировки крутящего		
---	--	--

момента. Рекомендованная сила крутящего момента при закручивании абатмента 25 Нсм		
---	--	--

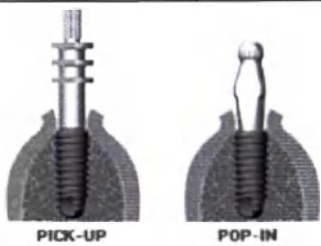
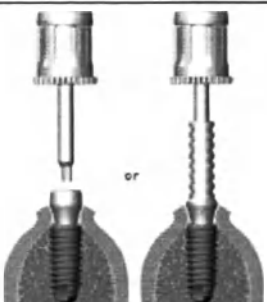
Абатмент временный AXIOM 2.8

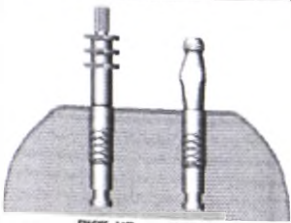
Используется для одиночного протезирования на имплантатах цилиндрически-конических AXIOM 2.8 с винтовой фиксацией при ограниченном мезиодистальном пространстве.

Установите абатменты временные на имплантаты цилиндрически-конические AXIOM 2.8 вручную		
---	---	---

Абатмент эстетический титановый AXIOM, с винтом

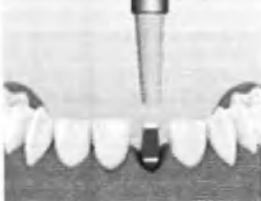
Предназначен для одиночных или мостовидных реставраций на имплантатах конических AXIOM PX и имплантатах цилиндрически-конических AXIOM REG с цементной фиксацией.

Извлеките винт заживляющий с помощью длинного шестигранного ключа.		
Установите трансфер в имплантат и зафиксируйте винт трансфера (вручную с использованием среднего усилия затягивания). Снимите слепок методом закрытой ложки (метод "pop-in") или открытой ложки (метод "pick-up").	 PICK-UP POP-IN	
Повторно установите винт заживляющий или сделайте временный протез с помощью абатмента временного.		

Отлейте мастер-модель.		
Вставьте абатмент эстетический титановый в аналог имплантата и зафиксируйте его с помощью винта лабораторного AXIOM. Отфрезируйте абатмент до получения нужной формы и сформируйте постоянный протез.		
Вставьте абатмент в имплантат, ориентируя абатмент в соответствии с индексацией имплантата. Зафиксируйте прилагаемым винтом для окончательной фиксации.		
Затяните с помощью шестигранных ключей и динамометрического ключа с храповым механизмом, или с помощью шестигранных мандрелей и приспособления для регулировки крутящего момента		

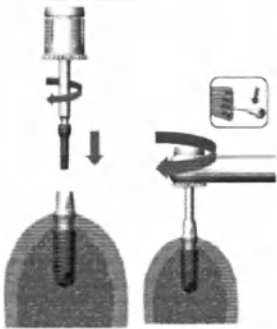
Абатмент вколачиваемый AXIOM 2.8

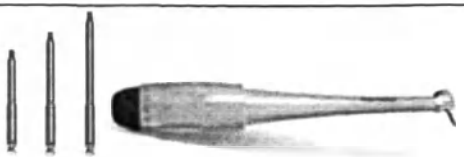
Используется для одиночного протезирования на имплантатах цилиндрически-конических AXIOM 2.8 с цементной фиксацией

Вколотите абатменты вколачиваемые в имплантаты цилиндрически-конические AXIOM 2,8		
---	---	---

Абатмент стандартный титановый AXIOM, с винтом / Абатмент стандартный угловой титановый AXIOM, с винтом

Используется для одиночного или мостовидного протезирования на имплантатах конических AXIOM PX и имплантатах цилиндрически-конических AXIOM REG с цементной фиксацией

Снимите винт заживляющий с помощью длинного шестигранного ключа. Установите выбранный стандартный титановый абатмент в имплантат до упора и зафиксируйте его прилагаемым винтом для абатмента (опоры). Зафиксируйте винт с помощью динамометрического ключа или наконечника и шестигранной мандрели. Величина крутящего момента – 25 Нсм		
Снимите классический слепок с помощью стандартной ложки. После снятия слепка закройте шахту винта подходящим материалом, предварительно изолировав головку винта. Зафиксируйте защитный колпачок.		
Изготовьте окончательную реставрацию. Закройте шахту винта пломбировочным материалом, предварительно изолировав головку винта. Зафиксируйте коронку на абатменте во рту на временный цемент.		

Затяните с помощью шестигранных ключей и динамометрического ключа с храповым механизмом, или с помощью шестигранных мандрелей и приспособления регулировки для крутящего момента		
--	--	--

Абатмент AXIOM MU, с держателем/ AXIOM MU NO IN, с держателем и винтом/ Абатмент AXIOM MU IN, с держателем и винтом/ Абатмент AXIOM MUN, с держателем

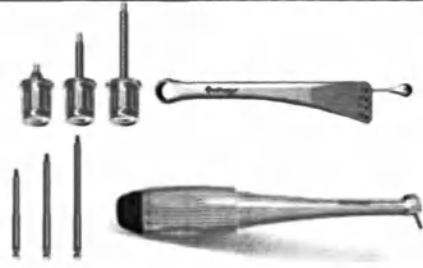
Используются для мостовидных реставраций с винтовой фиксацией, для протезирования при полной адентии и для балочных конструкций с винтовой фиксацией на имплантатах конических AXIOM PX и имплантатах цилиндрически-конических AXIOM REG.

Поставляются с держателем и винтом для абатмента для окончательной фиксации.

Установка	 Прямой	Установите абатмент AXIOM MU в имплантат без затягивания
	 Угловой	Установите абатмент AXIOM MU в имплантат
Завинчивание		Завинтите винт для абатмента (опоры), чтобы установить абатмент AXIOM MU на имплантат. Затяните с помощью ключа MU и динамометрического ключа с храповым механизмом, или с помощью мандрелей MU и приспособления для регулировки крутящего момента

Абатмент AXIOM FLEXIBASE, с винтом

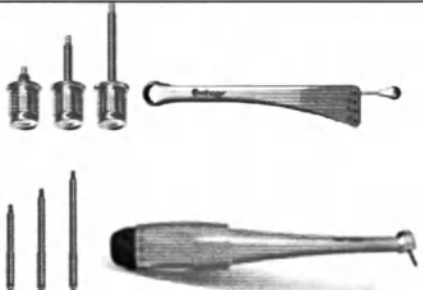
Используется для одиночного или мостовидного протезирования с цементной фиксацией на имплантатах конических AXIOM PX и имплантатах цилиндрически-конических AXIOM REG

Завинтите винт для абатмента (опоры), чтобы установить абатмент на имплантат. Затяните с помощью шестигранных ключей и динамометрического ключа с храповым механизмом, или с помощью шестигранных мандрелей и приспособления для регулирования крутящего момента.	
---	--

Абатмент AXIOM Tibase C/L BL, с винтом

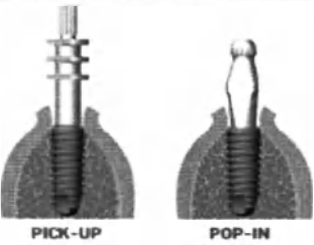
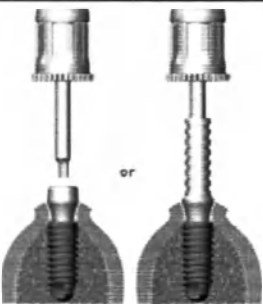
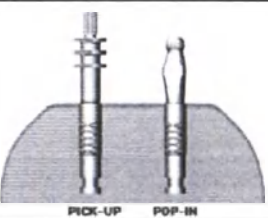
Используется для одиночного или мостовидного протезирования с цементной фиксацией на имплантатах конических AXIOM PX и имплантатах цилиндрически-конических AXIOM REG.

Совместимы со скан-адаптерами Sirona для интраорального сканера SIRONA CEREC. Совместимы с блоками SIRONA CERECc размера L.

Завинтите винт для абатмента, чтобы установить абатмент на имплантат. Затяните с помощью шестигранных ключей и динамометрического ключа с храповым механизмом, или с помощью шестигранных мандрелей и приспособления для регулировки крутящего момента.	
---	--

Абатмент AXIOM модифицируемый, с винтом

Используется для одиночного или мостовидного протезирования с цементной фиксацией на имплантатах конических AXIOM PX и имплантатах цилиндрически-конических AXIOM REG.

Выкрутите винт заживляющий с помощью длинного шестигранного ключа. Вставьте трансфер в имплантат и зафиксируйте винт трансфера (вручную с использованием среднего усилия затяжки). Сделайте слепок с помощью закрытой ложки или открытой ложки.		
Повторно установить винт заживляющий или сделайте временный протез с помощью абатмента временного.		
Установите аналог на колпачок трансфера и затяните винт колпачка трансфера вручную или с помощью шестигранного ключа (вручную с использованием среднего усилия затяжки <10 Н.см).		
Правильно расположив абатмент, вставьте его в аналог и завинтите винт для абатмента.		
Обработайте абатмент модифицируемый до необходимого размера путем сверления непосредственно на модели. Сформируйте постоянный протез		

Завинтите винт для абатмента, чтобы установить абатмент модифицируемый на имплантат.		
Затяните с помощью шестигранных ключей и динамометрического ключа с храповым механизмом, или с помощью шестигранных мандрелей и приспособления для регулировки крутящего момента		

Этапы заживления

Этап заживления после установки имплантата можно проводить тремя различными способами:

- двухэтапная хирургия
- одноэтапная хирургия
- немедленная нагрузка

Винт-заглушка (поставляется с имплантатом) помещается в имплантат с целью защиты внутреннего соединения вовремя остеоинтеграции. Десна над имплантатом закрывается; таким образом имплантат не подвергается какой-либо нагрузке.

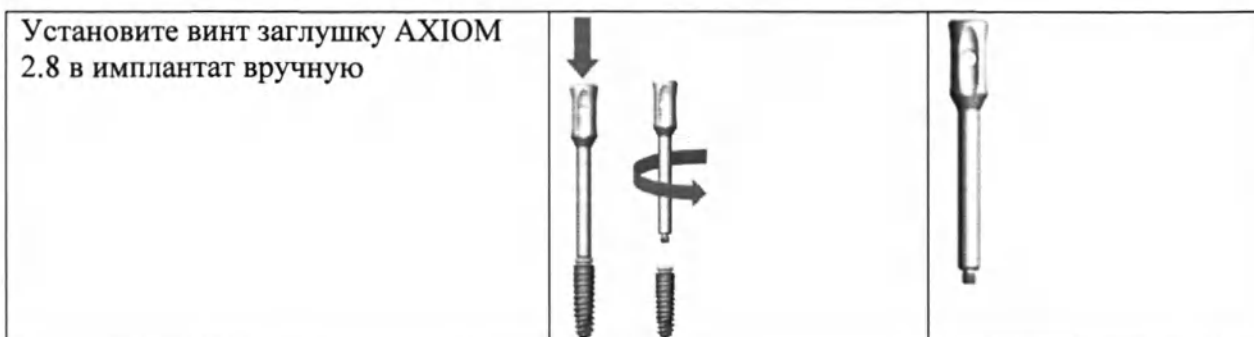
После остеоинтеграции в имплантат помещается заживляющий винт с целью придания десне определенной формы вокруг заживляющего винта, который имеет такой же профиль выступания, как и протезная часть.

Винт заживляющий помещается в имплантат сразу после установки имплантата с целью придания десне определенной формы вокруг винта заживляющего, который имеет такой же профиль выступания, как и протезная часть.

Хирург может приступить к немедленной нагрузке путем установки протеза на имплантат.

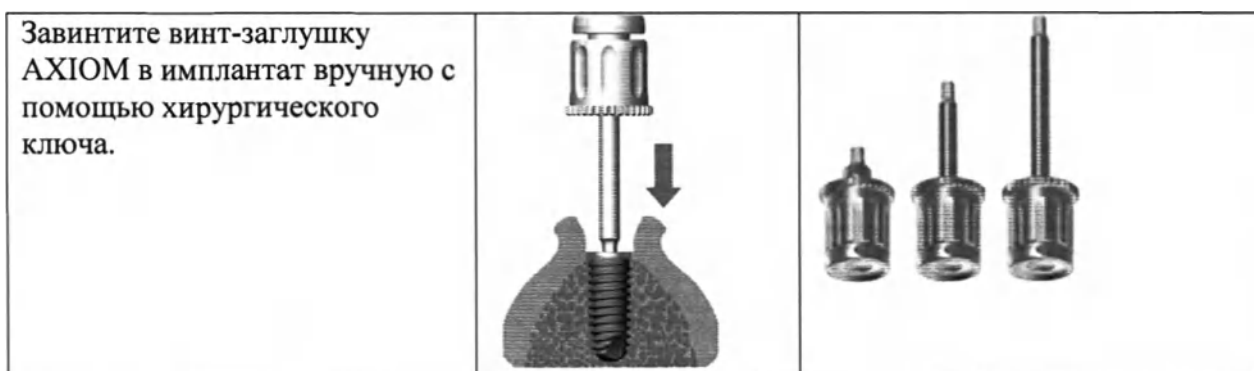
Винт заглушка AXIOM 2.8

Используется для имплантата цилиндрически-конического AXIOM 2.8 с целью предварительного формирования десны в фазе заживления, защиты соединения имплантата во время периода интеграции.



Винт заглушка AXIOM

Используется для предварительного формирования десны в фазе заживления, защиты соединения имплантата конического AXIOM PX и имплантата цилиндрически-конического AXIOM REG во время периода интеграции.



Винт заживляющий AXIOM 2.8

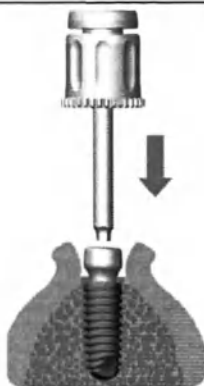
Используется для имплантата цилиндрически-конического AXIOM 2.8 с целью предварительного формирования десны в фазе заживления.



Винт заживляющий AXIOM / Винт заживляющий плоский AXIOM

Используется для имплантатов конических AXIOM PX и имплантатов цилиндрически-конических AXIOM REG с целью предварительного формирования десны в фазе заживления, защиты соединения имплантата во время периода интеграции.

Завинтите винт заживляющий AXIOM в имплантат вручную с помощью хирургического ключа.



Винт лабораторный AXIOM

Используется для фиксации многокомпонентной фиксации на протяжении планирования, моделирования, производства, а также финальной фиксации.

Винт для абатмента (опоры) AXIOM

Используется для фиксации абатмента к имплантату.

Аттачмент (замковое крепление) AXIOM LOCATOR

Используется для стабилизации съемного протеза

Завинтите аттачмент AXIOM Locator в имплантат



8. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Условия применения имплантатов стоматологических с принадлежностями не предусматривают никаких особых условий или ограничений. Они подходят для имплантации в любом верхне- или нижнечелюстном дентальном отделе.

Медицинское изделие должно быть использовано только профессиональными стоматологами, прошедшими специализацию по имплантологии и/или ортопедической стоматологии, располагающие соответствующим оборудованием и работающие с соблюдением санитарных норм. Условием использования системы является владение хирургическими и/или ортопедическими мануальными навыками.

В соответствии с рекомендациями компании-производителя Anthogyr для работы с имплантатами стоматологическими с принадлежностями рекомендовано использовать только оригинальные компоненты и инструменты.

Компания не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в результате несоблюдения предложенных протоколов или при использовании имплантатов, ортопедических компонентов или инструментов, не относящихся к системе AXIOM, поскольку составные части имплантационных производителей не являются взаимозаменяемыми.

Врач целиком и полностью отвечает за проведение предварительного обследования пациента, а также за выбор методики лечения. Выбор диаметра и длины имплантата зависит от клинической ситуации и определяется врачом до операции.

Изделие должно быть исправным в процессе эксплуатации при номинальных значениях температуры от +32°C до +42°C, устойчивым к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми он контактирует.

Рекомендуется хранить имплантаты в оригинальной упаковке при температуре окружающего воздуха от 15 до 30°C, вдали от влаги и прямых солнечных лучей.

Упаковка должна быть защищена от попадания пыли и не должна находиться в одном помещении с растворителями и/или красками, содержащими растворители или химические вещества.

Продукция не должна использоваться после окончания срока годности, указанного на сопроводительной этикетке.

В случае повреждения упаковки (блистера) или обнаружения дефекта при вскрытии упаковки использование продукта запрещено.

Условия транспортировки: перевозка изделий осуществляется в транспортировочных коробках со съемной крышкой автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом при температуре от +5 до +30 °C.

9. СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Стандарт	Название
AAMI TIR 12 (2010)	Разработка, тестирование и маркировка многоразовых медицинских изделий для вторичной обработки в медицинских учреждениях: Руководство для производителей медицинских изделий
ASTM F136 (2013)	Стандартная спецификация на пластичный сплав титан-балюминий-4ванадий ELI (ультрамелкозернистый) для хирургических имплантатов (UNS R56401)
ASTM F2026 (2016)	Стандартная спецификация для полимеров полиэфирэфиркетона (ПЭЭК), используемых для изготовления хирургических имплантатов
ASTM F1929 (2015)	Стандартный метод обнаружения негерметичности уплотнения в пористой медицинской упаковке с помощью проникновения красителя
ASTM F1980-07 (2016)	Стандартное руководство по ускоренному старению систем защиты стерильности для медицинских изделий
ASTM F86 (2013)	Стандартная практика подготовки поверхности и маркировки металлических хирургических имплантатов
ASTM F88-F88M-15 (2015)	Стандартный метод испытания прочности уплотнения гибких защитных материалов
ISO 2768-1 (1989)	Общие допуски: Часть 1: предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками

ISO 2768-2 (1989)	Общие допуски: Часть 2: геометрические допуски для деталей без указания допусков на отдельные размеры.
ISO 5832-3 (2016)	Имплантаты для хирургии – Металлические материалы – Часть 3: деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия
NF EN 556-1 (2002)	Стерилизация медицинских изделий – Требования к медицинским изделиям категории "СТЕРИЛЬНЫЕ" – Часть 1: требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации
NF EN 868-5 (2009)	Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 5: термостойкие самозапечатывающиеся пакеты и рукава из пористых материалов и многослойной пластиковой пленки – Требования и методы испытаний
NF EN 980 (2008)	Символы для использования в маркировке медицинских изделий
NF EN 1041-A1 (2013)	Информация, предоставляемая изготовителем медицинских изделий
NF EN 1642 (2013)	Стоматология – Медицинские изделия для стоматологических целей – Зубные имплантаты
NF EN ISO 1942 (2011)	Стоматология – Терминология
NF EN ISO 6410-1 (1996)	Технические чертежи. Винтовые резьбы и детали с резьбой. Часть 1: общие нормы
NF EN ISO 10993-1 (2010)	Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 1: оценка и испытания в рамках процесса менеджмента риска
NF EN ISO 10993-3 (2009)	Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 3: испытания на генотоксичность, канцерогенность и репродуктивную токсичность
NF EN ISO 10993-5 (2010)	Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 5: испытания на цитотоксичность in vitro
NF EN ISO 10993-6 (2009)	Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 6: испытания на местные эффекты после имплантации
NF EN ISO 10993-10 (2013)	Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 10: испытания на раздражение и сенсибилизацию кожи
NF EN ISO 10993-11 (2009)	Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 11: испытания на системную токсичность
NF EN ISO 10993-12 (2012)	Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 12: подготовка проб и контрольные образцы
NF EN ISO 10993-17 (2009)	Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 17: Установление допустимых пределов для продуктов вымывания
NF EN ISO 10993-18 (2009)	Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 18: исследование химических свойств материалов
NF EN ISO 11137-1 (2016)	Стерилизация медицинской продукции – Облучение – Часть 1: требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
NF EN ISO 11137-2 (2015)	Стерилизация медицинской продукции – Облучение – Часть 2: установление стерилизующей дозы
NF EN ISO 11607-1/A1 (2014)	Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 1: требования к материалам, системам защиты стерильности и системам упаковки.
NF EN ISO 11607-2/A1 (2014)	Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 2: требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки
NF EN ISO 11737-1 (2006)	Стерилизация медицинских изделий – Микробиологические методы – Часть 1: оценка популяции микроорганизмов на продукции
NF EN ISO 11737-2 (2010)	Стерилизация медицинских изделий – Микробиологические методы – Часть 2: испытания на стерильность, проводимые при определении, валидации и обеспечении процессов стерилизации
NF EN ISO 13485 (2012)	Изделия медицинские изделия – Системы менеджмента качества – Требования для целей регулирования
NF EN ISO 14644-1 (1999)	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды – Часть 1: классификация чистоты воздуха по концентрации частиц
NF EN ISO 14644-2 (2000)	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды – Часть 2: мониторинг для подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц
NF EN ISO 14644-3 (2006)	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды – Часть 3: методы испытаний
NF EN ISO 14644-4 (2001)	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды – Часть 4: проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию
NF EN ISO 14698-1 (2004)	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды – Контроль биозагрязнений – Часть 1: общие принципы и методы

NF EN ISO 14698-2 (2004)	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды – Контроль биозагрязнений – Часть 2: оценка и интерпретация данных о биозагрязнениях
NF EN ISO 14801 (2016)	Стоматология – Имплантаты – Усталостные испытания для внутрикостных зубных имплантатов
NF EN ISO 14937 (2009)	Стерилизация медицинской продукции – Общие требования к определению характеристик стерилизующего средства и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
NF EN ISO 14971 (2013)	Изделия медицинские – Применение принципов управления рисками к медицинским изделиям
NF EN ISO 15223-1 (2017)	Изделия медицинские – Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации – Часть 1: общие требования
NF ISO 15223-2 (2010)	Изделия медицинские – Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации – Часть 2: разработка, выбор и валидация символов
NF EN ISO 17664 (2004)	Стерилизация медицинских изделий – Информация, предоставляемая изготовителем для обработки повторно стерилизуемых медицинских изделий
NF EN ISO 17665-1 (2006)	Стерилизация медицинской продукции – Влажный жар. Часть 1: требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
NF EN 62366-1 (2015)	Медицинские изделия – Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности

10. СТЕРИЛЬНОСТЬ

Детали, реализуемые стерильными

Имплантаты стоматологические с принадлежностями поставляются в стерильном виде, упакованы в блистерную упаковку и стерилизованы с использованием гамма-излучения.

Стерильность имплантатов гарантирована только при соблюдении всех указанных ниже условий:

целостность упаковки не нарушена; срок годности не превышен; изделие хранилось в чистом, сухом и прохладном месте.

Процесс стерилизации гамма-излучением проводится подрядчиком на объекте, расположенном по адресу:

Компания Synergy Health

МИН 712 Ле Арнаво

13323 Марсель

ФРАНЦИЯ (MIN 712 Les Arnavaux 13323 Marseille FRANCE)

Процесс стерилизации гамма-излучением был валидирован в соответствии со стандартом ISO 11137 (2006) Стерилизация медицинской продукции – Радиационная стерилизация – Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий – Часть 2: Установление стерилизующей дозы.

Абатменты (временные, стандартные, MU, вколачиваемые), винты заглушки, винты заживляющие, поставляемые в стерильном виде, маркированы символом



Не следует использовать эти изделия, если упаковка вскрыта или повреждена, либо если срок годности истек. Эти изделия должны храниться в чистом, сухом и прохладном месте. Во время стерилизации изделий Anthgug индикатор состояния стерилизации имеет красный вид. Само по себе это гарантирует стерильность изделия.

Изделия поставляемые стерильными (стерилизация гамма-лучами) нельзя повторно стерилизовать. Необходимо соблюдать дату окончания срока годности изделия.

Изделия, реализуемые нестерильными

Некоторые принадлежности (абатменты эстетические, модифицируемые, Flexibase, Tibase) аттачмент Locator, винты для абатмента поставляются в нестерильном виде и маркированы символом



Некоторые из них перед использованием необходимо простерилизовать.

Если детали реализуются нестерильными и перед использованием их необходимо простерилизовать, то их следует стерилизовать с помощью стерилизации паром (134°C, 3 минуты).

11. МАРКИРОВКА

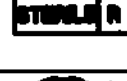
Используемые символы

- Для медицинского изделия

	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Срок годности
	Простерилизовано облучением

	См. инструкции по применению
	Для одноразового использования
	Не использовать при повреждении упаковки
	Знак соответствия европейским стандартам
RX ONLY	Внимание: закон запрещает отпуск без рецепта
	Не подлежит повторной стерилизации
	Изготовитель
	Внимание
	Соответствие российским нормам и стандартам

- Для принадлежностей, реализуемых стерильными

	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Срок годности
	Простерилизовано облучением
	См. инструкции по применению

	Для одноразового использования
	Не использовать при повреждении упаковки
	Знак соответствия европейским стандартам
RX ONLY	Внимание: закон запрещает отпуск без рецепта
	Усилие фиксации
	Изготовитель
	Внимание
	Соответствие российским нормам и стандартам
GTIN	Глобальный номер предмета торговли

- Для принадлежностей, реализуемых нестерильными

	Дата изготовления
LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу
	См. инструкции по применению
	Для одноразового использования
	Не использовать при повреждении упаковки
	Знак соответствия европейским стандартам

RX ONLY	Внимание: закон запрещает отпуск без рецепта
	Усилие фиксации
	Изготовитель
	Внимание
	Соответствие российским нормам и стандартам
GTIN	Глобальный номер предмета торговли
	Стерилизация в автоклаве без упаковки
	Нестерильное изделие

Этикетка на русском языке должна содержать следующую информацию:

- артикул
- наименование изделия
- номер регистрационного удостоверение
- сведения о материале, из которого изготовлено изделие
- сведения об изготовителе (название, адрес)
- сведения об импортере (название, адрес, контактные данные)
- номер партии
- дата производства
- срок годности
- штрих-код, QR-код,
- символ  для стерильных изделий и принадлежностей или символ  для нестерильных принадлежностей

Артикул: PX34080

STERILE

Имплантаты стоматологические с принадлежностями:

Имплантат конический AXIOM PX, включая винт заглушку AXIOM

РУ № ФСЗ 2010/08073 от XX.XX.XXXX

Материал: Титан

Изготовитель: "АНТОЖИР САС", Франция

2237, avenue André Lazquin, 74700 Sallanches, France

Импортер: ООО "Штрауманн"

119571, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 119А

info.ru@straumann.com

Партия: XX-XXXXXX

Дата производства: XXXX-XX

Срок годности: XXXX-XX

Штрих-код, QR-код

12. УТИЛИЗАЦИЯ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Объект, выполняющий операцию, отвечает за обращение с отходами, возникшими в результате процедуры (упаковка, извлеченный имплантат и т. д.), как с медицинскими отходами.

Медицинские отходы необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами обращения с медицинскими отходами. Утилизацию следует проводить по классу Б, как эпидемиологически опасные отходы, после обязательного обеззараживания. Не утилизируйте использованные медицинские изделия вместе с обычными бытовыми отходами, так как после применения они могут представлять потенциальную биологическую опасность из-за загрязнения кровью и другими биологическими материалами.

По окончании срока хранения неиспользованные изделия должны быть утилизированы в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. По классу опасности отходов в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания неиспользованные изделия относятся к классу А (ТБО).

13. СРОК ГОДНОСТИ

Изделия необходимо использовать до даты истечения срока годности, указанной на этикетке.

Срок годности изделий компании ANTHOGYR, поставляемых стерильными, составляет 5 лет.

Срок годности для изделий, поставляемых нестерильными, не ограничен.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основываясь на опыте и знаниях, компания Anthogut разработала гарантийную программу Serenity. Данная программа охватывает все этапы восстановления от начала до конца. Гарантийная программа применяется ко всем этапам лечения от

хирургической операции до изготовления окончательной реставрации. Для получения дополнительной информации о гарантийной программе обратитесь к уполномоченному представителю производителя на территории Российской Федерации.

<Печать:

* Бенуа ГРАНЖЕ (Benoît GRANGE),
нотариус * 74700 Салланш, рю Пеллиссе,
333 (333 rue Pellissier 74700 – Sallanches)>

Круглая печать : «неразборчиво»

[Штамп:

Я, нижеподписавшийся г-н Гранже, участник партнерства
«Нотариусы Салланша (Верхняя Савойя) Альбан РОЛЛЕ,
Бенуа ГРАНЖЕ и Эрве ПЛАНТЕВАН»
(SCP Alban ROLLET, Benoît GRANGE et Hervé PLANTEVIN,
notaire à SALLANCHES (Haute-Savoie)), удостоверяю,
что вышеуказанная подпись была поставлена
в моем присутствии г-ном Эриком Женовом.]

<Печать:

«Антожир»

Акционерное общество с уставным капиталом 1 254 040 евро
2237 Авеню Андре Ласкин
74700 САЛЛАНШ
Тел.: +33 (0)4 50 58 02 37 Факс: +33 (0)4 50 93 78 60
Идентификационный код: 605 620 442 00034
Код основного вида деятельности: 3250A>

«Апостиль подтверждает только подлинность подписи, печати или штампа на документе. Он не означает, что содержание документа является верным, или что Французская Республика согласна с его содержанием.»

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

РОССИЯ

1. Французская Республика
Настоящий официальный документ
2. подписан Бенуа ГРАНЖЕМ
3. выступающим в качестве нотариуса
4. скреплен печатью/штампом нотариуса Бенуа Гранжа * 747000,
САЛЛАНШ, рю Пеллиссе, 333

Удостоверено

5. в ШАМБЕРИ
6. 1 октября 2019 г.
7. Генеральным прокурором при Апелляционном суде Шамбери
8. за номером 2425
9. Место печати/штампа:

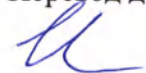
10. Подпись:

<подписано>

Круглая печать :
«неразборчиво»

Натали Парот
(Nathalie PAROT)
Заместитель генерального прокурора]

Перевод данного текста выполнен переводчиком Ильченко Сергеем Евгеньевичем.



Российская Федерация
Город Москва.
Десятого октября две тысячи девятнадцатого года.

Я, Корсик Владимир Константинович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика, Ильченко Сергея Евгеньевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2019-48-1856

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.

В. К. Корсик



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 171 лист(а)(ов)

Нотариус

