

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Арсенал»

Анцинов В.В.

_____ 2013 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения
«Костыли с опорой под локоть с наконечником» ТУ 9396-009-93703958-2013

Назначение.

Костыли с опорой под локоть с наконечником предназначены для дополнительной опоры при ходьбе инвалидов, больных и престарелых людей.

Основные технические характеристики.

Костыли с опорой под локоть изготовлены из прочного алюминиевого сплава, окрашены в различный цвет, снабжены резиновым наконечником, ручки выполнены из пластмассы. Костыли имеют регулировку по высоте с шагом 2,5 см и снабжены (или нет) устройством противоскольжения УПС.

Выдерживают нагрузку до 100 кг.

Противопоказания к применению.

Относительные медицинские противопоказания:

Выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей.
Выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).

Подготовка к работе изделия.

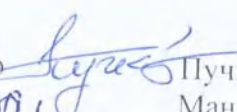
Провести внешний осмотр костылей на наличие резинового наконечника, ручки, устройства противоскольжения, каких-либо механических повреждений на верхней и нижней части костыля. Проверить надёжность их крепления и работу устройства противоскольжения. В случае неудовлетворительных результатов осмотра и проверки эксплуатация костылей запрещена.

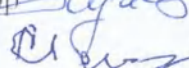
Отрегулировать высоту ножек костылей под конкретного пользователя.

Правила хранения и использования.

Хранение костылей в домашних условиях должно производиться в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

Хранение костылей на складах и базах должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C на стеллажах и на расстоянии не менее 1 м от стен и отопительных приборов.
Эксплуатируются ходунки при температуре воздуха от минус 40°C до плюс 40°C.

Главный конструктор  Пучков В.Ю.

Главный технолог  Манекин А.Г.