

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Арсенал»

Анцинов В.В.

2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения «Костыли подмышечные с наконечником» ТУ 9396-009-93703958-2013

Назначение.

Костыли подмышечные с наконечником предназначены для дополнительной опоры при ходьбе инвалидов, больных и престарелых людей.

Основные технические характеристики.

Костыли подмышечные изготовлены из прочного алюминиевого сплава, окрашены в различный цвет, снабжены резиновым наконечником, ручки выполнены из пластмассы. Костыли имеют регулировку по высоте ручки с шагом 3,5 см. и регулировку по высоте ножки с шагом 2,5 см. и имеют (или не имеют) устройство противоскольжения УПС. Выдерживают нагрузку до 100кг.

Противопоказания к применению.

Относительные медицинские противопоказания:

Выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей.
Выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).

Подготовка к работе изделия.

Провести внешний осмотр костылей на наличие резинового наконечника, ручки, устройства противоскольжения, каких-либо механических повреждений на верхней и нижней части костыля. Проверить надёжность их крепления и работу устройства противоскольжения. В случае неудовлетворительных результатов осмотра и проверки эксплуатация костылей запрещена.

Отрегулировать высоту ножек и ручек костылей под конкретного пользователя.

Правила хранения и использования.

Хранение костылей в домашних условиях должно производиться в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

Хранение костылей на складах и базах должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C на стеллажах и на расстоянии не менее 1м от стен и отопительных приборов.

Эксплуатируются ходунки при температуре воздуха от минус 40 °C до плюс 40°C.

Главный конструктор

Пучков В.Ю.

Главный технолог

Манекин А.Г.