

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Арсенал»

Анцинов В.В.

2013 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения
«Ходунки складные комбинированные (шагающие/фиксированные)
с наконечниками ХСШ-1» по ТУ 9396-009-93703958-2013

Назначение.

Ходунки складные комбинированные (шагающие/фиксированные) с наконечниками ХСШ-1 предназначены для дополнительной опоры при ходьбе инвалидов, больных и престарелых людей, страдающими разного рода заболеваниями и способных сохранять равновесие, но не могут ходить самостоятельно.

Основные технические характеристики.

Ходунки ХСШ-1 выполнены в виде шарнирного каркаса и изготовлены из прочного алюминиевого сплава, окрашены в различный цвет, снабжены резиновыми наконечниками, ручки выполнены из пластмассы. Ходунки ХСШ-1 имеют регулировку по высоте ножек с шагом 2,5 см. Ходунки ХСШ-1 выдерживают нагрузку до 100кг.

Противопоказания к применению.

Относительные медицинские противопоказания:

Выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей.

Подготовка к работе изделия.

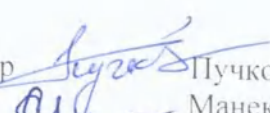
Провести внешний осмотр ходунков ХСШ-1 на наличие резиновых наконечников, каких-либо механических повреждений. Проверить надёжность крепления и целостность всех деталей и узлов, убедиться в плавной работе шарниров на предмет отсутствия каких-либо заеданий. В случае неудовлетворительных результатов осмотра и проверки эксплуатация ходунков запрещена.

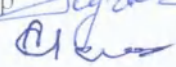
Правила хранения и использования.

Хранение ходунков ХСШ-1 в домашних условиях должно производиться в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

Хранение тростей стульев на складах и базах должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C на стеллажах и на расстоянии не менее 1м от стен и отопительных приборов.

Эксплуатируются ходунки при температуре воздуха от минус 40 °C до плюс 40°C.

Главный конструктор  Пучков В.Ю.

Главный технолог  Манекин А.Г.

Справка

об изделии медицинского назначения

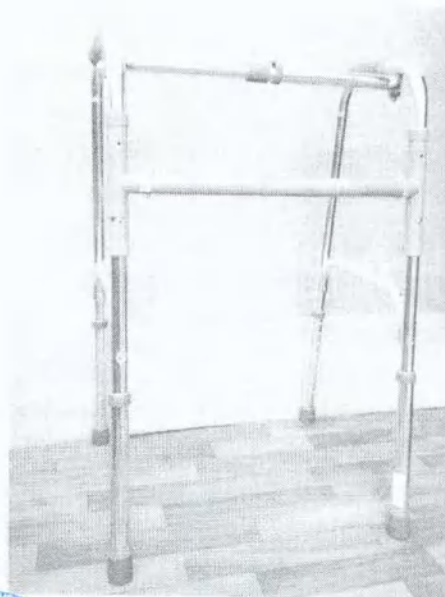
Наименование изделия: «Ходунки складные комбинированные (шагающие/фиксированные) с наконечниками ХСШ-1» по ТУ 9396-009-93703958-2013

Назначение: Ходунки складные комбинированные (шагающие/фиксированные) с наконечниками ХСШ-1 предназначены для дополнительной опоры при ходьбе инвалидов, больных и престарелых людей, страдающими разного рода заболеваниями и способных сохранять равновесие, но не могут ходить самостоятельно.

Основные технические характеристики: Ходунки ХСШ-1 выполнены в виде шарнирного каркаса и изготовлены из прочного алюминиевого сплава, окрашены в различный цвет, снабжены резиновыми наконечниками, ручки выполнены из пластмассы. Ходунки ХСШ-1 имеют регулировку по высоте ножек с шагом 2,5 см. Ходунки ХСШ-1 выдерживают нагрузку до 100кг.

Описание и функции: Ходунки ХСШ-1 представляют собой сборную шарнирную конструкцию из прочных алюминиевых труб. Применяя указанные ходунки, человек передвигает правую часть ходунков и делает шаг ногой, а после этого подвигает левую часть рамы, совершая второй шаг. Т.е. ходунки, как бы, «шагают» вместе с ним посредством поочередной перестановки правой и левой сторон устройства. Такие ходунки помогают пациенту передвигаться гораздо быстрее, чем при помощи стационарных. Ходунки удобны для людей, которые в процессе реабилитации после болезни только начинают ходить. Ножки ходунков снабжены телескопическими втулками, позволяющими изменять высоту ходунков под рост конкретного пользователя. Резиновые наконечники ножек обеспечивают надёжный контакт с дорожным покрытием в любую погоду.

Показанием к назначению инвалидам ходунков являются: Стойкие выраженные нарушения статодинамических функций и функций кровообращения, восстановление способности к передвижению в зависимости от нарушений статодинамических функций человека. Ходунки выдаются пользователям при наличии: нарушений ходьбы и стояния вследствие заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с умеренными и выраженными нарушениями функций ходьбы и стояния.



Относительные медицинские противопоказания:
Выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей.

Генеральный директор ООО «Арсенал»



Ашенинов В.В.