

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Арсенал»

Анцинов В.В.

2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения «Трости опорные с наконечником» ТУ 9396-009-93703958-2013

Назначение.

Трости опорные с наконечником предназначены для дополнительной опоры при ходьбе инвалидов, больных и престарелых людей.

Основные технические характеристики.

Трости изготовлены из прочного алюминиевого сплава, окрашены в различный цвет, снабжены резиновым наконечником, ручки выполнены из пластика или дерева.

Трости регулируются по высоте и имеют (или не имеют) устройство противоскольжения УПС.

Выдерживают нагрузку до 100кг.

Противопоказания к применению.

Относительные медицинские противопоказания:

Выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей.

Выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).

Подготовка к работе изделия.

Провести внешний осмотр трости на наличие резинового наконечника, ручки, устройства противоскольжения, каких-либо механических повреждений на верхней и нижней части трости. Проверить надёжность их крепления и работу устройства противоскольжения. В случае неудовлетворительных результатов осмотра и проверки эксплуатация трости запрещена.

Отрегулировать высоту трости под конкретного пользователя.

Правила хранения и использования.

Хранение трости опорной в домашних условиях должно производиться в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

Хранение тростей опорных на складах и базах должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C на стеллажах и на расстоянии не менее 1м от стен и отопительных приборов.

Эксплуатируются ходунки при температуре воздуха от минус 40 °C до плюс 40°C.

Главный конструктор

Пучков В.Ю.

Главный технолог

Манекин А.Г.

Справка

об изделии медицинского назначения

Наименование изделия: трости опорные с наконечником по ТУ 9396-009-93703958-2013

Назначение: трости предназначены для дополнительной опоры при ходьбе инвалидов, больных и престарелых людей.


Основные технические характеристики: трости изготовлены из прочного алюминиевого сплава, окрашены в различный цвет, снабжены резиновым наконечником, ручки выполнены из пластика или дерева. трости регулируются по высоте и имеют (или не имеют) устройство противоскольжения УПС. Трости выдерживают нагрузку до 100кг.

Описание и функции: трость (верхняя часть трости) представляет собой перфорированную алюминиевую трубку, на торце которой закреплена пластиковая или деревянная ручка. С противоположного торца в неё помещена другая алюминиевая трубка (нижняя часть трости), снабжённая устройством фиксации для регулировки трости по высоте и резиновым наконечником. На нижней части может быть установлено (или не установлено) устройство противоскольжения (УПС). Трость легко регулируется по высоте для конкретного пользователя, резиновый наконечник и устройство противоскольжения обеспечивают надёжный контакт с дорожным покрытием в любую погоду.

Трости опорные с наконечником по ТУ 9396-009-93703958-2013 обеспечивают человеку комфортное передвижение с равномерным перенесением нагрузки с больной конечности на всё тело.

Показанием к назначению инвалидам тростей опорных является восстановление способности к передвижению в зависимости от нарушений статодинамических функций человека. Трости опорные выдаются пользователям при наличии: нарушений ходьбы и стояния вследствие заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с умеренными и выраженными нарушениями функций ходьбы и стояния.

Относительные медицинские противопоказания: Выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей. Выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).

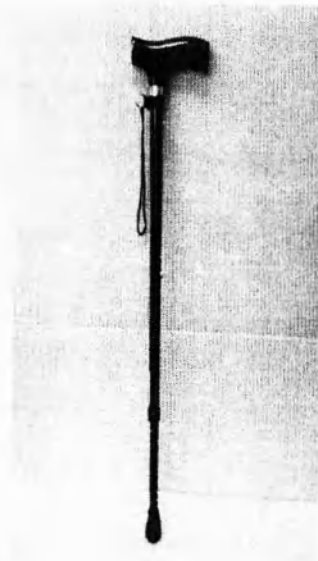

Генеральный директор ООО «Арсенал»



Анцинов В.В.