

3.3. Задняя панель прибора

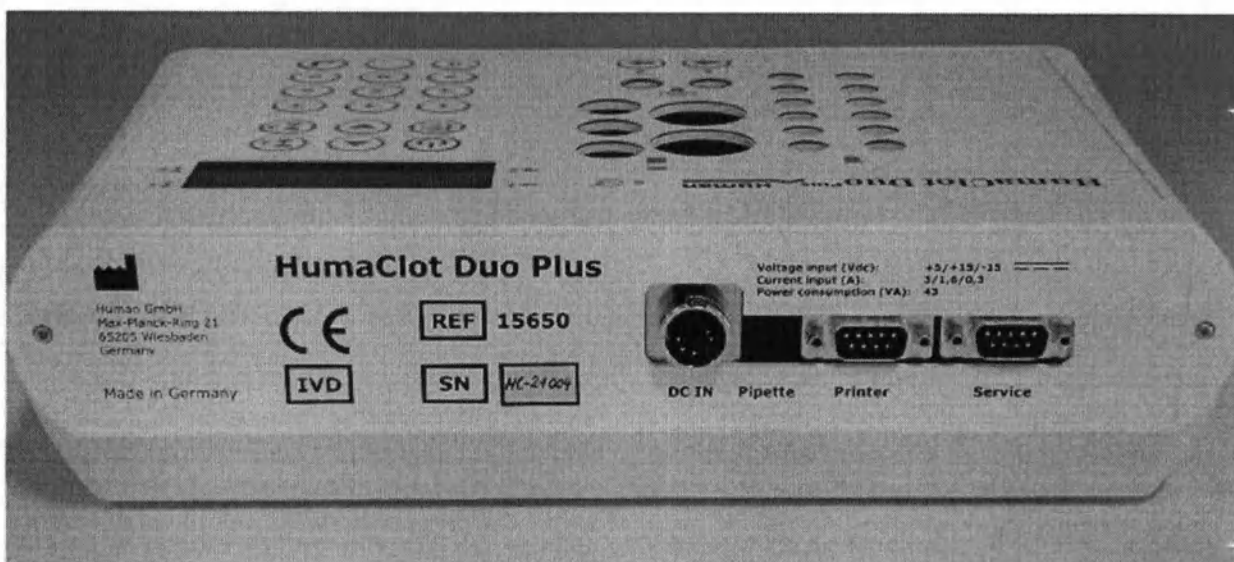


Рисунок 3. Задняя сторона прибора.

DC IN - гнездо для сетевого кабеля

Pipette - гнездо для подключения стартовой пипетки

Printer - гнездо для подключения термопринтера

Service - гнездо для подключения к компьютеру (upgrade программ, TECMONI, LIMS) или считывателю штрих-кода.

3.4. Автопипетка (при дополнительном заказе)

Дополнительный инструмент, предназначенный для добавления стартового реагента; поддерживает четыре объема от 25 до 100 мкл;

3.5. Термопринтер (при дополнительном заказе)

Дополнительный инструмент, предназначенный для распечатки результатов. Термопринтер должен поддерживать следующие серийные настройки связи: 9600 bd, 8 Data, 1 Stop, No parity. После подсоединения термопринтера к HumaClot Duo Plus следующие данные будут автоматически распечатаны:

Result Print-Out

Test Parameter Print - Out

Service Report Print - Out

System Identification Print - Out

3.6. Сканер штрих-кода (при дополнительном заказе)

Дополнительный инструмент, который предназначен для облегчения ввода данных пациентов. Считывает до 20 характеристик. Штрих-код, содержащий большую информацию, должен быть обрезан до максимальной длины, ещё считываемой сканером.



Внимание! Для питания сканера штрих-кода необходимо напряжение 5В, которое подается через 9-игольный разъем кабеля RS-232. Нужно использовать сканер только с такими характеристиками.