


УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от _____ 200__ г. № _____

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО "МИМ"

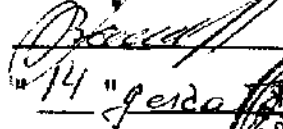
В.А. Чикризов



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Шприцев инъекционных однократного применения трехдетальных
(наименование изделия медицинского назначения)

вместимостью 150 мл

Настоящая инструкция регламентирует порядок применения медицинских изделий – Шприцев инъекционных однократного применения трехдетальных, вместимостью 150 мл (далее по тексту – шприцы) выпускаемых по ТУ 9398-008-27380060-2009.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Шприц, предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей человека различными жидкими лекарственными препаратами.

Шприц является неактивным, инвазивным изделием, кратковременного применения с указанным сроком хранения.

Шприц применяется только для медицинских целей.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шприц выпускается 2-х типов:

- с наконечником типа "Луер-Лок" (для подсоединения любых медицинских изделий имеющих присоединительный конус "Луер");

- с наконечником для катетерной насадки (для подсоединения катетеров имеющих присоединительный конус 1:8).

Шприц поставляется в герметичной потребительской упаковке.

На потребительской упаковке указано:

- наименование шприца;
- тип шприца;
- номинальная вместимость;
- номер партии и срок годности шприца.

Шприц стерилизован окисью этилена и поставляется стерильным, апиrogenным и нетоксичным.

3 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к применению не выявлено.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

1 Визуальным осмотром определить целостность потребительской упаковки.

2 Убедиться в действии срока годности шприца.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1 Вскрыть потребительскую упаковку, извлечь шприц.

2 Плотно надеть на конус шприца медицинское изделие, с которым предполагается работать.

3 Использовать шприц с подсоединенным изделием по назначению.

4 После использования шприц и используемое с ним изделие уничтожить, согласно инструкции Минздрава по утилизации.

Внимание! Перед использованием убедитесь что присоединительный конус дополнительного устройства соответствует конусу выбранного Вами шприца.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 Хранить шприц в отапливаемых, вентилируемых помещениях с температурой воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажностью не более 80%.

2 Срок хранения не выше срока годности, указанного на упаковке.

Меры безопасности:

- Запрещается использовать шприц из поврежденной потребительской упаковки или с просроченным сроком годности, он подлежит уничтожению. Повторная стерилизация шприца недопустима.

- Не допускается повторное использование шприца.

- Строго соблюдать инструкцию Минздрава по утилизации шприцев.

Внимание! Остерегайтесь травмирования использованным инструментом.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Стерильность шприца гарантируется предприятием - изготовителем в течение 3 лет со дня стерилизации, при сохранении целостности потребительской упаковки и соблюдении условий хранения.


Зам. генерального директора ООО "МИМ"


(подпись)

О.В. Карганов

ООО Медсанчасть "Кросно"

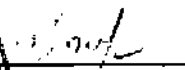


(подпись, печать)

И.Х. Макарова