

3. Установка компрессора aspirатора ①



1) Откройте переднюю дверцу основного корпуса, поставьте в него крепление компрессора.

Подключите входной/выходной кабель емкости aspirатора к компрессору ►(IN), ◄(OUT). (►(ВХОД), ◄(ВЫХОД)).

(Выполняйте подключение емкости aspirатора к компрессору внимательно, соблюдая маркировку: ►двигателя ⇔ IN (ВХОД) емкость aspirатора / ◄ двигателя ⇔ OUT (ВЫХОД) емкость aspirатора)

Установите подключенный компрессор aspirатора на крепление.

Вставьте штепсель и закройте дверцу.

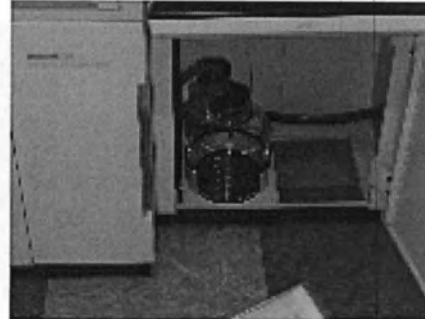
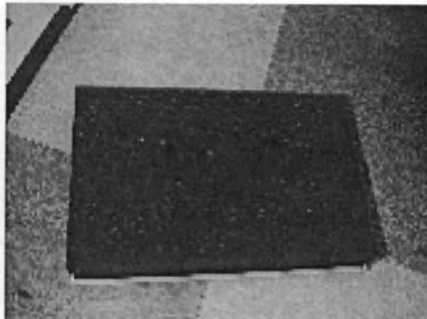


<Крепление двигателя>

Емкость aspirатора



Компрессор aspirатора

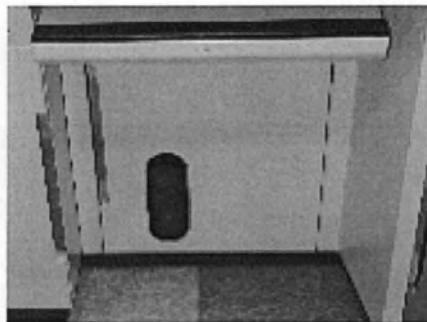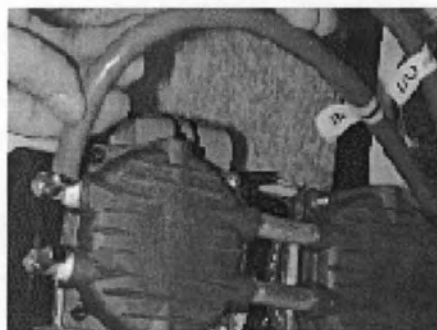

4. Установка компрессора аспиратора с двумя головками②

Откройте заднюю дверцу основного корпуса, поставьте в него крепление компрессора.


Подключите входные/выходные кабели емкости (малого размера) аспиратора к компрессору аспиратора □(IN) (ВХОД), □(OUT) (ВЫХОД).

(Выполняйте подключение емкости аспиратора к компрессору внимательно, соблюдая маркировку:

► компрессор ⇔ IN (ВХОД) емкость аспиратора / ◄ компрессор ⇔ OUT (ВЫХОД) емкость аспиратора)

Установите подключенный компрессор аспиратора на крепление двигателя.

Вставьте штепсель и закройте дверцу.

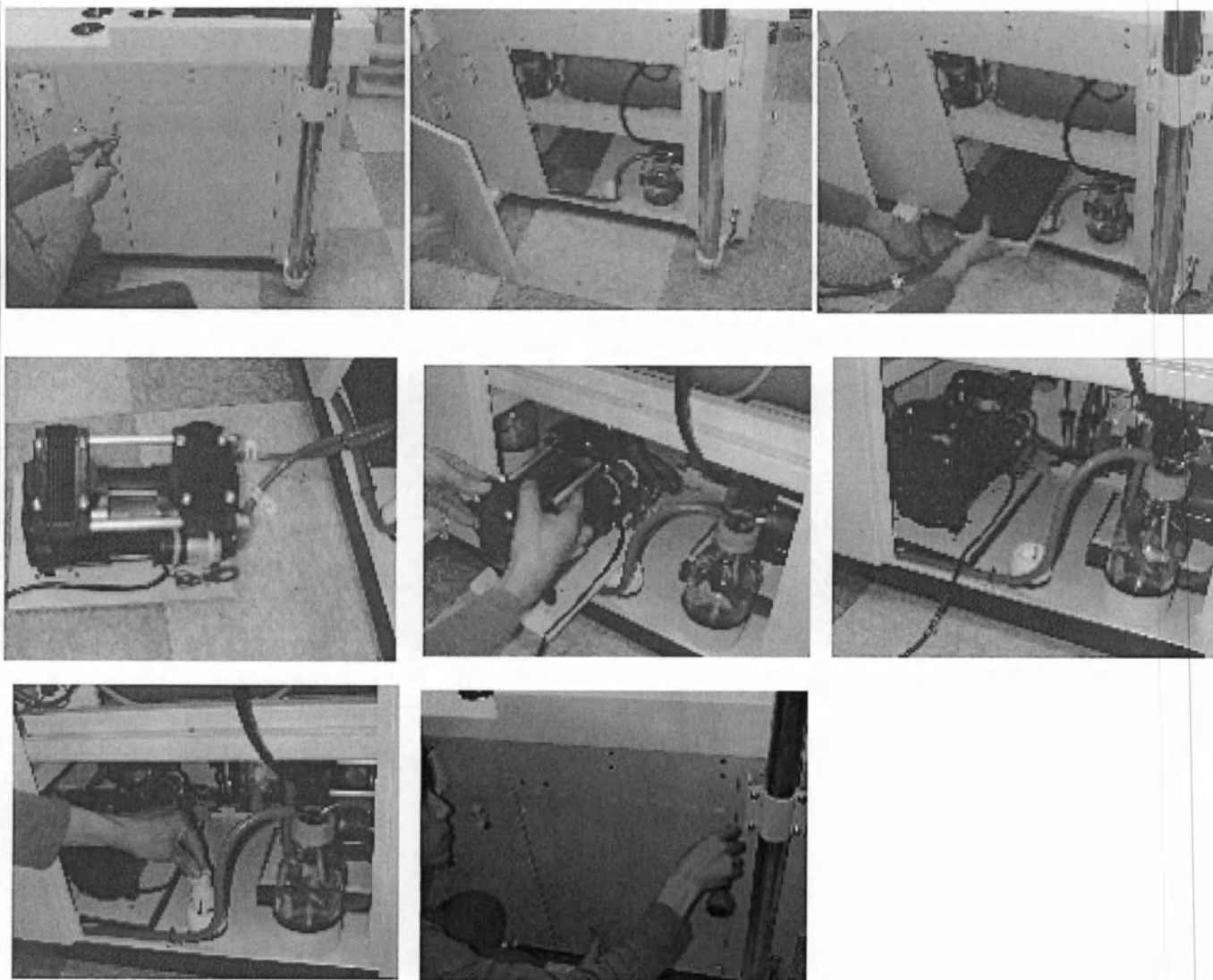

✂ Выполняйте подключение емкости аспиратора к компрессору
внимательно, соблюдая маркировку

- компрессор ⇔ IN (ВХОД) емкость аспиратора
- ◄ компрессор ⇔ OUT (ВЫХОД) емкость аспиратора





Если вы неправильно соедините кабели, емкость разобьется под давлением. Поэтому соблюдайте это указание.

5. Установка держателя под флаконы, лотка для инструментов.

- 1) Разъедините две половинки кронштейна и присоедините их к стойке №1.
Соедините держатель с кронштейном и подсоедините подставку под флаконы.



<кронштейн>

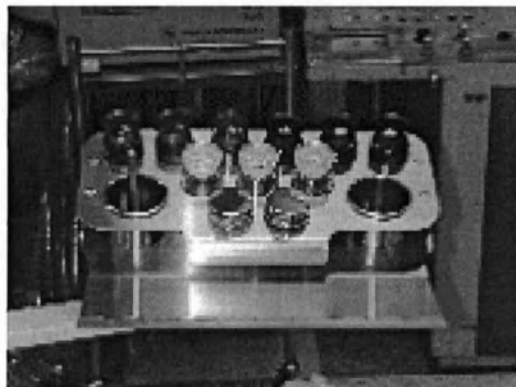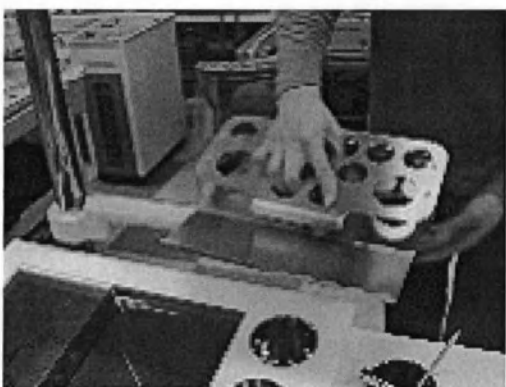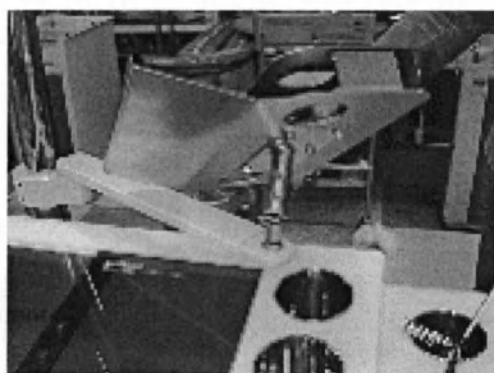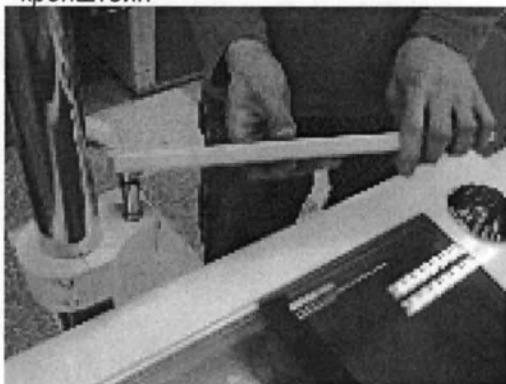





<Подставка под флаконы>

- 2) Закрепите держатель лотка для инструментов на кронштейне, расположенном в левой части основного корпуса




6. Установка распылителя, аспиратора и вентилятора

- 1) Установите распылитель на держатель и закрепите его.

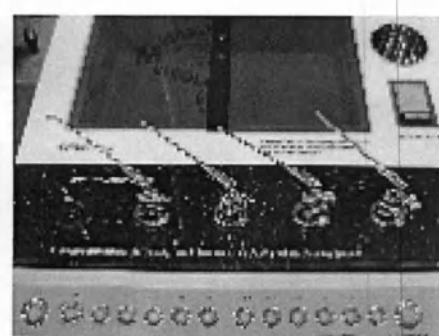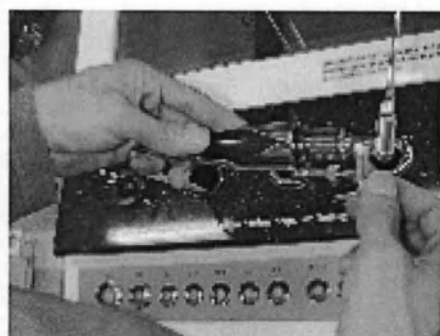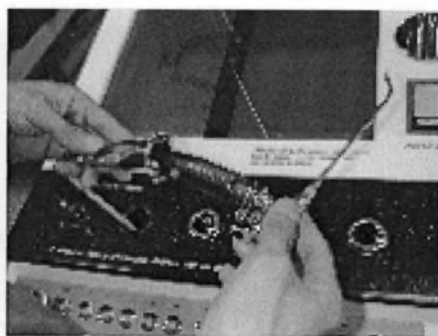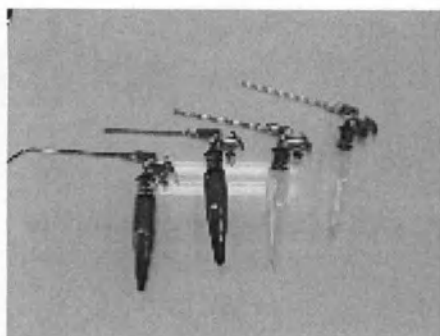


- 2) Подсоедините шланг аспирационного устройства к отверстию для аспирации и повесьте его на держатель.

Отверстие аспирационного устройства Держатель аспирационного устройства

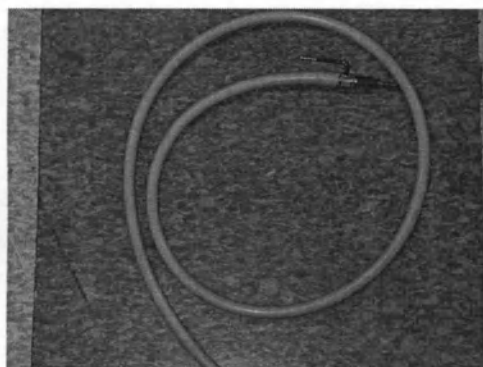

<шланг аспиратора>




- 3) Подсоедините шланг вентилятора к отверстию для продувки и повесьте на держатель.

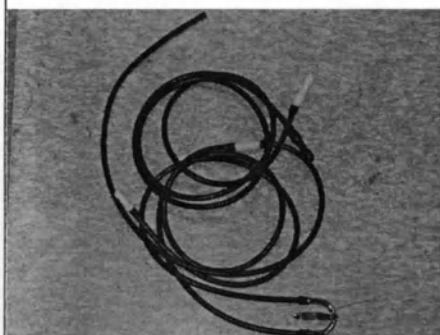

<шланг вентилятора>

7. Подключите кабель электропитания.

Подключите кабель к разъему электропитания "Power In" и в розетку.

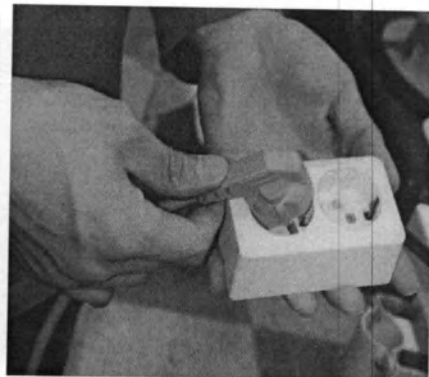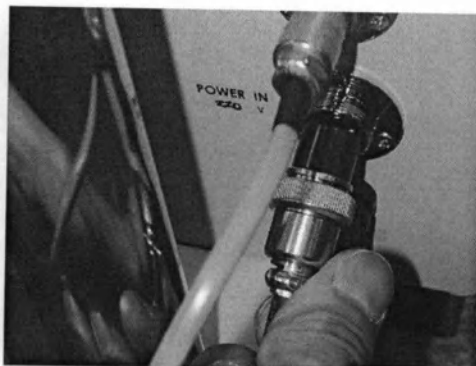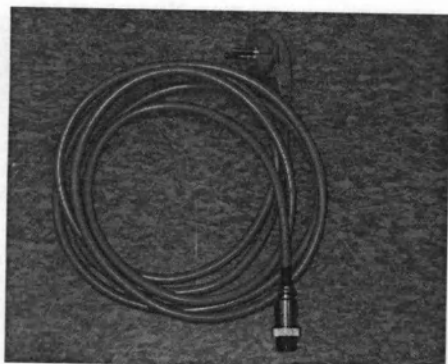

< кабель электропитания >



7. Подключите кабель электропитания.

Подключите кабель к разъему электропитания "Power In" и в розетку.



< кабель электропитания >

