

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ФАРМ БСК»



С.М.Бундова

2011г.

Инструкция по применению

Акушерско-гинекологического одноразового стерильного инструмента серии ДЖИНРАМ (GINRAM)

Акушерско-гинекологические одноразовые стерильные инструменты серии ДЖИНРАМ (GINRAM) могут применяться в гинекологических, венерологических, урологических отделениях больниц, поликлиник, для взятия мазков на цитологическое и бактериологическое исследование, проведения анализов на фертильность, а так же в родильных домах при родовспоможении и сопутствующих исследованиях.

1. Зеркало вагинальное

Применяется для расширения влагалища и обнажения шейки матки в условиях гинекологических учреждений любого уровня.

Зеркало вагинальное, является изделием однократного применения и изготовлено из прозрачного полистирола.

Ширина раскрытия створок составляет не менее 75 мм

Длина створок не менее 110 мм

Удобная форма ручки обеспечивает достаточное сцепление во время операции установки/извлечения зеркала. Материал обладает высокой прозрачностью, что позволяет проводить осмотр вагинальной стенки.

Порядок работы.

- Вскройте индивидуальную упаковку.
- Сомкните створки зеркала вместе.
- Вставьте зеркало в вагинальную полость с закрытыми створками
- Слегка сожмите ручки вместе.
- Поверните центральный замок в горизонтальном направлении так, чтобы ручки остались заблокированными.
- Чтобы удалить зеркало, разблокируйте центральный замок, закройте створки и выньте зеркало.
- Утилизируйте зеркало.

ВНИМАНИЕ !

Прочтите инструкции перед использованием.

Не использовать повторно.

Не использовать, в случае повреждения целостности индивидуальной упаковки.

Использовать сразу же после вскрытия упаковки.

Утилизировать после использования в соответствии с действующими нормативами.

Устройство должно использоваться только обученным медицинским персоналом

Противопоказаний нет.