



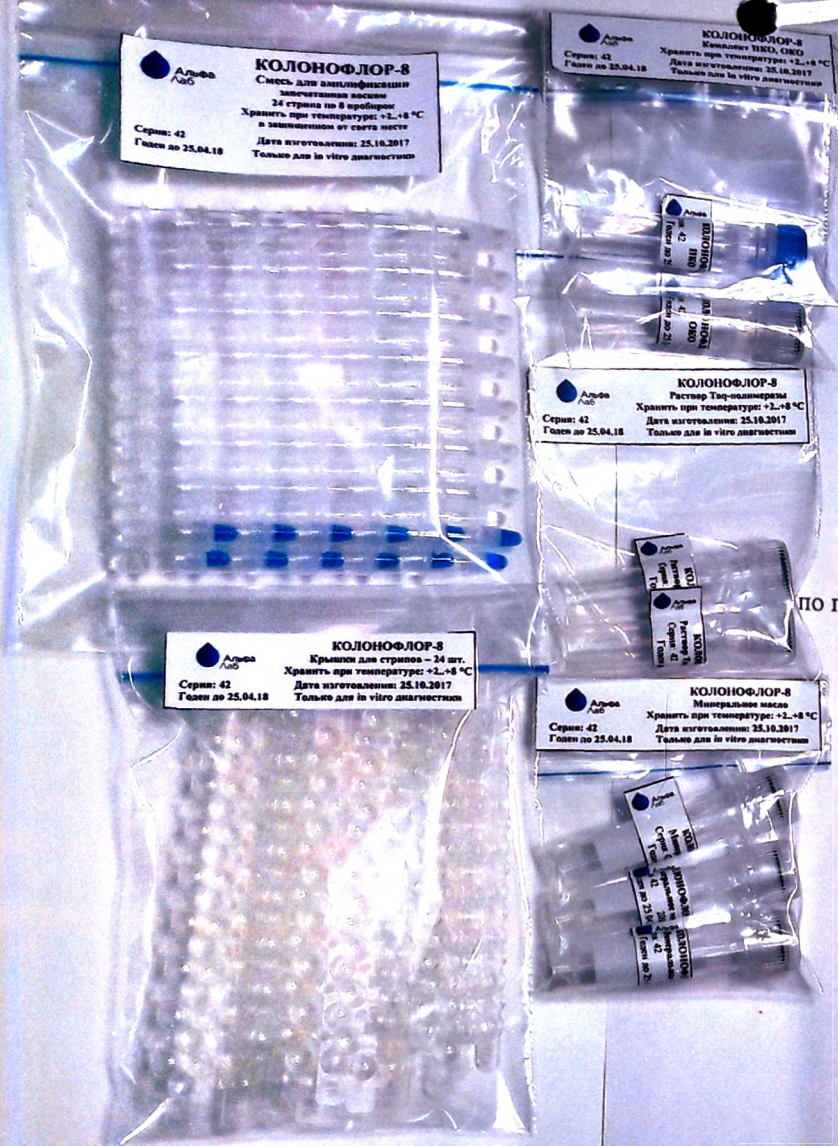

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АльфаЛаб»
М.А.Суворова
2018г

Общество с ограниченной
ответственностью
«АльфаЛаб»
Синкт-Петербург

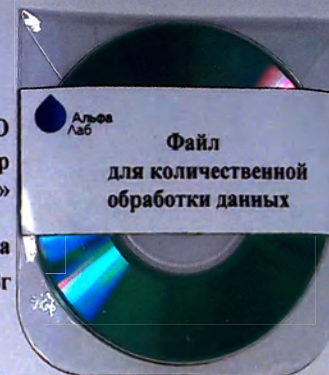


ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия «Набор реагентов для исследования микробиоты толстого кишечника методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в реальном времени «КОЛОНОФЛОР»»

Варианты комплектации:


- Форма 1 «КОЛОНОФЛОР- 8»
- Форма 2 «КОЛОНОФЛОР-16 (биосенсор)»
- Форма 3 «КОЛОНОФЛОР-16 (метаболизм)»

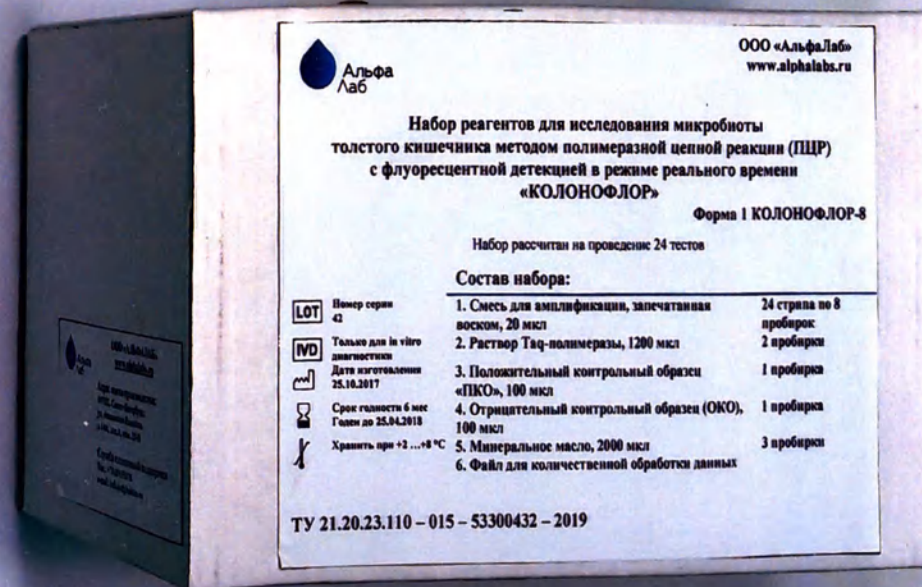

ВНИМАНИЕ! Изучите инструкцию перед началом работы



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АльфаЛаб»
М.А.Суворова
2018г

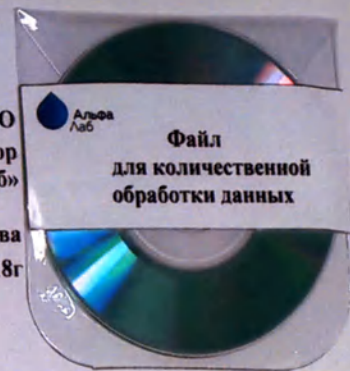

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия «Набор реагентов для исследования микробиоты толстого кишечника методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в реальном времени «КОЛОНОФЛОР»»

Варианты комплектации:
Форма 1 «КОЛОНОФЛОР- 8»
Форма 2 «КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз)»
Форма 3 «КОЛОНОФЛОР-16 (метаболизм)»

ВНИМАНИЕ! Изучите инструкцию перед началом работы

Альфа Лаб

ООО «АльфаЛаб»
www.alphalabs.ru

Набор реагентов для исследования микробиоты толстого кишечника методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «КОЛОНОФЛОР»

Форма 2 КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз)

Набор рассчитан на проведение 24 тестов

Состав набора:

LOT	Идентификация	Идентификация	Идентификация
Номер серии 42	Только для in vitro диагностики	Дата изготовления 25.10.2017	Срок годности 6 мес. Голень до 25.04.2018
1. Смесь для амплификации, запечатанная воском, 20 мкл	2. Раствор Taq-полимеразы, 1500 мкл	3. Положительный контрольный образец «ПКО-1», 200 мкл	4. Положительный контрольный образец «ПКО-26», 200 мкл
48 стрипов по 8 пробирок	3 пробирки	1 пробирка	1 пробирка
5. Отрицательный контрольный образец (ОКО), 200 мкл	6. Минеральное масло, 2000 мкл	7. Файл для количественной обработки данных	
1 пробирка	5 пробирок		

ТУ 21.20.23.110 – 015 – 53300432 – 2019



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АльфаЛаб»
М.А.Суворова
2018г



ИНСТРУКЦИЯ

менению медицинского изделия “Набор реагентов для исследования микробиоты толстого кишечника методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в реальном времени «КОЛОНОФЛОР»”



Варианты комплектации:

- Форма 1 «КОЛОНОФЛОР- 8»
- Форма 2 «КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз)»
- Форма 3 «КОЛОНОФЛОР-16 (метаболизм)»

ООО «АльфаЛаб»
www.alphalabs.ru

Набор реагентов для исследования микробиоты толстого кишечника методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «КОЛОНОФЛОР»
Форма 3 КОЛОНОФЛОР-16 (метаболизм)

Набор рассчитан на проведение 24 тестов

Состав набора:		
LOT	Номер серии 42	48 стрипов по 8 пробирок
IVD	Только для in vitro диагностики Дата изготовления 25.10.2017	3 пробирки
📅	Срок годности 6 мес Годен до 25.04.2018	1 пробирка
	Хранить при +2...+8 °C	1 пробирка
🧴	Смесь для амплификации, запечатанная воском, 20 мкл	5 пробирок
🧴	Раствор Taq-полимеразы, 1500 мкл	
🧴	Положительный контрольный образец «ПКО-1», 200 мкл	
🧴	Положительный контрольный образец «ПКО-2», 200 мкл	
🧴	Отрицательный контрольный образец (ОКО), 200 мкл	
🧴	Минеральное масло, 2000 мкл	
📀	Файл для количественной обработки данных	

ТУ 21.20.23.110 – 015 – 53300432 – 2019

ВНИМАНИЕ! Изучите инструкцию перед началом р.

Прошито и пронумеровано 3
В количестве _____ листов

Генеральный директор ООО «Альфалаб»

Суворова М.А.

