



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «Компания «Интермедсервис»»



Голубев В.А.
03 марта 2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стол медицинский универсальный Tarsus

2008

Предисловие

Благодарим Вас за приобретение стола марки Tarsus, произведенного компанией Sjobloms Sjukvardsutrustning Ab, Швеция. Надеемся, что Вы останетесь довольны качеством данного изделия. Наша цель – оправдать Ваши ожидания. При возникновении каких-либо проблем свяжитесь с нашим отделом обслуживания, наши эксперты помогут решить возникшую проблему оптимальным для Вас образом.

Руководство по эксплуатации содержит всю необходимую информацию по использованию, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия, а также по замене запасных частей. При необходимости или после модификации изделия в руководство по эксплуатации вносятся изменения, также руководство может содержать сведения о планируемых изменениях.

Гарантия

На все изделия марки Tarsus предоставляется гарантия сроком на 2 года. На обшивку, гидронасос и газовые пружины предоставляется гарантия сроком на 2 года. Если покупатель вносит изменения в изделие, а также, если эксплуатация осуществляется ненадлежащим образом или изделие используется не по назначению, гарантия аннулируется. Естественный износ, повреждения, возникшие по неосторожности или в результате неправильного использования, также не покрываются гарантией. Необходимо соблюдать указания по обслуживанию, приведенные в данном руководстве.

Важная информация

Во избежание получения травм пациентом и врачом, проводящим осмотр, перед использованием стола врач должен внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.


Руководство по эксплуатации содержит предупреждения о риске получения травм. С данными предупреждениями нужно ознакомиться и принять во внимание.

Значок треугольника с восклицательным знаком указывает на особо важную информацию.




Предупреждающий треугольник

Комплектация

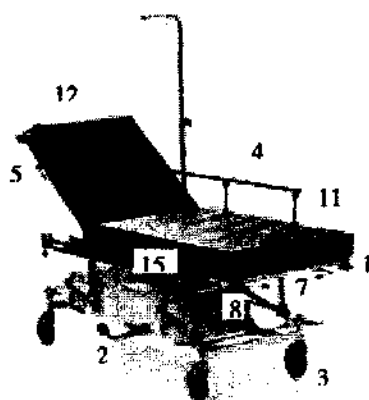

Стандартный держатель для ног без обшивки

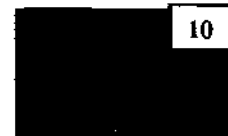

Составной держатель для ног

Позиция	Наименование
1	Выдвижная ножная секция
2	Педаля управления
3	Колёсики с центральной фиксацией, 100 мм.
4	Боковые опоры
5	Рычаг для регулировки спинки ¹
6	Рычаг для регулировки высоты держателей для ног
7	Рычаг для фиксации держателей для ног
8	Рычаг для выдвижения ножной секции
9	Держатели для ног, стандартное исполнение
10	Держатели для ног, составные
11	Подушка сиденья
12	Подушка спинки
15	Тазовая секция

Позиция	Наименование
13	Зажимной рычаг для регулировки высоты держателей ног
14	Зажимной рычаг для фиксации держателей ног




Описание функций

Подсоединение к сети стола медицинского универсального

Вставьте вилку в заземлённую розетку.

Подсоедините ножную педаль, как показано на рисунке.

Проверьте, чтобы вилка с установочным штифтом находилась в правильном положении, была крепко закреплена в гнезде (ее закрепление требует некоторого усилия). Если вилка неплотно вставлена в гнездо, будет работать только один электропривод.

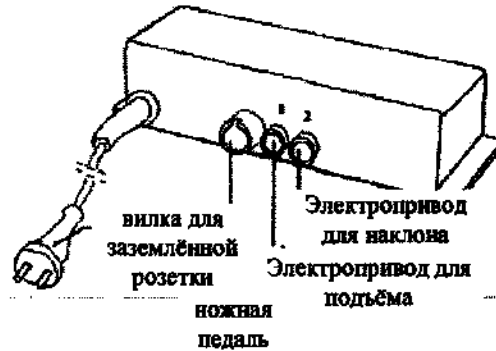

Регулировка положения спинки

Спинка снабжена газовыми пружинами.



Для изменения положения на двух сторонах стола предусмотрены рукоятки.

Подъем:

Нажмите на рукоятки. Газовая пружина поможет поднять спинку. Отпустите рукоятки по достижении нужного положения.

Опускание:

Нажмите на рукоятки. Спинка опустится. Отпустите рукоятки по достижении нужного положения.

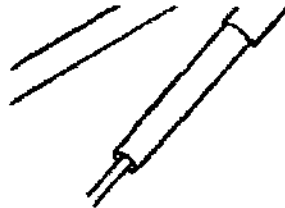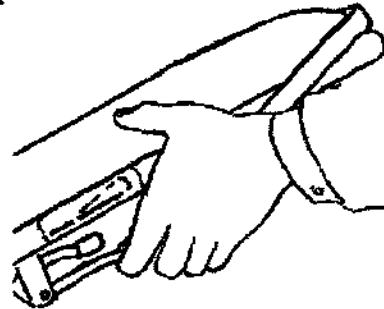

Функции педали управления

Две кнопки на левой стороне педали управления помогают регулировать высоту стола.

Подъем стола

Чтобы поднять стол, нажмите первую кнопку слева.




Опускание стола

Чтобы опустить стол, нажмите вторую кнопку слева.



Подъем тазовой секции

Третья кнопка слева помогает поднять тазовую секцию.

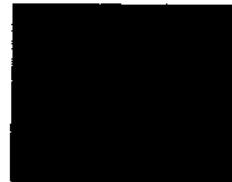

Опускание тазовой секции

Первая кнопка справа помогает опустить тазовую секцию



ОСТОРОЖНО!

Существует риск защемления рук между выдвижными рычагами и пластмассовой коробкой. Следите за тем, чтобы в промежуток между рабочими частями изделия не попали руки или одежда.

Выдвижная ножная секция

Максимально вытяните рычаг (стержень с хромоым покрытием внизу, см. рис. 1) (см. рис. 2) и выдвигайте секцию до нужной длины. Опустите рычаг для фиксации положения



Максимально вытяните рычаг

Чтобы задвинуть ножную секцию, следуйте приведенным инструкциям в обратном порядке.