



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «Компания «Интермедсервис»»



Голубев В.А.
«6» марта 2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кресло медицинское универсальное Tarsus

2008

Предисловие

Благодарим Вас за приобретение кресла марки Tarsus, произведенного компанией Sjöbloms Sjukvårstjänst AB, Швеция. Надеемся, что Вы останетесь довольны качеством данного изделия. Наша цель – оправдать Ваши ожидания. При возникновении каких-либо проблем свяжитесь с нашим отделом обслуживания, наши эксперты помогут решить возникшую проблему оптимальным для Вас образом.

Руководство по эксплуатации содержит всю необходимую информацию по использованию, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия, а также по замене запасных частей. При необходимости или после модификации изделия в руководство по эксплуатации вносятся изменения, также руководство может содержать сведения о планируемых изменениях.

Гарантия

На все изделия марки Tarsus предоставляется гарантия сроком на 2 года. На обшивку, гидронасос и газовые пружины предоставляется гарантия сроком на 2 года. Если покупатель вносит изменения в изделие, а также, если эксплуатация осуществляется ненадлежащим образом или изделие используется не по назначению, гарантия аннулируется. Естественный износ, повреждения, возникшие по неосторожности или в результате неправильного использования, также не покрываются гарантией. Необходимо соблюдать указания по обслуживанию, приведенные в данном руководстве.

Важная информация

Во избежание получения травм пациентом и врачом, проводящим осмотр, перед использованием кресла врач должен внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации содержит предупреждения о риске получения травм. С данными предупреждениями нужно ознакомиться и принять во внимание.

Значок треугольника с восклицательным знаком указывает на особо важную информацию.



Предупреждающий треугольник

Комплектация

1. Стойка инфузионная.
2. Дуга анестезиолога.
3. Подколенники.
4. Держатели для ног.
5. Держатели для рук.
6. Подлокотники.
7. Кассетодержатель для рентгена.
8. Подголовник.
9. Лоток сливной.
10. Фиксаторы.
11. Держатель кольпоскопа.
12. Валик поясничный.
13. Упоры.
14. Корзина.
15. Контейнеры для использованного материала.
16. Стул врача.
17. Столик инструментальный.
18. Тележка.
19. Пульт управления.


Описание функций

Подсоединение к сети кресла Tarsus

Вставьте вилку в заземлённую розетку.

Подсоедините ножную педаль, как показано на рисунке.

Проверьте, чтобы вилка с установочным штифтом находилась в правильном положении, была крепко закреплена в гнезде (ее закрепление требует некоторого усилия). Если вилка неплотно вставлена в гнездо, будет работать только один электропривод.

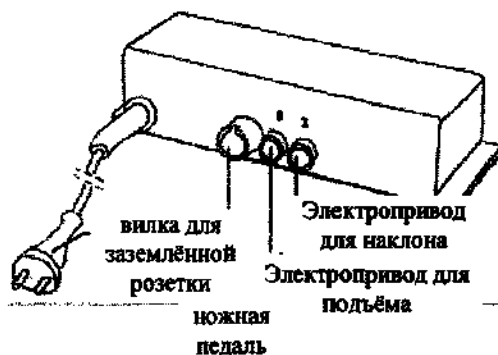

Регулировка положения спинки


Спинка снабжена газовыми пружинами. Для изменения положения на двух сторонах кресла предусмотрены рукоятки.

Подъем:

Нажмите на рукоятки. Газовая пружина поможет поднять спинку. Отпустите рукоятки по достижении нужного положения.

Опускание:

Нажмите на рукоятки. Спинка опустится. Отпустите рукоятки по достижении нужного положения.


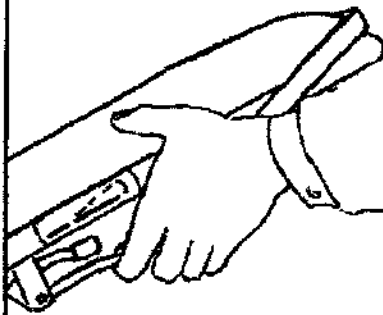


Функции педали управления (для кресла с двумя электроприводами)

Две кнопки на левой стороне педали управления помогают регулировать высоту кресла. Две кнопки на правой стороне помогают регулировать положение тазовой секции.



Подъем кресла

Чтобы поднять кресло, нажмите первую кнопку слева.

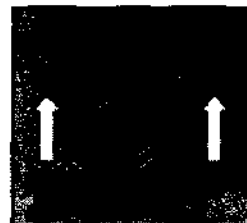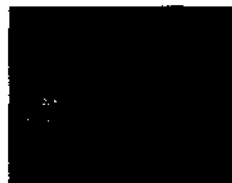

Опускание кресла

Чтобы опустить кресло, нажмите вторую кнопку слева.

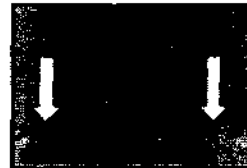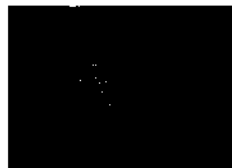

Подъем тазовой секции и установка положения Тренделенбурга

Третья кнопка слева помогает поднять тазовую секцию. Для установки положения Тренделенбурга максимально опустите спинку.



Опускание тазовой секции и установка положения Тренделенбурга

Первая кнопка справа помогает опустить тазовую секцию и отрегулировать положение Тренделенбурга.



ОСТОРОЖНО!

Существует риск защемления рук между подъемными рычагами и пластмассовой коробкой. Следите за тем, чтобы в промежуток между рабочими частями изделия не попали руки или одежда.