

Директор
ООО «ПАС»



Инструкция по применению.

1. Наименование и область применения медицинского изделия.

Аптечка первой помощи для работников АППр-«ПАС» по ТУ 9398-006-72225532-2013 предназначена для своевременного оказания само – взаимопомощи работникам на различных предприятиях, в организациях и учреждениях, в офисах, конторах, в полевых условиях, и др.

Аптечка представляет собой футляр, укомплектованный медицинскими изделиями соответствующими приказу Минздравсоцразвития РФ № 169н от 05.03.2011г. (приложение 1). Аптечка и ее комплектация отвечает всем необходимым требованиям, стандартам и техническим условиям.

2. Показания для применения медицинского изделия.

Предназначено для своевременного оказания само – взаимопомощи работникам до врачебной помощи на различных предприятиях, в организациях и учреждениях, в офисах, конторах, в полевых условиях, и др. при ранах, ожогах, временной остановки наружного кровотечения и при проведении сердечно-легочной реанимации.

При травмах вызвать скорую помощь или обратиться в близлежащее лечебное учреждение.

2.1. Возможные травмы и способы помощи:

- 1) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках. При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую;
- 2) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий выше места повреждения с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку;
- 3) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска";
- 4) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки и бинты или применяя пакет перевязочный стерильный. При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку и закрепить её лейкопластырем. При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный;
- 5) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые;

б) покрывало спасательное изотермическое расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегрева), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.

Наличие травм, не предусмотренных комплектацией данной аптечки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать вложения медицинских изделий после истечения их срока годности.

4. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

При правильном использовании согласно инструкции и хранении – побочные действия отсутствуют.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

Хранить в местах, недоступных для детей.

6. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.

Негативного воздействия с другими медицинскими изделиями - не выявлено.

7. Указание возможности и особенностей применения медицинского изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания.

Негативного воздействия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания - не выявлено.

8. Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

При травмах управлять транспортными средствами или механизмами – не рекомендуется.

9. Варианты комплектации медицинского изделия.

Аптечка комплектуется строго в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ № 169н от 05.03.2011г.

10. Технические характеристики.

Аптечки поставляются в двух видах футляра: футляр полимерный твердый и футляр мягкий.

Вид футляра, габаритные размеры и масса, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Вид футляра	Габаритные размеры, мм	Масса футляра, кг, не более	Масса аптечки с комплектацией, кг, не более
Футляр полимерный твердый	230(±5)x170(±5)x90(±5)	0,25	0,8
Футляр мягкий	240(±5)x180(±5)x105(±5)	0,3	

Состав комплектации аптечки представлен в приложении 1.

Медицинские изделия, входящие в состав аптечки, не подлежат замене другими вложениями, не предусмотренными приказом Минздравсоцразвития РФ № 169н от 05.03.2011г.

Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Техническое обслуживание или ремонт аптечки – не требуется.

Футляры утилизируются вместе с бытовыми отходами. Использованные/неиспользованные или просроченные медицинские изделия, вложенные в футляры утилизируются вместе с бытовыми отходами.

11. Срок службы (годности), условия хранения и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности).

Средний срок службы футляра - не менее 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации футляра - 3 года со дня изготовления. Сроки годности вложенных в аптечку медицинских изделий указаны на упаковке каждого изделия. При комплектации аптечки срок годности медицинских изделий должен составлять не менее 70% от полного срока годности, указанного в соответствующих документах.

Аптечки должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность медицинских изделий при температуре от 5°C до 40°C и влажности 80% при температуре 25°C.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать медицинские изделия по истечению срока годности.

По истечении сроков годности медицинских изделий или по мере использования медицинских изделий необходимо их пополнять.

12. Сведения о производителе медицинского изделия.

ООО «ПАС», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а;
Тел.: (846) 205-68-89.

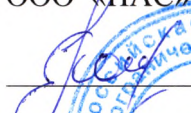
**КОМПЛЕКТАЦИЯ
ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ**

№ п/п	Наименование изделий медицин- ского назначения	Нормативный документ	Форма Выпуска размеры)	Кол-во (шту- ки, упа- ковки)
1	Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кро- вотечения и перевязки ран			
1.1	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский не- стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 5 см	1 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский не- стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	1 шт.
1.4	Бинт марлевый медицинский не- стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский сте- рильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 7 см	1 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский сте- рильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.
1.7	Бинт марлевый медицинский сте- рильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	2 шт.
1.8	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	ГОСТ 1179-93		1 шт.
1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93	Не менее 16 x 14 см N 10	1 уп.
1.10	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см x 10 см	2 шт.
1.11	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9см x 7,2см	10 шт.
1.12	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1 см x 250 см	1 шт.
2	Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реа- нимации			
2.1	Устройство для проведения ис- кусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной венте- ляции легких "Рот - маска"	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.
3	Прочие изделия медицинского назначения			
3.1	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ГОСТ 21239- 93 (ИСО 7741-86)		1 шт.
3.2	Салфетки антисептические из бу- мажного текстилеподобного мате- риала стерильные спиртовые	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 12,5 x 11,0 см	5 шт.
3.3	Перчатки медицинские нестериль- ные, смотровые	ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 ГОСТ Р 52239-2004	Размер не менее М	2 пары

		ГОСТ 3-88		
--	--	-----------	--	--

№ п/п	Наименование изделий медицин- ского назначения	Нормативный документ	Форма Выпуска размеры)	Кол-во (шту- ки, упа- ковки)
3.4	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материа- ла с резинками или с завязками	ГОСТ Р ИСО 10993-99		2 шт.
3.5	Покрывало спасательное изотер- мическое	ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92	Не менее 160 x 210 см	1 шт.
4	Прочие средства			
4.1	Английские булавки стальные со спиралью	ГОСТ 9389-75	не менее 38 мм	3 шт.
4.2	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицин- ского назначения аптечки для оказания первой помощи работни- кам			1 шт.
4.3	Футляр или сумка санитарная			1 шт.
4.4	Блокнот отрывной для записей	ГОСТ 18510-87	формат не менее А7	1 шт.
4.5	Авторучка	ГОСТ 28937-91		1 шт.

Директор
ООО «ПАС»

 А.С. Попов

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

_____ листов

