

Утверждена
Приказом Росздравнадзора
от _____ 20 ____ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор Федерального
государственного унитарного
предприятия Научно-
производственный центр
«Фармзащита» Федерального
медико-биологического агентства



В.Б. Назаров
2013 г.

Инструкция по применению
медицинского изделия
«Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОСТОП® Спорт», стерильное»

2013

Назначение

Медицинское изделие «Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОСТОП® Спорт» стерильное» (далее по тексту «ГЕМОСТОП® Спорт») предназначено для остановки наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении крупных сосудов.

«ГЕМОСТОП® Спорт» может применяться при оказании первой помощи вне медицинской организации, а также в амбулаторных, стационарных и в домашних условиях.

Техническая характеристика

«ГЕМОСТОП® Спорт» представляет собой средство на основе гранул сферической формы алюмосиликатов кальция и натрия (производные цеолитов), обладающие адсорбирующей способностью, уложенные в сетчатый пакет из синтетического материала. Гемостатический эффект основан на быстром влагопоглощении. При контакте с кровью поглощается большой объем воды относительно массы и объема «ГЕМОСТОП® Спорт», что приводит к локальной концентрации клеточных и крупных белковых компонентов крови (в т.ч. факторов свертывания). Это в свою очередь индуцирует формирование кровяного свертка. Кроме того, поверхностный потенциал цеолита способствует активации XII фактора свертываемости крови и тромбоцитов.

Форма выпуска

«ГЕМОСТОП® Спорт» выпускается в индивидуальных упаковках из материала упаковочного комбинированного, расфасованный по 50 и 100 г.

Порядок применения

Перед применением «ГЕМОСТОП® Спорт» рекомендуется очистить рану от инородных тел, кровяных свертков бинтом для обеспечения максимального контакта «ГЕМОСТОП® Спорт» с поврежденным сосудом.

«ГЕМОСТОП® Спорт» применяется путем наложения сетчатого пакета, не нарушая его целостности, в рану непосредственно к источнику кровотечения. Поверх раны накладывают ватно-марлевую повязку или тампон, при отсутствии плотную ткань и осуществляют ручную компрессию в течение 5-7 мин. Не извлекая сетчатого пакета из раны, накладывают давящую повязку. Затем накладывают кровоостанавливающий жгут выше раны, не затягивая его. При возобновлении кровотечения затягивают жгут.

Упаковку «ГЕМОСТОП® Спорт» необходимо вскрывать непосредственно перед применением. Повторному использованию не подлежит. При нарушении герметичности упаковки для использования не годен из-за быстрого влагонасыщения.

Меры предосторожности

Применять только после ознакомления с инструкцией.

Противопоказания

«ГЕМОСТОП® Спорт» противопоказаний к применению не имеет.

Условия хранения

«ГЕМОСТОП® Спорт» хранить в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре +5 °С до +25 °С (допустимо кратковременное хранение при температуре до +40 °С).

Срок годности – 3 года с даты стерилизации.

Утилизация

Образующиеся отходы и отработанное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Отходы собираются только в одноразовую упаковку для последующего термического обезвреживания.

Производитель

Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России)

141402, Московская обл., г. Химки, Вашутинское ш., д. 11

тел./факс: +7(495) 789-65-55

Сайт: www.atompharm.ru

E-mail: info@atompharm.ru

Заместитель директора по производству

ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России



А.В. Дружков

Прошито и пронумеровано
и скреплено печатью 4 листов

Директор
ФГУП НИЦ «Фармзащита» ФМБА Рос

В.Б. Назаров

МП

« 2 » 2 2013 г.

