
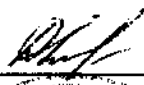


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «Интермедсервис»


_____ Д.В. Турбин
« » _____ 2010__г.

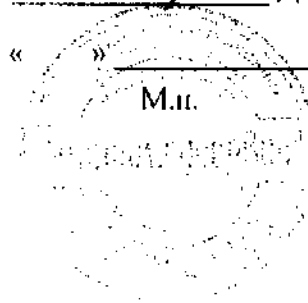

Инструкция по применению
«Комплект белья и одежды хирургический,
одноразовый, стерильный и нестерильный КМ-
«ИМС» по ТУ 9398-002-50337012-2010»

Производства ООО «Интермедсервис», Россия

В хирургических стационарах одноразовая медицинская одежда и белье используются в операционном блоке при выполнении хирургических операций.

В санпропускнике операционного блока хирурги, операционные медсестры, анестезиологи и медсестры-анестезисты переодеваются в комплект хирургический, включающий костюм хирургический. Затем персонал одевает бахилы, шапочку и входит непосредственно в операционный блок. После обработки рук в предоперационной, операционная сестра в операционной одевает стерильный халат, маску и накрывает один общий стол для хирургического инструментария (3 простыни) и один малый инструментальный – стол Mayo (1 простыня). В настоящее время в связи с совершенствованием процессов стерилизации и переходом на разовые укладки для каждой операции клиники отказываются от использования общего стола для хирургического инструментария.

Для накрытия малого инструментального стола может использоваться простыня-мешок на столик Mayo. Малый инструментальный стол накрывается на каждую операцию.

Простыней одноразового использования укрывается операционный стол и накрывается пациент (2 простыни – меняются на каждой операции). В процессе укладки пациента могут использоваться разовые пеленки.

После обработки рук хирурги одеваются в разовые стерильные халаты и приступают к выполнению хирургических вмешательств.

После обработки операционного поля пациент укрывается одной специализированной простыней с вырезами, отверстиями и т.д., снабженных адгезивными краями, впитывающими зонами, карманами и т.д. Такой подход позволяет использовать одну одноразовую простыню вместо двух многоразовых и двух пеленок для укрытия пациента.

Смена хирургических халатов, простыней и пеленок на операционном столе производится после каждой выполненной операции.

После окончания операций использованное белье собирается в специальную емкость, где в случаях загрязнения биологическими жидкостями обеззараживается одним из регламентированных методов.

Использование одноразовой медицинской одежды и белья в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

В отделениях интенсивной терапии и реанимации одноразовая медицинская одежда медперсоналом (костюм хирургический), шапочка одевается в начале смены и используется в течение ее. При выполнении перевязок или других процедур персонал использует хирургический халат и непромокаемый фартук, который дезинфицируется после каждой перевязки или процедуры.

В отделении используется одноразовое белье в виде простыней и пеленок. Смена белья производится ежедневно или по мере загрязнения.

В акушерско-гинекологических отделениях одноразовая медицинская одежда применяется медицинским персоналом, принимающим роды в родильном зале, а также при выполнении гинекологических операций.

В инфекционных стационарах одноразовая медицинская одежда и белье используются в отделениях интенсивной терапии и реанимации (второй халат), а также в отделениях, где существует высокая вероятность загрязнения одежды медицинского персонала и постельного белья биологическими жидкостями инфекционных больных. В других отделениях инфекционного стационара использование одноразовой медицинской одежды и белья желательно (в зависимости от возможностей ее приобретения).

Использование одноразовой медицинской одежды и белья при проведении противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных (экстремальных) ситуациях

Комплекты одноразовой медицинской одежды находятся в укладках в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники и используются при выявлении случаев заболевания особо опасными инфекциями на амбулаторном приеме или при обслуживании визитов на дому.

Одноразовая медицинская одежда используется при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с преднамеренным применением биологических патогенных агентов (биотеррористический акт) или при возникновении аварийных ситуаций на объектах биотехнологической промышленности или в лабораториях, работающих с патогенными микроорганизмами. В этих случаях комплектами одноразовой медицинской одежды обеспечиваются:

- группы санитарно-эпидемиологической разведки
- группы консультантов
- группы эпидемиологов
- группы эвакуаторов;
- группы дезинфекторов

ТРЕБОВАНИЯ К СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

Одноразовая медицинская одежда и белье подвергаются газовой стерилизации (окисью этилена). На упаковке изделий, прошедших стерилизацию, должна быть отметка о стерильности. Срок сохранения стерильности составляет 3 года. Проверку стерильности проводят в соответствии с методиками контроля стерильности изделий медицинского назначения, утвержденными в установленном порядке.

Одноразовая медицинская одежда и белье хранятся в герметичной упаковке в специально оборудованном помещении для хранения мягкого инвентаря. Нарушение целостности упаковки свидетельствует о нарушении стерильности одноразовой медицинской одежды и белья, и стерильности.

Одноразовая медицинская одежда и белье могут выпускаться в нестерильном варианте. В этом случае хранение осуществляется также в специально оборудованном помещении для хранения мягкого инвентаря. Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

В хирургических отделениях одноразовая медицинская одежда используется в операционных (одежда хирургов) – в течение времени выполнения оперативного вмешательства;

В акушерско-гинекологических отделениях одноразовая медицинская одежда используется в течение времени приема родов или времени выполнения гинекологической операции.

В отделениях интенсивной терапии и реанимации одноразовая медицинская одежда используется в течение рабочего дня (при загрязнении одноразовой медицинской одежды биологическими жидкостями она подлежит замене немедленно).

В инфекционных стационарах одноразовая медицинская одежда используется :

- в отделениях интенсивной терапии и реанимации – в течение рабочего дня;
- в отделениях, где существует высокая вероятность загрязнения спецодежды медицинского персонала биологическими жидкостями инфекционных больных – в течение рабочего дня (при загрязнении одноразовой медицинской одежды биологическими жидкостями она подлежит замене немедленно);
- в других отделениях инфекционного стационара – в течение рабочего дня.

Время использования одноразового белья медицинского назначения составляет:

- при проведении хирургических операций (стерильные комплекты) – в течение времени проведения оперативного вмешательства;
- при обработке ран – в течение времени проведения обработки раны;
- при приеме родов – в течение времени приема родов;
- при выполнении гинекологических операций – в течение времени выполнения гинекологической операции;
- при проведении интенсивной терапии и реанимации – в течение суток.

Одноразовое постельное белье родильниц используется в течение 3-х суток. нательное белье и полотенца – в течение одних суток, подкладные салфетки используются до загрязнения.

Время использования одноразового белья медицинского назначения в инфекционных стационарах составляет:

- в отделениях интенсивной терапии и реанимации – в течение суток
- в отделениях, где имеется высокая вероятность попадания на постельные принадлежности биологических жидкостей инфекционных больных – в течение одной недели (при загрязнении одноразового белья биологическими жидкостями оно подлежит замене немедленно)
- в других отделениях инфекционного стационара – в течение 7 дней (при загрязнении

одноразового белья биологическими жидкостями оно подлежит замене немедленно).

Одноразовая медицинская одежда, находящаяся в укладках в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники, используются в течение времени, необходимого для оказания медицинской помощи и проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении случаев заболевания особо опасными инфекциями на амбулаторном приеме или при обслуживании визитов на дому.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с преднамеренным применением биологических патогенных агентов (биотеррористический акт) или при возникновении аварийных ситуаций на объектах биотехнологической промышленности или в лабораториях, работающих с патогенными микроорганизмами, комплекты одноразовой медицинской одежды используются:

- группой санитарно-эпидемиологической разведки – в течение времени проведения санитарно-эпидемиологической разведки;
- группой консультантов – в течение времени проведения консультации;
- группой эпидемиологов – в течение времени проведения эпидемиологического обследования очагов или вспышек;
- группой эвакуаторов – в течение времени эвакуации инфекционного больного;
- группой дезинфекторов – в течение времени проведения заключительной дезинфекции.

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

Одноразовая медицинская одежда и белье должны храниться в специально выделенных помещениях (бельевых). В отделениях должен храниться суточный запас чистого белья в отдельных помещениях или в отдельных местах на постах медсестер и других помещениях с чистым режимом при наличии специально выделенных для этой цели встроенных или обычных шкафов.

Белье и тара должны быть промаркированы, хранение в отделениях немаркированного белья не допускается.

Использованная одноразовая медицинская одежда и белье собираются в отделениях в специальную непромокаемую тару (пластиковые или полиэтиленовые мешки, специально оборудованные бельевые тележки или другие аналогичные приспособления) с применением современных технических устройств и передаются в центральную грязную бельевую. Все процессы, связанные с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой белья, должны быть максимально механизированы.

Временное хранение (не более 12 часов) использованной одноразовой медицинской одежды и белья грязного белья в отделениях следует осуществлять в санитарных комнатах или других специально отведенных для этой цели помещениях в закрытой таре (металлических, пластмассовых бачках, плотных ящиках и других емкостях, подвергающихся дезинфекции).



Для работы с использованной одноразовой медицинской одеждой и бельем персонал должен быть обеспечен сменной санитарной одеждой (халат, косынка, перчатки, маска).

Использованная одноразовая медицинская одежда и белье, не загрязненные биологическими жидкостями, могут быть захоронены на обычных полигонах по захоронению твердых бытовых отходов.

Использованная одноразовая медицинская одежда и белье, которые были загрязнены биологическими жидкостями, или в отношении которых не исключается контаминация биологическими патогенными агентами (бактериями, вирусами, простейшими и др.), подвергается обязательной дезинфекции. Дезинфекция проводится в соответствии с действующими нормативными документами непосредственно на местах первичного сбора отходов. Дезинфекция может проводиться химическим методом путем полного погружения изделий в дезинфицирующий раствор, приготовленный в специально выделенных для этих целей емкостях. Для дезинфекции используются зарегистрированные и разрешенные к применению Министерством здравоохранения в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в инструкциях по их применению. Кроме того, дезинфекция может проводиться в паровых стерилизаторах (автоклавирование) и в дезинфекционных камерах. При дезинфекции использованной медицинской одежды и белья одноразового применения в паровых стерилизаторах или в дезинфекционных камерах, она собирается в биксы или в камерные мешки.

Продезинфицированная одежда и белье одноразового применения упаковывается в соответствующие классу отходов одноразовые пакеты для сбора и хранения медицинских отходов, в дальнейшем уничтожается на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими методами. При централизованном способе обезвреживания производится в печах мусоросжигательных заводов.

**Комплект белья и одежды хирургический,
одноразовый, стерильный и нестерильный КМ-
«ИМС» по ТУ 9398-002-50337012-2010,
производства ООО «Интермедсервис», Россия**

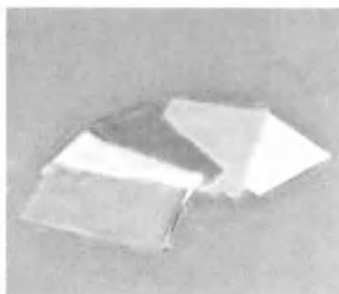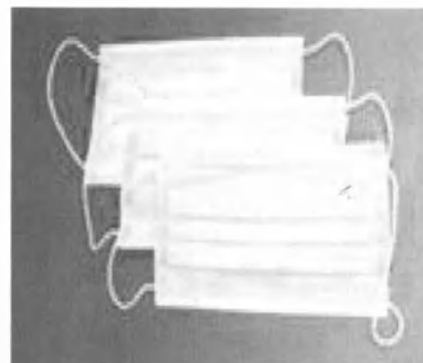

**Комплект белья и одежды хирургический,
одноразовый, стерильный и нестерильный КМ-
«ИМС» по ТУ 9398-002-50337012-2010,
производства ООО «Интермедсервис», Россия**

