

2.2 Для подготовки к работе распакуйте шкаф и очистите от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или бензином, промойте горячей водой с моющими средствами и просушите.

2.3 Проверьте комплектность.

2.4 Проверьте целостность покрытий поверхностей шкафа.

2.5 Осуществите сборку согласно инструкции.

Инструкция по сборке

Сборку производить на плоской поверхности!

1. Вставьте пластмассовые втулки из комплекта Петель для стекла 12 и 13 в Верх шкафа 9 и в Полку среднюю 5 сверху, и из комплекта поставки в Основание 8 и в Полку среднюю 5 снизу.

2. Положите на плоскую поверхность Верх шкафа 9 резьбовыми втулками вверх.

3. Установите Стенку заднюю 1 на Верх шкафа 9 до совпадения отверстий с резьбовыми втулками, предварительно определив направление установки Стенки задней 1 по совпадению резьбовых втулок с соответствующими отверстиями в Стенках боковых 2 и 3, которые устанавливаются на резьбовые втулки Верха шкафа так, чтобы технологические вырезы «А» были направлены в сторону Основания 8. Зафиксируйте Стенку заднюю 1 Винтами с Шайбами из комплекта поставки (см. рис. 2).

4. Соедините Стенки боковые 2 и 3 со Стенкой задней 1 и Верхом шкафа 9. Для этого нужно завести Стенки боковые сверху в отгибы задней стенки так, чтобы технологические вырезы «А» были направлены в сторону Основания 8.

5. Установите Полку среднюю 5 плоскостью согласно швеллерам Стенок боковых 2 и 3 до совпадения отверстий с резьбовыми втулками и соедините их между собой и Стенкой задней 1 Винтами с Шайбами из комплекта поставки.

6. Установите Основание 8, до совпадения отверстий с резьбовыми втулками, на Стенки боковые 2 и 3 и Стенку заднюю 1, соедините их все между собой Винтами с Шайбами из комплекта поставки. Винты около осей Дверок 6 и 7 завернуть на 2-3 оборота.

7. Поставьте Дверки нижние 6 и 7, установив их оси в пластмассовые втулки Основания 8 и в Полке средней 5.

8. Заверните Винты с Шайбами из комплекта поставки около осей Дверок нижних 6 и 7 в Основание 8.

9. Заверните в Основание 8 Опоры 16 (см. рис. 5).

10. Поставьте шкаф на Опоры 16 и, выворачивая их поочередно, выставьте такое положение шкафа, при котором Дверки 6 и 7 открываются и закрываются свободно.

11. Установите замок 11 Дверки 7, входящий в комплект поставки.

12. Установите с помощью Винтов (саморезов) и отрегулируйте магнитные защёлки 15 на Полке средней 5, всё из комплекта поставки.

13. Уложите Полки 10 на уголки Стенок боковых 2 и 3 в нижней части шкафа.

14. Установите Петли для стекла верхние 13 и нижние 12 в пластиковые втулки, установленные в Верх шкафа 9 и в Полку среднюю 11 соответственно, винтами для крепления стекла — внутрь шкафа.

15. Вложите пластмассовые вкладыши из комплекта в Петли для стекла 13 и 12, установите Дверки стеклянные 4 и закрепите в Петлях винтами крепления стекла так, чтобы Дверки стояли без перекосов и открывались свободно.

16. Установите Ручки для стекол 14 на Дверки стеклянные 4 напротив магнитной защёлки.

17. Уложите Полки стеклянные 17 на уголки Стенок боковых 2 и 3 в верхней части шкафа.

18. Проверьте затяжку винтов!

Схема сборки шкафа ШМ-2 (разборный)
т.ц.д. 3.562.002 (Вариант 1)

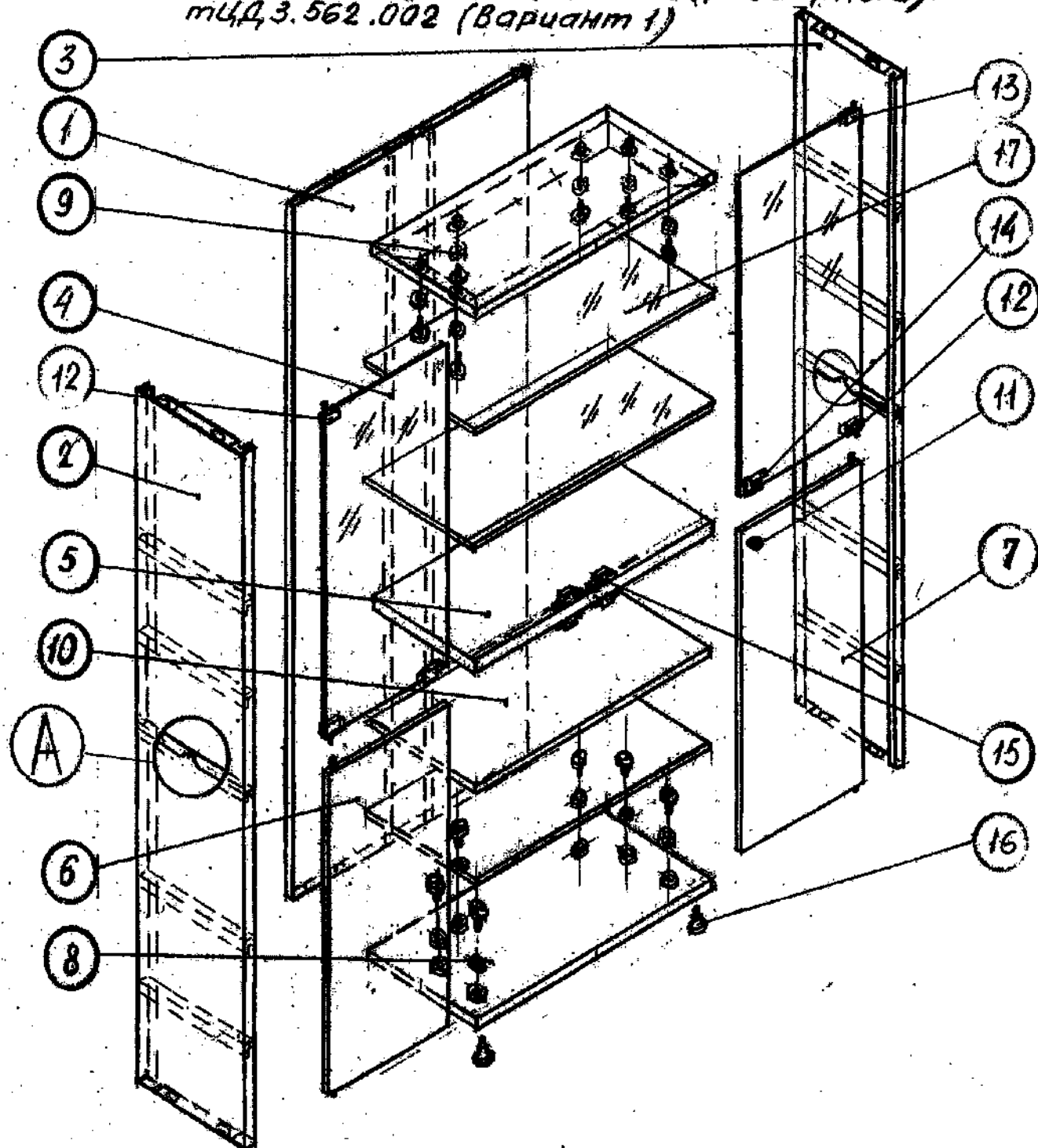


Рисунок 1

Шкаф медицинский двухстворчатый
ШМ-2 (разборный)

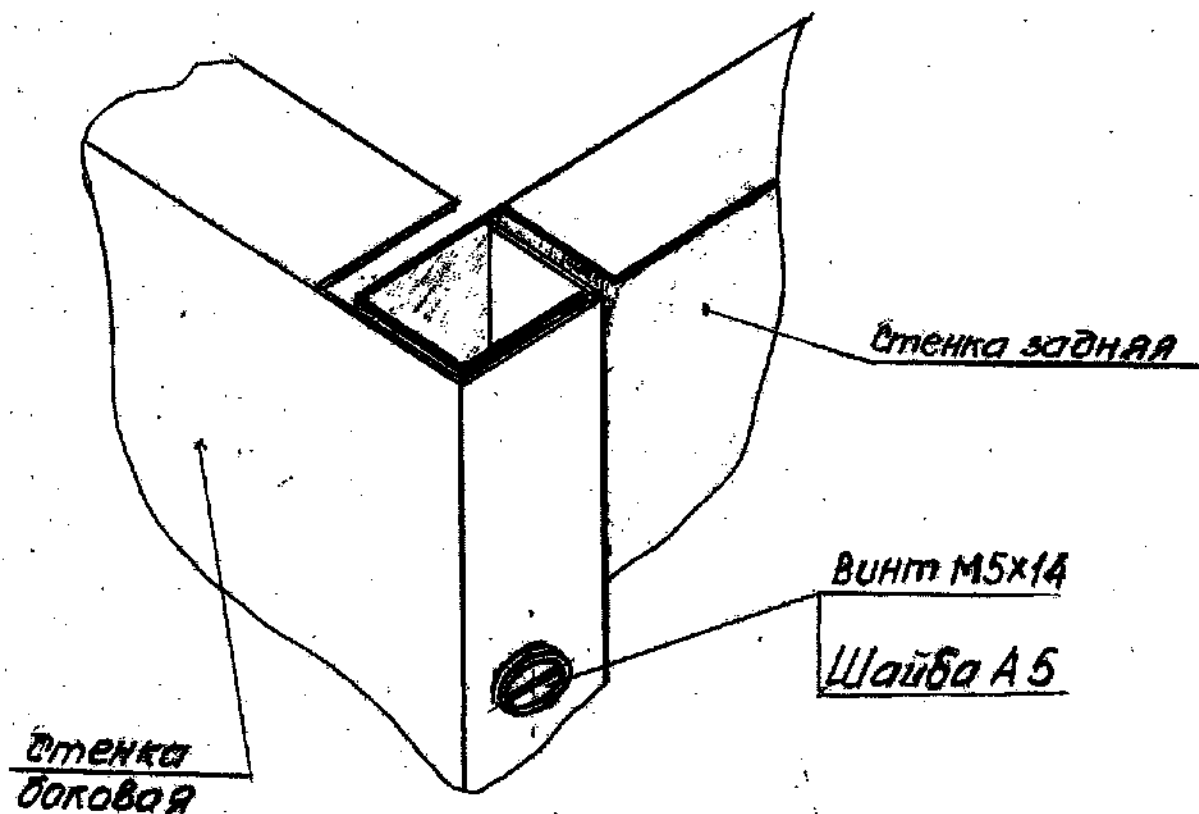


Рис. 2

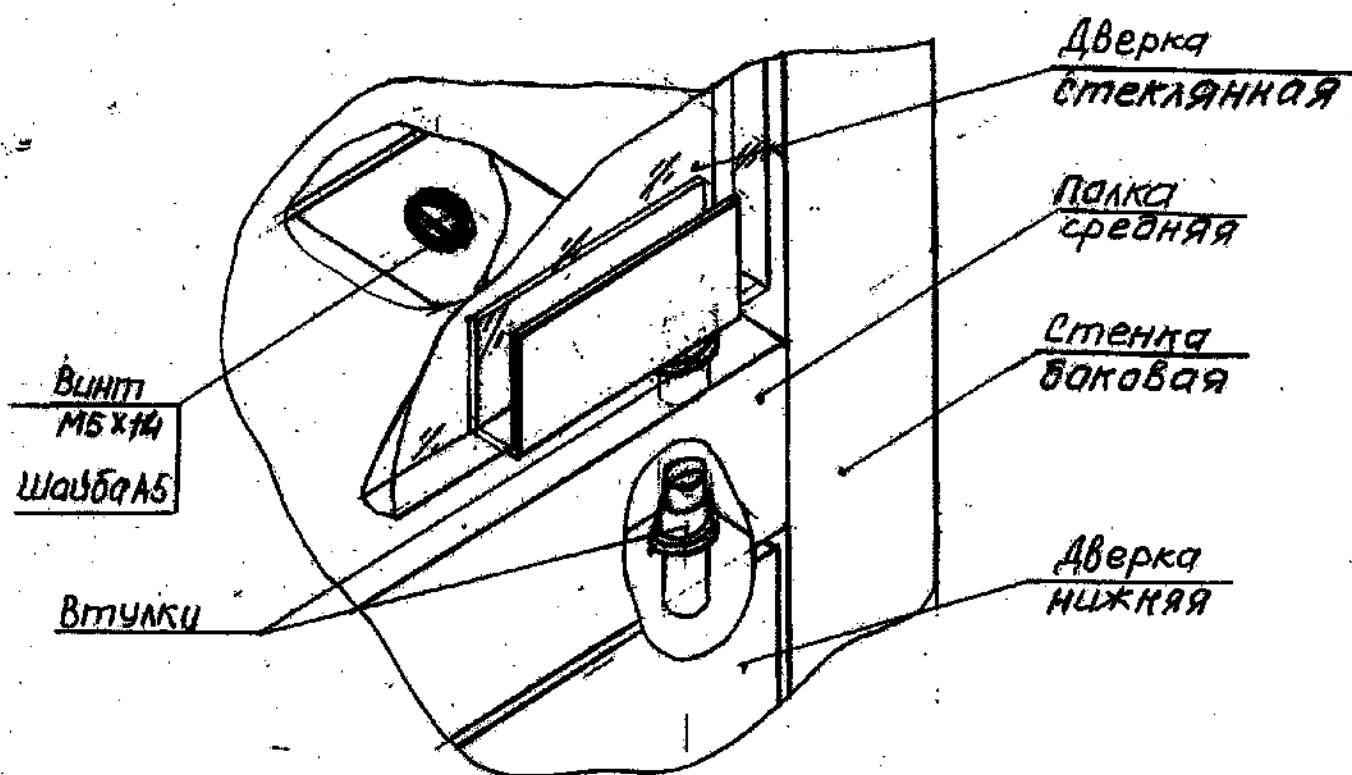


Рис. 3.

Шкаф медицинский ШМ (разборный)

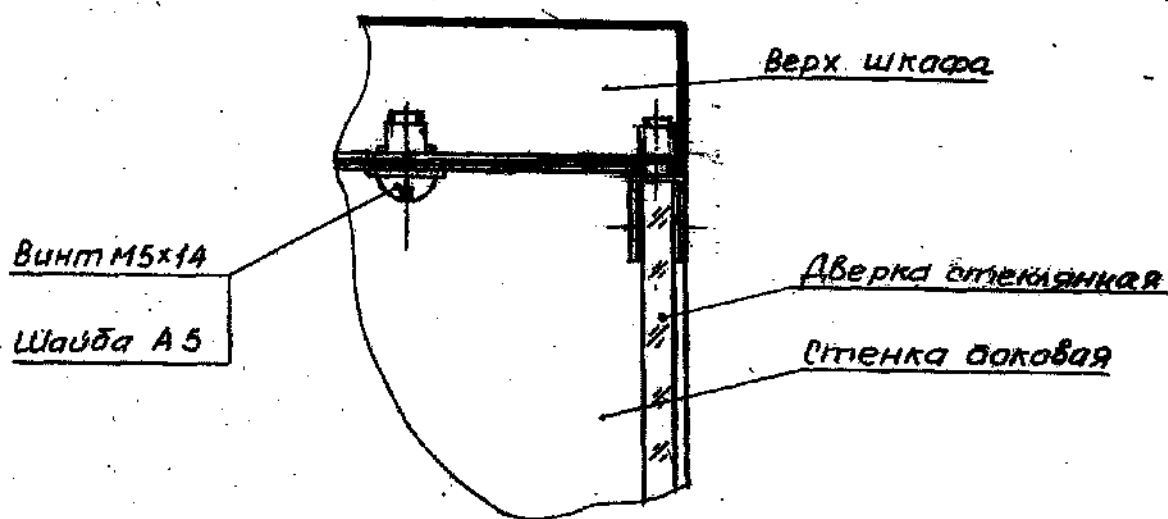


Рис. 4

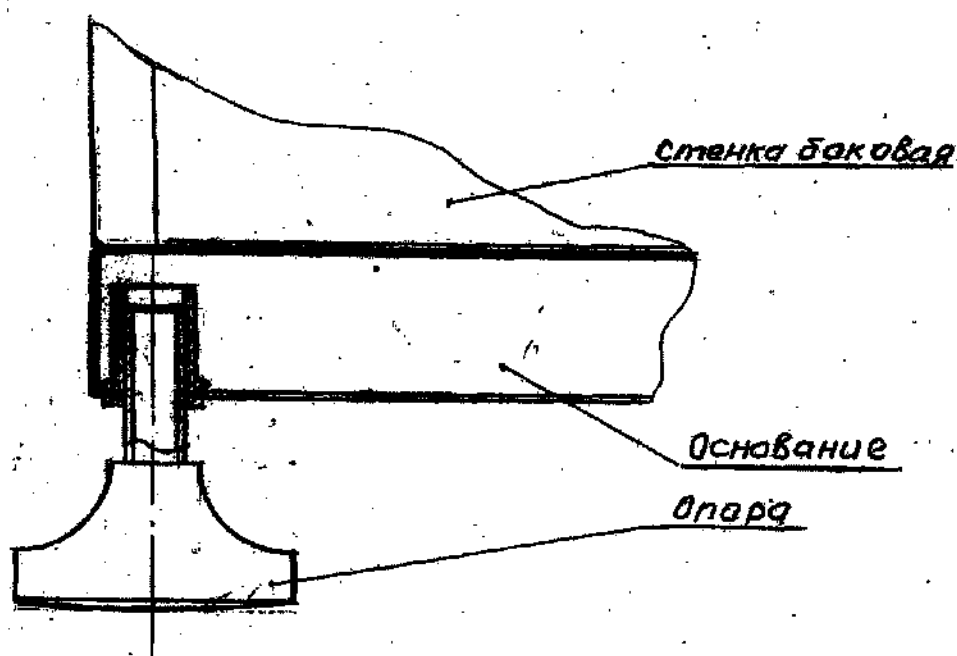


Рис. 5

Шкаф медицинский ШМ (разборный)

3. Указание мер безопасности

3.1 К сборке и эксплуатации шкафов допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию шкафов.

3.2 Необходимо помнить, что стеклянные полки могут выдержать равномерно распределенную нагрузку не более 10 кг.

3.3 Банки, колбы и т.п. предметы, имеющие небольшую площадь опоры, хранимые на стеклянных полках, должны быть весом не более 5 кг.

Грузы более 5 кг необходимо устанавливать на металлические полки в нижней части шкафа.

Пронумеровано

На 5 (пять)

Ген. дир. 100



листах
А.В. Костров