



СИМС-2



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Кресла-туалеты серии WC: WC Mobail, WC DeLux, WC Econom, WC XXL,
WC eFix, WC Standart, WC DeLux Mobail**



СИМС-2

Применение

Кресла-туалеты (далее кресло) предназначены для облегчения ухода за тяжелобольными и инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Надежная, функциональная конструкция кресел-туалетов позволяет использовать их как в стационарных медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Кресло-туалет собирается без использования дополнительного инструмента.

Сидение, затем крышка прикрепляются к задней части рамы.

Гигиеническое судно устанавливается на дугообразные опоры под сидением.

Высота сидения регулируется выдвижающимися ножками опоры. Для этого необходимо нажать на кнопку клип-фиксатора и выдвинуть ножку на необходимую высоту, до фиксации кнопки клип-фиксатора.

Конструкция кресла WC Mobail позволяет использовать его сверху над унитазом.

Когда кресло установлено над унитазом, необходимо обязательно зафиксировать задние колеса имеющимся на них тормозом.

Техническое обслуживание

При эксплуатации кресло-туалет требует определенного технического ухода.

Рама кресла-туалета изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие, не подверженное коррозии при контакте с водой, облегчает санитарную обработку кресла-туалета.

При мытье допустимо использование воды и моющих средств. Не используйте растворители (ацетон, спирт и т. п.) и абразивные средства. После санитарной обработки вытрите кресло насухо.

Следует предохранять кресло от ударов твердыми и острыми предметами.

Не подвергайте кресло длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

При повреждении резиновых наконечников на ножках стула необходимо провести их замену.

Ремонт

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.



Инструкции по технике безопасности

Убедитесь в надежности крепления всех резьбовых соединений.

Кнопки фиксаторов на нижних частях опор должны совпадать с соответствующими отверстиями на опорах.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

Не допускайте контакта кресла- туалета с электрическими приборами и проводами.

Технические характеристики

Модель (артикул)	Максимальная нагрузка , кг	Масса, кг	Высота сидения, см	Шаг регуливовки высоты сидения, см	Расстояние между поручнями, см
WC Mobail	100	8	44-55	2,5	44
WC DeLux	100	9,6	44-55	2,5	49
WC Econom	100	11	43-53	2,5	43
WC XXL	100	12	43-53	2,5	53
WC eFix	100	5	42	-	44
WC Standart	100	9	48-58	2,5	45
WC DeLux Mobail	100	9,6	44-55	2,5	49

По заказу, дополнительно кресла-туалеты могут комплектоваться следующими принадлежностями:

Ведро для кресел-туалетов - Potty
Резиновая насадка -WC Tip Econom
Резиновая насадка -WC Tip DeLux
Резиновая насадка -WC Tip XXL
Резиновая насадка -WC Tip eFix
Резиновая насадка -WC Tip Standart



Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие качества кресла-туалета при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний эксплуатации.

Установленный срок пользования пять лет.

Гарантийный срок хранения – два года со дня изготовления кресла туалетного.

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня выдачи пользователю

Регистрационное удостоверение № , сертификат соответствия № РОСС

Дата продажи: « »

Генеральный директор
ООО «СИМС-2»



Бадалян С.П.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 4 листа

