



ТЕПЛО ДЛЯ ВАС

"РУССКАЯ ПЕЧКА"

СОЛЕВАЯ
МНОГОРАЗОВАЯ
САМОРАЗОГРЕВАЮЩАЯСЯ
ГРЕЛКА



- ◆ Эффективное профилактическое и лечебное средство.
- ◆ Мгновенный разогрев за счет теплоты кристаллизации раствора.
- ◆ Комфорт дома и на улице.
- ◆ Автономный источник тепла в экстремальных ситуациях.
- ◆ Принимает формы согреваемой поверхности.
- ◆ Предельно просто, гигиенично и безопасно.
- ◆ Долговечно и надёжно.
- ◆ Лечебный холод - свойство аккумулировать холод.

УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Грелка представляет собой прочный герметичный пластиковый пакет с нетоксичным раствором ацетата натрия - соли, применяемой в пищевой промышленности и медицине. В растворе находится кнопка - активатор, представляющая собой металлическую мембрану в пластиковом корпусе.

При нажатии на мембрану образуется центр кристаллизации, вызывая фазовый переход раствора из жидкого состояния в твёрдое с выделением тепла и разогревом до $+54^{\circ}\text{C}$.

Грелки различных форм и размеров позволяют эффективно прогревать различные участки тела.

Для использования внешнего холода грелку в восстановленном (жидком) состоянии поместите в морозильную камеру на 30-60 минут. Не следует охлаждать грелку до температуры ниже минус 8°C , так как произойдет самокристаллизация раствора с выделением тепла.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		
ТЕПЛО		ХОЛОД
В ПОМЕЩЕНИИ	ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	
◆ Профилактика и лечение - остеохондроза - радикулита - ишиаса - гайморита - миозита - отита - артрита суставов	◆ В холодном транспорте ◆ При работе на холоде ◆ В туристических походах - пеших - лыжных - водных ◆ Во время отдыха за городом ◆ Подогрев кино-фото аппаратуры зимой ◆ Подогрев медицинских препаратов	◆ Профилактика и лечение - мигрени - носовых кровотечений - ушибов - растяжений связок и мышц - укусов насекомых - при высокой температуре ◆ Температурный комфорт в жаркий день ◆ Охлаждение продуктов и напитков при перевозках
◆ Разогревание - перед массажем - при тубаже печени - после инъекции для улучшения рассасывания лекарств ◆ Комфорт дома и в офисе		



ТЕПЛО ДЛЯ ВАС

"РУССКАЯ ПЕЧКА"

СОЛЕВАЯ
МНОГОРАЗОВАЯ
САМОРАЗОГРЕВАЮЩАЯСЯ
ГРЕЛКА

- ◆ Эффективное профилактическое и лечебное средство.
- ◆ Мгновенный разогрев за счет теплоты кристаллизации раствора.
- ◆ Комфорт дома и на улице.
- ◆ Автономный источник тепла в экстремальных ситуациях.
- ◆ Принимает формы согреваемой поверхности.
- ◆ Предельно просто, гигиенично и безопасно.
- ◆ Долговечно и надёжно.
- ◆ Лечебный холод - свойство аккумулировать холод.

УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Грелка представляет собой прочный герметичный пластиковый пакет с нетоксичным раствором ацетата натрия - соли, применяемой в пищевой промышленности и медицине. В растворе находится кнопка - активатор, представляющая собой металлическую мембрану в пластиковом корпусе.

При нажатии на мембрану образуется центр кристаллизации, вызывая фазовый переход раствора из жидкого состояния в твердое с выделением тепла и разогревом до $+54^{\circ}\text{C}$.

Грелки различных форм и размеров позволяют эффективно прогревать различные участки тела.

Для использования внешнего холода грелку в восстановленном (жидком) состоянии поместите в морозильную камеру на 30-60 минут. Не следует охлаждать грелку до температуры ниже -8°C , так как произойдет самокристаллизация раствора с выделением тепла.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		
ТЕПЛО		ХОЛОД
В ПОМЕЩЕНИИ	ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	
◆ Профилактика и лечение	◆ В холодном транспорте	◆ Профилактика и лечение
- остеохондроза	◆ При работе на холоде	- мигрени
- радикулита	◆ В туристических походах	- носовых кровотечений
- ишиаса	- пеших	- ушибов
- гайморита	- лыжных	- растяжений связок и
- миозита	- водных	мышц
- отита	◆ Во время отдыха за	- укусов насекомых
- артрита суставов	городом	- при высокой
◆ Разогревание	◆ Подогрев кино-фото	температуре
- перед массажем	аппаратуры зимой	◆ Температурный комфорт
- при тубаже печени	◆ Подогрев медицинских	в жаркий день
- после инъекции для	препаратов	◆ Охлаждение продуктов и
улучшения рассасывания		напитков при перевозках
лекарств		
◆ Комфорт дома и в офисе		

КАК ВКЛЮЧИТЬ ГРЕЛКУ

Для включения грелки с усилием надавите на ребристую сторону металлической пластины кнопки - активатора, плавающей внутри грелки. Повторите нажатие до начала кристаллизации раствора, белой волной распространяющейся от кнопки - активатора с эффектом разогрева грелки. Подождите несколько секунд для распространения тепла по всему пакету и энергично разомните грелку в руках (как тесто).

Мягкую и эластичную, разогретую до $+54^{\circ}\text{C}$ грелку приложите к согреваемому месту, легко приспособив к контурам тела.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ГРЕЛКИ

В удобное для вас время грелка легко восстанавливается, т.е. переводится в исходное (жидкое) состояние, в котором может находиться неограниченный срок. Для этого оберните грелку тканевой салфеткой и прокипятите в воде до полного исчезновения кристаллов (10-20 минут в зависимости от размера). При кипячении происходит также стерилизация грелки. Достаньте грелку из воды и охладите до комнатной температуры. Грелка готова к повторному использованию.

В период охлаждения вы можете использовать грелку "Русская печка" как традиционную грелку.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРЕЛКИ

Предохраняйте грелку от порезов и проколов. Не используйте острые предметы для извлечения грелки из кипятка. Грелка с нарушением герметичности не подлежит восстановлению.

Плёнка и содержимое грелки не представляют опасности для Вашего здоровья. В случае попадания раствора на тело или одежду прополаскайте это место водой.

При охлаждении ниже -8°C происходит самокристаллизация раствора.

При использовании грелки в качестве аккумулятора холода время охлаждения выбирается таким, чтобы не произошла самокристаллизация раствора.

Храните грелку в восстановленном (жидком) состоянии.

В грелке допускается появление кристаллов в виде снежинок, не влияющих на работу грелки.

Для максимального лечебного эффекта проконсультируйтесь с врачом о порядке проведения физиотерапевтических процедур.

ГРЕЛКА-СТЕЛКА ПРИМЕНЯЕТСЯ:

При хронических заболеваниях и последствиях травм опорно-двигательного аппарата нижних конечностей (артриты, пероститы, миозиты, вывихи, переломы, рубцовые изменения кожи и подлежащих тканей после термических и химических ожогов).

Под влиянием местной аппликации теплой стелькой, на стопе повышается температура кожи и подлежащих тканей, усиливается кровообращение и лимфоток, ускоряются процессы регенерации и обмена веществ, ускоряется рассасывание инфильтратов, гематом.

Разогретую после включения тепловую стельку следует вложить в шерстяной носок, который надевается на ногу так, чтобы стелька плотно прилегала к стопе. Вставать на стельку не следует.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Онкологические заболевания, острые воспалительные процессы, свежие травмы и кровотечения,

Изготовитель : ООО фирма " ЛИНТУБ ", г. Москва, патент № 2043094,
ТУ 9452-001-29888905-94, сертификат соответствия № РОСС RU .МЕ20.В02175

Дата выпуска: _____

Гарантия 1 год.

☎ 875-89-44

FAX 875-89-44

КАК ВКЛЮЧИТЬ ГРЕЛКУ

Для включения грелки с усилием надавите на ребристую сторону металлической пластины кнопки - активатора, плавающей внутри грелки. Повторите нажатие до начала кристаллизации раствора, белой волной распространяющейся от кнопки - активатора с эффектом разогрева грелки. Подождите несколько секунд для распространения тепла по всему пакету и энергично разомните грелку в руках (как тесто).

Мягкую и эластичную, разогретую до +54°C грелку приложите к согреваемому месту, легко приспособив к контурам тела.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ГРЕЛКИ

В удобное для вас время грелка легко восстанавливается, т.е. переводится в исходное (жидкое) состояние, в котором может находиться неограниченный срок. Для этого оберните грелку тканевой салфеткой и прокипятите в воде 15-20 минут до полного исчезновения кристаллов. При кипячении происходит также стерилизация грелки. Достаньте грелку из воды и охладите до комнатной температуры. Грелка готова к повторному использованию.

В период охлаждения вы можете использовать грелку "Русская печка" как традиционную грелку.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРЕЛКИ

Предохраняйте грелку от порезов и проколов. Не используйте острые предметы для извлечения грелки из кипятка. Грелка с нарушением герметичности не подлежит восстановлению.

Пленка и содержимое грелки не представляют опасности для Вашего здоровья. В случае попадания раствора на тело или одежду прополаскайте это место водой.

При охлаждении ниже -8°C происходит самокристаллизация раствора.

При использовании грелки в качестве аккумулятора холода время охлаждения выбирается таким, чтобы не произошла самокристаллизация раствора.

Храните грелку в восстановленном (жидком) состоянии.

В грелке допускается появление кристаллов в виде снежинок, не влияющих на работу грелки.

Для максимального лечебного эффекта проконсультируйтесь с врачом о порядке проведения физиотерапевтических процедур.

ГРЕЛКА-СТЕЛКА ПРИМЕНЯЕТСЯ:

При хронических заболеваниях и последствиях травм опорно-двигательного аппарата нижних конечностей (артриты, пероститы, миозиты, вывихи, переломы, рубцовые изменения кожи и подлежащих тканей после термических и химических ожогов).

Под влиянием местной аппликации теплой стелькой, на ступне повышается температура кожи и подлежащих тканей, усиливается кровообращение и лимфоток, ускоряются процессы регенерации и обмена веществ, ускоряется рассасывание инфильтратов, гематом.

Разогретую после включения тепловую стельку следует вложить в шерстяной носок, который надевается на ногу так, чтобы стелька плотно прилегала к стопе. Вставать на стельку не следует.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Онкологические заболевания, острые воспалительные процессы, свежие травмы и кровотечения.

Изготовитель : ООО фирма "ЛИНТУБ", г. Москва, патент № 2043094,

ТУ 9452-001-29888905-94, сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ20.В02175

Дата выпуска: _____

Гарантия 1 год.

☎ 675-89-44

FAX 675-89-44