



Грелка полимерная тип А

по ТУ 22.29.29-004-05769082-2019

Исх. № 7718/2019
г. Москва

Копия верна
Директор ОЗРи

ООО «Объединение «Альфарастек»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Копия верна
 Директор ОЗРГ
 ООО ЦПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
 Мершинев А.Ю.
 "Медик"

Место нанесения товарного знака
 завода-изготовителя на грелку полимерную
 по ТУ 22.29.29-004-05769082-2019



Секретка полимерная тип А
по ТУ 22.29.29-004-05769082-2019


в индивидуальной упаковке

Исришев А.Ю.

Копия верна

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО, Общественное Агентство

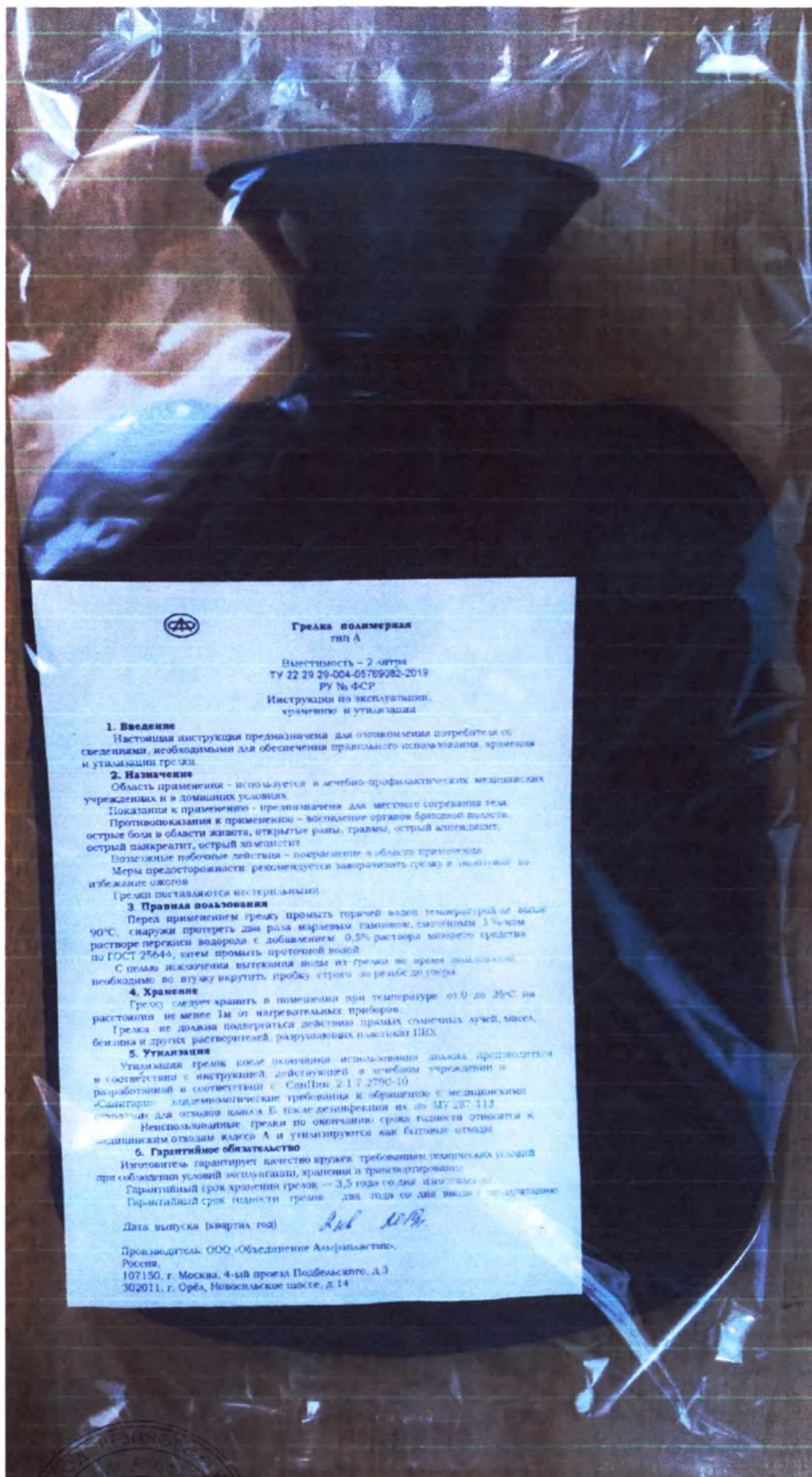

Грелка полимерная тип А

Вместимость – 2 литра
ТУ 22.29.29-004-05769082-2019
РУ № 4-СР

Инструкция по эксплуатации,
хранению и утилизации

1. Введение

Настоящая инструкция предназначена для ознакомления потребителя со сведениями, необходимыми для обеспечения правильного использования, хранения и утилизации грелки.

2. Назначение

Область применения – используется в лечебно-профилактических медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению – предназначена для местного согревания тела. Противопоказания к применению – воспаление органов брюшной полости, острые боли в области живота, открытые раны, травмы, острый аппендицит, острый панкреатит, острый холецистит.

Возможные побочные действия – покраснение в области применения.

Меры предосторожности: рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов.

Грелка поставляется стерилизованной.

3. Правила пользования

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90°C, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным 3%-ым раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, затем промыть проточной водой.

С целью исключения вытекания воды из грелки во время эксплуатации, необходимо во время вкрутить пробку строго до резки до упора.

4. Хранение

Грелку следует хранить в помещении при температуре от 0 до 25°C на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.

Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина и других растворителей, разрушающих пластик ПНД.

5. Утилизация

Утилизация грелок после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113.

Неиспользованные грелки по окончании срока годности относятся к медицинским отходам класса А и утилизуются как бытовые отходы.

6. Гарантийное обязательство

Изготовитель гарантирует качество изделий, требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.


Гарантийный срок хранения грелок – 3,5 года со дня изготовления.

Гарантийный срок годности грелок – два года со дня выпуска из производства.

Дата выпуска (квартал года)

2 кв. 2019

Производитель: ООО «Объединение Аам/напастипо»,
Россия,
107150, г. Москва, 4-ый проезд Подбельского, д.3
302011, г. Орёл, Новосельское шоссе, д.14

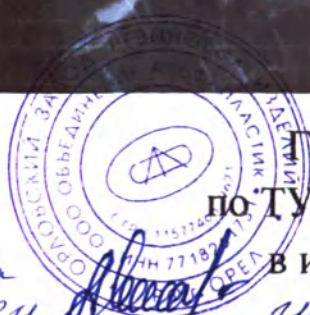

Грелка полимерная тип А
по ТУ 22.29.29-004-05769082-2019

в индивидуальной упаковке

Консультация Верна

Директор ДЗРМ

ООО ЦРММ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

всё, что связано с медициной

Альбрандаски

Меринев А.И.



ООО "Объединение Альфапластик"

ГРЕЛКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

тип А

Вместимость – 2 литра

Количество: **10 шт.**
ТУ 22.29.29-004-05769082-2019
РУ № ФСР

Дата выпуска: 2 кв. 2019г.
Ф.И.О. упаковщика
Штамп ОТК

Гарантийный срок хранения грелок – 3,5 года
со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации – два года
со дня ввода в эксплуатацию
Производитель:
ООО "Объединение Альфапластик",
Россия,
107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д.14



Копия верна
Директор ОЗРМ *А.В. Меринев* А.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Грелка полимерная тип А
по ТУ 22.29.29-004-05769082-2019
в групповой упаковке



ООО "Объединение Альфапластик"

ГРЕЛКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

тип А

Вместимость – 2 литра

Количество: 10 шт.
ТУ 22.29.29-004-05769082-2019
РУ № ФСР

Дата выпуска (квартал, год)
Ф.И.О. упаковщика
Штамп ОТК

Гарантийный срок хранения грелок – 3,5 года
со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации – два года
со дня ввода в эксплуатацию
Производитель:
ООО "Объединение Альфапластик",
Россия,
107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д.14

Копия верна

Директор ОЗР

ООО "Объединение



Шеринев А.И.

Альфапластик"