

Кружка Эсмарха полимерная  
ТУ 22.29.29-002-05769082-2019  
РУ № ФСР  
Вместимость 1,5 л

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ

### 1. Назначение

Кружка Эсмарха полимерная предназначена для проведения лечебных или очистительных клизм, спринцеваний и орошений как в домашних условиях, так и в лечебно-профилактических учреждениях.

#### Показания к применению:

1. Постановка очистительных и лекарственных клизм при пищевом отравлении, лечении запоров, после операционной очистке кишечника от каловых масс.
  2. Промывания и спринцевания при различных гинекологических воспалительных заболеваниях.
- Противопоказания к применению – рак прямой кишки, острые воспалительные и эрозивно-язвенные поражения слизистой кишечника, острый аппендицит, острый перитонит, желудочно-кишечные кровотечения, болезнь Крона.
- Меры предосторожности – перед применением проконсультироваться с врачом.
- Кружка нестерильна, предназначена для многократного использования (не более 10 циклов).

### 2. Эксплуатация

Перед применением проверить целостность упаковки. Кружку извлечь из индивидуальной упаковки, проверить на наличие внешних повреждений. После перекрытия удлиненной трубки с помощью зажима, заполнить резервуар необходимым количеством вводимого раствора. Удалить воздух из системы, вновь перекрыть подачу раствора зажимом. Горловину резервуара плотно закрыть крышкой. Трубку взять в правую руку в области дистального конца. Кружку поднять на высоту 1-1,5 м и, после открытия запорного устройства, ввести необходимое количество раствора.

При проведении лечебных или очистительных клизм ввести дистальный конец трубки в прямую кишку на глубину 8-12 см и опустить кружку ниже уровня дистального наконечника и после отхождения газов снова постепенно поднимать ее. При постановке очистительной клизмы нужно сделать, чтобы одновременно вводилось не более (1,5-2,0) л жидкости. Оставив на дне мешка немного воды, чтобы в кишечник не попал воздух, зажимом закрыть доступ жидкости. По окончании манипуляции дистальный конец трубки извлечь из прямой кишки через салфетку, смоченную в дезрастворе. Область заднего прохода протереть чистой салфеткой.

При проведении спринцевания и орошения влагалища ввести дистальный конец трубки на глубину 10-15 см. По окончании манипуляции дистальный конец трубки извлечь из влагалища через салфетку, смоченную в дезрастворе. Область промежности протереть чистой салфеткой.

### 3. Дезинфекция

Кружка Эсмарха полимерная перед применением и после эксплуатации (в сборе) подвергается дезинфекции в соответствии с МУ 287-113 путем погружения изделия на 80 минут при температуре не менее 18°C в 3 %-ный раствор перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5% -ного раствора моющего средства по ГОСТ 25644. После дезинфекции кружки промывают в проточной питьевой воде ГОСТ Р 51232 и подсушивают при комнатной температуре.

### 4. Хранение

Кружки должны храниться в помещении при температуре от 0 до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей. Кружки при транспортировании и хранении не должны подвергаться действию масел, растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих пленку ПВХ и трубку ПВХ.

### 5. Утилизация

Утилизация кружек после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в данном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113. Использованные кружки по окончании срока годности относятся к медицинским отходам класса А и утилизируются как бытовые отходы.

### 6. Гарантийное обязательство

Изготовитель гарантирует качество кружек требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы кружек — 3 года со дня изготовления.

Дата выд. (месяц, год) 05.2019

Промышленность

107150

30201

Сайт

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru

www.abc.ru



Кружка Эсмарха полимерная  
по ТУ 22.29.29-002-05769082-2019  
в индивидуальной упаковке

Комп. Верка  
Директор озри  
ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  
ФГБУН ЦНИИ АПИ