


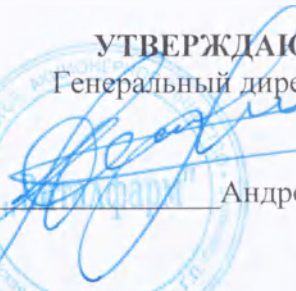

www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка первой помощи в дорогу по ТУ 9398-033-85535470-2015,
в вариантах исполнения.

производства ЗАО «Виталфарм»

Исполнение: Аптечка первой помощи в дорогу индивидуальная

ИМЮЕ.939.1120-001И

72954
07.11.2019

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи в дорожных условиях, на отдыхе, в походе или поездке.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую само и взаимопомощь при травмах, полученных в дорожных условиях, на отдыхе, в походе или поездке.


Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая рекомендация):

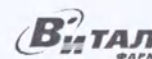

Аптечка первой помощи в дорогу индивидуальная

Инструкция по применению

Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство
Жгут кровоостанавливающий	для временной остановки кровотечения
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее, дезинфицирующее средство
Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая	дезинфицирующее средство
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	для проведения сердечно-легочной реанимации

ИМЮЕ.939.1120-001И

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

Перечень вложений, входящих в изделие «Аптечка первой помощи в дорогу индивидуальная»:

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
Медицинские изделия			
1 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или	Производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 03.09.2015 Производства ООО ПФК «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 Производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 Производства ЗАО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 08.10.2013 Производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015	Шт.	1

ИМЮЕ.939.1120-001И

(Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014)	Производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015		
2 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см.) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014)	Производства ООО «ИНГАКАМФ» Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 03.09.2015 Производства ООО ПФК «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 Производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 Производства ЗАО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 08.10.2013 Производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015 Производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015	Шт.	1
3 Жгут кровоостанавливающий		Шт.	1

ИМЮЕ.939.1120-001И

(Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» по ТУ 9398-010-50887801-2005 в составе: - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот») или (Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10) или (Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм» по ТУ 9398-032-85535470-2015)	Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 от 18.04.2013 Производства ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432 от 25.08.2016 Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733 от 19.02.2016		
4 Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см (Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) бактерицидный) или (Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip) или (Лейкопластырь бактерицидный)	Производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд», КНР, РУ ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017 Производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252 от 12.12.2011 Производства «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01958 от 23.06.2008	Шт.	1
5 Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 30мм x 60мм) (Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70 % этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00) или (Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ) или (Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013)	Производства ООО «М.К. Асептика», Россия, РУ ФСР 2009/05438 от 11.04.2019 Производства «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд», Китай, РУ ФСЗ 2009/04575 от 18.06.2018 Производства ООО Фармэль, Россия, РУ РЗН 2014/1695 от 09.06.2014	Шт.	1

ИМЮЕ.939.1120-001И

следующих типоразмеров: 135x185 мм, 110x125 мм, 60x100 мм, 60x60 мм, 30x60 мм) или (Салфетка антисептическая спиртовая стерильная по ТУ 9393-001-56176857-2015) или (Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные, одноразовые по ТУ 21.20.24-001-35196086-2015)	Производства ООО «Авангард», Россия, РУ РЗН 2016/4620 от 21.11.2016 Производства ООО «Грани», Россия, РУ РЗН 2016/4491 от 10.05.2018		
6 Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» (Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» по ТУ 9398-010-50887801-2005 в составе: - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот») или (Устройство полимерное с односторонним воздушным клапаном одноразовое для проведения искусственного дыхания рот-устройство-рот на догоспитальном этапе оказания экстренной реанимационной помощи Р-У-Р-«АППОЛО» по ТУ 9398-016-42965160-2004) или (Устройство для проведения искусственного дыхания – «Рот – Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047-85535470-2017)	Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 от 18.04.2013 Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2008/03530 от 22.10.2008 Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2018/6705 от 22.01.2018	Шт.	1
7 Футляр	ИМЮЕ.939.1120-09 или ИМЮЕ.939.1120-10/1 или ИМЮЕ.939.1120-10/2 или ИМЮЕ.939.1120-14/2 или	Шт.	1

ИМЮЕ.939.1120-001И

72954
07.11.2019

	ИМЮЕ.939.1120-20 или ИМЮЕ.939.1120-38		
8 Инструкция по применению	ИМЮЕ.939.1120-001И	Шт.	1

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Футляр полипропиленовый 09

- Длина, мм - 235 ± 25
- Ширина, мм - 190 ± 20
- Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Футляр полипропиленовый 10/1

- Длина, мм - 175 ± 18
- Ширина, мм - 143 ± 14
- Высота, глубина, мм - 70 ± 7

Футляр полистирольный 10/2

- Длина, мм - 210 ± 20
- Ширина, мм - 210 ± 20
- Высота, глубина, мм - 68 ± 10

Футляр текстильный 14/2

- Длина, мм - 175 ± 27
- Ширина, мм - 125 ± 19
- Высота, глубина, мм - 70 ± 11

Футляр полипропиленовый 20

Длина, мм - 240 ± 24

Ширина, мм - 185 ± 19

Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Футляр полипропиленовый 38

- Длина, мм - 175 ± 20
- Ширина, мм - 150 ± 15
- Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

Футляр полипропиленовый 09 (255 ± 50);

Футляр полипропиленовый 10/1 (170 ± 30);

Футляр полистирольный 10/2 (220 ± 30);

Футляр текстильный 14/2 (45 ± 15);

ИМЮЕ.939.1120-001И

Футляр полипропиленовый 20 (160±30);

Футляр полипропиленовый 38 (160±30).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

Футляр 14/2 – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOUYWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» K50, 25Н ГОСТ 30019.1;

или

Футляр 09, 10/1, 20, 38 – полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

или

Футляр 10/2 – полистирол ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86.

Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, ПФ1503/07-ПЭ, КПО-01.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до +25°C. Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

4 года с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев со дня продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм»
Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

ИМЮЕ.939.1120-001И

Пропито, пронумеровано,
скреплено печатью

8
листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.В.





www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

Андросов В.В.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка первой помощи в дорогу по ТУ 9398-033-85535470-2015,

в вариантах исполнения.

производства ЗАО «Виталфарм»

Исполнение: Аптечка первой помощи в дорогу семейная

ИМЮЕ.939.1120-002И

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи в дорожных условиях, на отдыхе, в походе или поездке.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую само и взаимопомощь при травмах, полученных в дорожных условиях, на отдыхе, в походе или поездке.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая рекомендация):



Аптечка первой помощи в дорогу семейная

Инструкция по применению

Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство
Жгут кровоостанавливающий	для временной остановки кровотечения
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее, дезинфицирующее средство
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	для защиты рук при обработке грязных ран
Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая	дезинфицирующее средство
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	для проведения сердечно-легочной реанимации

ИМЮЕ.939.1120-002И

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

Перечень вложений, входящих в изделие «Аптечка первой помощи в дорогу семейная»:

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
Медицинские изделия			
1 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см.) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или	Производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 03.09.2015 Производства ООО ПФК «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 Производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 Производства ЗАО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 08.10.2013 Производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015	Шт.	2

ИМЮЕ.939.1120-002И

(Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014)	Производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015		
2 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см.) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014)	Производства ООО «ИНГАКАМФ» Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 03.09.2015 Производства ООО ПФК «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 Производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 Производства ЗАО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 08.10.2013 Производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015 Производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015	Шт.	1
3 Жгут кровоостанавливающий		Шт.	1

ИМЮЕ.939.1120-002И

(Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» по ТУ 9398-010-50887801-2005 в составе: - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот») или (Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10) или (Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм» по ТУ 9398-032-85535470-2015)	Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 от 18.04.2013 Производства ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432 от 25.08.2016 Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733 от 19.02.2016		
4 Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см (Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) бактерицидный) или (Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip) или (Лейкопластырь бактерицидный)	Производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд», КНР, РУ ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017 Производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252 от 12.12.2011 Производства «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01958 от 23.06.2008	Шт.	2
5 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (Перчатки медицинские нестерильные и стерильные) или (Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные) или (Перчатки медицинские диагностические, из натурального латекса или синтетические, стерильные, нестерильные, опудренные, неопудренные, с гладкой поверхностью, с текстурированной поверхностью) или	Производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07368 от 05.07.2010 Производства Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009 Производства «Интернэшнл Медикал Продактс ЛЛС», США, РУ ФСЗ 2010/06177 от 02.02.2010	Пара	1

ИМЮЕ.939.1120-002И

(Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные) или (Перчатки диагностические медицинские SF Gloves различных типоразмеров)	Производства «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэ Продактс Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2012/13220 от 02.11.2012 Производства «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07717 от 21.04.2014		
6 Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 30мм x 60мм) (Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70 % этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00) или (Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ) или (Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013 следующих типоразмеров: 135x185 мм, 110x125 мм, 60x100 мм, 60x60 мм, 30x60 мм) или (Салфетка антисептическая спиртовая стерильная по ТУ 9393-001-56176857-2015) или (Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные, одноразовые по ТУ 21.20.24-001-35196086-2015)	Производства ООО «М.К. Асептика», Россия, РУ ФСР 2009/05438 от 11.04.2019 Производства «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд», Китай, РУ ФСЗ 2009/04575 от 18.06.2018 Производства ООО Фармэль, Россия, РУ РЗН 2014/1695 от 09.06.2014 Производства ООО «Авангард», Россия, РУ РЗН 2016/4620 от 21.11.2016 Производства ООО «Грани», Россия, РУ РЗН 2016/4491 от 10.05.2018	Шт.	2
7 Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» (Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» по ТУ 9398-010-50887801-2005 в составе: - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для	Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 от 18.04.2013	Шт.	1

ИМЮЕ.939.1120-002И

проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот») или (Устройство полимерное с односторонним воздушным клапаном одноразовое для проведения искусственного дыхания рот-устройство-рот на догоспитальном этапе оказания экстренной реанимационной помощи Р-У-Р-«АППОЛО» по ТУ 9398-016-42965160-2004) или (Устройство для проведения искусственного дыхания – «Рот – Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047-85535470-2017)	Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2008/03530 от 22.10.2008 Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2018/6705 от 22.01.2018		
8 Футляр	ИМЮЕ.939.1120-09 или ИМЮЕ.939.1120-10/1 или ИМЮЕ.939.1120-10/2 или ИМЮЕ.939.1120-14/2 или ИМЮЕ.939.1120-20 или ИМЮЕ.939.1120-38	Шт.	1
9 Инструкция по применению	ИМЮЕ.939.1120-002И	Шт.	1

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Футляр полипропиленовый 09

- Длина, мм - 235 ± 25
- Ширина, мм - 190 ± 20
- Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Футляр полипропиленовый 10/1

- Длина, мм - 175 ± 18
- Ширина, мм - 143 ± 14
- Высота, глубина, мм - 70 ± 7

Футляр полистирольный 10/2

- Длина, мм - 210 ± 20
- Ширина, мм - 210 ± 20
- Высота, глубина, мм - 68 ± 10

ИМЮЕ.939.1120-002И

Футляр текстильный 14/2

- Длина, мм - 175 ± 27

- Ширина, мм - 125 ± 19

- Высота, глубина, мм - 70 ± 11

Футляр полипропиленовый 20

Длина, мм - 240 ± 24

Ширина, мм - 185 ± 19

Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Футляр полипропиленовый 38

-Длина, мм - 175 ± 20

-Ширина, мм - 150 ± 15

-Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

Футляр полипропиленовый 09 (255 ± 50);

Футляр полипропиленовый 10/1 (170 ± 30);

Футляр полистирольный 10/2 (220 ± 30);

Футляр текстильный 14/2 (45 ± 15);

Футляр полипропиленовый 20 (160 ± 30);

Футляр полипропиленовый 38 (160 ± 30).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

Футляр 14/2 – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOUYWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» К50, 25Н ГОСТ 30019.1;

или

Футляр 09, 10/1, 20, 38 – полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

или

Футляр 10/2 – полистирол ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86.

Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, ПФ1503/07-ПЭ, КПО-01.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ИМЮЕ.939.1120-002И

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до +25°C. Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

4 года с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев со дня продажи.

Дата изготовления и номер партии: Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

ИМЮЕ.939.1120-002И

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
_____ листа (ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.





www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор


Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка первой помощи в дорогу по ТУ 9398-033-85535470-2015,
в вариантах исполнения.

производства ЗАО «Виталфарм»

Исполнение: Аптечка первой помощи в дорогу для семьи с ребенком

ИМЮЕ.939.1120-003И

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи в дорожных условиях, на отдыхе, в походе или поездке.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую само и взаимопомощь при травмах, полученных в дорожных условиях, на отдыхе, в походе или поездке.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая рекомендация):



Аптечка первой помощи в дорогу для семьи с ребенком

Инструкция по применению

Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство
Жгут кровоостанавливающий	для временной остановки кровотечения
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее, дезинфицирующее средство
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	для защиты рук при обработке грязных ран
Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая	дезинфицирующее средство
Стаканчик для приема лекарств	для точного дозирования лекарственных средств
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	для проведения сердечно-легочной реанимации
Ножницы	применять при перевязке

ИМЮЕ.939.1120-003И

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

Перечень вложений, входящих в изделие «Аптечка первой помощи в дорогу для семьи с ребенком»:

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Кол. ичес. тво
1	2	3	4
Медицинские изделия			
1 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см.) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или	Производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 03.09.2015 Производства ООО ПФК «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 Производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 Производства ЗАО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 08.10.2013 Производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015	Шт.	2

ИМЮЕ.939.1120-003И

(Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014)	Производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015		
2 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см.) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014)	Производства ООО «ИНГАКАМФ» Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 03.09.2015 Производства ООО ПФК «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 Производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 Производства ЗАО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 08.10.2013 Производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015 Производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015	Шт.	2
3 Жгут кровоостанавливающий		Шт.	1

ИМЮЕ.939.1120-003И

(Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» по ТУ 9398-010-50887801-2005 в составе: - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот») или (Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10) или (Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм» по ТУ 9398-032-85535470-2015)	Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 от 18.04.2013 Производства ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432 от 25.08.2016 Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733 от 19.02.2016		
4 Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см х 7,2 см (Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) бактерицидный) или (Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip) или (Лейкопластырь бактерицидный)	Производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд», КНР, РУ ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017 Производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252 от 12.12.2011 Производства «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01958 от 23.06.2008	Шт.	3
5 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (Перчатки медицинские нестерильные и стерильные) или (Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные) или (Перчатки медицинские диагностические, из натурального латекса или синтетические, стерильные, нестерильные, опудренные, неопудренные, с гладкой поверхностью, с текстурированной поверхностью) или	Производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07368 от 05.07.2010 Производства Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009 Производства «Интернэшнл Медикал Продактс ЛЛС», США, РУ ФСЗ 2010/06177 от 02.02.2010	Пара	1

ИМЮЕ.939.1120-003И

(Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные) или (Перчатки диагностические медицинские SF Gloves различных типоразмеров)	Производства «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2012/13220 от 02.11.2012 Производства «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07717 от 21.04.2014		
6 Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 30мм x 60мм) (Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70 % этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00) или (Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ) или (Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013 следующих типоразмеров: 135x185 мм, 110x125 мм, 60x100 мм, 60x60 мм, 30x60 мм) или (Салфетка антисептическая спиртовая стерильная по ТУ 9393-001-56176857-2015) или (Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные, одноразовые по ТУ 21.20.24-001-35196086-2015)	Производства ООО «М.К. Асептика», Россия, РУ ФСР 2009/05438 от 11.04.2019 Производства «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд», Китай, РУ ФСЗ 2009/04575 от 18.06.2018 Производства ООО Фармэль, Россия, РУ РЗН 2014/1695 от 09.06.2014 Производства ООО «Авангард», Россия, РУ РЗН 2016/4620 от 21.11.2016 Производства ООО «Грани», Россия, РУ РЗН 2016/4491 от 10.05.2018	Шт.	3
7 Стаканчик для приема лекарств, 30 мл (Стаканчик полимерный градуированный для приема лекарств, одноразовый Сл 30-01-«В-Ф» по ТУ 9464-006-50887801-2008) или (Тара полимерная для лекарственных средств по ТУ 9464-001-62798327-2010 в следующих исполнениях: флакон-капельница (5, 10, 30) мл; флакон под резиновую крышку 100 мл; стаканчик мерный 30 мл;	Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03469 от 18.04.2013 Производства ООО ПКФ «Экспопласт», Россия, РУ ФСР 2011/10697 от 28.04.2011	Шт.	1

ИМЮЕ.939.1120-003И

контейнер полимерный (60, 100) мл; футляр для пинетки)			
8 Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» (Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» по ТУ 9398-010-50887801-2005 в составе: - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот») или (Устройство полимерное с односторонним воздушным клапаном одноразовое для проведения искусственного дыхания рот-устройство-рот на догоспитальном этапе оказания экстренной реанимационной помощи Р-У-Р-«АППОЛО» по ТУ 9398-016-42965160-2004) или (Устройство для проведения искусственного дыхания – «Рот – Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047-85535470-2017)	Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 от 18.04.2013 Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2008/03530 от 22.10.2008 Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2018/6705 от 22.01.2018	Шт.	1
9 Футляр	ИМЮЕ.939.1120-09 или ИМЮЕ.939.1120-10/1 или ИМЮЕ.939.1120-10/2 или ИМЮЕ.939.1120-14/2 или ИМЮЕ.939.1120-20 или ИМЮЕ.939.1120-38	Шт.	1
10 Инструкция по применению	ИМЮЕ.939.1120-003И	Шт.	1
Принадлежности			
11 Ножницы (Ножницы тупоконечные 130) или	YIWU PENGHAO STATIONERY CO.LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации	Шт.	1

ИМЮЕ.939.1120-003И

(Ножницы бытовые 120) или	и декларированию «YIWU WENYA STATIONARY FACTORY», Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию		
(Ножницы бытовые (100 мм) или	Huaian Tisurg Medical Instruments Co., Ltd., Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию		
(Ножницы бытовые (100 мм)	YIWU PENGHAO STATIONERY CO., LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию		

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Футляр полипропиленовый 09

- Длина, мм - 235 ± 25

- Ширина, мм - 190 ± 20

- Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Футляр полипропиленовый 10/1

- Длина, мм - 175 ± 18

- Ширина, мм - 143 ± 14

- Высота, глубина, мм - 70 ± 7

Футляр полистирольный 10/2

- Длина, мм - 210 ± 20

- Ширина, мм - 210 ± 20

- Высота, глубина, мм - 68 ± 10

Футляр текстильный 14/2

- Длина, мм - 175 ± 27

- Ширина, мм - 125 ± 19

- Высота, глубина, мм - 70 ± 11

Футляр полипропиленовый 20

Длина, мм - 240 ± 24

Ширина, мм - 185 ± 19

Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Футляр полипропиленовый 38

-Длина, мм - 175 ± 20

-Ширина, мм - 150 ± 15

-Высота, глубина, мм - 75 ± 10

ИМЮЕ.939.1120-003И

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

Футляр полипропиленовый 09 (255 ± 50);

Футляр полипропиленовый 10/1 (170 ± 30);

Футляр полистирольный 10/2 (220 ± 30);

Футляр текстильный 14/2 (45 ± 15);

Футляр полипропиленовый 20 (160 ± 30);

Футляр полипропиленовый 38 (160 ± 30).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

Футляр 14/2 – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOU YWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» К50, 25Н ГОСТ 30019.1;

или

Футляр 09, 10/1, 20, 38 – полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

или

Футляр 10/2 – полистирол ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86.

Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, ПФ1503/07-ПЭ, КПО-01.

Ножницы должны быть изготовлены из следующих материалов:

Материал лезвия - нержавеющая сталь 420 (20Cr13),

Материал ручек - полипропилен PP Z30S.

Допуск габаритной длины ножниц составляет: ± 10 мм.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

ИМЮЕ.939.1120-003И

Срок годности:

4 года с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев со дня продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм»
Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул.
Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

ИМЮЕ.939.1120-003И

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
_____ листа (ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В





www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

**Аптечка первой помощи в дорогу по ТУ 9398-033-85535470-2015,
в вариантах исполнения.**

производства ЗАО «Виталфарм»

Исполнение: Аптечка первой помощи в дорогу семейная

ИМЮЕ.939.1120-002И

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи в дорожных условиях, на отдыхе, в походе или поездке.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую само и взаимопомощь при травмах, полученных в дорожных условиях, на отдыхе, в походе или поездке.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая рекомендация):



Аптечка первой помощи в дорогу семейная

Инструкция по применению

Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство
Жгут кровоостанавливающий	для временной остановки кровотечения
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее, дезинфицирующее средство
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	для защиты рук при обработке грязных ран
Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая	дезинфицирующее средство
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	для проведения сердечно-легочной реанимации

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

Перечень вложений, входящих в изделие «Аптечка первой помощи в дорогу семейная»:

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Кол ичес тво
1	2	3	4
Медицинские изделия			
1 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м х 5 см, 5 м х 7 см, 5 м х 10 см, 7 м х 7 см, 7 м х 10 см, 7 м х 14 см, 10 м х 7 см, 10 м х 10 см, 10 м х 16 см) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 5см; 5м х 7см; 5м х 10см; 7м х 7см; 7м х 14см.) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или	Производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 03.09.2015 Производства ООО ПФК «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 Производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 Производства ЗАО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 08.10.2013 Производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015	Шт.	2

ИМЮЕ.939.1120-002И

(Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014)	Производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015		
2 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см.) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014)	Производства ООО «ИНГАКАМФ» Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 03.09.2015 Производства ООО ПФК «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 Производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 Производства ЗАО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 08.10.2013 Производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015 Производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015	Шт.	1
3 Жгут кровоостанавливающий		Шт.	1

ИМЮЕ.939.1120-002И

(Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» по ТУ 9398-010-50887801-2005 в составе: - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот») или (Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10) или (Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм» по ТУ 9398-032-85535470-2015)	Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 от 18.04.2013 Производства ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432 от 25.08.2016 Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733 от 19.02.2016		
4 Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см х 7,2 см (Лейкопластырь медицинский бактерицидный «Импэкс-Мед») или (Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) бактерицидный) или (Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip) или (Лейкопластырь бактерицидный) или Лейкопластырь медицинский бактерицидный по ТУ 9393-011-56334457-2011 восьми типоразмеров: 1,9 см х 7,2 см; 2,5 см х 7,2 см; 3,8 см х 3,8 см; 4,0 см х 10,0 см; 4,1 см х 3,8 см; 6,0 см х 2,0 см; 6,0 см х 10,0 см; 10,0 см х 10,0 см) или (Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010) или (Лейкопластырь «Унипласт бактерицидный» по ТУ 9393-013-	Производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2009/03549 от 12.03.2015 Производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд», КНР, РУ ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017 Производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252 от 12.12.2011 Производства «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01958 от 23.06.2008 Производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2011/12017 от 04.03.2013 Производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03213 от 15.06.2015 Производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/07192 от 15.06.2015	Шт.	2

ИМЮЕ.939.1120-002И

45961725-2010) или (Пластырь медицинский стерильный бактерицидный с антисептиком разных форм и размеров)	Производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ РЗН 2015/3108 от 25.09.2015		
5 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (Перчатки медицинские нестерильные и стерильные) или (Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные) или (Перчатки медицинские диагностические, из натурального латекса или синтетические, стерильные, нестерильные, опудренные, неопудренные, с гладкой поверхностью, с текстурированной поверхностью) или (Перчатки медицинские смотро- вые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные) или (Перчатки диагностические медицинские SF Gloves различных типоразмеров)	Производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07368 от 05.07.2010 Производства Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009 Производства «Интернэшнл Медикал Продактс ЛЛС», США, РУ ФСЗ 2010/06177 от 02.02.2010 Производства «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2012/13220 от 02.11.2012 Производства «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07717 от 21.04.2014	Пар а	1
6 Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 30мм x 60мм) (Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70 % этиловый спирт) по ТУ 9393-001- 51276525-00) или (Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ) или (Салфетки спиртовые стерильные по ТУ 9393-004-52707619-2006) или (Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013 следующих типоразмеров:	Производства ООО «М.К. Асептика», Россия, РУ ФСР 2009/05438 от 11.04.2019 Производства «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд», Китай, РУ ФСЗ 2009/04575 от 18.06.2018 Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01592 от 15.10.2014 Производства ООО Фармэль, Россия, РУ РЗН 2014/1695 от 09.06.2014	Шт.	2

	ИМЮЕ.939.1120-20 или ИМЮЕ.939.1120-38		
9 Инструкция по применению	ИМЮЕ.939.1120-002И	Шт.	1

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Футляр полипропиленовый 09

- Длина, мм - 235 ± 25
- Ширина, мм - 190 ± 20
- Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Футляр полипропиленовый 10/1

- Длина, мм - 175 ± 18
- Ширина, мм - 143 ± 14
- Высота, глубина, мм - 70 ± 7

Футляр полистирольный 10/2

- Длина, мм - 210 ± 20
- Ширина, мм - 210 ± 20
- Высота, глубина, мм - 68 ± 10

Футляр текстильный 14/2

- Длина, мм - 175 ± 27
- Ширина, мм - 125 ± 19
- Высота, глубина, мм - 70 ± 11

Футляр полипропиленовый 20

Длина, мм - 240 ± 24

Ширина, мм - 185 ± 19

Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Футляр полипропиленовый 38

- Длина, мм - 175 ± 20
- Ширина, мм - 150 ± 15
- Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

Футляр полипропиленовый 09 (255 ± 50);

Футляр полипропиленовый 10/1 (170 ± 30);

Футляр полистирольный 10/2 (220 ± 30);

Футляр текстильный 14/2 (45 ± 15);

ИМЮЕ.939.1120-002И

Футляр полипропиленовый 20 (160±30);

Футляр полипропиленовый 38 (160±30).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

Футляр 14/2 – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOUYWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» K50, 25Н ГОСТ 30019.1.

или

Футляр 09, 10/1, 20, 38 – полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

или

Футляр 10/2 – полистирол ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86.

Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, ПФ1503/07-ПЭ, КПО-01.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до +25°C. Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

4 года с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев со дня продажи.

Дата изготовления и номер партии: Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

ИМЮЕ.939.1120-002И

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

_____ листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

_____ Андросов В.В.





www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка первой помощи в дорогу по ТУ 9398-033-85535470-2015,

в вариантах исполнения.

производства ЗАО «Виталфарм»

Исполнение: Аптечка первой помощи в дорогу для семьи с ребенком

ИМЮЕ.939.1120-003И

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи в дорожных условиях, на отдыхе, в походе или поездке.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую само и взаимопомощь при травмах, полученных в дорожных условиях, на отдыхе, в походе или поездке.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая рекомендация):



Аптечка первой помощи в дорогу для семьи с ребенком

Инструкция по применению

Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство
Жгут кровоостанавливающий	для временной остановки кровотечения
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее, дезинфицирующее средство
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	для защиты рук при обработке грязных ран
Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая	дезинфицирующее средство
Стаканчик для приема лекарств	для точного дозирования лекарственных средств
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	для проведения сердечно-легочной реанимации
Ножницы	применять при перевязке

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

Перечень вложений, входящих в изделие «Аптечка первой помощи в дорогу для семьи с ребенком»:

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Кол ичес тво
1	2	3	4
Медицинские изделия			
1 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см.) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или	Производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 03.09.2015 Производства ООО ПФК «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 Производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 Производства ЗАО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 08.10.2013 Производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015	Шт.	2

ИМЮЕ.939.1120-003И

(Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014)	Производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015		
2 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см.) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014)	Производства ООО «ИНГАКАМФ» Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 03.09.2015 Производства ООО ПФК «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 Производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 Производства ЗАО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 08.10.2013 Производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015 Производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 Производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015	Шт.	2
3 Жгут кровоостанавливающий		Шт.	1

ИМЮЕ.939.1120-003И

45961725-2010) или (Пластырь медицинский стерильный бактерицидный с антисептиком разных форм и размеров)	Производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ РЗН 2015/3108 от 25.09.2015		
5 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (Перчатки медицинские нестерильные и стерильные) или (Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные) или (Перчатки медицинские диагностические, из натурального латекса или синтетические, стерильные, нестерильные, опудренные, неопудренные, с гладкой поверхностью, с текстурированной поверхностью) или (Перчатки медицинские смотро- вые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные) или (Перчатки диагностические медицинские SF Gloves различных типоразмеров)	Производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07368 от 05.07.2010 Производства Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009 Производства «Интернэшнл Медикал Продактс ЛЛС», США, РУ ФСЗ 2010/06177 от 02.02.2010 Производства «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэ Продактс Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2012/13220 от 02.11.2012 Производства «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07717 от 21.04.2014	Пар а	1
6 Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 30мм x 60мм) (Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70 % этиловый спирт) по ТУ 9393-001- 51276525-00) или (Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ) или (Салфетки спиртовые стерильные по ТУ 9393-004-52707619-2006) или (Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013 следующих типоразмеров:	Производства ООО «М.К. Асептика», Россия, РУ ФСР 2009/05438 от 11.04.2019 Производства «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд», Китай, РУ ФСЗ 2009/04575 от 18.06.2018 Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01592 от 15.10.2014 Производства ООО Фармэль, Россия, РУ РЗН 2014/1695 от 09.06.2014	Шт.	3

ИМЮЕ.939.1120-003И

135x185 мм, 110x125 мм, 60x100 мм, 60x60 мм, 30x60 мм) или (Салфетка антисептическая спиртовая стерильная по ТУ 9393-001-56176857-2015) или (Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные, одноразовые по ТУ 21.20.24-001-35196086-2015)	Производства ООО «Авангард», Россия, РУ РЗН 2016/4620 от 21.11.2016 Производства ООО «Грани», Россия, РУ РЗН 2016/4491 от 10.05.2018		
7 Стаканчик для приема лекарств, 30 мл (Стаканчик полимерный градуированный для приема лекарств, одноразовый Сл 30-01-«В-Ф» по ТУ 9464-006-50887801-2008) или (Тара полимерная для лекарственных средств по ТУ 9464-001-62798327-2010 в следующих исполнениях: флакон-капельница (5, 10, 30) мл; флакон под резиновую крышку 100 мл; стаканчик мерный 30 мл; контейнер полимерный (60, 100) мл; футляр для пипетки)	Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03469 от 18.04.2013 Производства ООО ПКФ «Экспопласт», Россия, РУ ФСР 2011/10697 от 28.04.2011	Шт.	1
8 Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» (Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» по ТУ 9398-010-50887801-2005 в составе: - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот») или (Устройство полимерное с односторонним воздушным клапаном одноразовое для проведения искусственного дыхания рот-устройство-рот на догоспитальном этапе оказания	Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 от 18.04.2013 Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2008/03530 от 22.10.2008	Шт.	1

ИМЮЕ.939.1120-003И

экстренной реанимационной помощи Р-У-Р-«АППОЛО» по ТУ 9398-016-42965160-2004) или (Устройство для проведения искусственного дыхания – «Рот – Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047-85535470-2017)	Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2018/6705 от 22.01.2018		
Принадлежности			
9 Ножницы (Ножницы тупоконечные 130) или (Ножницы бытовые 120)	YIWU PENGHAO STATIONERY CO.LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию «YIWY WENYA STATIONARY FACTORY», Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию	Шт.	1
10 Футляр	ИМЮЕ.939.1120-09 или ИМЮЕ.939.1120-10/1 или ИМЮЕ.939.1120-10/2 или ИМЮЕ.939.1120-14/2 или ИМЮЕ.939.1120-20 или ИМЮЕ.939.1120-38	Шт.	1
11 Инструкция по применению	ИМЮЕ.939.1120-003И	Шт.	1

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Футляр полипропиленовый 09

- Длина, мм - 235 ± 25
- Ширина, мм - 190 ± 20
- Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Футляр полипропиленовый 10/1

- Длина, мм - 175 ± 18
- Ширина, мм - 143 ± 14
- Высота, глубина, мм - 70 ± 7

Футляр полистирольный 10/2

- Длина, мм - 210 ± 20

ИМЮЕ.939.1120-003И

- Ширина, мм - 210 ± 20

- Высота, глубина, мм - 68 ± 10

Футляр текстильный 14/2

- Длина, мм - 175 ± 27

- Ширина, мм - 125 ± 19

- Высота, глубина, мм - 70 ± 11

Футляр полипропиленовый 20

Длина, мм - 240 ± 24

Ширина, мм - 185 ± 19

Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Футляр полипропиленовый 38

-Длина, мм - 175 ± 20

-Ширина, мм - 150 ± 15

-Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

Футляр полипропиленовый 09 (255 ± 50);

Футляр полипропиленовый 10/1 (170 ± 30);

Футляр полистирольный 10/2 (220 ± 30);

Футляр текстильный 14/2 (45 ± 15);

Футляр полипропиленовый 20 (160 ± 30);

Футляр полипропиленовый 38 (160 ± 30).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

Футляр 14/2 – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOUYWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» K50, 25Н ГОСТ 30019.1.

или

Футляр 09, 10/1, 20, 38 – полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

или

Футляр 10/2 – полистирол ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86.

Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, ПФ1503/07-ПЭ, КПО-01.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

ИМЮЕ.939.1120-003И

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до +25°C.

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

4 года с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев со дня продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
70 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.В.

