

Макеты маркировки и упаковки на медицинское изделие


Ингалятор компрессорный OMRON C25 (NE-C102-RU).

1. Макет маркировки медицинского изделия.

1.1. Маркировка изделия.



1.2. Маркировка на упаковке.

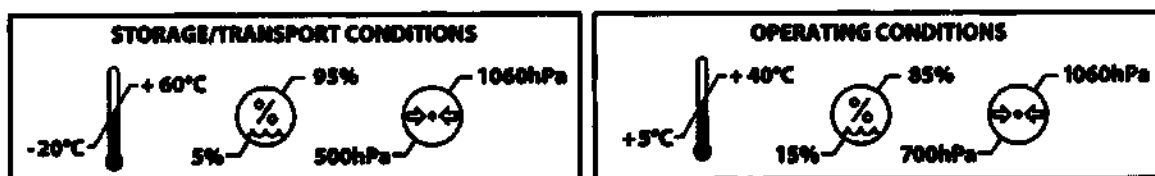

OMRON

C25

Ингалятор компрессорный

All for Healthcare

OMRON

C25

Ингалятор компрессорный



ОБЛЕГЧАЕТ
ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА



ЭФФЕКТИВНАЯ ДОСТАВКА
ПРЕПАРАТА В ЛЕГКИЕ



Одно решение в любое
время года

Ингалятор «2 в 1» с назальным душем



назальный душ



Простуда
Аллергический
ринит
Синусит



All for Healthcare

CE0051 EN

Внимание! Прочтите внимательно инструкцию по эксплуатации.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.

Внимание! Прочтите внимательно инструкцию по эксплуатации.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.

Внимание! Прочтите внимательно инструкцию по эксплуатации.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.
Информация о безопасности и предупреждениях.

2. Макет упаковки медицинского изделия.

2.1. Макет упаковки медицинского изделия.



2.2. Место расположения рекламной информации на упаковке медицинского изделия

OMRON

	EN	RU
	C25 (NE-C182-RU) Compressor Nebulizer	Ингалятор компрессорный OMRON C25 (NE-C182-RU)
i	2-in-1 Nebulizer with Nasal Shower - four seasons, one solution to treat and provide relief from respiratory conditions throughout the year	Ингалятор «2 в 1» с назальным душем — одно решение в любое время года, предназначен для лечения и улучшения функционирования органов дыхания в течение всего года
	Relieves blocked nose and symptoms of conditions such as common cold, allergic rhinitis or sinusitis	Облегчает заложенность носа и уменьшает симптомы простуды, аллергического ринита или гайморита
	Provides efficient medication deposition in the lungs to treat conditions such as bronchitis, bronchiolitis or asthma	Обеспечивает эффективную легочную депозицию лекарственного средства при лечении бронхита, бронхиолита или астмы
	Nasal Shower: MMAD 67-81 µm, Nebulization rate: not less than 5 ml/min Nebulizer: MMAD 2.5-2.75 µm, Nebulization rate: more than 0.3 ml/min	Насальный душ: от 67 до 81 мкм производительность (выход воздуха) более 5 мл/мин Небулайзер: MMAD от 2.5 до 2.75 мкм, производительность (выход воздуха): не менее 0.3 мл/мин
	Contents: Compressor, Nebulizer Kit, Nasal Shower, Air Tube (PVC, 100 cm), Mouthpiece, Adapter, Adult Mask (PVC), Child Mask (PVC), Instruction Manual	В комплект поставки: компрессор с установленными резиновыми фильтрами, небулайзерная камера, назальный душ, соединительная трубка (ПВХ, 100 см), загубник, переносчик, маска для взрослых (ПВХ), маска для детей (ПВХ), властичная лента (2 шт.), руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Модель: C25 (NE-C182-RU)

230 В ~ 50 Гц



4 015672 111257



Одно решение в любое время года


Ингалятор «2 в 1» с назальным душем



небулайзерная камера



Бронхит
Бронхиолит
Астма

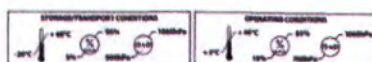

RU: NE-C182-RU-02-06/2019
343775 rev.00
Сделано в Мексике


OMRON

C25

Идеальный мониторинг

All for Healthcare

OM

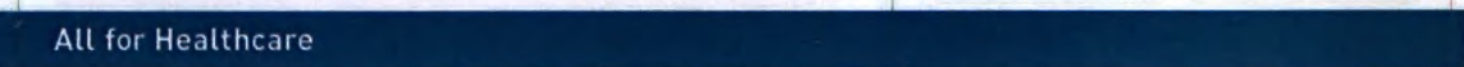

ПРОШУРОВАН

4 ЛИСТОВ



Исполнительный директор
Крикуняк М.В.

Фотографические изображения медицинского изделия:

«Ингалятор компрессорный OMRON C25 (NE-C102-RU)»


Исполнительный директор АО «Комплект Сервис» от имени ЗА HEALTH CARE S.r.l., Италия
по доверенности

"20" 10 2022 г.



М.Б. Крикунчик
(Подпись)



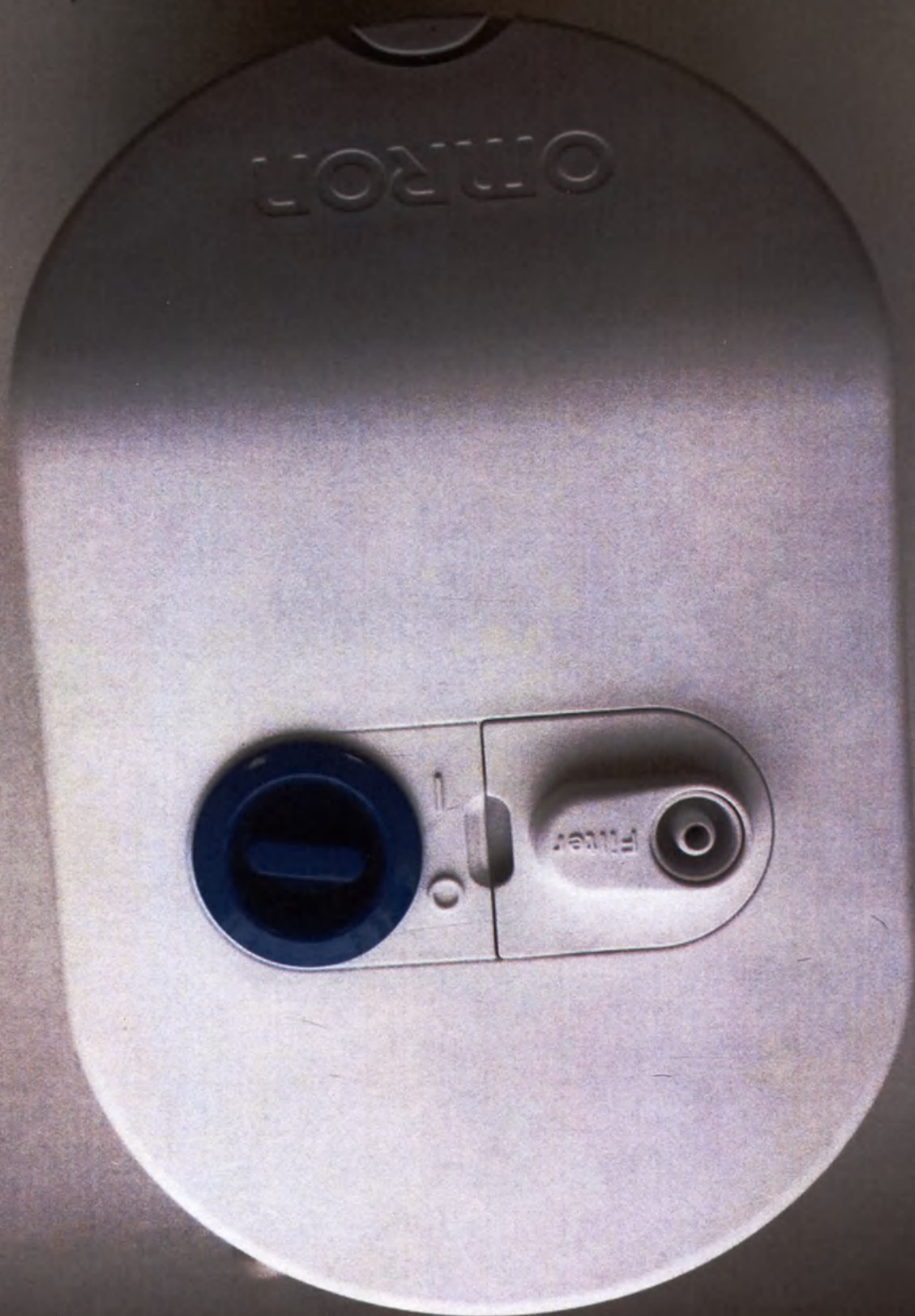

Компрессор с установленным воздушным фильтром,

небулайзерная камера,



назальный душ,




воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см),



загубник,



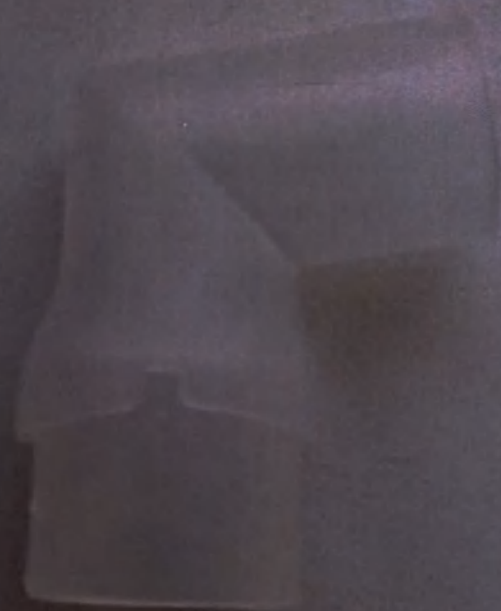

маска для взрослых (ПВХ),






эластичная лента (2 шт.),



OMRON

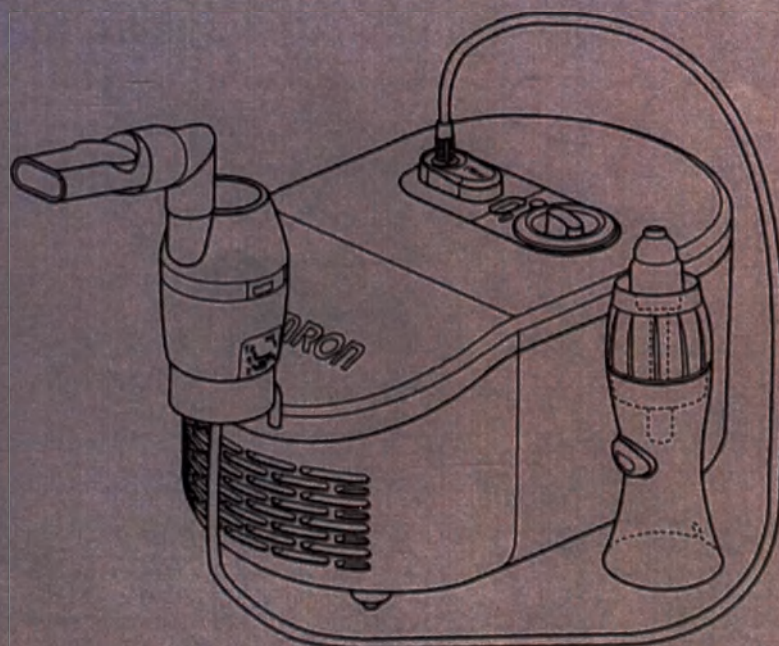

RU

Ингалятор компрессорный C25 (NE-C102-RU)

Руководство по эксплуатации

All for Healthcare

IM-NE-C102-RU-03-06/2019
3A3782 rev.02



OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Ингалятор
торговой марки OMRON**



**АО «КомплектСервис»,
уполномоченный представитель производителя,
эксклюзивный дистрибьютор
и импортер медицинской техники OMRON
на территории Российской Федерации,
благодарит Вас за покупку ингалятора OMRON.**

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании – это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**


или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

GC-NEB-NE-C102-RU-01-02/2021
3A4779 rev.00

Исполнительный директор
Крикунович М.В.

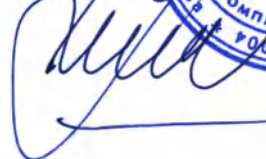

Макеты маркировки и упаковки на медицинское изделие


Ингалятор компрессорный OMRON C25 (NE-C102-RU).

1. Макет маркировки медицинского изделия.

1.1. Маркировка изделия.



1.2. Маркировка на упаковке.

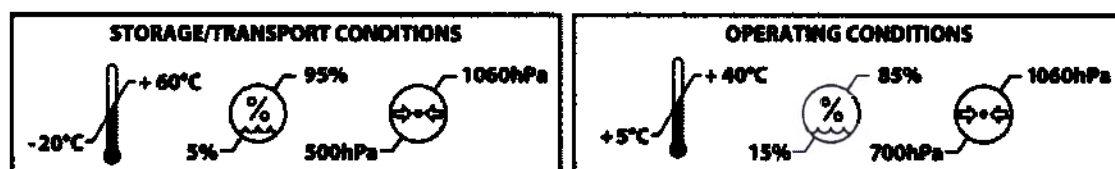

Ингалятор компрессорный



SN


C25

Ингалятор компрессорный



ОБЛЕГЧАЕТ
ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА

**ЭФФЕКТИВНАЯ ДОСТАВКА
ПРЕПАРАТА В ЛЕГКИЕ**

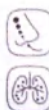

Одно решение в любое
время года

Ингалятор «2 в 1» с назальным душем




назальный душ



- Простуда
- Аллергический ринит
- Синусит



All for Healthcare

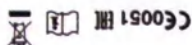

28271 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28272 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28273 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28274 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28275 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28276 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28277 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28278 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28279 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28280 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28281 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28282 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28283 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28284 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28285 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28286 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28287 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28288 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28289 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28290 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28291 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28292 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28293 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28294 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28295 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28296 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28297 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28298 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28299 *Staphylococcus aureus* strain 1000
 28300 *Staphylococcus aureus* strain 1000

2. Макет упаковки медицинского изделия.

2.1. Макет упаковки медицинского изделия.

	EN	RU
	C25 (NE-C102-RU) Compressor Nebulizer	Ингалятор компрессорный OMRON C25 (NE-C102-RU)
	2-in-1 Nebulizer with Nasal Shower - four solutions, one solution to treat and provide relief from respiratory conditions throughout the year	Ингалятор «2 в 1» с назальным душем — одно решение в любое время года, предназначенное для лечения и улучшения функционирования органов дыхания в течение всего года
	Relieves blocked nose and symptoms of conditions such as common cold, allergic rhinitis or sinusitis	Облегчает заложенность носа и уменьшает симптомы простуды, аллергического ринита или гайморита
	Provides efficient medication deposition in the lungs to treat conditions such as bronchitis, bronchiolitis or asthma	Обеспечивает эффективную легочную депозицию лекарственного средства при лечении бронхита, бронхиолита или астмы
	Nasal Shower: MMAD 6.7-8.1 µm, Nebulization rate: not less than 1 ml/min Nebulizer: MMAD 2.5-2.75 µm, Nebulization rate: more than 0.3 ml/min	Назальный душ: от 6.7 до 8.1 мкм, производительность (выход аэрозоля) более 1 мл / мин Небулайзер: MMAD от 2.5 до 2.75 мкм, производительность (выход аэрозоля) не менее 0.3 мл / мин
	Content: Compressor, Nebulizer Kit, Nasal Shower, Air Tube (PVC, 100 cm), Mouthpiece, Adapter, Adult Mask (PVC), Child Mask (PVC), Instruction Manual	Комплект поставки: компрессор с установленными воздушными фильтрами, небулайзерная камера, назальный душ, воздушная трубка (ПВХ, 100 см), загубник, переносная маска для взрослых (ПВХ), маска для детей (ПВХ), эластичная лента (2 шт.), руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Модель C25 (NE-C102-RU)

2008-1014



4 015672 111257

OMRON



Одно решение в любое время года


Ингалятор «2 в 1» с назальным душем



небулайзерная камера



Бронхит
Бронхиолит
Астма

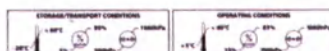

PM NE-C102-RU-02 06/2019
JAS775 rev.00
Сделано в Японии

2.2. Место расположения рекламной информации на упаковке медицинского изделия



	EN	RU
	C25 (NE-C162-RU) Compressor Nebulizer	Ингалятор компрессорный OMRON C25 (NE-C162-RU)
	2-in-1 Nebulizer with Nasal Shower - four seasons, one solution to treat and provide relief from respiratory conditions throughout the year	Ингалятор «2 в 1» с назальным душем — одно решение в любое время года, предназначено для лечения и улучшения функционирования органов дыхания в течение всего года
	Relieves blocked nose and symptoms of conditions such as common cold, allergic rhinitis or sinusitis	Облегчает заложенность носа и уменьшает симптомы простуды, аллергического ринита или гайморита
	Provides efficient medication deposition in the lungs to treat conditions such as bronchitis, bronchiolitis or asthma	Обеспечивает эффективную ингаляцию лекарственных средств при лечении бронхита, бронхиолита или астмы
	Nasal Shower: MMAD 67-81 µm, Nebulization rate: not less than 5 ml/min Nebulizer: MMAD 2.5-2.75 µm, Nebulization rate: more than 0.3 ml/min	Назальный душ: от 67 до 81 мкм производительность (выход воздуха) более 5 мл/мин Небулайзер: MMAD от 2.5 до 2.75 мкм, производительность (выход воздуха) не менее 0.3 мл/мин
	Contents: Compressor, Nebulizer Kit, Nasal Shower, Air Tube (PVC, 100 cm), Mouthpiece, Adapter, Adult Mask (PVC), Child Mask (PVC), Instruction Manual	Комплект поставки: компрессор с установленными воздушными фильтрами, небулайзерная камера, назальный душ, ингаляционная трубка (ПВХ, 100 см), мундштук, переносчик, маска для взрослых (ПВХ), маска для детей (ПВХ), влажная лента (2 шт.), руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Model: C25 (NE-C162-RU)

2008 - 1074




4 015672 111257

STORAGE/TRANSPORT CONDITIONS



OPERATING CONDITIONS

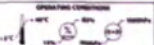

PE-NE-C162-RU-02-06/2019
 343775 rev 02
 © Omron и Philips



небулайзерная камера



Бронхит
Бронхиолит
Астма

нутри границ красной пунктирной линии).



OMRON

C25

ингалятор компрессорный

All for Healthcare

OMRON

C25

Ингалятор компрессорный



Одно решение в любое время года

Ингалятор «2 в 1» с назальным душем



назальный душ

ОБЛЕГЧАЕТ
ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА
ЭФФЕКТИВНАЯ ДОСТАВКА
ПРЕПАРАТА В ЛЕГКИЕ



Простуда
Аллергический
ринит
Синусит



All for Healthcare

СЕРТИФИКАТ

Сертификат соответствия
на продукцию, изготовленную
в соответствии с требованиями
технических условий, указанных
в документе, подтверждающем
соответствие продукции
требованиям стандарта
ГОСТ Р 50769-2007

Сертификат соответствия
на продукцию, изготовленную
в соответствии с требованиями
технических условий, указанных
в документе, подтверждающем
соответствие продукции
требованиям стандарта
ГОСТ Р 50769-2007

Сертификат соответствия
на продукцию, изготовленную
в соответствии с требованиями
технических условий, указанных
в документе, подтверждающем
соответствие продукции
требованиям стандарта
ГОСТ Р 50769-2007

ПРОШНУРОВАНО

4 лист

Исполнительный директор
Крикунович М. Б.

