

МАТРАЦ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
(МЯГКОЕ ТЕПЛО)
«ТЕРМОЭЛИТ»
Модель MCI 2N

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное устройство мягкого тепла предназначено для электроподогрева массажного, операционного стола, либо больничной кровати и обеспечения комфортных условий для пациента при автоматическом контроле за температурой поверхности, на которой располагается пациент.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термоматрац	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Чехол защитный (опция)	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. ОПИСАНИЕ

Матрац выполнен в виде мягкого покрывала с встроенным нагревательным элементом, внешнее покрытие которого изготовлено из влагонепроницаемой и влагоотталкивающей износостойкой ткани.

Изделие может комплектоваться защитным чехлом, выдерживающим многократную обработку в автоклаве при температуре до +120°C или стирку до +95°C.

Электропитание термоэлемента осуществляется от отдельного блока питания, который подает на нагревательный элемент безопасное для человека напряжение.

Устройство позволяет устанавливать и автоматически поддерживать температуру нагрева поверхности матраца от температуры окружающей среды до +40°C.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер матраца (стандартный)	150 x 50 см
Напряжение питания	сеть 220 В, 50 Гц
Напряжение питания нагревателей	12-15 В
Потребляемая мощность не более	80 Вт
Масса блока питания не более	1,5 кг

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Матрац раскладывается на столе либо кровати этикеткой вниз. Перед размещением пациента матрац предварительно прогревается в течение 10 – 15 минут, для чего необходимо выполнить следующие действия.

Сетевой и сигнальный кабели матраца подключить к блоку питания, а вилку блока питания вставить в сетевую розетку. Чехол (при его наличии в комплекте изделия) одевается на матрац.

Выключатель питания блока управления перевести в положение «включено».

Дисплеи передней панели блока управления показывают температуру поверхности матраца в градусах Цельсия. Подождите несколько секунд, пока на правом дисплее не появятся показания реальной температуры поверхности, а на левом дисплее – «24» — заданная программой температура.

С помощью кнопок «▲» и «▼» задайте нужную температуру для электроматраца. На правом дисплее появится светящаяся точка, означающая, что устройство находится в режиме нагрева. Эта точка погаснет при достижении заданной температуры, которая в дальнейшем будет поддерживаться автоматически.

Оператор в любой момент может изменить заданную температуру кнопками «▲» и «▼». При нажатии и удержании этих кнопок ускоряется изменение значений.

Примечание: Программа, заложенная в блоке управления, не позволяет задавать температуру термозлемента более +40°C.

После проведения процедуры выключается общее питание, а вилка шнура питания вынимается из сетевой розетки.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для правильной эксплуатации обязательными являются следующие требования:

- не включать изделия в сети питания с напряжением более, чем указано в паспорте изделия;
- не подвергать поверхность матраца резким ударам или другим сильным механическим воздействиям, так как вмонтированный термозлемент содержит электронные компоненты;
- не повреждать материал поверхности изделия;
- не производить самостоятельно ремонт изделия в том случае, если оно перестало нагреваться или отмечаются сбои в работе электроники;
- регулярно осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения или износа. При обнаружении таких признаков необходимо прекратить эксплуатацию изделия;

7. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- *Если устройство подает звуковые сигналы*

Блок управления имеет программу обнаружения неисправностей и аварийной сигнализации. В том случае, если устройство издает повторяющийся писк, а на дисплеях появляются символы, не относящиеся к температуре, возможен один из следующих вариантов:

- Вы забыли установить температуру работы устройства – задайте нужную температуру кнопками «▲» и «▼».
- Было отключение питания в сети и сбились настройки прибора – снова задайте нужную температуру кнопками «▲» и «▼».
- Температура поверхности превысила предельно допустимую (40°C) – убедитесь, что на поверхности матраца нет постороннего источника тепла, в противном случае матрац неисправен и следует обратиться к продавцу или производителю.
- Обнаружена неисправность термозлемента или электронной схемы – проверьте правильность подключения кабелей и, если все правильно подключено, обратитесь к продавцу или производителю изделия.

- *Если устройство медленно нагревается*

При падении фактического напряжения в сети ниже 220В устройство может разогреваться значительно медленнее нормы (норма = 5 градусов за первые 5-10 минут нагрева). В этих случаях рекомендуется включать блок питания в сеть через стандартный стабилизатор напряжения.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев с даты продажи или с даты выпуска, если дата продажи в гарантийном талоне отсутствует. Гарантия производителя не распространяется на термоматрац и блок питания с нарушенными гарантийными пломбами, а также на случаи нарушения условий эксплуатации изделий.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электроматрац «Термозлит», модель MCI 2P соответствует техническим условиям ТУ 9452-002-58392980-2012 и признано годным к эксплуатации по назначению.

Декларация соответствия:

Регистрационное удостоверение:

Дата выпуска _____

Контактный телефон: (495) 763 95 17

✉ mail@elitmaxima.ru

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 1

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термозлит» модель MCI 2P заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 2

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термозлит» модель MCI 2P заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

МАТРАЦ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

(МЯГКОЕ ТЕПЛО)

«ТЕРМОЭЛИТ»

Модель MSI 2P

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное устройство мягкого тепла предназначено для обогрева пеленального столика и обеспечения комфортных условий для новорожденных и детей грудного возраста при автоматическом контроле за температурой поверхности, на которой находится ребенок.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термоматрац	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Чехол защитный (опция)	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. ОПИСАНИЕ

Матрац выполнен в виде мягкого покрывала с встроенным нагревательным элементом, внешнее покрытие которого изготовлено из влагонепроницаемой и водоотталкивающей износостойкой ткани.

Изделие может комплектоваться защитным чехлом, выдерживающим многократную обработку в автоклаве при температуре до $+120^{\circ}\text{C}$ или стирку до $+95^{\circ}\text{C}$.

Электропитание термoeлемента осуществляется от отдельного блока питания, который подает на нагревательный элемент безопасное для человека напряжение.

Устройство позволяет устанавливать и автоматически поддерживать температуру нагрева поверхности матраца от температуры окружающей среды до $+40^{\circ}\text{C}$.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер матраца (стандартный)	66 x 62 см
Напряжение питания	сеть 220 В, 50 Гц
Напряжение питания термoeлемента	12-15 В
Потребляемая мощность не более	40 Вт
Масса блока питания не более	1,5 кг

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Блок управления размещается в любом удобном месте, а матрац раскладывается на пеленальном столике этикеткой вниз.

Сетевой и сигнальный кабели матраца подключаются к блоку питания. Вилка сетевого шнура блока питания вставляется в розетку, выключатель питания блока управления переводится в положение «включено». Чехол (при его наличии в комплекте изделия) одевается на матрац.

Перед размещением ребенка матрац желательно прогреть в течение 5 – 10 минут.

Дисплеи передней панели блока управления показывают температуру поверхности матраца в градусах Цельсия. Подождите несколько секунд, пока на правом дисплее не появятся показания реальной температуры поверхности, а на левом дисплее – «24» – заданная программой температура.

С помощью кнопок «▲» и «▼» задайте нужную температуру для электромаатраца. На правом дисплее появится светящаяся точка, означающая, что устройство находится в режиме нагрева. Эта точка погаснет при достижении заданной температуры, которая в дальнейшем будет поддерживаться автоматически.

Оператор в любой момент может изменить заданную температуру кнопками «▲» и «▼». При нажатии и удержании какой-либо из этих кнопок ускоряется изменение значений.

Примечание: Программа, заложенная в блоке управления, не позволяет задавать температуру термоэлемента более +40°C.

После проведения процедуры выключается общее питание, а вилка шнура питания вынимается из сетевой розетки.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для правильной эксплуатации обязательными являются следующие требования:

- не включать изделие в сети питания с напряжением более, чем указано в паспорте изделия;
- не подвергать поверхность матраца резким ударам или другим сильным механическим воздействиям, так как вмонтированный термоэлемент содержит электронные компоненты;
- не повреждать материал поверхности изделия;
- не производить самостоятельно ремонт изделия в том случае, если оно перестало нагреваться или отмечаются сбои в работе электроники;
- регулярно осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения или износа. При обнаружении таких признаков необходимо прекратить эксплуатацию изделия;

7. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- *Если устройство подает звуковые сигналы*

Блок управления имеет программу обнаружения неисправностей и аварийной сигнализации. В том случае, если устройство издает повторяющийся писк, а на дисплеях появляются символы, не относящиеся к температуре, возможен один из следующих вариантов:

- Вы забыли установить температуру работы устройства – задайте нужную температуру кнопками «▲» и «▼».
- Было отключение питания в сети и сбились настройки прибора – снова задайте нужную температуру кнопками «▲» и «▼».
- Температура поверхности превысила предельно допустимую (40°C) – убедитесь, что на поверхности матраца нет постороннего источника тепла, в противном случае матрац неисправен и следует обратиться к продавцу или производителю.
- Обнаружена неисправность термоэлемента или электронной схемы – проверьте правильность подключения кабелей и, если все правильно подключено, обратитесь к продавцу или производителю изделия.

- *Если устройство медленно нагревается*

При падении фактического напряжения в сети ниже 220В устройство может разогреваться значительно медленнее нормы (норма = 10 градусов за первые 5-10 минут нагрева). В этих случаях рекомендуется включать блок питания в сеть через стандартный стабилизатор напряжения.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев с даты продажи или с даты выпуска, если дата продажи в гарантийном талоне отсутствует. Гарантия производителя не распространяется на термоматрац и блок питания с нарушенными гарантийными пломбами, а также на случаи нарушения условий эксплуатации изделий.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электроматрац «Термозлит», модель MCI 2T соответствует техническим условиям ТУ 9452-002-58392980-2012 и признано годным к эксплуатации по назначению.

Декларация соответствия:

Регистрационное удостоверение:

Дата выпуска _____

Контактный телефон: (495) 763 95 17

✉ mail@elitmaxima.ru

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 1

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термозлит» модель MCI 2T заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 2

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термозлит» модель MCI 2T заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

МАТРАЦ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

(МЯГКОЕ ТЕПЛО)

«ТЕРМОЭЛИТ»

Модель MSI 2T

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное устройство мягкого тепла предназначено для обогрева новорожденных и детей грудного возраста, обеспечения комфортных условий для них при автоматическом контроле за температурой поверхности кровати, в которой находится ребенок.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термоматрац	1 шт.
Блок питания с кронштейном	1 шт.
Чехол защитный (опция)	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. ОПИСАНИЕ

Матрац выполнен в виде мягкого покрывала с встроенным нагревательным элементом, внешнее покрытие которого изготовлено из влагонепроницаемой и влагоотталкивающей износостойкой ткани.

Изделие может комплектоваться защитным чехлом, выдерживающим многократную обработку в автоклаве при температуре до +120°C или стирку до +95°C.

Электропитание термоэлемента осуществляется от отдельного блока питания, который подает на нагревательный элемент безопасное для человека напряжение.

Устройство позволяет устанавливать и автоматически поддерживать температуру нагрева поверхности матраца от температуры окружающей среды до +40°C.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер матраца (стандартный)	63 x 40 см
Напряжение питания	сеть 220 В, 50 Гц
Напряжение питания термоэлемента	9-15 В
Потребляемая мощность не более	30 Вт
Масса блока питания не более	1,5 кг

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Блок управления с помощью специального кронштейна надежно крепится к любой вертикальной стойке рамы кровати. Чтобы уберечь блок управления от ударов, его следует располагать внутри контура кровати. Благодаря кронштейну блок управления можно зафиксировать на нужной высоте и под любым углом. Матрац укладывается в кювету этикеткой вниз.

Сетевой и сигнальный кабели матраца продеваются через одно из отверстий в днище кюветы и подключаются к блоку питания, а вилка сетевого шнура блока питания вставляется в розетку. Чехол (при его наличии в комплекте изделия) одевается на матрац.

Выключатель питания блока управления переводится в положение «включено».

Перед размещением ребенка матрац желательно прогреть в течение 5 – 10 минут.

Дисплеи передней панели блока управления показывают температуру поверхности матраца в градусах Цельсия. Подождите несколько секунд, пока на правом дисплее не появятся показания реальной температуры поверхности, а на левом дисплее – «24» — заданная программой температура.

С помощью кнопок «▲» и «▼» задайте нужную температуру для электроматраца. На правом дисплее появится светящаяся точка, означающая, что устройство находится в режиме нагрева. Эта точка будет мигать при достижении заданной температуры, которая

Оператор в любой момент может изменить заданную температуру кнопками «▲» и «▼». При нажатии и удержании какой-либо из этих кнопок ускоряется изменение значений.

Примечание: Программа, заложенная в блоке управления, не позволяет задавать температуру термозлемента более +40°C.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для правильной эксплуатации обязательными являются следующие требования:

- не включать изделие в сети питания с напряжением более, чем указано в паспорте изделия;
- не подвергать поверхность матраца резким ударам или другим сильным механическим воздействиям, так как вмонтированный термозлемент содержит электронные компоненты;
- не повреждать материал поверхности изделия;
- не производить самостоятельно ремонт изделия в том случае, если оно перестало нагреваться или отмечаются сбои в работе электроники;
- регулярно осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения или износа. При обнаружении таких признаков необходимо прекратить эксплуатацию изделия;

7. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- *Если устройство подает звуковые сигналы*

Блок управления имеет программу обнаружения неисправностей и аварийной сигнализации. В том случае, если устройство издает повторяющийся писк, а на дисплеях появляются символы, не относящиеся к температуре, возможен один из следующих вариантов:

- Вы забыли установить температуру работы устройства – задайте нужную температуру кнопками «▲» и «▼».
- Было отключение питания в сети и сбились настройки прибора – снова задайте нужную температуру кнопками «▲» и «▼».
- Температура поверхности превысила предельно допустимую (40°C) – убедитесь, что на поверхности матраца нет постороннего источника тепла, в противном случае матрац неисправен и следует обратиться к продавцу или производителю.
- Обнаружена неисправность термозлемента или электронной схемы – проверьте правильность подключения кабелей и, если все правильно подключено, обратитесь к продавцу или производителю изделия.

- *Если устройство медленно нагревается*

При падении фактического напряжения в сети ниже 220В устройство может разогреваться значительно медленнее нормы (норма = 10 градусов за первые 5-10 минут нагрева). В этих случаях рекомендуется включать блок питания в сеть через стандартный стабилизатор напряжения.

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 1

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термоэлит» модель МСІ 3А заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 2

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термоэлит» модель МСІ 3А заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

МАТРАЦ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

(МЯГКОЕ ТЕПЛО)

«ТЕРМОЭЛИТ»

Модель МСИ 3А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное устройство мягкого тепла предназначено для обогрева новорожденных и детей грудного возраста, поддержания нормальной температуры тела при нарушениях естественной терморегуляции организма.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термоматрац	1 шт.
Чехол «гнездо» (опция)	1 шт.
Блок питания с кронштейном	1 шт.
Внешний датчик температуры тела	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. ОПИСАНИЕ

Матрац выполнен в виде мягкого покрывала с встроенным нагревательным элементом и датчиком контроля за температурой поверхности, внешнее покрытие матраца изготовлено из влагонепроницаемой и влагоотталкивающей износостойкой ткани.

Изделие может комплектоваться специальным чехлом типа «гнездо» из ткани с нулевым пылеотделением и снимающей возможное статическое электричество. Чехол выдерживает многократную обработку в автоклаве при температуре до +120°C или стирку до +95°C.

Электропитание термоэлемента осуществляется от отдельного блока управления, который подает на нагревательный элемент матраца безопасное для человека напряжение. К блоку управления подключается внешний датчик температуры, который позволяет контролировать отклонения температуры тела пациента от нормы.

Устройство позволяет задавать и автоматически поддерживать нужный диапазон температуры тела пациента путем контролируемого нагрева поверхности матраца. В случае отключения внешнего электропитания устройство автоматически переходит на питание от встроенных аккумуляторов, а при его возобновлении – в режим подзарядки аккумуляторов и питания от внешней сети.

В случае отключения внешнего датчика температуры устройство будет работать в режиме поддержания постоянной температуры поверхности матраца независимо от внешних факторов.

Подробное описание работы с устройством читайте в прилагаемом РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер матраца (стандартный)	64 x 38 см
Напряжение питания	сеть 220 В, 50 Гц
Напряжение питания термоэлемента	12-15 В
Продолжительность автономной работы, не менее, мин.	60
Потребляемая мощность не более	30 Вт
Масса блока питания не более	1,7 кг

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Блок управления с помощью специального кронштейна надежно крепится к любой вертикальной стойке рамы кровати. Чтобы уберечь блок управления от ударов, его следует располагать внутри контура кровати. Благодаря кронштейну блок управления

можно зафиксировать на нужной высоте и под нужным углом. Матрац укладывается в кювету этикеткой вниз.

Сетевой и сигнальный кабели матраца продеваются через одно из отверстий в днище кюветы и подключаются к блоку питания, а вилка сетевого шнура блока питания вставляется в розетку. Чехол «гнездо» одевается на матрас. Внешний датчик температуры подключается к блоку управления и впоследствии закрепляется на теле ребенка.

Выключатель питания блока управления переводится в положение «включено».

Перед размещением ребенка матрац желательно прогреть в течение 5 – 10 минут.

Примечание: Программа, заложенная в блоке управления, не позволяет задавать температуру термоэлемента более +40°C.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для правильной эксплуатации обязательными являются следующие требования:

- не включать изделие в сети питания с напряжением более, чем указано в паспорте изделия;
- не подвергать поверхность матраца резким ударам или другим сильным механическим воздействиям, так как вмонтированный термоэлемент содержит электронные компоненты;
- не повреждать материал поверхности изделия;
- не производить самостоятельно ремонт изделия в том случае, если оно перестало нагреваться или отмечаются сбои в работе электроники;
- регулярно осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения или износа. При обнаружении таких признаков необходимо прекратить эксплуатацию изделия;

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев с даты продажи или с даты выпуска, если дата продажи в гарантийном талоне отсутствует. Гарантия производителя не распространяется на термоматрац и блок питания с нарушенными гарантийными пломбами, а также на случаи нарушения условий эксплуатации изделий.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электроматрац «Термозлит», модель MCI 3A соответствует техническим условиям ТУ 9452-002-58392980-2012 и признан годным к эксплуатации по назначению.

Декларация соответствия:

Регистрационное удостоверение:

Дата выпуска _____

Контактный телефон: (495) 763 95 17

✉ mail@elitmaxima.ru

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 1

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термоэлит» модель MCI 3N заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 2

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термоэлит» модель MCI 3N заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

МАТРАЦ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
(МЯГКОЕ ТЕПЛО)
«ТЕРМОЭЛИТ»
Модель MCI 3N



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное устройство мягкого тепла предназначено для обогрева пациента во время операции и в послеоперационный период с целью поддержания нормальной температуры тела при нарушениях естественной терморегуляции организма.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термоматрац	1 шт.
Чехол (опция)	1-2 шт.
Блок питания	1 шт.
Внешний датчик температуры тела	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Упаковка (пластиковая сумка или коробка)	1 шт.

3. ОПИСАНИЕ

Матрац выполнен в виде мягкого покрывала с встроенным нагревательным элементом и датчиком контроля за температурой поверхности, внешнее покрытие матраца изготовлено из влагонепроницаемой и влагоотталкивающей износостойкой ткани.

Изделие может комплектоваться защитным чехлом, выдерживающим многократную обработку в автоклаве при температуре до +120°C или стирку до +95°C.

Электропитание термоэлемента осуществляется от отдельного блока управления, который подает на нагревательный элемент матраца безопасное для человека напряжение. К блоку управления подключается внешний датчик температуры, который позволяет контролировать отклонения температуры тела пациента от нормы.

Устройство позволяет задавать и автоматически поддерживать нужный диапазон температуры тела пациента путем контролируемого нагрева поверхности матраца. В случае отключения внешнего датчика температуры устройство будет работать в режиме поддержания постоянной температуры поверхности матраца независимо от внешних факторов.

Подробное описание работы с устройством читайте в прилагаемом РУКОВОДСТВЕ ОПЕРАТОРА.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер матраца (стандартный)	120 x 50 см
Напряжение питания	сеть 220 В, 50 Гц
Напряжение питания термоэлемента	12-15 В
Потребляемая мощность не более	80 Вт
Масса блока питания не более	1,7 кг

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Блок управления располагается в любом удобном для оператора месте. Матрац раскладывается на операционном столе или кушетке.

Сетевой и сигнальный кабели матраца подключаются к блоку питания, а вилка сетевого шнура блока питания вставляется в розетку. Чехол «гнездо» одевается на матрас. Внешний датчик температуры подключается к блоку управления и впоследствии закрепляется на теле пациента.

Выключатель питания блока управления переводится в положение «включено».

Перед размещением пациента матрас желательно прогреть в течение 5 – 10 минут.

Примечание: Программа, заложенная в блоке управления, не позволяет задавать температуру термоэлемента более +40°C.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для правильной эксплуатации обязательными являются следующие требования:

- не включать изделие в сети питания с напряжением более, чем указано в паспорте изделия;
- не подвергать поверхность матраца резким ударам или другим сильным механическим воздействиям, так как вмонтированный термоэлемент содержит электронные компоненты;
- не повреждать материал поверхности изделия;
- не производить самостоятельно ремонт изделия в том случае, если оно перестало нагреваться или отмечаются сбои в работе электроники;
- регулярно осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения или износа. При обнаружении таких признаков необходимо прекратить эксплуатацию изделия;

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев с даты продажи или с даты выпуска, если дата продажи в гарантийном талоне отсутствует. Гарантия производителя не распространяется на термоматрас и блок питания с нарушенными гарантийными пломбами, а также на случаи нарушения условий эксплуатации изделий.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электроматрас «Термозлит», модель MCI 3N соответствует техническим условиям ТУ 9452-002-58392980-2012 и признан годным к эксплуатации по назначению.

Сертификат соответствия:

Регистрационное удостоверение:

Дата выпуска _____

Контактный телефон: (495) 763 95 17

✉ mail@elitmaxima.ru

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 1

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термозлит» модель MCI 3T заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 2

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термозлит» модель MCI 3T заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

МАТРАЦ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
(МЯГКОЕ ТЕПЛО)
«ТЕРМОЭЛИТ»
Модель МСІ 3Т

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное устройство мягкого тепла предназначено для обогрева новорожденных и детей грудного возраста, поддержания нормальной температуры тела при нарушениях естественной терморегуляции организма.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термоматрац	1 шт.
Чехол «гнездо» (опция)	1 шт.
Блок питания с кронштейном	1 шт.
Внешний датчик температуры тела	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. ОПИСАНИЕ

Матрац выполнен в виде мягкого покрывала с встроенным нагревательным элементом и датчиком контроля за температурой поверхности, внешнее покрытие матраца изготовлено из влагонепроницаемой и влагоотталкивающей износостойкой ткани.

Изделие может комплектоваться специальным чехлом типа «гнездо» из ткани с нулевым пылеотделением и снимающей возможное статическое электричество. Чехол выдерживает многократную обработку в автоклаве при температуре до +120°C или стирку до +95°C.

Электропитание термоэлемента осуществляется от отдельного блока управления, который подает на нагревательный элемент матраца безопасное для человека напряжение. К блоку управления подключается внешний датчик температуры, который позволяет контролировать отклонения температуры тела пациента от нормы.

Устройство позволяет задавать и автоматически поддерживать нужный диапазон температуры тела пациента путем контролируемого нагрева поверхности матраца. В случае отключения внешнего датчика температуры устройство будет работать в режиме поддержания постоянной температуры поверхности матраца независимо от внешних факторов.

Подробное описание работы с устройством читайте в прилагаемом РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер матраца (стандартный)	64 x 38 см
Напряжение питания	сеть 220 В, 50 Гц
Напряжение питания термоэлемента	12-15 В
Потребляемая мощность не более	30 Вт
Масса блока питания не более	1,7 кг

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Блок управления с помощью специального кронштейна надежно крепится к любой вертикальной стойке рамы кровати. Чтобы уберечь блок управления от ударов, его следует располагать внутри контура кровати. Благодаря кронштейну блок управления можно зафиксировать на нужной высоте и под нужным углом. Матрац укладывается в

Сетевой и сигнальный кабели матраца продеваются через одно из отверстий в днище юветы и подключаются к блоку питания, а вилка сетевого шнура блока питания вставляется в розетку. Чехол «гнездо» одевается на матрас. Внешний датчик температуры подключается к блоку управления и впоследствии закрепляется на теле ребенка.

Выключатель питания блока управления переводится в положение «включено».

Перед размещением ребенка матрас желательно прогреть в течение 5 – 10 минут.

Примечание: Программа, заложенная в блоке управления, не позволяет задавать температуру термоэлемента более +40°C.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для правильной эксплуатации обязательными являются следующие требования:

- не включать изделие в сети питания с напряжением более, чем указано в паспорте изделия;
- не подвергать поверхность матраца резким ударам или другим сильным механическим воздействиям, так как вмонтированный термоэлемент содержит электронные компоненты;
- не повреждать материал поверхности изделия;
- не производить самостоятельно ремонт изделия в том случае, если оно перестало нагреваться или отмечаются сбои в работе электроники;
- регулярно осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения или износа. При обнаружении таких признаков необходимо прекратить эксплуатацию изделия;

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев с даты продажи или с даты выпуска, если дата продажи в гарантийном талоне отсутствует. Гарантия производителя не распространяется на термоматрас и блок питания с нарушенными гарантийными пломбами, а также на случаи нарушения условий эксплуатации изделий.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электроматрас «Термозлит», модель MCI 3T соответствует техническим условиям ТУ 9452-002-58392980-2012 и признан годным к эксплуатации по назначению.

Декларация соответствия:

Регистрационное удостоверение:

Дата выпуска _____

Контактный телефон: (495) 763 95 17

✉ mail@elitmaxima.ru

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 1

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термоэлит» модель MCI 3U заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель

Владелец

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 2

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термоэлит» модель MCI 3U заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель

Владелец

МАТРАЦ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

(МЯГКОЕ ТЕПЛО)

«ТЕРМОЭЛИТ»

Модель MCI 3U

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное устройство мягкого тепла предназначено для обогрева новорожденных и детей грудного возраста, обеспечения комфортных условий для них при автоматическом контроле за температурой поверхности кровати, в которой находится ребенок.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термоматрац	1 шт.
Чехол «гнездо» (опция)	1 шт.
Блок питания с кронштейном	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. ОПИСАНИЕ

Матрац выполнен в виде мягкого покрывала с встроенным нагревательным элементом и датчиком контроля за температурой поверхности, внешнее покрытие матраца изготовлено из влагонепроницаемой и влагоотталкивающей износостойкой ткани.

Изделие может комплектоваться специальным чехлом типа «гнездо» из ткани с нулевым пылеотделением и снимающей возможное статическое электричество. Чехол выдерживает многократную обработку в автоклаве при температуре до +120°C или стирку до +95°C.

Электропитание термоэлемента осуществляется от отдельного блока управления, который подает на нагревательный элемент матраца безопасное для человека напряжение. К блоку управления подключается внешний датчик температуры, который позволяет контролировать отклонения температуры тела пациента от нормы.

Устройство позволяет задавать и автоматически поддерживать нужный диапазон температуры поверхности матраца, контролируемый с точностью до 0,1°C.

Блок управления имеет разъем для подключения внешнего датчика типа YSI-400 (не входит в комплект поставки), позволяющего контролировать температуру тела пациента с целью поддержания ее в заданных пределах при нарушении естественной терморегуляции организма.

Подробное описание работы с устройством читайте в прилагаемом РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер матраца (стандартный)	64 x 38 см
Напряжение питания	сеть 220 В, 50 Гц
Напряжение питания термоэлемента	12-15 В
Потребляемая мощность не более	30 Вт
Масса блока питания не более	1,7 кг

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Блок управления с помощью специального кронштейна надежно крепится к любой вертикальной стойке рамы кровати. Чтобы уберечь блок управления от ударов, его следует располагать внутри контура кровати. Благодаря кронштейну блок управления можно зафиксировать на нужной высоте и под нужным углом. Матрац укладывается в

Сетевой и сигнальный кабели матраца продеваются через одно из отверстий в днище кюветы и подключаются к блоку питания, а вилка сетевого шнура блока питания вставляется в розетку. Чехол «гнездо» одевается на матрас. Выключатель питания блока управления переводится в положение «включено».

Перед размещением ребенка матрац желательно прогреть в течение 5 – 10 минут.

Примечание: Программа, заложенная в блоке управления, не позволяет задавать температуру термоэлемента более +40°C.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для правильной эксплуатации обязательными являются следующие требования:

- не включать изделие в сети питания с напряжением более, чем указано в паспорте изделия;
- не подвергать поверхность матраца резким ударам или другим сильным механическим воздействиям, так как вмонтированный термоэлемент содержит электронные компоненты;
- не повреждать материал поверхности изделия;
- не производить самостоятельно ремонт изделия в том случае, если оно перестало нагреваться или отмечаются сбои в работе электроники;
- регулярно осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения или износа. При обнаружении таких признаков необходимо прекратить эксплуатацию изделия;

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев с даты продажи или с даты выпуска, если дата продажи в гарантийном талоне отсутствует. Гарантия производителя не распространяется на термоматрац и блок питания с нарушенными гарантийными пломбами, а также на случаи нарушения условий эксплуатации изделий.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электроматрац «Термоэлит», модель MCI 3U соответствует техническим условиям ТУ 9452-002-58392980-2012 и признан годным к эксплуатации по назначению.

Декларация соответствия:

Регистрационное удостоверение:

Дата выпуска _____

Контактный телефон: (495) 763 95 17

✉ mail@elitmaxima.ru

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 1

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термоэлит» модель МАИ 2 заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 2

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термоэлит» модель МАИ 2 заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

МАТРАЦ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
(МЯГКОЕ ТЕПЛО)
«ТЕРМОЭЛИТ»
Модель МАІ 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Термоматрац предназначен для использования в автомобилях скорой медицинской помощи. Применяется квалифицированным медицинским персоналом при необходимости обогрева пациентов, страдающих от гипотермии, а также для создания пациентам комфортных температурных условий при перевозке.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термоматрац	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка (сумка)	1 шт.

3. ОПИСАНИЕ

Матрац выполнен в виде мягкого покрывала с встроенным нагревательным элементом, внешнее покрытие которого изготовлено из влагонепроницаемой и влагоотталкивающей износостойкой ткани.

Электропитание термoeлемента осуществляется от бортовой сети автомобиля 12 вольт.

Устройство позволяет устанавливать и автоматически поддерживать температуру нагрева поверхности Матраца от температуры окружающей среды до +40°C.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер матраца	160 x 50 см
Напряжение питания	Бортовая сеть а/м 12В
Потребляемая мощность не более	80 Вт
Масса изделия не более	1,5 кг

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед размещением пациента матрац желательно предварительно прогреть, для чего необходимо штекер кабеля питания вставить в сетевую розетку (прикуриватель), отстегнуть боковой клапан с блоком управления, и выключатель питания перевести в положение «включено».

Дисплей на панели блока управления покажет «24» — заданную по умолчанию температуру поверхности матраца в градусах Цельсия. С помощью кнопок «▲» и «▼» установите нужную температуру для электроматраца. Через 3-4 секунды дисплей покажет реальную температуру поверхности.

Постоянно горящая светящаяся точка на дисплее означает, что устройство находится в режиме нагрева. Эта точка будет мигать при достижении заданной температуры, которая в дальнейшем будет поддерживаться автоматически.

Оператор в любой момент может изменить заданную температуру кнопками «▲» и «▼». При нажатии и удержании какой-либо из этих кнопок ускоряется изменение значений.

Примечание: Программа, заложенная в блоке управления, не позволяет задавать температуру термoeлемента более +40°C.

После проведения процедуры выключается общее питание, а штекер шнура питания вынимается из сетевой розетки.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для правильной эксплуатации обязательными являются следующие требования:

- не включать изделия в сети питания с напряжением более, чем указано в паспорте изделия;

- не подвергать поверхность матраца резким ударам или другим сильным механическим воздействиям, так как вмонтированный термозлемент содержит электронные компоненты;

- не повреждать материал поверхности изделия;

- не производить самостоятельно ремонт изделия в том случае, если оно перестало нагреваться или отмечаются сбои в работе электроники;

- регулярно осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения или износа. При обнаружении таких признаков необходимо прекратить эксплуатацию изделия.

7. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- *Если устройство не включается*

Блок управления устройства имеет автоматическую защиту от резких перепадов напряжения в сети. Если дисплеи блока управления не загораются при включении, проверьте контакт в гнезде «прикуривателя». В остальных случаях обращайтесь к продавцу или производителю устройства.

- *Если устройство подает звуковые сигналы*

Блок управления имеет программу обнаружения неисправностей и аварийной сигнализации. В том случае, если устройство издает повторяющийся писк, а на дисплеях появляются символы, не относящиеся к температуре, возможен один из следующих вариантов:

- Вы забыли установить температуру работы устройства – задайте нужную температуру кнопками «▲» и «▼».

- Было отключение питания в сети и сбились настройки прибора – снова задайте нужную температуру кнопками «▲» и «▼».

- Температура поверхности превысила предельно допустимую (40°C) – убедитесь, что на поверхности матраца нет постороннего источника тепла, в противном случае он неисправен и следует обратиться к продавцу или производителю.

- Обнаружена неисправность термозлемента или электронной схемы – обратитесь к продавцу или производителю изделия.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев с даты продажи или с даты выпуска, если дата продажи в гарантийном талоне отсутствует. Гарантия производителя не распространяется на термоматрац и блок питания с нарушенными гарантийными пломбами, а также на случаи нарушения условий эксплуатации изделий.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электроматрац «Термозлит», модель MAI 2 соответствует техническим условиям ТУ 9452-002-58392980-2012 и признан годным к эксплуатации по назначению.

Сертификат соответствия:

Регистрационное удостоверение:

Дата выпуска _____

Контактный телефон: (495) 763 95 17

✉ mail@elitmaxima.ru

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев с даты продажи или с даты выпуска, если дата продажи в гарантийном талоне отсутствует. Гарантия производителя не распространяется на термоматрац и блок питания с нарушенными гарантийными пломбами, а также на случаи нарушения условий эксплуатации изделий.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электроматрац «Термозлит», модель MCI 2A соответствует техническим условиям ТУ 9452-002-58392980-2012 и признано годным к эксплуатации по назначению.

Декларация соответствия:

Регистрационное удостоверение:

Дата выпуска _____

Контактный телефон: (495) 763 95 17

✉ mail@elitmaxima.ru

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 1

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термозлит» модель MCI 2A заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

ООО «ЭлитМаксима» г.Москва

ТАЛОН № 2

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие мягкого тепла «Термозлит» модель MCI 2A заводской N _____

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись продавца)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

МАТРАЦ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

(МЯГКОЕ ТЕПЛО)

«ТЕРМОЭЛИТ»

Модель MSI 2A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное устройство мягкого тепла предназначено для обогрева новорожденных и детей грудного возраста, обеспечения комфортных условий для них при автоматическом контроле за температурой поверхности кровати, в которой находится ребенок.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термоматрац	1 шт.
Блок питания с кронштейном	1 шт.
Чехол защитный (опция)	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. ОПИСАНИЕ

Матрац выполнен в виде мягкого покрывала с встроенным нагревательным элементом, внешнее покрытие которого изготовлено из влагонепроницаемой и влагоотталкивающей износостойкой ткани.

Изделие может комплектоваться защитным чехлом, выдерживающим многократную обработку в автоклаве при температуре до +120°C или стирку до +95°C.

Электропитание термоэлемента осуществляется от отдельного блока питания, который подает на нагревательный элемент безопасное для человека напряжение.

Устройство позволяет устанавливать и автоматически поддерживать температуру нагрева поверхности матраца от температуры окружающей среды до +40°C. В случае отключения внешнего электропитания устройство автоматически переходит на питание от встроенных аккумуляторов, а при его возобновлении – в режим подзарядки аккумуляторов и питания от внешней сети.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер матраца (стандартный)	63 x 40 см
Напряжение внешнего питания	сеть 220 В, 50 Гц
Напряжение питания термоэлемента	9-15 В
Продолжительность автономной работы, не менее, мин.	60
Потребляемая мощность не более	30 Вт
Масса блока питания не более	2,5 кг

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Блок управления с помощью специального кронштейна надежно крепится к любой вертикальной стойке рамы кровати. Чтобы уберечь блок управления от ударов, его следует располагать внутри контура кровати. Благодаря кронштейну блок управления можно зафиксировать на нужной высоте и под любым углом. Матрац укладывается в кювету этикеткой вниз.

Сетевой и сигнальный кабели матраца продеваются через одно из отверстий в днище кюветы и подключаются к блоку питания, а вилка сетевого шнура блока питания вставляется в розетку. Чехол (при его наличии в комплекте изделия) одевается на матрас.

Выключатель питания блока управления переводится в положение «включено».

Перед размещением ребенка матрац желательно прогреть в течение 5 – 10 минут.

Дисплеи передней панели блока управления показывают температуру поверхности матраца в градусах Цельсия. Подождите несколько секунд, пока на правом дисплее не появятся показания реальной температуры поверхности, а на левом дисплее – «24» —

С помощью кнопок «▲» и «▼» задайте нужную температуру для электроматраца. На правом дисплее появится светящаяся точка, означающая, что устройство находится в режиме нагрева. Эта точка будет мигать при достижении заданной температуры, которая в дальнейшем будет поддерживаться автоматически.

Оператор в любой момент может изменить заданную температуру кнопками «▲» и «▼». При нажатии и удержании какой-либо из этих кнопок ускорится изменение значений.

Примечание: Программа, заложенная в блоке управления, не позволяет задавать температуру термoeлементa более +40°C.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для правильной эксплуатации обязательными являются следующие требования:

- не включать изделие в сети питания с напряжением более, чем указано в паспорте изделия;
- не подвергать поверхность матраца резким ударам или другим сильным механическим воздействиям, так как вмонтированный термoeлемент содержит электронные компоненты;
- не повреждать материал поверхности изделия;
- не производить самостоятельно ремонт изделия в том случае, если оно перестало нагреваться или отмечаются сбои в работе электроники;
- регулярно осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения или износа. При обнаружении таких признаков необходимо прекратить эксплуатацию изделия;

7. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- Если устройство подает звуковые сигналы

Блок управления имеет программу обнаружения неисправностей и аварийной сигнализации. В том случае, если устройство издает повторяющийся писк, а на дисплеях появляются символы, не относящиеся к температуре, возможен один из следующих вариантов:

- Вы забыли установить температуру работы устройства – задайте нужную температуру кнопками «▲» и «▼».
- Было отключение питания в сети и сбились настройки прибора – снова задайте нужную температуру кнопками «▲» и «▼».
- Температура поверхности превысила предельно допустимую (40°C) – убедитесь, что на поверхности матраца нет постороннего источника тепла, в противном случае матрац неисправен и следует обратиться к продавцу или производителю.
- Обнаружена неисправность термoeлементa или электронной схемы – проверьте правильность подключения кабелей и, если все правильно подключено, обратитесь к продавцу или производителю изделия.

- Если устройство медленно нагревается

При падении фактического напряжения в сети ниже 220В устройство может разогреваться значительно медленнее нормы (норма = 10 градусов за первые 5-10 минут нагрева). В этих случаях рекомендуется включать блок питания в сеть через стандартный стабилизатор напряжения.

ООО «ЭлитМаксима»

127562 г. Москва Алтуфьевское ш. д. 28

ИНН/КПП 7715314625/771501001 ОГРН 1037739551728

Р/с 40702810400240001782 в ОАО «Банк Москвы» БИК 044525219

06.02.2012

Доверенность № 44

ООО «ЭлитМаксима» в лице Генерального директора Беленького С.Г., действующего на основании Устава, доверяет:

1. Мамонтовой Екатерине Юрьевне (паспортные данные: № 68 05 226614, выдан Ленинским РОВД г. Тамбова, дата выдачи: 08.08.2005 г., код подразделения 682-008) –
должность: консультант по регистрации ИМН

2. Пикулик Владе Владиславовне (паспортные данные: № 45 06 578775, выдан ОВД «Щукино» г. Москвы, дата выдачи: 22.10.2004 г., код подразделения 772-099) –
должность: консультант по регистрации ИМН

представлять интересы Компании ООО «ЭлитМаксима», Россия в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Доверяется осуществлять действия, необходимые для прохождения процедуры регистрации медицинского изделия: «Матрац медицинский электрический «Термоэлит»» производства компании ООО «ЭлитМаксима», Россия, а именно:

- подготавливать пакет документов для регистрации;
- подавать документы для прохождения процедуры регистрации мед. изделия;
- получать регистрационные удостоверения на медицинское изделие: «Матрац медицинский электрический «Термоэлит»» производства компании ООО «ЭлитМаксима», Россия.

Доверенность выдана сроком на 6 месяцев.

Подписи:

1. Е.Ю. Мамнотова _____;

2. В.В. Пикулик _____ удостоверяю.

Директор

ООО «ЭлитМаксима»



Беленький С.Г.