




СИМС-2

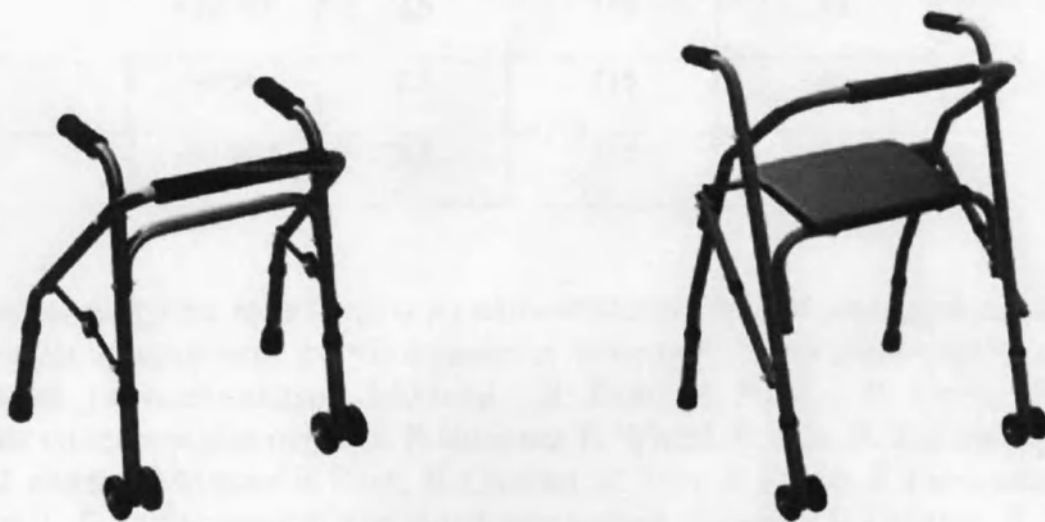

Руководство по эксплуатации

Опоры – ходунки серии R: R Wheel, R Duo, R Kid, R Push, R Quattro, R Trio, R Drive, R Euro.

Опоры-ходунки (далее опоры) предназначены для облегчения ходьбы, поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в домашних условиях и на улице, управляются обеими руками, возможно в комбинации с верхней частью тела, облегчают уход за тяжелобольными и инвалидами.

Варианты исполнения опор указаны в таблице 1

Таблица 1

Наименование	Регулировка по высоте, см	Шаг регулировки высоты, см	Допустимая нагрузка, кг	Расстояние между поручнями, см
R Wheel	78-96	2,5	100	46
R Duo	82-92	2,5	100	45
R Kid	52-62	2,5	100	46
R Push	82-94	2,5	115	46
R Quattro	81-90	2,5	115	46



СИМC-2

R Trio	83,5-93	2,5	115	35
R Drive	90-96	2,5	115	46
R Euro	82-89	2,5	115	46

Опоры-ходунки выполнены из алюминиевых труб с анодированным или порошковым покрытием, регулируемыми опорами, с мягкими рукоятками и резиновыми наконечниками. Модели R Duo, R Push, R Drive, R Euro снабжены сидением для отдыха. В моделях R Wheel, R Duo, R Kid на передних опорах 2 колеса. Модели R Push, R Quattro, R Trio, R Drive, R Euro снабжены колесами и быстросъемной корзиной для вещей. Модели R Quattro, R Trio, R Drive, R Euro оснащены ручными тормозами.

Опоры моделей R Wheel, R Duo, R Kid легко складываются и раскладываются.

Надежная фиксация в рабочем положении обеспечивается кнопчными замками – простыми, удобными, безопасными в обращении.

В опорах моделей R Wheel, R Duo, R Kid высота ходунков регулируется изменением высоты ножек.

В опорах моделей R Push, R Quattro, R Trio, R Drive, R Euro высота ходунков регулируется изменением высоты поручней.

Рукоятки опор изготовлены из не абсорбирующего материала ПВХ, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют такую форму, которая обеспечивает прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.

Опоры моделей R Wheel, R Duo, R Kid на задних ножках имеют резиновые наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное удержание на опорах и изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения.

Конструкция наконечников ходунков обеспечивает легкость их замены (при необходимости) и не создаёт эффекта присоски с поверхностью, по которой происходит движение.

Инструкции по монтажу и эксплуатации

В опорах моделей R Wheel, R Duo, R Kid высота ходунков регулируется изменением высоты ножек, путем нажатия на клип-фиксатор нажимную кнопку



СИМC-2

Установка высоты опоры моделей R Wheel, R Duo, R Kid.

- Нажимную кнопку вдавить в отверстие или вынуть клип-фиксатор.
- Алюминиевую трубку поставить в желаемое положение.
- Нажать кнопку и защелкнуть клип-фиксатор.


В опорах моделей R Push, R Quattro, R Trio, R Drive, R Euro высота ходунков регулируется изменением высоты поручней.

Установка высоты опоры моделей R Push, R Quattro, R Trio, R Drive, R Euro.

- Открутить винтовые зажимы на каждом из поручней.
- Потянуть поручень за ручку вверх на необходимую высоту.
- Удерживая поручень одной рукой, другой рукой закрутить до упора винтовой зажим.

Замена резинового наконечника

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Е). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию (см. технические характеристики), убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.

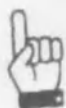

Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая пластинка. Она защищает наконечник от прорыва трубкой опоры. Результатом этого может стать повреждение напольного покрытия или падение.



Техническое обслуживание

Уход

Корпус опоры достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных чистящих средств.

Внимание! Не используйте содержащие растворители или масляные чистящие средства.

Обслуживание

Перед каждым использованием проверяйте опору на предмет повреждений. Убедитесь, что клип-фиксатор (нажимная кнопка) и наконечник или колёса(при наличии) прочно закреплены, а труба находится в правильном положении.

В моделях R Quattro, R Trio, R Drive, R Euro перед каждым использованием проверяйте исправность работы ручного тормоза.

Ремонт



СИМС-2

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Регистрационное удостоверение №

сертификат соответствия № РОСС

Генеральный директор ООО «СИМС-2»

Бадалян С.П.

