



СИМС-2



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами серии BS: сиденья
для ванн, стулья для ванн**

:



Применение

Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами серии BS (далее изделие): сиденья для ванн, стулья для ванн предназначены для облегчения ухода за тяжелобольными и инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при выполнении гигиенических процедур. Надежная, функциональная конструкция позволяет использовать их как в стационарных медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Технические характеристики и эксплуатация

Сиденья для ванн

Сиденья для ванн выпускаются в двух вариантах исполнения: BS Standart, BS Twist. Сиденья выполнены на алюминиевой раме с сидением из пластика ABS, и устанавливаются на боковые стенки ванны. Для безопасного использования на концах алюминиевой рамы надеты противоскользящие резиновые наконечники. В модели BS Twist для удобства по бокам сидения расположены поручни.

Стулья для ванн

Стулья для ванн выпускаются в двух вариантах исполнения BS Seat, BS Bench. Стулья выполнены на алюминиевой раме с сидением и спинкой изготовленными из пластика ABS. Сидение модели BS Seat имеет U-образный гигиенический вырез. Для безопасного использования на скользкой поверхности, на концах ножек расположены резиновые наконечники-присоски. В обоих вариантах исполнения возможна регулировка высоты стула.

Конструктивные особенности стульев для ванн приведены в таблице 1.



СИМС-2

Таблица 1

Модель (артикул)	Макси - мальная нагрузка , кг	Масса , кг	Регулировка высоты сидения, см	Шаг регулиру вки высоты, см
BS Seat	115	9	42-52	2,5
BS Bench	115	5	41-51	2,5

Техническое обслуживание

При мытье допустимо использование воды и моющих средств. Не используйте растворители (ацетон, спирт и т. п.) и абразивные средства. После санитарной обработки вытрите насадку насухо.

Следует предохранять от ударов твердыми и острыми предметами.

Не подвергайте длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

Не хранить вблизи от отопительных приборов.

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие качества при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний эксплуатации.

Установленный срок пользования пять лет.

Гарантийный срок хранения – два года со дня изготовления .


Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня выдачи пользователю.

Регистрационное удостоверение № , сертификат соответствия № РОСС

Дата продажи: « » 2011 г.

Генеральный директор

ООО «СИМС-2»

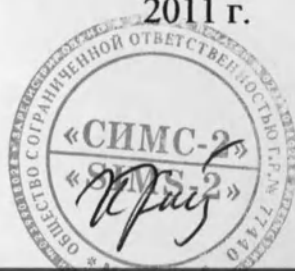


Бадалян С.П.



Модель (вариант)	Материал	Материал	Материал	Материал
БС 2см	112	9	45-22	22
БС Bench	112	2	41-21	22

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листа

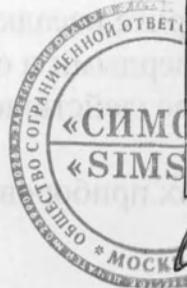

Иван Багдасарян С.П.
ген. директор
ООО «СЦММ-2»