



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Костыли серии U в вариантах исполнения с УПС и БЕЗ: U Standart (размеры S,M,L), U XXL (размеры S,M,L), U Lux(размеры S,M,L), U Matrix в трёх цветах (G,R,B), U Chrome(размеры S,M,L), U Ergo(размеры S,M,L)



СИМС-2

Применение

Костыли предназначены для дополнительной опоры при ходьбе пользователей любого возраста. Данное изделие можно использовать как в помещении, так и на улице.

Костыли позволяют исключить травмы ладоней (потёртости), уменьшить нагрузку на плечевой пояс, снизить энергозатраты при ходьбе. Равномерно распределенная нагрузка позволяет пациенту двигаться более продолжительные периоды времени. Изменение высоты позволяет регулировать костыли в соответствии с индивидуальными размерами пациента. Костыли выдерживают нагрузку от 100 до 225 кг.

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Установка высоты происходит через алюминиевую трубку путем нажатия на клип-фиксатор или нажимную кнопку

Установка высоты костыля

- Нажимную кнопку вдавить в отверстие .
- Алюминиевую трубку поставить в желаемое положение, до фиксации клип – фиксатора.

Установка высоты рукоятки кисти у подмышечных костылей

- Отвернуть фиксирующую гайку
- Вытащить крепёжный винт
- Переставить рукоятку в желаемое положение
- Вставить крепёжный винт в отверстия
- Завернуть фиксирующую гайку




СИМС-2

Установка высоты опоры предплечья у локтевых костылей

- Нажимную кнопку вдавить в отверстие .
- Опору предплечья поставить в желаемое положение, до фиксации клип – фиксатора.

Замена резинового наконечника

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Е). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию (см. технические характеристики), убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.

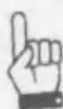

Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая пластинка. Она защищает наконечник от прорыва трубкой костыля. Результатом этого может стать повреждение напольного покрытия или падение.

Техническое обслуживание

Уход

Трубку костыля достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных чистящих средств.

Внимание! Не используйте содержащие растворители или масляные чистящие средства.

Обслуживание

Перед каждым использованием проверяйте костыли на предмет повреждений. Убедитесь, что клип-фиксатор и наконечник прочно закреплены. Небрежный уход или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

Ремонт

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.



Инструкции по технике безопасности

- Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!
- Перед каждым использованием проверяйте костыли на наличие повреждений.
- Регулярно проверяйте наконечник на наличие повреждений или износ..
- Механические изменения производить запрещено.
- Будьте внимательны во время передвижения по влажной плитке, полу или незакрепленному ковровому покрытию.

Технические характеристики костылей

Перечень костылей подмышечных и их конструктивные особенности приведены в таблице 1 .

Таблица 1

Модель	Высота от пола до подмышечного валика, см	Шаг регулировки рукоятки кисти, см	Шаг регулировки высоты костыля, см	Максимальная нагрузка, кг	Масса, кг	Материал	наличие УПС
U Standart (размеры S,M,L)	95-115,5 114-134,5 135-155,5	4	2,5	100 100 100	1,45 1,55 1,65	Алюминий	да
U XXL (размеры S,M,L)	95-115,5 114-135 135-155,5	4	2,5	220 220 220	3,9 4,2 4,9	Алюминий	нет
U Lux (размеры S,M,L)	95-115,5 114-135 135-155,5	4	2,5	100 100 100	0,8 1 1,5	Алюминий	нет



Перечень костылей локтевых и их конструктивные особенности приведены в таблице 2.

Таблица 2

Модель	Регулировка по высоте, см	Шаг регулировки и высоты костыля, см	Шаг регулировки опоры предплечья, см	Максимальная нагрузка, кг	Масса, кг	Наличие УПС	Материал
U Matrix в трёх цветах (G,R,B)	96-119	2,5	-	100	0,55	да	Алюминий
U Chrome (размеры S,M,L)	86-117 73-103 55-78	2,5	2,5	125	0,7 0,85 0,95	да	Алюминий
U Ergo (размеры S,M,L)	80-102 102-122 122-152	2,5	2,5	100	0,8 1 1,6	нет	Алюминий

Комплект поставки :

Костыль локтевой/костыль подмышечный -1/2 шт

Инструкция по эксплуатации - 1шт

По заказу, дополнительно костыли могут комплектоваться следующими принадлежностями, ассортимент которых приведен в таблице 3.



Таблица 3

Принадлежность
Валик подмышечный резиновый - U-Grip
Валик для кисти резиновый - U-Arm
Насадка резиновая-U Tip Standart
Насадка резиновая -U Tip XXL
Насадка резиновая -U Tip Lux
Насадка резиновая -U Tip Matrix
Насадка резиновая -U Tip Chrome
Насадка резиновая -U Tip Ergo
Устройство против скольжения – Ice Tip

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - **6 месяцев** со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции должен быть произведен в только компании ООО «СИМС-2» с применением оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - **24 месяца**

Регистрационное удостоверение № , сертификат соответствия № РОСС

Дата продажи: « »

2011 г.

Генеральный директор
ООО «СИМС-2»



Бадалян С.П.



1. Протокол
2. Протокол
3. Протокол
4. Протокол
5. Протокол
6. Протокол
7. Протокол
8. Протокол
9. Протокол
10. Протокол



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
_____ 6 _____ листа

Барашкин С.П.
дир. деп. 1
ООО СИМС-2