

**ВКЛАДЫШИ УШНЫЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ**

Руководство по эксплуатации

СЕФК.943363.001 P3



Handwritten signature

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на вкладыши ушные индивидуальные (далее – ИУВ) и содержит информацию, необходимую потребителю, для правильной эксплуатации ИУВ.

ИУВ предназначены для передачи усиленной звуковой информации от заушного слухового аппарата (далее слуховой аппарат или СА) в слуховой проход пациента через трубку звуковода ИУВ. Применяются при показаниях к электроакустической коррекции потерь слуха, в том числе с выраженным феноменом ускоренного нарастания громкости (ФУНГ).

Подбор и настройку СА с ИУВ должен осуществлять специалист по слухопротезированию.

Примечание - Если слуховой аппарат приобретен в организации, которая не оказывает услуги по подбору, настройке СА и изготовлению ИУВ, то обращайтесь в сурдологический центр «Радуга звуков» или кабинет слухопротезирования по месту жительства.

1 Технические данные

1.1 Технические данные представлены в таблице 1.

1.2 Средний срок службы не менее двенадцати месяцев с начала эксплуатации.

1.3 ИУВ не содержит драгоценных металлов.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки согласно таблице 2.

3 Техническое описание

3.1 ИУВ изготавливается по индивидуальному заказу со слепка наружного уха пользователя и обеспечивает звуковую связь и возможность крепления к слуховому аппарату посредством звуковода. Конструктивно звуковод ИУВ изготавливается круглого сечения в виде трубки двух видов: с уголком или без уголка.

Предприятие-изготовитель:
ОАО «ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ»
141190 г. Фрязино Московской области,
ул. Вокзальная, д. 2а
Тел/факс. (495) 745-15-78
E-mail: info@istok-audio.com
www.istok-audio.com

elba -

8 Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие ИУВ требованиям технических условий

ТУ 9444-031-18163033-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации ИУВ – три месяца со дня выдачи (с отметкой в Руководстве по эксплуатации или на потребительской коробке), при наличии в бланке заказа даты изготовления, печати ОТК и подписи представителя организации, выдавшей ИУВ.

8.3 В случае отсутствия отметки о дате выдачи в Руководстве по эксплуатации или на потребительской таре, гарантийные обязательства отсчитываются с даты изготовления ИУВ.

ВНИМАНИЕ! На ИУВ с механическими повреждениями и следами химического воздействия гарантия не распространяется.

9 Свидетельство о приемке и продаже

9.1 Вкладыш ушной индивидуальный заводской

№ _____, Силикон ☐ Вариофлекс ☐
Мягкий фотопласт ☐ Твердый фотопласт ☐
(выделить конкретный материал)

соответствует ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 15150-69, техническим условиям ТУ 9444-031-18163033-2009 и признан годным для эксплуатации.

Дата выдачи _____ Штамп ОТК

Штамп торгующей организации

7

elbam

Таблица 1

Исполнение ИУВ	Материал			
	Твердый фотопласт (Egger LPN dimethacrylate)	Мягкий фотопласт (Egger LPW methacrylate)	Вариофлекс (Varioflex liquid +Varioflex powder)	Силикон (Egger flex/AB two-component silicone)
Канал	+	+	+	+
Полуконха				
Конха				
Канал с пяткой		-	-	-
Скелетон				
Пряжка				
Когти				
Открытый				
Для карманно-го аппарата				
Примечание - Могут быть использованы аналогичные компоненты фирмы Egger или Dreve, применение которых обеспечивает технические характеристики, заявленные в настоящем ТУ.				

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Вкладыш ушной индивидуальный	СЕФК.943363.001	1
Коробка	СЕФК.323222.015	1
Пакет упаковочный с замком ПВД	-	1
Руководство по эксплуатации	СЕФК.943363.001РЭ	1

4

elbam

4 Подготовка к работе

4.1 Тщательно очистите ушной канал и раковину от серы и грязи перед использованием ИУВ.

4.2 Подготовьте слуховой аппарат к работе согласно руководству по эксплуатации к используемому слуховому аппарату.

4.3 Плотно наденьте звуковод ИУВ (эластичную прозрачную трубку) на переход (рожок) слухового аппарата. Трубка не должна быть перекручена.

ВНИМАНИЕ! При снятии (или установке) ИУВ с перехода СА необходимо держать слуховой аппарат за переход для исключения механического повреждения корпуса.

4.4 Установите регулятор усиления СА на минимальную громкость.

5 Использование ИУВ

5.1 Поместите СА за ушной раковиной и вставьте чистый ИУВ в наружный слуховой проход до плотного прилегания к стенкам слухового прохода. Если ИУВ изготовлен, соединен с СА и установлен правильно, то ощущение дискомфорта минимально.

5.2 Установите регулятор усиления СА на наиболее благоприятный для Вас уровень громкости.

5.3 Используйте ИУВ в течение всего времени ношения СА. Для эффективного использования СА с ИУВ необходимо некоторое время для привыкания к нему.

Соблюдение следующих рекомендаций позволит успешно адаптироваться к новым ощущениям и восприятию звуков.

6 Рекомендации по уходу

6.1 Соблюдайте гигиену слухового прохода.

6.2 Содержите ИУВ в чистоте. Не менее 2-3 раз в неделю ИУВ следует отделить от СА и очистить, погрузив на 15 мин в приготовленный на основе специальных таблеток очищающий раствор или в теплый мыльный раствор. Затем промыть его чистой проточной водой и просушить. Вентильное отверстие прочистите тонкой пеской. Перед присоединением трубки ИУВ к слуховому аппарату убедитесь, что они сухие.

НЕДОПУСТИМО ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, СПИРТО И КИСЛОСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ.

6.3 Снимайте ИУВ с присоединенным слуховым аппаратом во время сна, при посещении бани, душа, парикмахерской.

ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, СПОСОБНЫХ ПОВРЕДИТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ ИУВ.

6.4 Если трубочка, соединяющая ИУВ с СА, стала жесткой или хрупкой ее необходимо заменить.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОСТАВАТЬ ИУВ ИЗ УХА, ДЕРГАЯ ЗА ТРУБКУ ЗВУКОВОДА.

ВНИМАНИЕ! В случае повреждения ИУВ, появления новых требований по коррекции формы или к акустическим параметрам из-за изменения размера ушного канала или потери слуха, незамедлительно обратитесь к представителям фирмы-изготовителя.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование ИУВ по группе 5 ГОСТ 15150-69 крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида.

7.2 Условия хранения ИУВ в упаковке изготовителя (или аналогичной) - по группе 1 15150-69.