


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ФармИнформ»

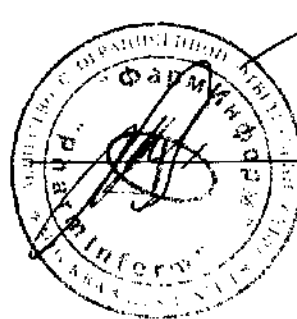

Макарова О.Е.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Инструменты микрохирургические офтальмологические режущие»

Инструменты микрохирургические офтальмологические режущие.

Описание:

Представляют собой стерильные инструменты для проведения офтальмологических манипуляций.

Характеристики:

Инструменты микрохирургические офтальмологические выпускаются в следующих исполнениях:

1. Лезвие серповидное, с углом 15° Neuro-Sharp (Neuro-Sharp blade 15° offset sickle).
2. Лезвие серповидное арахноидальное, с углом 15° Neuro-Sharp (Neuro-Sharp blade 15° offset arachnoid).
3. Лезвие штыковое Neuro-Sharp (Neuro-Sharp blade bayonet sickle).
4. Лезвие штыковое арахноидальное (Neuro-Sharp Neuro-Sharp blade bayonet sickle).
5. Лезвия-резцы специальные Beaver (Beaver Chisel blade).
6. Лезвие специальное для цервикальной биопсии Beaver (Beaver Cervical biopsy blade).
7. Лезвие специальное для мириготомии Beaver : различных модификаций
8. Нож специальный для мириготомии Beaver различных модификаций
9. Нож офтальмологический хирургический изогнутый Xstar Safety 2.00 мм
10. Ножи-кератомы Atomic Edge Safety: 2,8см; 3,0см.
11. Ножи-кератомы изогнутые с заточкой вверх Beaver Xstar Safety: - 1,4 мм; 1,5 мм; 1,7 мм; 1,8 мм; 2,2 мм; 2,4 мм; 2,5 мм; 2,6 мм; 2,75 мм; 2,8 мм; 3,0 мм; 3,2 мм.
-различных модификаций
12. Ножи-кератомы изогнутые с двойной заточкой Beaver Xstar Safety
-2,2 мм; 2,4 мм; 2,5 мм; 2,65 мм; 2,75 мм; 2.8 мм; 2,85 мм; 3,0 мм.; 3,2 мм.
-различных модификаций
13. Ножи Beaver AdgeAhead Safety Sideport/MVR: 0,6 мм(23G); 0,9 мм(20G).
14. Ножи Beaver Optimum Safety Sideport прямые: 15°; 22,5°; 30°; 45°.
15. Нож-расслаиватель Beaver Xstar Safety 2,5 мм, изогнутый, заточка вверх.
16. Ножи Atomic Edge Limbal Relaxing Incision: 250 микрон, 300 микрон, 350 микрон, 400 микрон, 500 микрон, 550 микрон, 600 микрон, 625 микрон, 650 микрон.
17. Пика глаукомная ревизионная (Leder): 30 градусов; 60 градусов
18. Ножницы офтальмологические хирургические по Ванас:

-однократного применения Visitec (BD Visitec disposable Vanna's, Scissors).

-различных модификаций

19. Ножницы офтальмологические хирургические по Весткотту 121 мм, режущая часть 22 мм (Wescott Scissors, 121 mm, blade 22 mm).
20. Ножницы офтальмологические различных модификаций
21. Лезвия Beaver различных модификаций
22. Разрезатель колец Beaver (Beaver Ring Cutter).
23. Зубчатое лезвие для разрезателя колец Beaver (Beaver Ring Cutter saw blade).
24. Лезвие специальное для разрезателя колец Beaver (Beaver Ring Cutter saw blade, high speed steel).
25. Лезвие сменное одноразовое Mini-Blade (Mini-Blade).
26. Лезвие сменное одноразовое Mini-Blade с одной режущей кромкой, скошенное 45° (Mini-Blade sharp one edge, bent 45°).
27. Лезвие сменное одноразовое Mini-Blade (Mini-Blade pointed tip, sharp on two sides).
28. Лезвие Arthro-Lok 4mm, изогнутое 60° (Arthro-Lok 4mm, angled 60°, hoe).
29. Лезвие сменное одноразовое Debakey, 8 мм (Debakey blade, 8mm).
30. Лезвие сменное одноразовое Debakey, 10 мм (Debakey blade, 10mm).
31. Лезвие специальное сменное Arthro-Lok различных модификаций
32. Лезвие хирургическое сменное Mini-Blade, двусторонней заточки, точечный конец (Mini-Blade, sharp on two sides, pointed tip),
33. Лезвие хирургическое сменное Arthro-Lok Blade всесторонней заточки (Arthro-Lok Blade, 4mm banana, sharp all around).
34. Рукоятка специальная для лоскута BeaverTail, плоская 1 на 13 см (BeaverTail flat handle, 13cm L, 1cm W).
35. Рукоятка специальная Arthro-Lok 4 мм на 18 см (Arthro-Lok 4mm handle wrench 18cm).
36. Рукоятка специальная Beaver Dynagrip 4 мм на 21 см (Beaver Dynagrip 21cm L, 4mm handle wrench).
37. Рукоятка с круговой насечкой для лезвий 13см x 0,66 см (Handle, round, knurled 13cm x 0,66cm).
38. Рукоятка круглая Beaver, с насечками 0,64 см на 10,2 см (Handle Beaver, round, knurled 10.2cm L, 0.64cm D).
39. Втулка сменная Beaver для Рукоятки 371410 (Chuck collet Beaver, replacement for 371410 handle).
40. Рукоятка плоская BeaverTail, 17 см: (BeaverTail 17cm L).
41. Рукоятки различных модификаций
42. Ножи офтальмологические хирургические кератомы изогнутые Safety:

- 1,1 мм; 1,8 мм; 2,0 мм; 2,2 мм; 2,4 мм; 2,5мм; 2,6мм; 2,75мм; 2,8мм; 3,0мм
- различного размера лезвия и заточки, прямые и изогнутые
- 43. Ножи офтальмологические хирургические Beaver:
 - глубокие высокоточные 250мкм; 350мкм; 500мкм; 500мкм; 550мкм; 600 мкм
 - роговичные имплантационные двускошенные с углом 45°: 3,2мм; 3,5мм; 4,1 мм
 - роговичные двускошенные с углом 45°: 2,5мм; 2,6мм; 2,75мм; 2,8мм; 3,0мм; 3,2мм; 3,5мм
- 44. Ножи офтальмологические хирургические кератомы Xstar:
 - с заточкой вверх, изогнутые : 1,8 мм; 2,2 мм; 2,4 мм; 2,5мм; 2,6мм; 2,75 мм; 2,8мм; 3,0 мм; 3,2 мм; 3,5 мм
 - имплантационные прямые 3,5мм; 4,1мм; 5,2мм
 - с двойной заточкой, изогнутые : 2,2 мм; 2,4 мм; 2,5мм; 2,6мм; 2,75 мм; 2,8мм; 3,0 мм;
 - имплантационные изогнутые с углом 45°, скос вверх: 3,2мм; 3,5мм; 4,1мм; 5,2мм
 - серповидные прямые 2,5мм
 - серповидные изогнутые с углом 55°; 2,5мм: скос вверх; скос вниз
 - различного размера лезвия и заточки , прямые и изогнутые
- 45. Ножи офтальмологические хирургические склеральные Pocket:
 - изогнутые 60°, скос вниз 3,0мм
 - изогнутые 60°, скос вверх 2,25мм
 - двускошенные прямые 3,0мм
- 46. Ножи офтальмологические хирургические Optimum:
 - изогнутые, изгиб влево 30°
 - прямые 15°; 22,5°; 30°; 45°
- 47. Лезвия глубокие с ограничителем сменные Beaverguard: 0,35мм; 0,5мм
- 48. Лезвия сменные Pocket:
 - изогнутые с углом 60° скос вверх 2,25мм
 - изогнутые с углом 60° скос вниз 3,0мм
 - двускошенные прямые 3,0мм
 - серповидные прямые 2,5мм
 - серповидные с углом 55°, скос вверх 2,5мм
- 49. Лезвия сменные Optimum прямые: 15°; 22,5°; 30°; 45°
- 50. Ножи офтальмологические хирургические Mini Blade
всесторонне заточенные, прямые
- 51. Лезвия различных модификаций
- 52. Лезвия сменные Mini Blade: различных модификаций
- 53. Ножи офтальмологические хирургические, всесторонне
заточенные Sclerotome
- 54. Лезвия сменные всесторонне заточенные Sclerotome

55. Ножи офтальмологические хирургические глубокие Micro-Unitome:

- угол 15°, глубина 1,5мм; 3,0мм; 5,0мм
- угол 22,5°, глубина 4,0мм
- угол 30°, глубина 3,5мм
- угол 45°, глубина 3,0мм

56. Ножи офтальмологические хирургические EdgeAhead:

- кератомы прямые 2,8мм
- кератомы изогнутые 1,2мм; 1,4мм; 1,5мм; 1,75мм; 2,3мм; 2,5мм; 2,65мм; 2,8мм; 3,0мм; 3,2 мм; 3,5мм
- для ИОЛ изогнутые 3,5мм; 4,1мм; 4,8мм; 5,2мм; 5,7мм; 6,2мм
- циркулярные прямые 2,25мм
- циркулярные изогнутые с углом 60° 2,25мм; 3,0мм; 6,0мм
- серповидные изогнутые скос вверх 1,75мм; 2,25мм
- серповидные изогнутые скос вниз 2,25мм
- передней камеры микровитреоретинальный 0,6мм
- передней камеры микровитреоретинальный 0,9мм (Blumenthal)
- микровитреоретинальный 0,6мм; 0,9мм; 1,1мм
- различного размера лезвия и заточки, прямые и изогнутые

57. Лезвия одноразовые сменные Micro-Sharp: различных модификаций

58. Лезвия сменные Micro-Blade с углом 15° и 30°

59. Лезвия сменные игольчатые с режущей кромкой: 1,5мм; 3,0мм; 5,0мм; 7,0мм

60. Трепаны и рукоятки:

- лакримальный (Sisler).
- различных модификаций

61. Ножи офтальмологические хирургические Beaver EdgeAhead 0,9 мм: прямой и изогнутый

62. Ножницы офтальмологические хирургические по Весткотту

- 108 мм, режущая часть 16 мм (Wescott Scissors, 108 mm, blade 16 mm).
- различных модификаций

63. Роговичные ножницы (Castroviejo)

- лезвия 10 мм, длина 100 мм; левые и правые
- различных модификаций

64. Ножницы офтальмологические хирургические

Предупреждение при использовании

Не используйте изделие, если упаковка пакета открыта или повреждена.

Внимание: перед использованием прочтите все предупреждения и инструкции перед применением. Неправильное применение может повлечь

за собой травму пациента или другие нежелательные явления, вплоть до инвалидизации или смерти пациента.

Изделие предназначено для одноразового применения. Не использовать повторно. Не заменять, не переустанавливать и не использовать другие элементы изделия. Это устройство не должно продаваться в свободной розничной сети. Данные медицинские изделия должны использоваться только, как инструменты офтальмологические хирургические, однократного применения.

Процедуру должен проводить обученный персонал с ориентировкой на анатомию, технически грамотный и потенциально готовый к осложнениям.

Показания для применения:

Инструменты микрохирургические офтальмологические режущие применяются при проведении различного рода офтальмологических хирургических вмешательствах – от манипуляций на амбулаторном приеме до узкоспециальных офтальмологических микрохирургических операций.

Противопоказания:

Отсутствуют.

Внимание: Для снижения уровня риска заражением ВИЧ или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами.

Инструкция по применению:

- Обработка рук персонала перед проведением манипуляции/операции – согласно принятому в клинике протоколу
- Обязательно использование средств индивидуальной защиты – перчаток, очков, масок.
- Обработка операционного поля вокруг глазного яблока – согласно принятого в клинике протокола или с применением покрытий для операционного поля производства «Becton Dickinson».
- После использования инструмента – обязательная утилизация

Упаковка: полиэтилен, бумага.

Стерилизация: оксид этилена.

Утилизация: совместно с другими расходными материалами, контактировавшими с кровью, согласно принятого в клинике протокола или с применением одноразовых контейнеров для утилизации.