



Инструкция по применению

МОНТАВИТ ГЕЛЬ

Увлажняющий гель

Регистрационный номер:

Состав на 1000 мг: Гидроксиэтилцеллюлоза - 23 мг., глицерин – 100 мг., очищенная вода - 876,9 мг., хлоргексидина дигидрохлорид - 0,1 мг.

Свойства: Монтавит Гель представляет собой бесцветный прозрачный водорастворимый гель на основе гидроксиэтилцеллюлозы; заменяет естественную слизь, оказывая увлажняющее и смазывающее действие при равномерном распределении на стенках влагалища. Монтавит Гель хорошо переносится слизистой оболочкой, не содержит жиров и совместим с латексом. Безупречное качество геля гарантируется проведением химического и бактериологического контроля.

Область применения: Состояния, когда нарушен состав влагалищного секрета или снижено количество его образования. Это может происходить во время менопаузы, после различных операций на матке и яичниках, молодые женщины могут сталкиваться с этой проблемой в стрессовых ситуациях (вагинизм). Все вышеперечисленное может приводить к появлению сухости слизистой оболочки влагалища, появлению на ней микротрещин. Это вызывает дискомфорт, чувство жжения, нарушения полового акта в виде затруднения проникновения во влагалище, напряжения, неприятных болезненных ощущений. В некоторых случаях целесообразно применение Монтавит Гель при проведении гинекологических вмешательств, связанных с введением инструментов во влагалище.

Побочные эффекты: Монтавит Гель прекрасно переносится, обладая исключительно хорошим смазывающим действием; не оказывает отрицательного действия на слизистую оболочку влагалища и на половой член.

Совместимость с другими препаратами: Монтавит Гель нейтрален и хорошо совместим с водорастворимыми веществами; может являться основой для доставки и распределения этих веществ на слизистой оболочке влагалища.

Предупреждения: Монтавит Гель не является противозачаточным средством, может использоваться с презервативами, легко смывается, не оставляет пятен.

Способ применения и дозы: Перед осуществлением полового акта нанести небольшое количество Монтавит Гель на преддверие влагалища. Для борьбы с сухостью влагалища доза и частота применения определяется женщиной индивидуально.

Форма выпуска: - гигиенический одноразовый тюбик 6,5 мл x 5
- тубы по 20 гр. многоразового использования
- тубы по 50 гр. многоразового использования

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте. Хранить при комнатной температуре.

Срок годности: 60 месяцев.

Фирма-производитель: Фармацойтише Фабрик Монтавит Гезельшафт м.б.Х.
Абзам/Тироль, Австрия

Претензии потребителей направлять по адресу:

представительство компании «Фармацойтише Фабрик Монтавит Гезельшафт м.б.Х.»
107150, Россия, Москва, ул. Бойцовая д.22 стр.3
Тел. (495) 781-71-08

Директор представительства
«Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.»



Е. К. Миронова





Инструкция по применению

МОНТАВИТ ГЕЛЬ

Увлажняющий гель

Регистрационный номер:

Состав на 1000 мг: Гидроксиэтилцеллюлоза - 23 мг., глицерин – 100 мг., очищенная вода - 876,9 мг., хлоргексидина дигидрохлорид - 0,1 мг.

Свойства: Монтавит Гель представляет собой бесцветный прозрачный водорастворимый гель на основе гидроксиэтилцеллюлозы; заменяет естественную слизь, оказывая увлажняющее и смазывающее действие при равномерном распределении на стенках влагалища. Монтавит Гель хорошо переносится слизистой оболочкой, не содержит жиров и совместим с латексом. Безупречное качество геля гарантируется проведением химического и бактериологического контроля.

Область применения: Состояния, когда нарушен состав влагалищного секрета или снижено количество его образования. Это может происходить во время менопаузы, после различных операций на матке и яичниках, молодые женщины могут сталкиваться с этой проблемой в стрессовых ситуациях (вагинизм). Все вышеперечисленное может приводить к появлению сухости слизистой оболочки влагалища, появлению на ней микротрещин. Это вызывает дискомфорт, чувство жжения, нарушения полового акта в виде затруднения проникновения во влагалище, напряжения, неприятных болезненных ощущений. В некоторых случаях целесообразно применение Монтавит Гель при проведении гинекологических вмешательств, связанных с введением инструментов во влагалище.

Побочные эффекты: Монтавит Гель прекрасно переносится, обладая исключительно хорошим смазывающим действием; не оказывает отрицательного действия на слизистую оболочку влагалища и на половой член.

Совместимость с другими препаратами: Монтавит Гель нейтрален и хорошо совместим с водорастворимыми веществами; может являться основой для доставки и распределения этих веществ на слизистой оболочке влагалища.

Предупреждения: Монтавит Гель не является противозачаточным средством, может использоваться с презервативами, легко смывается, не оставляет пятен.

Способ применения и дозы: Перед осуществлением полового акта нанести небольшое количество Монтавит Гель на преддверие влагалища. Для борьбы с сухостью влагалища доза и частота применения определяется женщиной индивидуально.

Форма выпуска: - гигиенический одноразовый тюбик 6,5 мл x 5
- тубы по 20 гр. многоразового использования
- тубы по 50 гр. многоразового использования

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте. Хранить при комнатной температуре.

Срок годности: 60 месяцев.

Фирма-производитель: Фармацойтише Фабрик Монтавит Гезельшафт м.б.Х.
Абзам/Тироль, Австрия

Претензии потребителей направлять по адресу:

представительство компании «Фармацойтише Фабрик Монтавит Гезельшафт м.б.Х.»
107150, Россия, Москва, ул. Бойцовая д.22 стр.3
Тел. (495) 781-71-08



Директор представительства
«Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.»

Е. К. Миронова





Инструкция по применению

МОНТАВИТ ГЕЛЬ

Увлажняющий гель

Регистрационный номер:

Состав на 1000 мг: Гидроксиэтилцеллюлоза - 23 мг., глицерин – 100 мг., очищенная вода - 876,9 мг., хлоргексидина дигидрохлорид - 0,1 мг.

Свойства: Монтavit Гель представляет собой бесцветный прозрачный водорастворимый гель на основе гидроксиэтилцеллюлозы; заменяет естественную слизь, оказывая увлажняющее и смазывающее действие при равномерном распределении на стенках влагалища. Монтavit Гель хорошо переносится слизистой оболочкой, не содержит жиров и совместим с латексом. Безупречное качество геля гарантируется проведением химического и бактериологического контроля.

Область применения: Состояния, когда нарушен состав влагалищного секрета или снижено количество его образования. Это может происходить во время менопаузы, после различных операций на матке и яичниках, молодые женщины могут сталкиваться с этой проблемой в стрессовых ситуациях (вагинизм). Все вышеперечисленное может приводить к появлению сухости слизистой оболочки влагалища, появлению на ней микротрещин. Это вызывает дискомфорт, чувство жжения, нарушения полового акта в виде затруднения проникновения во влагалище, напряжения, неприятных болезненных ощущений. В некоторых случаях целесообразно применение Монтavit Гель при проведении гинекологических вмешательств, связанных с введением инструментов во влагалище.

Побочные эффекты: Монтavit Гель прекрасно переносится, обладая исключительно хорошим смазывающим действием; не оказывает отрицательного действия на слизистую оболочку влагалища и на половой член.

Совместимость с другими препаратами: Монтavit Гель нейтрален и хорошо совместим с водорастворимыми веществами; может являться основой для доставки и распределения этих веществ на слизистой оболочке влагалища.

Предупреждения: Монтavit Гель не является противозачаточным средством, может использоваться с презервативами, легко смывается, не оставляет пятен.

Способ применения и дозы: Перед осуществлением полового акта нанести небольшое количество Монтavit Гель на преддверие влагалища. Для борьбы с сухостью влагалища доза и частота применения определяется женщиной индивидуально.

Форма выпуска: - гигиенический одноразовый тюбик 6,5 мл x 5
- тубы по 20 гр. многоразового использования
- тубы по 50 гр. многоразового использования

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте. Хранить при комнатной температуре.

Срок годности: 60 месяцев.

Фирма-производитель: Фармацойтише Фабрик Монтavit Гезельшафт м.б.Х.
Абзам/Тироль, Австрия

Претензии потребителей направлять по адресу:

представительство компании «Фармацойтише Фабрик Монтavit Гезельшафт м.б.Х.»
107150, Россия, Москва, ул. Бойцовая д.22 стр.3
Тел. (495) 781-71-08

Директор представительства
«Фармацойтише Фабрик Монтavit Гез.м.б.Х.»



Е. К. Миронова