

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ГК «Респект»



Ганиев Р.А.

**Инструкция по использованию
изделия медицинского назначения**

**«Пакеты полиэтиленовые с замками застёжками и ярлыками, для
сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических
учреждений - «Респект»**

ТУ 9398-001-13014251-2012

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА А, Б, В, Г

Пакеты полиэтиленовые с замками застёжками и ярлыками, для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. Предназначены для сбора медицинских отходов классов А, Б, В, Г, Д. Пакеты полиэтиленовые со стяжками полностью соответствуют СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

Выпускаются в следующих типоразмерах и цветах:

330 X 300/А;
330 X 600/А;
400 X 500/А;
500 X 600/А;
600 X 1000/А;
700 X 800/А;
700 X 1000/А;
800 X 900/А;
800 X 1000/А;
700 X 1100/А;
900 X 1200/А;
330 X 300/Б;
330 X 600/Б;
400 X 500/Б;
500 X 600/Б;
600 X 1000/Б;
700 X 800/Б;
700 X 1000/Б;
800 X 900/Б;
800 X 1000/Б;
700 X 1100/Б;
900 X 1200/Б;
330 X 300/В;
330 X 600/В;
500 X 600/В;
600 X 1000/В;
700 X 800/В;
700 X 1000/В;
800 X 900/В;
800 X 1000/В;
700 X 1100/В;
900 X 1200/В;
330 X 300/Г;
330 X 600/Г;
500 X 600/Г;
400 X 500/Г;
600 X 1000/Г;
700 X 800/Г;
700 X 1000/Г;
800 X 900/Г;
800 X 1000/Г;
700 X 1100/Г;
900 X 1200/Г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАКЕТОВ:

Одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов должны обеспечивать герметизацию и возможность безопасного сбора в них. Пакеты оснащаются специальными замками застёжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения. Пакеты имеют разные цвета в соответствии с тем классом отходов, для которых предназначены. Пакеты для сбора отходов кл. А должны иметь белую окраску, кл. Б - желтую, кл. В - красную, кл. Г - черную. При соблюдении всех правил герметизации использование пакетов снижает до 0 % риск распространения инфекции за пределы ЛПУ. Одноразовые пакеты, обладают высокой прочностью и герметичностью.

Комплекующие: пакет, замок застёжка, ярлык.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Инструкция по эксплуатации одноразовых полиэтиленовых пакетов для сбора и хранения медицинских отходов:

1. Достаньте пакет нужного вам типоразмера и класса опасности из коробки.
2. Расправьте пакет и раскройте его по горловине.
3. Руками придайте ему округлую форму.
4. Вставьте его в подходящую по размеру тару.
5. Для фиксации пакета загните его края по краю тары.
6. Проверьте, касается ли дно пакета дна тары.
7. Заполните пакет на 3/4 отходами выбранного класса опасности. Следите за тем, чтобы в пакет не попал острый инструментарий.
8. Соберите края пакета и выпустите из него воздух.
9. Перекрутите горловину пакета.
10. Герметизируйте пакет при помощи замка застёжки.

Пакет готов к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения отходов на территории ЛПУ.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАКЕТОВ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ.

Лечебно-профилактическое учреждение вне зависимости от его профиля и конечной мощности в результате своей деятельности образует различные по фракционному составу и степени опасности отходы.

Все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности. Класс А - неопасные отходы ЛПУ. Класс Б - опасные (рискованные) отходы ЛПУ. Класс В - чрезвычайно опасные отходы ЛПУ. Класс Г - отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным. Класс Д - радиоактивные отходы ЛПУ.

Пакеты для утилизации медицинских отходов класса А

Отходы класса А образуются в следующих структурных подразделениях:

- палатные отходы отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических) ЛПУ;
- административно-хозяйственные помещения ЛПУ;

- центральные пищеблоки, буфеты отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических);
- внекорпусной территории лечебно-профилактического учреждения.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставляются к местам установки (меж)корпусных контейнеров и перегружаются в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. Многоразовая тара после сбора и опорожнения подлежит мытью и дезинфекции. Крупногабаритные отходы данного класса собираются в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции.

Пакеты для утилизации медицинских отходов класса Б

Отходы класса Б образуются в следующих структурных подразделениях:

- операционные;
- реанимационные;
- процедурные, перевязочные и другие манипуляционно-диагностические помещения ЛПУ;
- инфекционные, кожно-венерологические отделения ЛПУ;
- медицинские и патолого-анатомические лаборатории;
- лаборатории, работающие с микроорганизмами 3-4 групп патогенности;
- виварии, ветеринарные лечебницы.

Все отходы, образующиеся в этих подразделениях, после дезинфекции собираются в одноразовую герметичную упаковку. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) закрепляется на специальных стойках (тележках). После заполнения пакета примерно на 3/4 из него удаляется воздух, и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет его герметизацию. Удаление воздуха и герметизация одноразового пакета производится в марлевой повязке и резиновых перчатках. Одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса Б маркируются надписью "Опасные отходы. Класс Б" с нанесением кода подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Пакеты для утилизации медицинских отходов класса В

Отходы класса В образуются в следующих структурных подразделениях:

- подразделения для пациентов с особо опасными и карантинными инфекциями;
- лаборатории, работающие с микроорганизмами 1-2 групп патогенности;
- фтизиатрические и микологические клиники (отделения).

Все отходы, образующиеся в данных подразделениях, подлежат дезинфекции в соответствии с действующими нормативными документами. Сбор отходов данного класса осуществляется в одноразовую упаковку. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) должна быть закреплена на специальных стойках (тележках). После заполнения пакета примерно на 3/4 из него удаляется воздух, и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет его герметизацию с соблюдением требований техники безопасности с возбудителями 1-2 групп патогенности. Микробиологические культуры и штаммы, вакцины должны собираться в одноразовую твердую герметичную

упаковку.

Транспортирование всех видов отходов класса В вне пределов медицинского подразделения осуществляется только в одноразовой упаковке после ее герметизации. В установленных местах загерметизированные одноразовые емкости (баки, пакеты) помещаются в (меж)корпусные контейнеры, предназначенные для сбора отходов класса В. Одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса В маркируются надписью "Чрезвычайно опасные отходы. Класс В" с нанесением кода подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Пакеты для утилизации медицинских отходов класса Г

Отходы класса Г образуются в следующих структурных подразделениях:

- диагностические подразделения;
- отделения химиотерапии;
- натолого-анатомические отделения;
- фармацевтические цехи, аптеки, склады;
- химические лаборатории;
- административно-хозяйственные помещения.

Степень токсичности каждого вида отходов данного класса определяется согласно классификатору токсичных промышленных отходов и методическим рекомендациям по определению класса токсичности промышленных отходов. Использованные люминесцентные лампы, ртуть содержащие приборы и оборудование собираются в закрытые герметичные емкости. После заполнения емкости герметизируются и хранятся в вспомогательных помещениях. Вывозятся специализированными предприятиями на договорных условиях. Сбор, хранение цитостатиков, относящихся к отходам 1-2 классов токсичности, осуществляют в соответствии с классификатором токсичных промышленных отходов и другими действующими нормативными документами. Отходы класса Г, относящиеся ко 2 и 3-му классу токсичности в соответствии с классификатором токсичных промышленных отходов, собираются и упаковываются в твердую упаковку, четвертого класса - в мягкую.

Пакеты для утилизации медицинских отходов класса Д

Отходы класса Д образуются в следующих структурных подразделениях:

- диагностические лаборатории (отделения);
- радиоизотопные лаборатории и рентгеновские кабинеты.

Сбор, хранение, удаление отходов данного класса осуществляется в соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности и других действующих нормативных документов, которые регламентируют обращение с радиоактивными веществами. В соответствии с требованиями статьи 24 Закона РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" не допускается:

- пересыпать отходы классов Б и В из одной емкости в другую;
- устанавливать одноразовые и многоразовые емкости около электронагревательных приборов;
- утаптывать любые отходы руками;
- осуществлять сбор отходов без перчаток.

Прошнуровано и скреплено
5 ЛИСТОВ
«Группа компаний «Реснекс»
Директор
22 ноября 2012г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ГК «Респект»

420061, г. Казань, ул. Космонавтов 59

Тел.: (843) 570-55-04

Пакеты полиэтиленовые с замками застёжки

и ярлыками, для сбора, хранения и удаления

отходов ЛПУ - «Респект»

ТУ 9398-001-13014251-2012

Класс _____

Размер _____ мм.

Упаковка _____ кмп.

Рег. Уд. № _____ от _____

Дата изг.: _____

Срок год.: _____

