

Фотографические изображения медицинского изделия

Увлажняющий и смазывающий раствор для защиты глаз «Теалоз-Дуо» в вариантах исполнения:

I. Увлажняющий и смазывающий раствор для защиты глаз «Теалоз-Дуо» 5 мл

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- Коробка упаковочная картонная – 1 шт.

II. Увлажняющий и смазывающий раствор для защиты глаз «Теалоз-Дуо» 10 мл

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- Коробка упаковочная картонная – 1 шт.





Gebrauchsanweisung beachten

Thealoz Duo

**Befeuchtung, Benetzung
und Schutz trockener Augen.
Zur Behandlung moderater bis
schwerer Symptome trockener
Augen**

ABAK®-Flasche - Ohne
Konservierungsmittel.

ZUSAMMENSETZUNG:

Trehalose 3 g
Natriumhyaluronat 0,15 g
Natriumchlorid, Trometamol, HCl,
Wasser für Injektionszwecke
..... q.s. ad. 100 ml

NAME UND ANSCHRIFT DES HERSTELLERS:

Laboratoires THEA
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand -
Cedex 2
FRANKREICH

WANN SOLLTE THEALAZ DUO ANGEWENDET WERDEN:

THEALAZ DUO enthält eine Lösung
zur Anwendung am Auge oder
auf Kontaktlinsen. THEALAZ DUO
wird empfohlen zur Behandlung
der Symptome trockener Augen
(Beschwerdegefühl, Stechen,
Brennen) aufgrund äußerer
Einflüsse wie Wind, Rauch,
Staub, Luftverschmutzung, starker
Sonneneinstrahlung, Kälte,
trockener Hitze, Klimaanlage
sowie Flugreisen oder langer
Bildschirmarbeit.

THEALAZ DUO enthält keine
Konservierungsmittel und
bietet optimalen Schutz für das
Augengewebe. Es ist für alle Arten
von Kontaktlinsen geeignet und
sorgt für sofortigen Tragekomfort
während des Tages.

EIGENSCHAFTEN:


THEALAZ DUO ist eine sterile,
hypotone und pH-neutrale Lösung
ohne Konservierungsmittel.
Hauptbestandteile sind Trehalose,
eine natürliche Substanz, die in
zahlreichen Pflanzen- und Tierarten
vorkommt, und Hyaluronsäure
(Natriumhyaluronat), eine im Auge
vorkommende, natürliche Substanz.

Dank seiner physikalisch-
chemischen Merkmale
verfügt Trehalose über
sehr gute antioxidative,
feuchtigkeitsspendende und
schützende Eigenschaften.
Trehalose ist ein wesentliches
Element der anhydrobiotischen
Mechanismen, die in verschiedenen
Mikroorganismen beobachtet
werden (ein verlangsamer
Stoffwechsel ermöglicht es ihnen,
auch extreme Trockenheit zu
überleben).

Trehalose wirkt antioxidativ
und schützt und stabilisiert die
Zellmembranen, indem es die
Veränderung von Proteinen und die
Zerstörung von Lipiden verhindert.

Hyaluronsäure ist ein im
menschlichen Körper (Auge)
natürlich vorkommender
Mehrfachzucker mit
außergewöhnlichen
feuchtigkeitsbindenden
Eigenschaften, die für eine
gleichmäßige und lang
anhaltende Befeuchtung der
Hornhautoberfläche sorgen.
Die bioadhäsiven Eigenschaften
bewirken eine gute Haftung auf
der Augenoberfläche, eine lang
anhaltende Linderung der
Symptome trockener Augen und
eine rasche Regeneration des
geschädigten Hornhautgewebes.

Durch die Kombination von
Trehalose und Hyaluronsäure
bewirkt THEALAZ DUO eine lang
anhaltende, intensive Befeuchtung

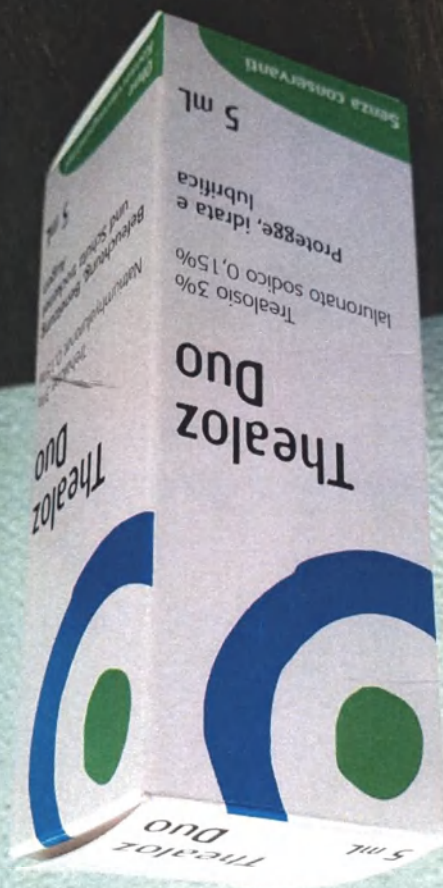



 Gebrauchsanweisung beachten

Thealoz Duo

**Befeuchtung, Benetzung
und Schutz trockener Augen.
Zur Behandlung moderater bis
schwerer Symptome trockener
Augen**

ABAK®-Flasche - Ohne
Konservierungsmittel.

ZUSAMMENSETZUNG:

Trehalose..... 3 g
Natriumhyaluronat..... 0,15 g
Natriumchlorid, Trometamol, HCl,
Wasser für Injektionszwecke.....
..... q.s. ad. 100 ml

NAME UND ANSCHRIFT DES HERSTELLERS:

Laboratoires THEA
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand -
Cedex 2
FRANKREICH

WANN SOLLTE THEALOX DUO ANGEWENDET WERDEN:

THEALOX DUO enthält eine Lösung
zur Anwendung am Auge oder
auf Kontaktlinsen. THEALOX DUO
wird empfohlen zur Behandlung
der Symptome trockener Augen
(Beschwerdegefühl, Stechen,
Brennen) aufgrund äußerer
Einflüsse wie Wind, Rauch,
Staub, Luftverschmutzung, starker
Sonneneinstrahlung, Kälte,
trockener Hitze, Klimaanlage
sowie Flugreisen oder langer
Bildschirmarbeit.

THEALOX DUO enthält keine
Konservierungsmittel und
bietet optimalen Schutz für das
Augengewebe. Es ist für alle Arten
von Kontaktlinsen geeignet und
sorgt für sofortigen Tragekomfort
während des Tages.

EIGENSCHAFTEN:

THEALOX DUO ist eine sterile,
hypotone und ph-neutrale Lösung
ohne Konservierungsmittel.
Hauptbestandteile sind Trehalose,
eine natürliche Substanz, die in
zahlreichen Pflanzen- und Tierarten
vorkommt, und Hyaluronsäure
(Natriumhyaluronat), eine im Auge
vorkommende, natürliche Substanz.

Dank seiner physikalisch-
chemischen Merkmale
verfügt Trehalose über
sehr gute antioxidative,
feuchtigkeitsspendende und
schützende Eigenschaften.
Trehalose ist ein wesentliches
Element der anhydrobiotischen
Mechanismen, die in verschiedenen
Mikroorganismen beobachtet
werden (ein verlangsamter
Stoffwechsel ermöglicht es ihnen,
auch extreme Trockenheit zu
überleben).

Trehalose wirkt antioxidativ
und schützt und stabilisiert die
Zellmembranen, indem es die
Veränderung von Proteinen und die
Zerstörung von Lipiden verhindert.

Hyaluronsäure ist ein im
menschlichen Körper (Auge)
natürlich vorkommender
Mehrfachzucker mit
außergewöhnlichen
feuchtigkeitsbindenden
Eigenschaften, die für eine
gleichmäßige und lang
anhaltende Befeuchtung der
Hornhautoberfläche sorgen.
Die bioadhäsiven Eigenschaften
bewirken eine gute Haftung auf
der Augenoberfläche, eine lang
anhaltende Linderung der
Symptome trockener Augen und
eine rasche Regeneration des
geschädigten Hornhautgewebes.

Durch die Kombination von
Trehalose und Hyaluronsäure
bewirkt THEALOX DUO eine lang
anhaltende, intensive Befeuchtung



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

7 (семь) листа(ов)

Должность: менеджер по регистрации

Подпись Архипов Д.В. Архипов Д.В.

По доверенности №355 от 17.09.18г.

«15» августа 2019 года.

