

Руководство по эксплуатации на шкафы медицинские «ШС»

Настоящее руководство распространяется на шкафы медицинские «ШС» (далее – шкафы) моделей: ШС-01, ШС-02.

1 Назначение изделия

Шкафы предназначены для хранения медикаментов и прочих медицинских материалов в медицинских учреждениях.

2 Состав изделия

Шкаф ШС-01 – металлический двухстворчатый четырехдверный. Внутри шкафа расположены три полки и разделительная перегородка, в правом верхнем углу – сейф с отдельной дверцей и замком. Двери шкафа снабжены ручками. Шкаф закрывается на два замка.

Шкаф ШС-02 – металлический одностворчатый двухдверный. Двери шкафа снабжены ручками. Шкаф закрывается на два замка повышенной секретности.

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем использовать изделие, внимательно прочитайте настоящее руководство.

3 Подготовка к работе

Распакуйте шкаф и осмотрите его состояние после транспортировки. Проверьте работу замка.

Выполните дезинфекцию всех наружных поверхностей химическим методом по ОСТ 42-21-2 путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

С помощью опор регулируемых, вкрученных в передние ножки шкафа ШС-02, отрегулируйте его устойчивость на месте установки.

4 Техническое обслуживание

Не реже одного раза в год резьбовые соединения регулируемых опор шкафа ШС-02 смазывать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733.

5 Хранение

Шкафы в упаковке предприятия – изготовителя должны храниться на складе поставщика или потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ15150. Срок хранения – 1 год.

6 Транспортирование

Шкафы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

7 Утилизация

Шкафы утилизировать как металлолом, предварительно открутив опоры регулируемые.



Руководство по эксплуатации на шкафы медицинские «ШС»

Настоящее руководство распространяется на шкафы медицинские «ШС» (далее – шкафы) моделей: ШС-01, ШС-02.

1 Назначение изделия

Шкафы предназначены для хранения медикаментов и прочих медицинских материалов в медицинских учреждениях.

2 Состав изделия

Шкаф ШС-01 – металлический двухстворчатый четырехдверный. Внутри шкафа расположены три полки и разделительная перегородка, в правом верхнем углу – сейф с отдельной дверцей и замком. Двери шкафа снабжены ручками. Шкаф закрывается на два замка.

Шкаф ШС-02 – металлический одностворчатый двухдверный. Двери шкафа снабжены ручками. Шкаф закрывается на два замка повышенной секретности.

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем использовать изделие, внимательно прочитайте настоящее руководство.

3 Подготовка к работе

Распакуйте шкаф и осмотрите его состояние после транспортировки. Проверьте работу замка.

Выполните дезинфекцию всех наружных поверхностей химическим методом по ОСТ 42-21-2 путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

С помощью опор регулируемых, вкрученных в передние ножки шкафа ШС-02, отрегулируйте его устойчивость на месте установки.

4 Техническое обслуживание

Не реже одного раза в год резьбовые соединения регулируемых опор шкафа ШС-02 смазывать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733.

5 Хранение

Шкафы в упаковке предприятия – изготовителя должны храниться на складе поставщика или потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ15150. Срок хранения – 1 год.

6 Транспортирование

Шкафы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

7 Утилизация

Шкафы утилизировать как металлолом, предварительно открутив опоры регулируемые.