

Руководство по эксплуатации на шкафы для одежды «ОВ ШМ»

Настоящее руководство распространяется на шкафы для одежды «ОВ ШМ» (далее – шкафы) моделей: ОВ ШМ 2-2, ОВ ШМ 2-3.

1 Назначение изделия

Шкафы предназначены для хранения одежды, обуви и головных уборов в медицинских учреждениях.

2 Состав изделия

Шкаф ОВ ШМ 2-2 – металлический двухдверный двухсекционный. В одной секции – полка для головных уборов, полка для обуви, штанга для одежды и два крючка. Во второй секции – нет полки для обуви. Двери снабжены ручками. Шкаф закрывается на замок. На задней стенке имеются отверстия для вентиляции.

Шкаф ОВ ШМ 2-3 отличается от шкафа ОВ ШМ 2-2 габаритами.

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем использовать изделие, внимательно прочитайте настоящее руководство.

3 Подготовка к работе

Распакуйте шкаф и осмотрите его состояние после транспортировки. Проверьте работу замка.

Выполните дезинфекцию всех наружных поверхностей химическим методом по ОСТ 42-21-2 путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

С помощью опор регулируемых, вкрученных в передние ножки, отрегулируйте его устойчивость на месте установки.

4 Техническое обслуживание

Не реже одного раза в год резьбовые соединения регулируемых опор смазывать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733.

5 Хранение

Шкафы в упаковке предприятия – изготовителя должны храниться на складе поставщика или потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ15150. Срок хранения – 1 год.

6 Транспортирование

Шкафы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

7 Утилизация

Шкафы утилизировать как металлолом, предварительно открутив опоры регулируемые.



Руководство по эксплуатации на шкафы для одежды «ОВ ШМ»

Настоящее руководство распространяется на шкафы для одежды «ОВ ШМ» (далее – шкафы) моделей: ОВ ШМ 2-2, ОВ ШМ 2-3.

1 Назначение изделия

Шкафы предназначены для хранения одежды, обуви и головных уборов в медицинских учреждениях.

2 Состав изделия

Шкаф ОВ ШМ 2-2 – металлический двухдверный двухсекционный. В одной секции – полка для головных уборов, полка для обуви, штанга для одежды и два крючка. Во второй секции – нет полки для обуви. Двери снабжены ручками. Шкаф закрывается на замок. На задней стенке имеются отверстия для вентиляции.

Шкаф ОВ ШМ 2-3 отличается от шкафа ОВ ШМ 2-2 габаритами.

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем использовать изделие, внимательно прочитайте настоящее руководство.

3 Подготовка к работе

Распакуйте шкаф и осмотрите его состояние после транспортировки. Проверьте работу замка.

Выполните дезинфекцию всех наружных поверхностей химическим методом по ОСТ 42-21-2 путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

С помощью опор регулируемых, вкрученных в передние ножки, отрегулируйте его устойчивость на месте установки.

4 Техническое обслуживание

Не реже одного раза в год резьбовые соединения регулируемых опор смазывать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733.

5 Хранение

Шкафы в упаковке предприятия – изготовителя должны храниться на складе поставщика или потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ15150. Срок хранения – 1 год.

6 Транспортирование

Шкафы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

7 Утилизация

Шкафы утилизировать как металлолом, предварительно открутив опоры регулируемые.