

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ГРУНДЛАГЕ»



Е.А.Егоров

«19» октября 2016г.

Инструкция по применению медицинского изделия

«Перчатки Sover хирургические стерильные по ТУ 2514-003-56247575-2016», производства
ООО «ГРУНДЛАГЕ», Россия

Пересмотр No.	2.00
Дата	19.10.2016

2016г.

ИП Перчатки Sover хирургические стерильные
по ТУ 2514-003-56247575-2016. Версия 2.00 от 19.10.2016г.

История изменений.

Версия документа	Действия
1.00	Первая редакция инструкции по применению
2.00	Внесение изменение в соответствии с запросом Росздравнадзора «О предоставлении материалов и сведений» от 12.09.2016 №10-41476/16

Описание. Ассортимент.

Перчатки Sover хирургические стерильные по ТУ 2514-003-56247575-2016, анатомической формы, текстурированная ладонная сторона, краг и тыльная сторона - гладкие. Одноразовые. Выпускаются для правой и левой руки. Имеют высокую эластичность, что сводит к минимуму вероятность разрыва. Конец манжеты может быть закручен венчиком, а может быть без него.

1. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные текстурированные анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0. **Предназначены для всех видов хирургических операций.**

2. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные текстурированные одинарного хлорирования анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0. **Предназначены для всех видов хирургических операций. Внутреннее одинарное хлорирование обеспечивает более плотное прилегание перчатки к коже, что повышает тактильное восприятие.**

3. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные с полимерным покрытием текстурированные анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0. **Предназначены для всех видов хирургических операций.**

4. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные текстурированные двойного хлорирования анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0. **Предназначены для всех видов хирургических операций. Внутреннее хлорирование обеспечивает более плотное прилегание перчатки к коже, что повышает тактильное восприятие. Внешнее хлорирование обеспечивает более точный захват инструмента.**

5. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые изопреновые неопудренные текстурированные анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0. **Предназначены для всех видов хирургических операций. Перчатки хорошо растяжимы и отличаются большей устойчивостью на разрыв. Возможно использование в качестве альтернативы латексным перчаткам при аллергии на латекс.**

6. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые нитрильные (нитриловые) неопудренные текстурированные анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0. **Предназначены для всех видов хирургических операций. Возможно использование в качестве альтернативы латексным перчаткам при**

аллергии на латекс. Нитриловые перчатки лучше облегают руку при достижении температуры тела, что повышает комфорт ношения данных печаток.

7. Перчатки Sover ULTRA хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием текстурированные без венчика натурального или зеленого цветов, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10,0. **Предназначены для всех видов хирургических операций. Отсутствует валик, что позволяет перчатке удобнее сидеть на руке хирурга. Перчатка зеленого цвета может применяться в системе двойного прокола для операций с повышенным риском инфицирования – хирург надевает по две перчатки на каждую руку, внутренняя перчатка – контрастного цвета. Внутреннее полимерное покрытие облегчает надевание перчатки.**

8. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием текстурированные с венчиком и без венчика с удлинённой крагой, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10,0. **Предназначены для всех видов хирургических операций. Может применяться, когда необходимо обеспечить более высокий уровень стерильности рук хирурга. Внутреннее полимерное покрытие облегчает надевание перчатки.**

9. Перчатки Sover Double Pair хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием текстурированные без венчика (2 пары в индивидуальной упаковке: внутренняя пара контрастного цвета без венчика; внешняя пара натурального цвета без венчика), размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10,0. **Предназначены для всех видов хирургических операций. Отсутствует валик, что позволяет перчатке удобнее сидеть на руке хирурга. Перчатка контрастного цвета применяется в системе двойного прокола для операций с повышенным риском инфицирования - хирург надевает по две перчатки на каждую руку, внутренняя перчатка – контрастного цвета.**

10. Перчатки Sover Microsurgery хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием текстурированные с венчиком и без венчика повышенной тактильной чувствительности, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10,0. **Предназначены для всех хирургических операций, требующих повышенной точности, например, микрохирургические операции.**

11. Перчатки Sover Orthopedic хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием текстурированные с венчиком и без венчика повышенной прочности, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10,0. **Предназначены для видов хирургических операций, требующих применения особо прочных хирургических перчаток, например, ортопедические операции.**

Назначение.

Изделие предназначено для защиты пациента и медицинского персонала от взаимного заражения при проведении хирургических манипуляций.

Условия применения: лечебные и лечебно-профилактические учреждения.

Показания.

Любые хирургические процедуры.

Возможные побочные действия.

Возможны покраснения при индивидуальной непереносимости материала. При возникновении аллергических реакций требуется проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности при применении.

Необходимо делать все возможное, чтобы не допустить повторного использования перчаток в медицинских учреждениях, например, проводить просветительскую работу в целях сокращения масштабов ненадлежащего использования перчаток, покупать перчатки однократного применения хорошего качества и своевременно пополнять их запасы.

Не используйте перчатки с истекшим сроком годности.

Не используйте перчатки, если стерильная упаковка вскрыта или повреждена.

Требования безопасности.

Безопасное использование перчаток предусматривает:

- применение правильной техники надевания перчаток, которая предотвращает их контаминацию;
- применение правильной техники снятия перчаток, которая предотвращает контаминацию рук медицинских работников.

Не используйте перчатки, если стерильная упаковка вскрыта или повреждена.

Основные технические характеристики

1. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные текстурированные анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0.

Толщина венчика на манжете – не более 2,5 мм

Размер	Физические параметры	
	Длина (мм)	Ширина ладони (мм)
5	300 ± 10	67 ± 6
5,5	300 ± 10	72 ± 6
6	300 ± 10	77 ± 6
6,5	300 ± 10	83 ± 6
7	300 ± 10	89 ± 6
7,5	300 ± 10	95 ± 6
8	300 ± 10	102 ± 6
8,5	300 ± 10	108 ± 6
9	300 ± 10	114 ± 6
9,5	300 ± 10	121 ± 6
10,0	300 ± 10	127 ± 6

Латексные. Неопудренные. Стерильные. Одноразовые.
Для всех видов хирургических операций.
Поверхность: текстурированная (микротекстура по всей поверхности перчаток).
Цвет: натуральный (от молочно-белого до желтого).

2. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные текстурированные одинарного хлорирования анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0.

Толщина венчика на манжете – не более 2,5 мм

Размер	Физические параметры	
	Длина (мм)	Ширина ладони (мм)
5	300 ± 10	67 ± 6
5,5	300 ± 10	72 ± 6
6	300 ± 10	77 ± 6
6,5	300 ± 10	83 ± 6
7	300 ± 10	89 ± 6
7,5	300 ± 10	95 ± 6
8	300 ± 10	102 ± 6
8,5	300 ± 10	108 ± 6
9	300 ± 10	114 ± 6
9,5	300 ± 10	121 ± 6
10,0	300 ± 10	127 ± 6

Латексные. Неопудренные. Стерильные. Одноразовые.
Для всех видов хирургических операций.
Поверхность: текстурированная (микротекстура по всей поверхности перчаток).
Цвет: натуральный (от молочно-белого до желтого).

3. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные с полимерным покрытием текстурированные анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0.

Толщина венчика на манжете – не более 2,5 мм

Размер	Физические параметры	
	Длина (мм)	Ширина ладони (мм)
5	300 ± 10	67 ± 6
5,5	300 ± 10	72 ± 6
6	300 ± 10	77 ± 6
6,5	300 ± 10	83 ± 6
7	300 ± 10	89 ± 6
7,5	300 ± 10	95 ± 6
8	300 ± 10	102 ± 6
8,5	300 ± 10	108 ± 6
9	300 ± 10	114 ± 6
9,5	300 ± 10	121 ± 6
10,0	300 ± 10	127 ± 6

Латексные. Неопудренные. Стерильные. Одноразовые.
Для всех видов хирургических операций.
Поверхность: текстурированная (микротекстура по всей поверхности перчаток).

Цвет: натуральный (от молочно-белого до желтого).

4. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные текстурированные двойного хлорирования анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0.

Толщина венчика на манжете – не более 2,5 мм

Размер	Физические параметры	
	Длина (мм)	Ширина ладони (мм)
5	300 ± 10	67 ± 6
5,5	300 ± 10	72 ± 6
6	300 ± 10	77 ± 6
6,5	300 ± 10	83 ± 6
7	300 ± 10	89 ± 6
7,5	300 ± 10	95 ± 6
8	300 ± 10	102 ± 6
8,5	300 ± 10	108 ± 6
9	300 ± 10	114 ± 6
9,5	300 ± 10	121 ± 6
10,0	300 ± 10	127 ± 6

Латексные. Неопудренные. Стерильные. Одноразовые.

Для всех видов хирургических операций

Поверхность: текстурированная (микротекстура по всей поверхности перчаток).

Цвет: натуральный (от молочно-белого до желтого).

5. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые изопреновые неопудренные текстурированные анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0.

Толщина венчика на манжете – не более 2,5 мм

Размер	Физические параметры	
	Длина (мм)	Ширина ладони (мм)
5	300 ± 10	67 ± 6
5,5	300 ± 10	72 ± 6
6	300 ± 10	77 ± 6
6,5	300 ± 10	83 ± 6
7	300 ± 10	89 ± 6
7,5	300 ± 10	95 ± 6
8	300 ± 10	102 ± 6
8,5	300 ± 10	108 ± 6
9	300 ± 10	114 ± 6
9,5	300 ± 10	121 ± 6
10,0	300 ± 10	127 ± 6

Изопреновые (синтетический каучук). Неопудренные. Стерильные. Одноразовые.

Для всех видов хирургических операций.

Поверхность: текстурированная (микротекстура по всей поверхности перчаток).

Цвет: натуральный (от молочно-белого до желтого).

6. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые нитрильные (нитриловые) неопудренные текстурированные анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0.

Толщина венчика на манжете – не более 2,5 мм

Размер	Физические параметры	
	Длина (мм)	Ширина ладони (мм)
5	300 ± 10	67 ± 6
5,5	300 ± 10	72 ± 6
6	300 ± 10	77 ± 6
6,5	300 ± 10	83 ± 6
7	300 ± 10	89 ± 6
7,5	300 ± 10	95 ± 6
8	300 ± 10	102 ± 6
8,5	300 ± 10	108 ± 6
9	300 ± 10	114 ± 6
9,5	300 ± 10	121 ± 6
10,0	300 ± 10	127 ± 6

Нитриловые (Синтетический каучук). Неопудренные. Стерильные. Одноразовые.

Для всех видов хирургических операций.

Поверхность: текстурированная (микротекстура по всей поверхности перчаток).

Цвет: синий.

7. Перчатки Sover ULTRA хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием текстурированные без венчика натурального или зеленого цветов, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0.

Размер	Физические параметры	
	Длина (мм)	Ширина ладони (мм)
5	300 ± 10	67 ± 6
5,5	300 ± 10	72 ± 6
6	300 ± 10	77 ± 6
6,5	300 ± 10	83 ± 6
7	300 ± 10	89 ± 6
7,5	300 ± 10	95 ± 6
8	300 ± 10	102 ± 6
8,5	300 ± 10	108 ± 6
9	300 ± 10	114 ± 6
9,5	300 ± 10	121 ± 6
10,0	300 ± 10	127 ± 6

Латексные. Неопудренные. Стерильные. Одноразовые.
 Для всех видов хирургических операций.
 С полимерным покрытием (Flexicoat SG).
 Поверхность: текстурированная (микротекстура по всей поверхности перчаток).
 Цвет: Зеленый или натуральный (от молочно-белого до желтого).

8. Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием текстурированные с венчиком и без венчика с удлиненной крагой, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0.
 Толщина венчика на манжете – не более 2,5 мм

Размер	Физические параметры	
	Длина (мм)	Ширина ладони (мм)
5	450 ± 10	67 ±6
5,5	450 ± 10	72 ± 6
6	450 ± 10	77 ±6
6,5	450 ± 10	83 ±6
7	450 ± 10	89 ±6
7,5	450 ± 10	95 ±6
8	450 ± 10	102 ±6
8,5	450 ± 10	108 ±6
9	450 ± 10	114 ±6
9,5	450 ± 10	121 ±6
10,0	450 ± 10	127 ± 6

Латексные. Неопудренные. Стерильные. Одноразовые.
 Для всех видов хирургических операций.
 С полимерным покрытием (Flexicoat SG).
 Поверхность: текстурированная (микротекстура по всей поверхности перчаток).
 Цвет: натуральный (от молочно-белого до желтого).

9. Перчатки Sover Double Pair хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием текстурированные без венчика (2 пары в индивидуальной упаковке: внутренняя пара контрастного цвета без венчика; внешняя пара натурального цвета без венчика), размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0.

Размер	Физические параметры	
	Длина (мм)	Ширина ладони (мм)
5	300 ± 10	67 ±6
5,5	300 ± 10	72 ± 6
6	300 ± 10	77 ±6
6,5	300 ± 10	83 ±6
7	300 ± 10	89 ±6
7,5	300 ± 10	95 ±6
8	300 ± 10	102 ±6

8,5	300 ± 10	108 ± 6
9	300 ± 10	114 ± 6
9,5	300 ± 10	121 ± 6
10,0	300 ± 10	127 ± 6

Внешняя пара: Латексные. Неопудренные. Стерильные. Одноразовые.

Для всех хирургических операций, при которых требуется дополнительная защита от инфекций и контроль целостности перчатки.

С полимерным покрытием (Flexicoat SG). Цвет: натуральный (от молочно-белого до желтого).

Поверхность: текстурированная (микротекстура по всей поверхности перчаток).

Внутренняя пара: Латексные. Неопудренные. Стерильные. Одноразовые.

С полимерным покрытием (Flexicoat SG). Цвет: зеленый.

Для всех хирургических операций, при которых требуется дополнительная защита от инфекций и контроль целостности перчатки.

Поверхность: текстурированная (микротекстура по всей поверхности перчаток).

10. Перчатки Sover Microsurgery хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием текстурированные с венчиком и без венчика повышенной тактильной чувствительности, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0.
- Толщина венчика на манжете – не более 2,5 мм

Размер	Физические параметры	
	Длина (мм)	Ширина ладони (мм)
5	300±10	67 ± 6
5,5	300±10	72 ± 6
6	300±10	77 ± 6
6,5	300±10	83 ± 6
7	300±10	89 ± 6
7,5	300±10	95 ± 6
8	300±10	102 ± 6
8,5	300±10	108 ± 6
9	300±10	114 ± 6
9,5	300±10	121 ± 6
10,0	300±10	127 ± 6

Латексные. Неопудренные. Стерильные. Одноразовые.

Для всех хирургических операций, требующих повышенной точности (микрохирургия).С полимерным покрытием (Flexicoat SG).

Поверхность: текстурированная (микротекстура по всей поверхности перчаток).

Цвет: натуральный (от молочно-белого до желтого).

11. Перчатки Sover Orthopedic хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием текстурированные с венчиком и без венчика повышенной прочности, размеры 5, 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5, 10,0.

Размер	Физические параметры
--------	----------------------

	Длина (мм)	Ширина ладони (мм)
5	300±10	67 ±6
5,5	300±10	72 ± 6
6	300±10	77 ±6
6,5	300±10	83 ±6
7	300±10	89 ±6
7,5	300±10	95 ±6
8	300±10	102 ±6
8,5	300±10	108 ±6
9	300±10	114 ±6
9,5	300±10	121 ±6
10,0	300±10	127 ± 6

Латексные. Неопудренные. Стерильные. Одноразовые.

Для видов хирургических операций, требующих применения особо прочных хирургических перчаток (ортопедия).


С полимерным покрытием (Flexicoat SG).

Поверхность: текстурированная (микротекстура по всей поверхности перчаток).


Цвет: натуральный (от молочно-белого до желтого).

Способ применения.

Как надевать перчатки:

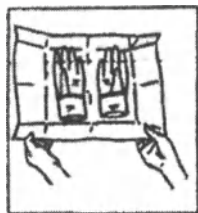


1. Откройте стерильную упаковку

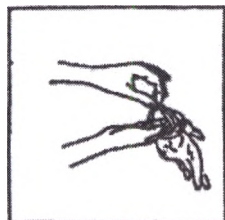

2. Достаньте перчатку из упаковки. Прикасайтесь только к той части перчатки, которая будет находиться на запястье (верхний край манжеты)



3. Наденьте первую перчатку.

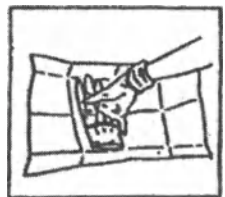

4. Возьмите вторую перчатку рукой без перчатки и прикасайтесь к той части перчатки, которая будет находиться на запястье.



5. Чтобы избежать прикосновения руки с надетой перчаткой, выверните наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки в перчатке, это позволит вам надеть вторую перчатку.




6. Наденьте вторую перчатку.

После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток!


Как снимать перчатки:



1. Захватите пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее, не дотрагиваясь кожи предплечья, и стягивайте ее с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку.

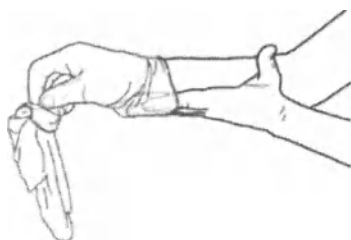

2. Держите снятую перчатку в руке с надетой перчаткой, подведите пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь – между второй перчаткой и запястьем. Снимите вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложите в первую перчатку.

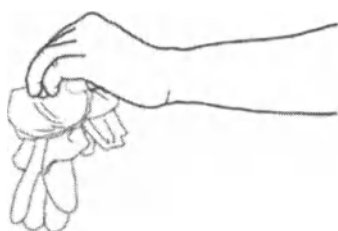

3. Утилизируйте снятые перчатки.
(см. пункт «Утилизация»)

Требования к охране окружающей среды.

Изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Методы и средства дезинфекции и предстерилизационной очистки.

Дезинфекция не предусмотрена. Перчатки Sover хирургические стерильные - одноразовые.

Стерильность.

Метод стерилизации - газовый (оксидом этилена). Повторная стерилизация не предусмотрена.

Упаковка.

Перчатки упакованы в индивидуальную упаковку – в бумажный пакет, в котором правая перчатка лежит отдельно от левой, и далее так же в бумажный пакет, который выполняет защитную функцию и сохраняет стерильность. Перчатки должны быть упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю), изготовленную по нормативно-технической документации изготовителя и соответствующей требованиям действующих стандартов и регистрационному удостоверению №ФСЗ 2009/03805 от 24.07.2012г. Материалы для упаковки закупаются у «ДГМ Фарма-Аппарате Хандель АГ», Швейцария. Первичная упаковка - конверт, спаянный из двух частей из бумаги, первая часть - бумага весом 40 грамм на метр с полиэтиленовым покрытием 18 грамм на метр с одной стороны, вторая часть - бумага весом 60 грамм на метр с клеевым покрытием 3 грамм на метр. Перчатки исполнения Sover Double Pair упакованы по 2 пары в индивидуальной упаковке: внутренняя пара контрастного цвета без венчика; внешняя пара натурального цвета без венчика.

Транспортная упаковка представляет собой ящик из гофрокартона, в который укладывается по 200 или 400 пар изделий одного артикула. Также предусмотрены упаковки малого объема по 5, 10, 15, 20, 25 пар.

Утилизация.

Перчатки и упаковка не содержат в своей конструкции материалов, опасных для окружающей среды и здоровья человека, однако после использования перчатки относятся к медицинским отходам класса Б и В и подлежат требованиям утилизации согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 (для отходов класса Б и В).

Гарантийные обязательства.

Производитель гарантирует соответствие перчаток Sover требованиям нормативных документов при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Противопоказания.

Аллергическая реакция на материал.

Условия транспортировки и хранения.

Перчатки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Распаковывать перчатки после транспортирования при минусовых температурах следует, выдержав их в упаковке в течение суток при температуре хранения.

Перчатки хранят в упакованном виде при температуре от 0 до + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

В процессе хранения перчатки должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей, находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию агрессивных веществ и сред.

Условия эксплуатации.


Перчатки хранят в упакованном виде при температуре от 0°C 0 до + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Срок годности.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Маркировка.

На упаковку нанесены следующие символы:

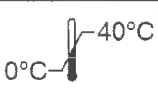	Код партии
	Не использовать повторно
	Производитель
	Дата изготовления
	Использовать до
	Температурный диапазон (от 0°C до +40°C)
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Содержит натуральный латекс
	Не допускать воздействие солнечного света
	Беречь от влаги
	Стерилизация с применением окиси этилена
	Не содержит натуральный латекс (для изделий из изопрена и нитрила)

Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУНДЛАГЕ» (ООО «ГРУНДЛАГЕ»)
197720, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, п. Решетниково, дом 11А, литера Е.
Тел.: +7(921)951-26-68. E-mail: e.egorov@grundlage.info

Места производства:

197720 г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, п. Решетниково, д.11а, литера Е;
197229, г. Санкт-Петербург, ул. Красных партизан (Лахта), д. 14, ангар 10.

В настоящем документе
Прошито, пронумеровано и
Скреплено печатью

13 (тринадцать) листов
Генеральный директор
ООО «ГРУНДЛАГЕ»

Егоров Е.А.

