



НАДЕВАНИЕ И СНЯТИЕ ЛИНЗ:

1. Надевание и снятие линзы всегда следует начинать с одного и того же глаза (например, с правого).
2. Делайте это над гладкой поверхностью, что бы без труда найти линзу в случае ее падения.
3. Перед любыми действиями с линзами тщательно вымойте руки с мылом и высушите их полотенцем, не оставляющим волосинок.
4. Прикасаться к линзам можно только подушечками пальцев.
5. Перед надеванием линзы на глаз убедитесь, что она:
 - Достаточно увлажнена
 - Не содержит трещин или разрывов
 - Находится в правильном положении – поместите линзу на кончик указательного пальца и проверьте положение линзы.

Если края линзы направлены вверх, линза в правильном положении. Если края линзы направлены в стороны, то линза вывернута.

НАДЕВАНИЕ ЛИНЗ ОДНОЙ РУКОЙ:

- Поместите линзу на подушечку указательного пальца;
- Смотрите прямо перед собой;
- Оттяните вниз нижнее веко средним пальцем;
- Переведите взгляд вверх и зафиксируйте его;
- Расположите линзу на нижней белой части глаза (склере);
- Осторожно переведите взгляд вниз;
- Медленно отпустите нижнее веко;
- Закройте глаза – линза сама разместиться на глазу.

НАДЕВАНИЕ ЛИНЗ ДВУМЯ РУКАМИ:

- Поместите линзу на подушечку указательного пальца;
- Средним пальцем оттяните вниз нижнее веко;
- Средним пальцем другой руки оттяните верхнее веко вверх;
- Поместите линзу на глазное яблоко;
- Не отпуская пальцы, переведите взгляд вниз: линза сама встанет в удобное положение;
- Осторожно отпустите веки.

СНЯТИЕ ДИНЗЫ:

- Оттяните пальцем нижнее веко, смотрите вверх;
- Указательным пальцем сместите линзу за край на нижнюю белую часть глаза;
- Подушечками большого и указательного пальцев слегка ущипните линзу и снимите ее с глаза;
- Расправьте линзу, чтобы не слиплись ее края.

УХОД ЗА ЛИНЗАМИ:

Гигиена и правильное обращение с линзами являются важными факторами в достижении безопасного и комфортного ношения линз.

ООО «Фирма Конкор», 160013, РФ г. Вологда, ул. Конева, 10

Тел. (8172) 73 10 20 факс: (8172) 73 10 27

Производственный отдел: тел. /факс: (8172) 75 25 66

E-mail: info@concor.ru

[http:// www.concor.ru](http://www.concor.ru)

Р/с 40702810630020000701 Банк Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Вологда

K/c 30101810600000000⁽⁸⁾782

БИК 041909782

ИНН 3525002324

ОГРН 1023500898057

ОКПО 22757703

ОКВЭД 33.40.1



ФИРМА КОНКОР ПРОИЗВОДСТВО МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД:

- Снимите линзу и положите ее на ладонь;
- Нанесите на линзу несколько капель многофункционального раствора и осторожно потрите поверхность линзы в течение 10 секунд с каждой стороны;
- Сполосните линзу раствором;
- Поместите линзу в контейнер, наполненный свежим многофункциональным раствором;
- Закройте контейнер крышечкой с соответствующей линзе отметкой;
- Оставьте линзы в растворе не менее чем на 4 часа (можно оставлять линзы в растворе на ночь);
- По истечении этого времени линзы можно сразу надевать;

Механическая очистка удаляет 90% всех поверхностей загрязнений, образующихся на линзе, а дезинфекция в многофункциональном растворе убивает болезнетворные микробы;

- 1 раз в неделю используйте рекомендуемые Вам Ферментные очистители.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

- Обрабатывайте линзы после каждого периода ношения;
- Не носите линзы дольше срока, указанного Вашим офтальмологом;
- Не очищайте линзы водой из-под крана;
- Не используйте многофункциональный раствор дольше указанного срока или уже отработанный раствор;
- Не смачивайте линзы слюной или какой-либо другой жидкостью, не предназначенной для увлажнения линз;
- При использовании макияжа рекомендуется: надевать линзы до нанесения косметики на глаза, снимать линзы перед снятием макияжа;
- При использовании аэрозолей в надетых линзах (дезодоранты, лаки для волос) следует закрывать глаза;
- При ощущении дискомфорта, покраснении глаз немедленно обращайтесь к своему офтальмологу.

Генеральный директор

В.П.Просянюк

ООО «Фирма Конкор», 160013, РФ г. Вологда, ул. Конева, 10

Тел. (8172) 73 10 20 факс: (8172) 73 10 27

Производственный отдел: тел. /факс: (8172) 75 25 66

E-mail: info@concor.ru

[http:// www.concor.ru](http://www.concor.ru)

Р/с 40702810630020000701 Банк Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Вологда

К/с 30101810600000000000⁽⁸⁾782 БИК 041909782

ИНН 3525002324

ОГРН 1023500898057

ОКПО 22757703

ОКВЭД 33.40.1