

Этикетка-Инструкция

Назначение: Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-пластмасса» является медицинским изделием, выпускается в нестерильной форме, предназначен для разделения поверхностей гипсовых моделей от акриловых пластмасс, применяемых при изготовлении зубных протезов в зуботехнических лабораториях.

Способ применения: Перед нанесением «Изолак» гипс-пластмасса» необходимо очистить и обезжирить поверхность гипсовой модели. Требуемое количество лака налить в отдельную ёмкость и кисточкой равномерно нанести на остывшую поверхность гипсовой модели, выдержать в течение 1-2 минут. При необходимости повторить обезжиривание и нанести лак заново. Вниманию! Не сливать использованный «Изолак» гипс-пластмасса» во флакон. Не опускать кисточку во флакон с лаком, это приводит к порче всего материала.

Условия хранения и транспортирования: «Изолак» гипс-пластмасса» должен храниться в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 98%.

Условия транспортирования по группе условий хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69 при температуре от -15 до +50°C и относительной влажности не более 98%.

Срок годности: 3 года

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие свойств «Изолак» гипс-пластмасса» требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение 3-х лет.

Техническое обслуживание и ремонт: Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Утилизация отходов: Отходы при использовании изделия «Изолак» гипс-пластмасса» в виде остатков лака и упаковки утилизируются согласно СанПиН 2.17.2790-10 класс А. Не использованное изделие по истечении срока годности утилизируется согласно СанПиН 2.17.2790-10 класс А.

Комплект поставки:

Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (125±5) мл. - 1 шт.

ИЗОЛАК

ЛАК РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗОЛАК

ГИПС - ПЛАСТМАССА



Официальный сайт
и интернет магазин
www.celit.ru

Изготовитель:
ООО «Целит»
Россия, г. Воронеж
ул. Димитрова д. 124/1
Тел. +7(473) 220-43-84;
факс +7(473) 237-61-06



ПАРТИЯ

ДАТА ВЫПУСКА

МАКЕТ маркировки медицинского изделия

«Лак разделительный зуботехнический «ИЗОЛАК» гипс - пластмасса 125мл

Этикетка-Инструкция

Назначение: Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-пластмасса» является медицинским изделием, выпускается в нестерильной форме, предназначен для разделения поверхностей гипсовых моделей от акриловых пластмасс, применяемых при изготовлении зубных протезов в зуботехнических лабораториях.

Способ применения: Перед нанесением «Изолак» гипс-пластмасса» необходимо очистить и обезжирить поверхность гипсовой модели. Требуемое количество лака налить в отдельную емкость и кисточкой равномерно нанести на остывшую поверхность гипсовой модели, выдержать в течение 1-2 минут. При необходимости повторить обезжиривание и нанести лак заново. Внимание! Не сливать, использованный «Изолак» гипс-пластмасса» во флакон. Не опускать кисточку во флакон с лаком, это приводит к порче всего материала.

Условия хранения и транспортирования: «Изолак» гипс-пластмасса» должен храниться в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 98%.

Условия транспортирования по группе условий хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69 при температуре от -15 до +50°C и относительной влажности не более 98%.

Срок годности: 3 года

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие свойств «Изолак» гипс-пластмасса» требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение 3-х лет.

Техническое обслуживание и ремонт: Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Утилизация отходов: Отходы при использовании изделия «Изолак» гипс-пластмасса» в виде остатков лака и упаковки утилизируются согласно СанПиН 21.7.2790-10 класс А. Не использованное изделие по истечении срока годности утилизируется согласно СанПиН 21.7.2790-10 класс А.

Комплект поставки

1. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объемом (500±5) мл - 1 шт.; Этикетка-инструкция - 1 шт.

2. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объемом (1000±5) мл - 1 шт.; Этикетка-инструкция - 1 шт.

РЧ № ФСР 2009/04528 от 19.03.2009 г.

ТУ 9391-005-10614163-98

ПАРТИЯ
ДАТА ВЫПУСКА
ОБЪЕМ, мл

ИЗОЛАК

ЛАК РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗОЛАК

ГИПС - ПЛАСТМАССА



Официальный сайт
и интернет магазин
www.celit.ru

Изготовитель:
ООО «Целит»
Россия, г. Воронеж
ул. Димитрова д. 124/1
Тел. +7(473) 220-43-84;
факс +7(473) 237-61-06



Макет маркировки медицинского изделия

«Лак разделительный зуботехнический «ИЗОЛАК» гипс-пластмасса»

500 мл
1000 мл

Этикетка-Инструкция

Назначение: Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-гипс является медицинским изделием, выпускается в стерильной форме, предназначен для разделения поверхностей гипсовых моделей от гипса, используемого при изготовлении зубных протезов в зуботехнических лабораториях.

Способ применения: Перед нанесением «Изолак» гипс-гипс необходимо очистить и обезжирить поверхность гипсовой модели. Требуемое количество лака налить в отдельную емкость и кисточкой равномерно нанести на отвердевшую поверхность гипсовой модели, выдержать в течение 1-2 минут.

Условия хранения и транспортирования: «Изолак» гипс-гипс должен храниться в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 98%.

Условия транспортирования по группе условий хранения З(ЖЗ) по ГОСТ 15150-69 при температуре от -15 до +50°C и относительной влажности не более 98%.

Срок годности: 3 года

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие свойств «Изолак» гипс-гипс требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение 3-х лет.

Техническое обслуживание и ремонт: Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Утилизация отходов: Отходы при использовании изделия «Изолак» гипс-гипс в виде остатков лака и упаковки утилизируются согласно СанПиН 21.7.2790-10 класс А. Не использованное изделие по истечении срока годности утилизируется согласно СанПиН 21.7.2790-10 класс А.

Комплект поставки

1. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объемом (500±5) мл - 1 шт.; Этикетка-инструкция - 1 шт.
2. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объемом (1000±5) мл - 1 шт.; Этикетка-инструкция - 1 шт.
РЧ № ФСР 2009/04528 от 19.03.2009г.
TV 9391-005-10614163-98

ИЗОЛАК

ЛАК РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗОЛАК

ГИПС - ГИПС




Официальный сайт
и интернет магазин
www.celit.ru

Изготовитель:
ООО «Целит»
Россия, г. Воронеж
ул. Димитрова д. 124/И
Тел. +7(473) 220-43-84;
факс +7(473)237-61-06



ПАРТИЯ
ДАТА ВЫПУСКА
ОБЪЕМ, мл

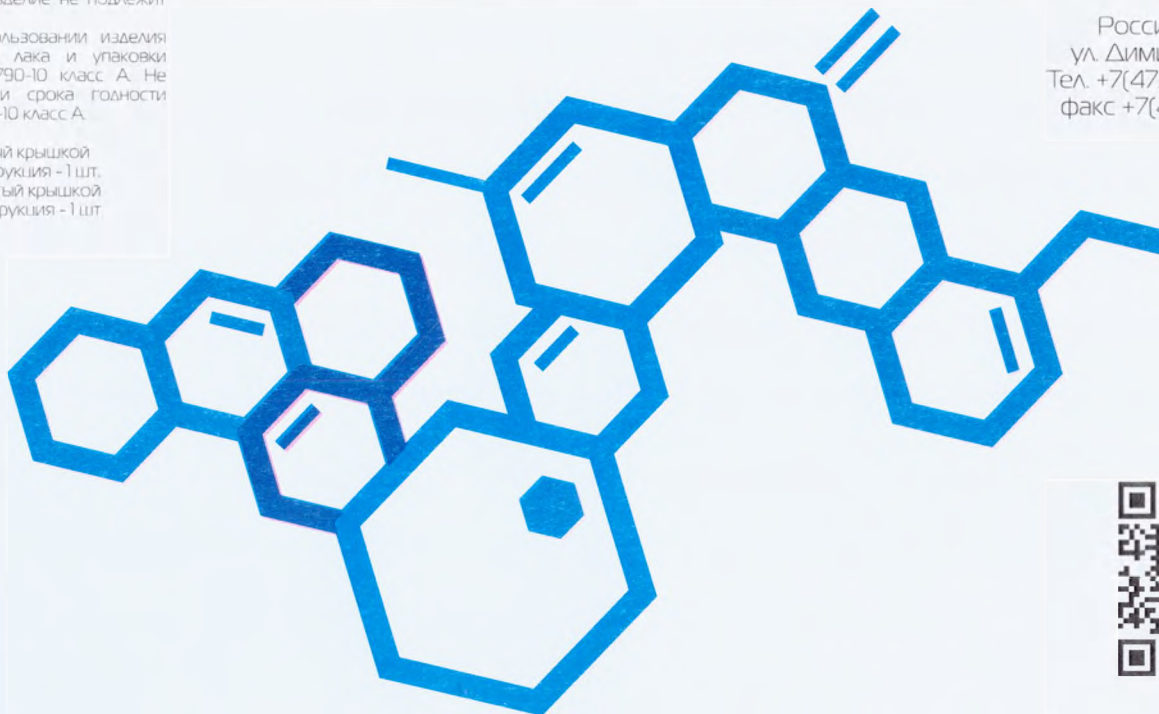

Макет маркировки медицинского изделия

«Лак разделительный зуботехнический „Изолак“

Гипс-гипс 500мл

или 1000мл

Этикетка-Инструкция

Назначение: Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-гипс является медицинским изделием, выпускается в нестерильной форме, предназначен для разделения поверхностей гипсовых моделей от гипса, используемого при изготовлении зубных протезов в зуботехнических лабораториях.

Способ применения: Перед нанесением «Изолак» гипс-гипс необходимо очистить и обезжирить поверхность гипсовой модели. Требуемое количество лака налить в отдельную емкость и кисточкой равномерно нанести на отвердевшую поверхность гипсовой модели, выдержать в течение 1-2 минут.

Условия хранения и транспортирования: «Изолак» гипс-гипс должен храниться в закрытом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности не более 98%.

Условия транспортирования по группе условий хранения 3(ЖЗ) по ГОСТ 15150-69 при температуре от -15 до +50°С и относительной влажности не более 98%.

Срок годности: 3 года

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие свойств «Изолак» гипс-гипс требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение 3-х лет.

Техническое обслуживание и ремонт: Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Утилизация отходов: Отходы при использовании изделия «Изолак» гипс-гипс в виде остатков лака и упаковки утилизируются согласно СанПиН 2.17.2790-10 класс А. Не использованное изделие по истечении срока годности утилизируется согласно СанПиН 2.17.2790-10 класс А.

Комплект поставки

Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объемом (125±5)мл - 1 шт.

ПАРТИЯ

ДАТА ВЫПУСКА

ИЗОЛАК


ЛАК РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗОЛАК

ГИПС - ГИПС



Официальный сайт
и интернет магазин
www.celit.ru


Изготовитель:
ООО «Целит»
Россия, г. Воронеж
ул. Димитрова д. 124/1
Тел. +7(473) 220-43-84;
факс +7(473) 237-61-06

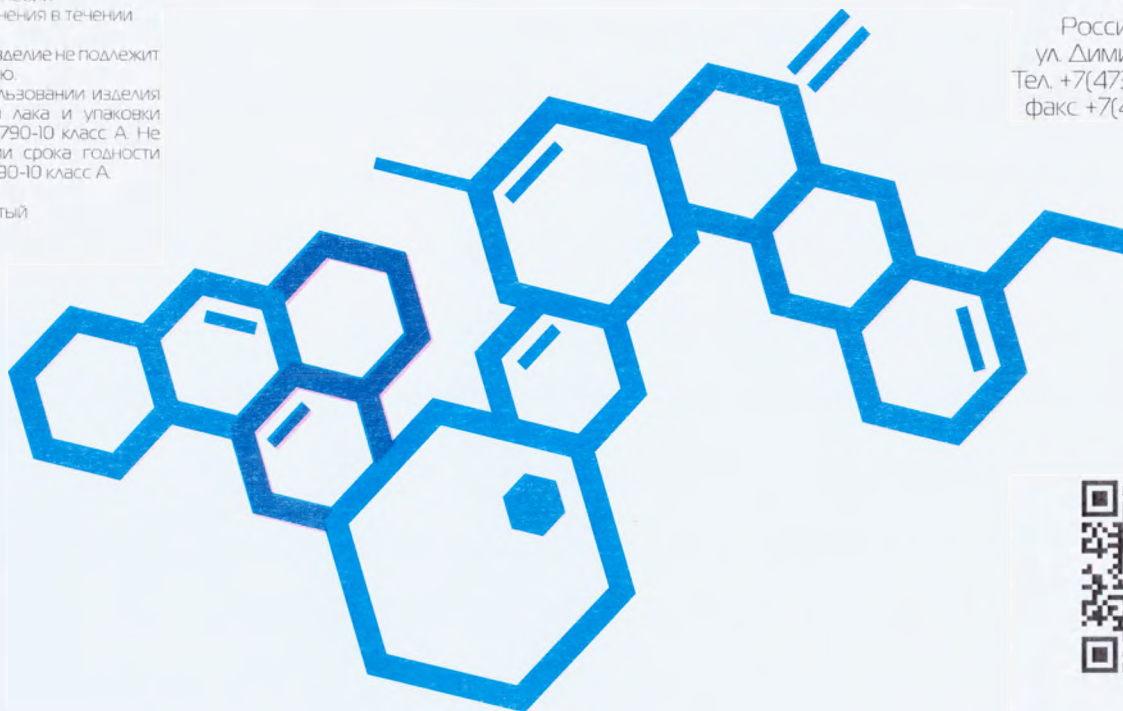

Макет маркировки медицинского изделия

«Лак разделительный зуботехнический «ИЗОЛАК» гипс-гипс 125мл»

Фототрафаретное изображение
 ЛАК РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭПОТЕХНИЧЕСКИЙ "ИЗОЛАК" 1000 ML
 ВАРУАНТ УПАКОВКИ ТИП - ПЛАСТИКА

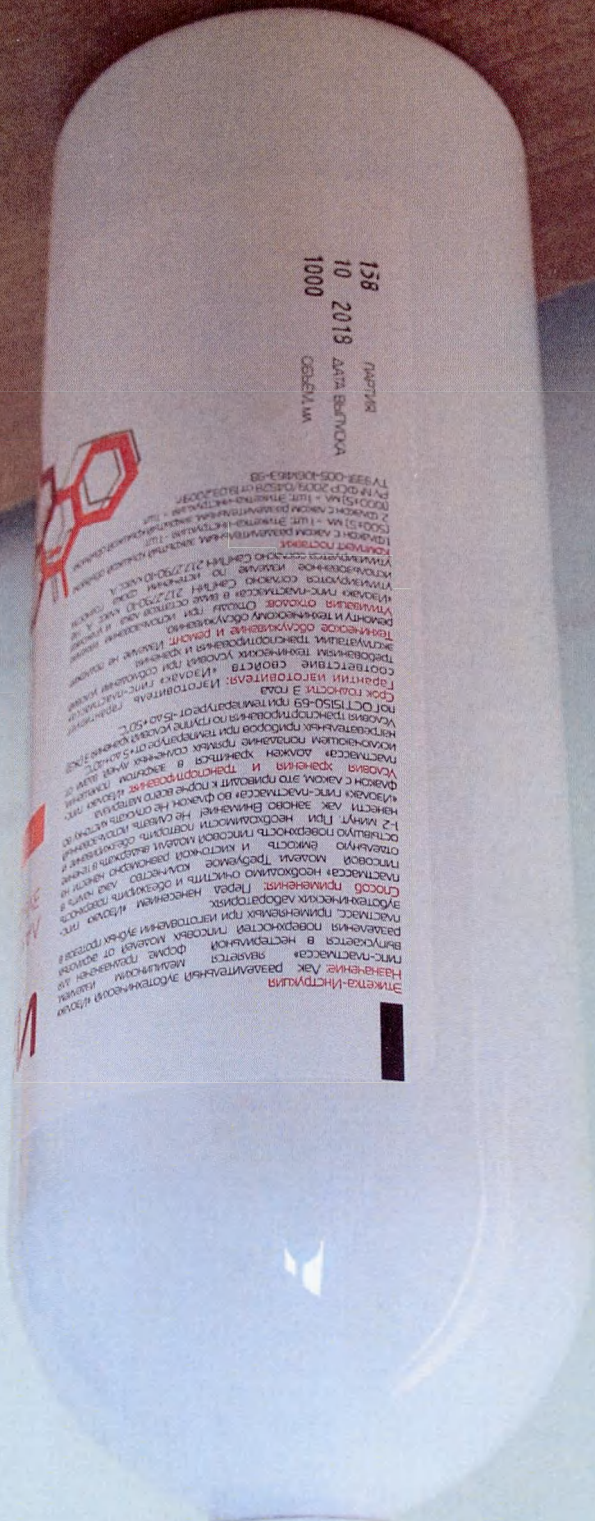

Фототрафаретное изображение оригинала
ЛАС РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭБОТЕХНИЧЕСКИЙ «ИЗОНАК» 1000 мл
ВАРИАНТ упаковки, маркировка ВАРИАНТ исполнения тип-тип

КОМПОНЕНТЫ
СОДЕРЖИТ ЛАСОВ ДЛЯ ЗАМЕНА ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ
СОДЕРЖИМ (500±5) мл - 1 шт., ЭБОТЕХНИЧЕСКИЙ
2 СОДЕРЖИТ ЛАСОВ ДЛЯ ЗАМЕНА ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ
ОБЪЕМОМ (1000±5) мл - 1 шт., ЭБОТЕХНИЧЕСКИЙ
РЧ № ФСР 2009/04/528 от 19.03.2009
ТУ 9391-005-1061153-98



38	ПАРТИЯ
12.2018	ДАТА ВЫПУСКА
1000	ОБЪЁМ, мл

Фотографическое изображение медицинского изделия
ЛАК РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ "ИЗОЛАК" 500 мл
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ ГИПС - ПЛАСТМАССА
ВАРИАНТ МАРКИРОВКИ

техническое обслуживание и ремонт
ремонту и техническому обслуживанию.
Утилизация отходов: Отходы при использовании лака
«Изолак» гипс-пластмасса» в виде остатков лака и угас-
утилизируются согласно СанПин 217.2790-10 класс А
использованное изделие по истечении срока годности
утилизируется согласно СанПин 217.2790-10 класс А
Комплект поставки:
1. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом
(500±5) мл - 1 шт; Этикетка-инструкция - 1 шт.
2. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом
(1000±5) мл - 1 шт; Этикетка-инструкция - 1 шт.
РУН № ФСР 2009/04528 от 19.03.2009 г.
ТУ 9391-005-10614163-98

158	ПАРТИЯ
10	ДАТА ВЫПУСКА
500	ОБЪЁМ, мл

Фототрафикаторное средство для обнаружения
 НАК ПАРАБАТИВАБЫИ СЫДОТЕНХИЗЕСКИИ "ИЗОВАК 500 мЛ
 ВАРУАИИ ИСТОАИЕНИИ ТИП - ПАСТИАССА



Фотопарусное изобретение невинного игрока
 АК ПАРАУТАБИЛЪ ЗЫОТЕХНИКА "ИЗОАК" 125 м.
 ВАРИАНТ исполнения: тиг - тиг



Фотографическое изображение медицинского изделия

«ЛАК Разделительный зуботехнический «ИЗОЛАК» 125 мл гипс - пластмасса

ВАРИАНТ маркировки

ВАРИАНТ исполнения: гипс - ПЛАСТМАССА



Фотографическое изображение медицинского изделия
ЛАК Разделительный зуботехнический "ИЗОЛАК" 125 мл гипс - ПЛАСТМАССА
ВАРИАНТ маркировки ВАРИАНТ исполнения: гипс - ПЛАСТМАССА

158


ПАРТИЯ

10 2018

ДАТА ВЫПУСКА

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие свойств «Изолак» гипс-пластмассы требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Техническое обслуживание и ремонт: Изделие не требует ремонта и технического обслуживания.
Утилизация отходов: Отходы при использовании «Изолак» гипс-пластмасса в виде остатков или испорченного изделия по истечении срока годности утилизируются согласно СанПин 217.2790-10.
Комплект поставки: Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объемом (125±5) мл - 1 шт.
Этикетка-инструкция - 1 шт.
РУН ФСР 2009/04528 от 19.03.2009г.
ТУ 9391-005-10614163-98

Фототрафусекое изображение негущуиетс удема
 "АК разгекутельный Зыдохуезекый" "АЗСАК" "АЗСА" 125м
 ВАРНАНТ ИСТОМНУ : ГИП - ПАРСТМАССА



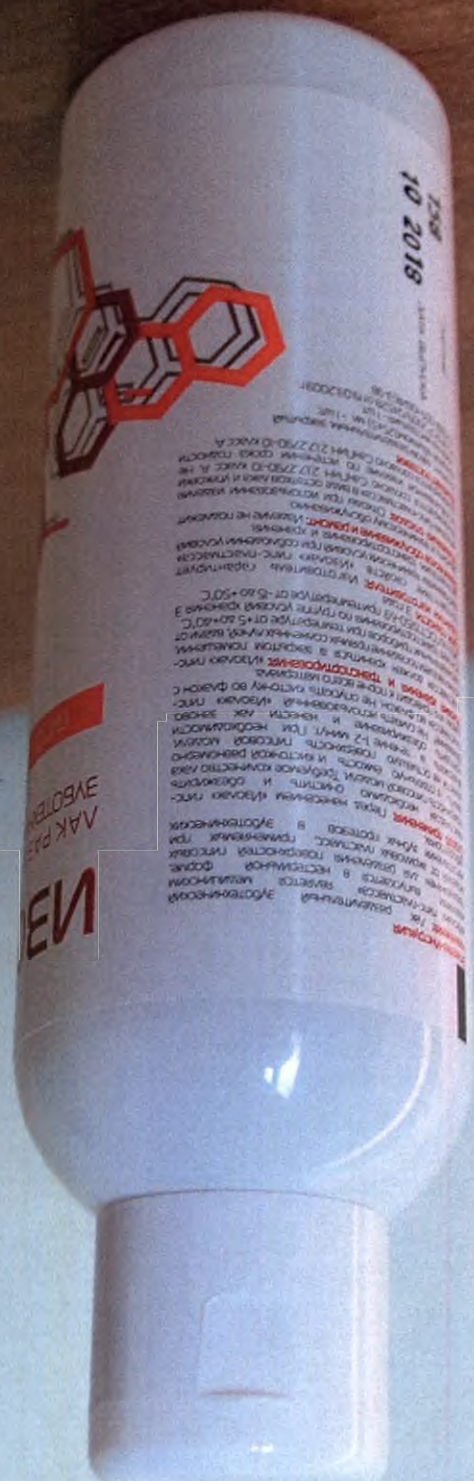


«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит»
М.В. Блажко
« 19 » 09 2019 г.

Фотграфическое изображение
изделия медицинского назначения

Лак разделительный зуботехнический «Изолак» по ТУ 9391-005-10614163-98
вид исполнения: 1. Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-пластмасса»

ООО «Целит»

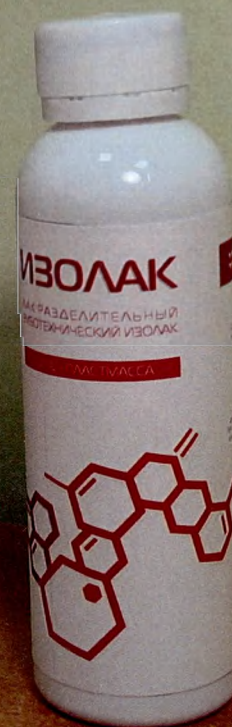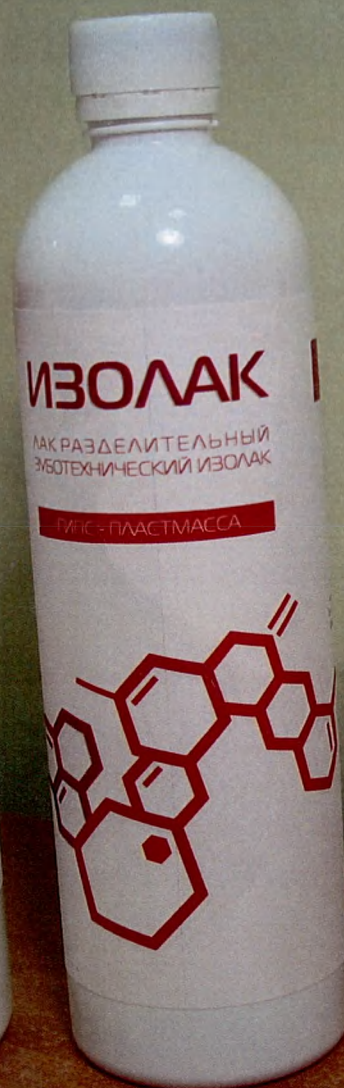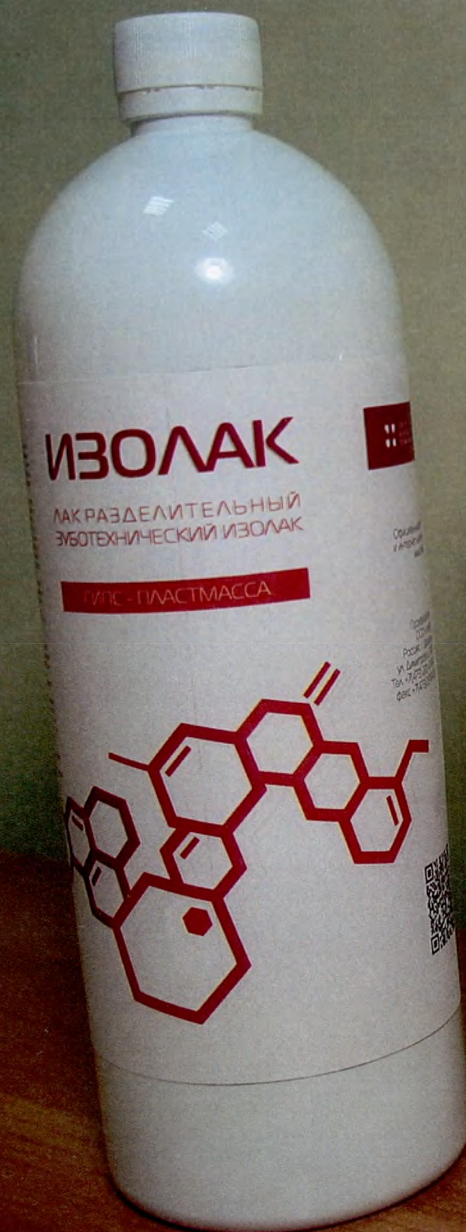

Всего прошито и скреплено печатью
21 8841 _____ листа(ов)
Должность Генеральный директор ООО «Целит»
Подпись _____ /М.В. Блажко,





«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит»
М.В. Блажко
« 19 » 09 2019 г.

Фотографическое изображение
изделия медицинского назначения

Лак разделительный зуботехнический «Изолак» по ТУ 9391-005-10614163-98
вид исполнения: 2. Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-гипс».

ООО «Целит»

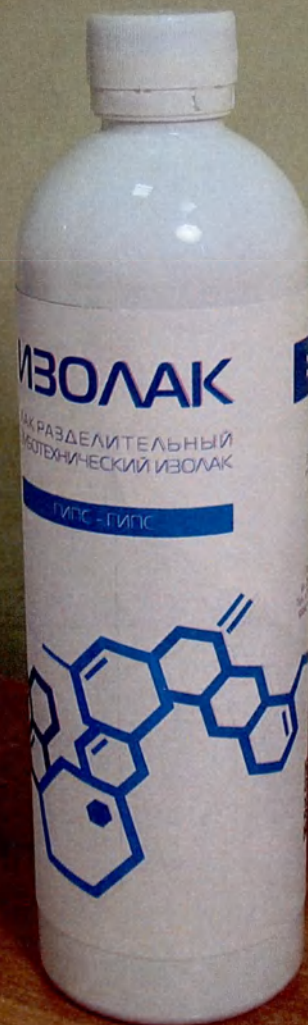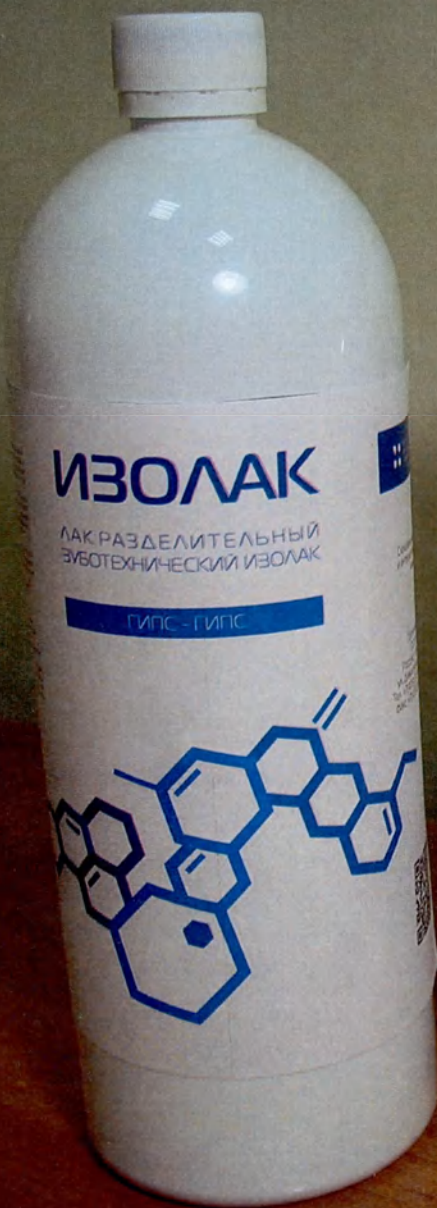

Всего прошито и скреплено печатью

2/два

листа(ов)

Должность Генеральный директор ООО «Целит»

Подпись /М.В. Блажко,

