

«Утверждаю»  
Генеральный директор ООО «Целит»  
М.В. Блажко  
« 19 » 09 2019 г.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-гипс»

ТУ 9391-005-10614163-98

ООО «Целит»

## ЭТИКЕТКА-ИНСТРУКЦИЯ

Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-гипс»

ТУ 9391-005-10614163-98

РУ № ФСР 2009/04528 от 19.03.2009 г

### НАЗНАЧЕНИЕ

Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-гипс» является медицинским изделием, выпускается в нестерильной форме, предназначен для разделения поверхностей гипсовых моделей от гипса, применяемого при изготовлении зубных протезов в зуботехнических лабораториях.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением «Изолак» гипс-гипс» необходимо очистить и обезжирить поверхность гипсовой модели. Требуемое количество лака налить в отдельную ёмкость и кисточкой равномерно нанести, на отвердевшую поверхность гипсовой модели, выдержать в течение 1-2 минут.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (125±5) мл — 1 шт;  
Этикетка-инструкция - 1 шт.
2. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (500±5) мл — 1 шт;  
Этикетка-инструкция - 1 шт.
3. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (1000±5) мл — 1 шт;  
Этикетка-инструкция - 1 шт.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

«Изолак» гипс-гипс» должен храниться в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 98%.

Условия транспортирования при температуре от -15 до +50°C и относительной влажности не более 98%.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие свойств «Изолака» гипс-гипс» требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение 3-х лет.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

### УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Отходы при использовании изделия «Изолак» гипс-гипс» в виде остатков лака и упаковки утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А. Неиспользованное изделие по истечении срока годности утилизируется согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124 и тел. (473) 279-78-87, факс (473) 237-61-06.  
[www.celit.ru](http://www.celit.ru)

Подготовил:

Гл. технолог

 /Е.В. Попова/

Всего прошито и скреплено печатью

21 фев листа(ов)  
Должность Генеральный директор ООО «Целит»  
Подпись /М.В. Блажко,

