


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Фирма «Финко»

Ветчинкин Дмитрий Николаевич

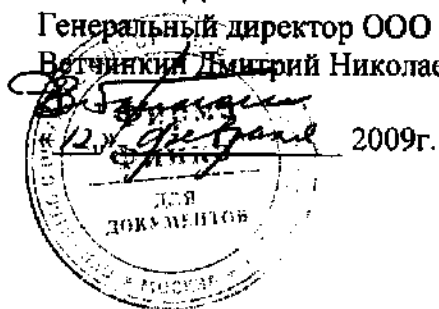

ИНСТРУКЦИЯ.

По применению «Повязки компрессионные»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Повязки компрессионные:

- Бинт поддерживающий и компрессионный «Дауэрбинде К»
- Бинты эластичные фиксирующие типа «Моллеласт»
- Бинт эластичный клейкий «Хафтэласт»
- Бинт продольно-эластичный «Порэласт»
- Бинты компрессионные «Розидал К»

«Дауэрбинде К»

Налагать повязку предпочтительнее рано утром или после продолжительного нахождения ног в горизонтальном положении.

Ширина бинта должна соответствовать диаметру бинтуемой части тела (как правило 8,10 или 12 см)

Обычно повязку накладывают на находящуюся под прямым углом (90°) по отношению к ноге ступню.

Бинтовать следует так, чтобы давление бинта ослаблялось по направлению от стопы к колену.

При бинтовании бинт держать у ноги, внутренняя часть бинта должна быть обращена наружу.

Техника наложения осуществляется по предписанию врача.

«Моллеласт»

Бинт наложить циркулярными турами. Излишки обрезать. Концы зафиксировать с помощью пластыря.

Стирать в горячей воде при температуре 40 градусов. Сушить в разложенном виде.

«Хафтэласт»

Отмерить необходимую длину бинта, отрезать от рулона и наложить циркулярными турами. Концы бинта не требуют фиксации.

Бинт не подлежит стирке.

«Порэласт»

Бинт нарезать отрезками, необходимыми для наложения одного циркулярного тура. Бинт накладывается неклеякой стороной к коже пациента. Каждый последующий тур накладывается внахлест наполовину предыдущего тура.

Бинт не используется повторно.

«Розидал К»

Малозэластичные бинты для давящих, поддерживающих и облегчающих повязок.

Способ употребления

Показания:

Давящая повязка при флебических и лимфатических изменениях , например: варикозное расширение вен, недостаточность центральных вен, тромбофлебит, флеботромбоз, посттромбозный синдром, хроническая венозная недостаточность на стадиях I, II и III, при отеках (флебических, лимфатических, липоидных, посттравматических, постоперационных отеках, отеках у беременных), при постсклеротических изменениях и после хирургического вмешательства на венах.

Поддерживающая и облегчающая повязка для профилактики и лечения контузий, дисторсий, ранений сухожилий и вывихов.

Противопоказания:

Далеко зашедшая облитерация периферических артерий, декомпенсированная сердечная недостаточность, септический флебит, Phlegmasia coerulea dolens.

