

УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный предприниматель
Балашов А.В.
2019 г.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Матрас ортопедический по
ТУ 32.50.50-001-0065124049-2019**

Введена впервые

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Матрас ортопедический по ТУ 32.50.50-001-0065124049-2019
(далее по тексту «матрас», «изделия»).

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

I. Матрас ортопедический серии «Real», варианты исполнения:

1. *Матрас ортопедический «Real Mild»* (с блоком независимых пружин «ТФК 256»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм));
2. *Матрас ортопедический «Real Relax»* (с блоком независимых пружин «ТФК 256»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм));
3. *Матрас ортопедический «Real People»* (с блоком независимых пружин «ТФК 256»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм));
4. *Матрас ортопедический «Real Beauty»* (с блоком независимых пружин «ТФК 256»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм));
5. *Матрас ортопедический «Real Beauty+»* (с блоком независимых пружин «ТФК 256»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм));

II. Матрас ортопедический серии «Honey», варианты исполнения:

1. *Матрас ортопедический «Honey Joy»* (с блоком независимых пружин: «ТФК 256» или «ТФК 500» или «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм));
2. *Матрас ортопедический «Honey Land»* (с блоком независимых пружин: «ТФК 256» или «ТФК 500» или «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм));
3. *Матрас ортопедический «Honey Season»* (с блоком независимых пружин: «ТФК 256» или «ТФК 500» или «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм));
4. *Матрас ортопедический «Honey Moon»* (с блоком независимых пружин: «ТФК 256» или «ТФК 500» или «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм),

двухспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

5. *Матрас ортопедический «Honey Pie»* (с блоком независимых пружин: «ТФК 256» или «ТФК 500» или «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двухспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

6. *Матрас ортопедический «Honey Layer 6»* (беспружинный; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двухспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм).

III. Матрас ортопедический серии «BioNative», варианты исполнения:

1. *Матрас ортопедический «BioNative Laguna»* (с блоком независимых пружин: «ТФК 256» или «ТФК 500» или «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двухспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

2. *Матрас ортопедический «BioNative Spring»* (с блоком независимых пружин: «ТФК 256» или «ТФК 500» или «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двухспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

3. *Матрас ортопедический «BioNative City»* (с блоком независимых пружин: «ТФК 256» или «ТФК 500» или «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двухспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

4. *Матрас ортопедический «BioNative Selva»* (с блоком независимых пружин: «ТФК 256» или «ТФК 500» или «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двухспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

5. *Матрас ортопедический «BioNative Family 20»* (с блоком независимых пружин: «ТФК 256» или «ТФК 500» или «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двухспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

6. *Матрас ортопедический «BioNative Family 40»* (с блоком независимых пружин: «ТФК 256» или «ТФК 500» или «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двухспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

7. Матрас ортопедический «BioNative Night» (с блоком независимых пружин: «ТФК 256» или «ТФК 500» или «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

IV. Матрас ортопедические серии «Paradise», варианты исполнения:

1. Матрас ортопедический «Paradise Bahamas» (с блоком независимых пружин «ТФК 500»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

2. Матрас ортопедический «Paradise Malibu» (с блоком независимых пружин «ТФК 500»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

3. Матрас ортопедический «Paradise Goa» (с блоком независимых пружин «ТФК 500»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

V. Матрас ортопедический серии «Vim», варианты исполнения:

1. Матрас ортопедический «Vim Victoria» (с блоком независимых пружин «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

2. Матрас ортопедический «Vim Sutherland» (с блоком независимых пружин «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

3. Матрас ортопедический «Vim Tugela» (с блоком независимых пружин «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм);

4. Матрас ортопедический «Vim Niagara» (с блоком независимых пружин «ТФК 1000»; размер: полуторный (1900х700 мм, 1900х800 мм, 1900х900 мм, 1950х700 мм, 1950х800 мм, 1950х900 мм, 2000х700 мм, 2000х800 мм, 2000х900 мм), двуспальный (1900х1200 мм, 1900х1400 мм, 1900х1600 мм, 1900х1800 мм, 1950х1200 мм, 1950х1400 мм, 1950х1600 мм, 1950х1800 мм, 2000х1200 мм, 2000х1400 мм, 2000х1600 мм, 2000х1800 мм).

НАЗНАЧЕНИЕ

для профилактики деформаций и нарушения функций костно-мышечной системы (предупреждения ортопедических патологий)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

медицинские и лечебно-профилактические учреждения (отделения ортопедии), а также домашние условия.

КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделия многократного использования.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

лица, нуждающиеся в профилактики деформаций и нарушения функций костно-мышечной системы (предупреждения ортопедических патологий).

КОНТАКТ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

Изделие поверхностного контакта, вид контакта – кратковременный.

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Изделия выпускаются в нестерильном виде.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- заболевания спины (компрессия позвоночника, боль в спине при остеохондрозе, спондилоартрозах, спондилитах позвоночника);
- мышечное напряжение;
- нарушение осанки (сколиоз);
- комплексная реабилитация после травм позвоночника (на поздних этапах восстановления).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не выявлено.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При надлежащем использовании побочных эффектов не наблюдается.

ПОРЯДОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ

- Провести визуальный осмотр потребительской упаковки.
- Освободить изделие от потребительской упаковки.
- Проверить целостность изделия, методом визуального осмотра.
- После снятия упаковки перед эксплуатацией изделие необходимо проветрить, чтобы удалить производственный запах. Для ускорения этого процесса матрас рекомендуется пропылесосить. Интенсивность запаха снизится, и он полностью исчезнет через 14 дней.

ПОРЯДОК ПОДБОРА ИЗДЕЛИЯ

Следует выбирать модель матраса с учетом массы тела человека, т.к. все модели ортопедических матрасов проектируются с учетом различных весовых категорий людей. Превышение максимально допустимой нагрузки на спальное место запрещается, поскольку приводит к существенному сокращению срока службы матраса. Убедитесь в том, что Ваш вес не превышает рекомендуемую нагрузку на матрас. Данную информацию Вы найдете на маркировке матраса.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Следует оберегать поверхность матраса от механических повреждений, запрещается выбивать, сгибать матрас, ставить на ребро и под углом к стене.

Важно помнить, что ортопедический эффект матраса полностью проявляется только на ортопедическом основании, представляющем собой решетку из поперечных ламелей (изогнутых многослойных пластин из дерева), закрепленных с помощью упругих держателей в деревянной или металлической раме.

Размер матраса должен соответствовать размеру спального ложа (свободно без деформации помещаться в кровати: как по длине, так и по ширине).

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать матрас на кроватях с металлической сеткой (панцирная, зиг-заг, пружинная и т.д.), а также на мягкой поверхности.

Ручки опциональны и выполняют декоративную функцию и не предназначены для переноса и переворачивания матрасов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- Матрас ортопедический (одного варианта исполнения);
- Эксплуатационная документация: Инструкция по применению – 1 экз.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С. Относительная влажность: 20– 80%.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделия по внешнему виду (общий вид с разрезом см. Приложение А) и технологии изготовления должны соответствовать требованиям технической документации.

Сырье и материалы

- Основные материалы и сырье, применяемые при изготовлении матрасов представлены в таблице ниже.

Материал	Состав	Наименование изделия (с указанием конструктивной части)
Ткань Трикот, плотность – 70-90 г/м ²	100 % полиэстер	Чехол:- Матрас ортопедический «Real Mild»
Трикотажное полотно Х-4190, плотность – 270 г/м ²	100 % полиэстер	Чехол: - Матрасы ортопедические «Real Relax», «Real Beauty», «Real Beauty +», «Real People»
Трикотажное полотно Х-1930, плотность – 350 г/м ²	28,5% - хлопок, 71,5% - полиэстер	Чехол: - Матрасы ортопедические серии «Honey», серии «Paradise» и серии «Vim»
Трикотажное полотно Х-1408, плотность – 300 г/м ²	100 % - полиэстер	Чехол: - Матрасы ортопедические серии «Paradise» и серии «BioNative»
Трикотажное полотно Х-1321, плотность – 350 г/м ²	100 % - полиэстер	Чехол: - Матрасы ортопедические серии «Paradise»
Трикотажное полотно Х-1829, плотность – 300 г/м ²	100 % - полиэстер	Чехол: - Матрасы ортопедические серии «BioNative»
Полотно трикотажное ворсовое из химических нитей: для обивки мебели с маркировками: KARAT	100% - полиэстер	Борт чехла и ручки (плотность ткани– 300 г/м ² или 250 г/м ² или 200 г/м ²)
Полотно трикотажное ворсовое из химических нитей: для обивки мебели с маркировками: PULSE/H		
Полотно объемное термоскрепленное из полиэфирного волокна синтепон, плотность – 60 г/м ²	100% - полиэстер	Наполнитель для чехла: - Матрасы ортопедические «Real Mild», «Real Relax», «Real People», «Real Beauty», «Real Beauty +», серии «Honey», серии «Paradise», серии «Vim»
Бамбуковый пласт плотность – 200 г/м ²	100% - бамбуковое волокно	Наполнитель для чехла: - Матрасы ортопедические серии «BioNative»
Пенополиуретан эластичный ST 2536, плотность – 25 кг/м ³ толщина слоя – 80 мм (для «TFK 256») и 100 мм (для «TFK 500» и «TFK 1000»), высота – 14 мм (-/+ 5%)	100 % - пенополиуретан	Усиление боковин (наполнитель): - Матрасы ортопедические «Real Relax», «Real People», «Real Beauty», «Real Beauty +», серии «Honey», серии «BioNative», серии «Paradise», серии «Vim»

Материал	Состав	Наименование изделия (с указанием конструктивной части)
Пенополиуретан эластичный ST 1825 плотность – 17,5-/+0,5 кг/м ³ , толщина слоя – 15 мм (-/+ 5%)	100 % - пенополиуретан	Наполнитель: - Матрасы ортопедические «Real Mild», «Real Relax», «Real Beauty +», «Real People», «Real Beauty», серии «Honey», серии «BioNative», серии «Paradise», серии «Vim»
Пенополиуретан эластичный ST 2236, плотность – 21,5-/+0,5 кг/м ³ , толщина слоя – 15 мм (-/+ 5%)	100 % - пенополиуретан	Наполнитель: - Матрасы ортопедические «BioNative Family 20», «BioNative Family 40», «BioNative Night»
Пенополиуретан эластичный ST 2536, плотность – 25 кг/м ³ толщина слоя – 15 мм (-/+ 5%)	100 % - пенополиуретан	Наполнитель: - Матрас ортопедический «BioNative Laguna»
Пенополиуретан эластичный ST 3040, плотность – 29,5-/+0,7 кг/м ³ , толщина слоя – 40 мм (-/+ 5%)	100 % - пенополиуретан	Наполнитель: - Матрас ортопедический «BioNative Selva»
Полотно нетканое термоскрепленное «Полиспан®ПРОФИ» плотность – 75 г/м ²	100% - полипропилен	Наполнитель: - Матрасы ортопедические серии «Real», серии «Honey», «Vim Niagara»
Полотно нетканое термоскрепленное «Полиспан®ПРОФИ» плотность – 17 г/м ²	100% - полипропилен	Наполнитель для чехла: - Матрасы ортопедические «Real Relax», «Real People», «Real Beauty», «Real Beauty +», серии «Honey», серии «BioNative», серии «Paradise», серии «Vim»
Полотно нетканое термоскрепленное «Полиспан®ПРОФИ» плотность – 60-70 г/м ²	100% - полипропилен	Прокладочный слой: - Матрасы ортопедические «Real Relax», «Real People», «Real Beauty», «Real Beauty +», серии «Honey», серии «BioNative», серии «Paradise», серии «Vim»
Войлок, плотность – 500 г/м ² , толщина слоя – 5 мм (-/+ 5%)	60% -акрил 25% - полипропилен 15%-хлопок и шерсть	Жёсткий слой: - Матрасы ортопедические «Real Mild», «Real People», «Vim Victoria», «Vim Suhterland»
Латексированные кокосовые маты, плотность – 80-100 кг/м ³ толщина слоя – 10 мм (-/+ 5%)	85% - кокосовое волокно, 15%-латекс	Жёсткий слой: - Матрасы ортопедические серии «Honey», «BioNative City», «BioNative Family 20», «BioNative Family 40», «Paradise Bahamas», «Paradise Goa», «Vim Victoria»
Латекс мебельный Verbeq плотность – 65 кг/м ³ толщина слоя – 20 мм (-/+ 5%)	80% - пенополиуретан, 20% - натуральный латекс	Наполнитель:- Матрасы ортопедические «Honey Season», «Honey Moon», «Honey Pie», «Vim Victoria»
Латекс мебельный Verbeq плотность – 65 кг/м ³ толщина слоя – 30 мм (-/+ 5%)		Наполнитель:- Матрасы ортопедические «Honey Layer 6», «Paradise Malibu», «Paradise Goa», «Vim Suhterland», «Vim Niagara»
Латекс мебельный Verbeq плотность – 65 кг/м ³ толщина слоя – 10 мм (-/+ 5%)		Наполнитель: - Матрасы ортопедические «BioNative Night», «Vim Niagara»
Полотно нетканое иглопробивное прокладочное латексированное из смеси льняных и синтетических волокон, с маркировкой "Лекан", плотность – 700 г/м ² , толщина слоя – 5 мм (-/+ 5%)	75% - лён, 25% - полиэфирное волокно	Наполнитель: - Матрасы ортопедические «BioNative Laguna», «BioNative Spring», «BioNative Selva», «BioNative Family 20», «BioNative Family 40»

Материал	Состав	Наименование изделия (с указанием конструктивной части)
Мат Bi-cocos, плотность – 80-100 кг/м ³ , толщина слоя – 10 мм (-/+ 5%)	50% - кокосовое волокно, 50% - полиэфирное волокно	Жёсткий слой: - Матрасы ортопедические «BioNative Night», «BioNative Spring», «Real People», «Real Beauty», «Real Beauty +»
Ватин, плотность – 200 г/м ² толщина слоя – 5 мм, (-/+ 5%)	100% - хлопок	Наполнитель: - Матрасы ортопедические «BioNative Laguna», «BioNative City», «BioNative Selva»
Пенополиуретан эластичный LR 5014(с эффектом памяти) плотность – 50 г/м ² толщина слоя – 20 мм (-/+ 5%)	100 % - пенополиуретан	Наполнитель: - Матрасы ортопедические «BioNative Family 20»
Пенополиуретан эластичный LR 5014(с эффектом памяти), плотность – 50 г/м ² , толщина слоя – 40 мм (-/+ 5%)		Наполнитель:- Матрасы ортопедические «BioNative Family 40»
Пенополиуретан эластичный S 3530 (с массажным эффектом), плотность – 35 кг/м ³ , толщина слоя – 320 мм (-/+ 5%)	100 % - пенополиуретан	Наполнитель: - Матрас ортопедический «Bionative Night»
Стальная проволока марка Б, 2 класс, диаметр 1,8 мм	-	Пружинный блок «TFK 256»
Стальная проволока марка Б, 2 класс, диаметр 1,3	-	Пружинный блок «TFK 500»
Стальная проволока марка Б, 2 класс, диаметр 0,6	-	Пружинный блок «TFK 1000»

Требования к изготовлению

- Матрасы по периметру с двух сторон должны иметь декоративный кант толщиной от 1,4 мм до 2,0 мм.
- Мягкие элементы матрацев на основе пружинных блоков при эксплуатации не должны издавать шума в виде щелчков и скрипа.
- Для простежки облицовочной ткани должны применяться полиспан и/или синтепон. В качестве облицовочной ткани должны быть использованы полотна трикотажного ворсового из химических нитей: для обивки мебели или из трикотажного полотна.
- Швы в изделиях должны быть ровными, без пропусков, просечек, складок и морщин.
- Облицовочный материал мягких элементов матрацев должен быть закреплен без морщин и перекосов. Морщины на облицовочном материале мягких элементов матрацев, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются.
- Облицовочный материал мягких элементов на углах должен быть расправлен и зашит нитками, подобранных по цвету.
- На поверхности матрацев не должно быть складок, сборок, механических повреждений, загрязнений, а также нарушений структуры материалов.
- Готовые изделия должны быть очищены от пыли и концов ниток.
- Методы раскроя, способы изготовления матраца должны соответствовать техническому описанию.
- Классификация и виды стежков, строчек и швов по ГОСТ 12807.
- Требования к стежкам, строчкам и швам - по ГОСТ 29122.
- При эксплуатации изделий не должны выделяться химические вещества, относящиеся к первому классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать допустимые уровни. При выделении из изделий нескольких вредных химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентрации к их предельно допустимой концентрации не должна превышать единицу по ГОСТ 12.1.007. Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха не более 2 баллов.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Возможна сухая чистка с помощью пылесоса.

ОБРАБОТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Наружные поверхности матрасов должны быть устойчивы к обработке дезинфицирующими и моющими средствами по МУ 287-113 - 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ГОСТ 14193 или раствором детского мыла по ГОСТ 28546.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Упакованные изделия перевозят всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- Размеры и масса брутто пакета должны соответствовать ГОСТ 24597.
- Погрузка, транспортирование, разгрузка матрасов должны обеспечить их сохранность и исключить возможность повреждения упаковки.
- Требования к транспортированию пакетами – по ГОСТ 26663, ГОСТ 24597 и другим нормативным документам.
- Средства скрепления упаковок, упакованной в транспортную тару, в пакетированном виде - по ГОСТ 21650 и другим нормативным документам со следующими дополнениями: деревянные ящики и контейнеры должны быть высланы водонепроницаемыми материалами.
- Изделия должны храниться в крытых помещениях по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Упакованные изделия, должны храниться до реализации на стеллажах в упаковке изготовителя.
- Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие качества матрасов требованиям ТУ 32.50.50-001-0065124049-2019 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи матраса, при внерыночном распределении - со дня получения ее потребителем.
- Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи.
- Гарантийный срок хранения - 5 лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизация матрасов осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" для отходов класса А.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (РАЗРАБОТЧИК)

Индивидуальный предприниматель Балашов Александр Викторович, Россия, 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Гаринский, 16-9 (*Адрес места производства:* Россия, 624260, Свердловская обл. г. Асбест, ул. Чапаева 1, литер 15).

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии по поводу качества медицинского изделия направляются Индивидуальному предпринимателю Балашову Александру Викторовичу, Россия, 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Гаринский, 16-9

Телефон/факс: (343) 305-2000. Адрес электронной почты: roakkord_3@bk.ru

СИМВОЛЫ ПО УХОДУ



- Стирка запрещена;



- Не отбеливать;



- Глажение запрещено;

СИМВОЛЫ НА МАРКИРОВКЕ



Беречь от влаги



Верх




Беречь от солнечных лучей

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ


- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 57770-2017 «Матрасы ортопедические. Типы и основные параметры»;
- ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»;
- ГОСТ ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».
- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»
- ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Общий вид изделия с разрезом


- Матрас ортопедический «Real Mild»

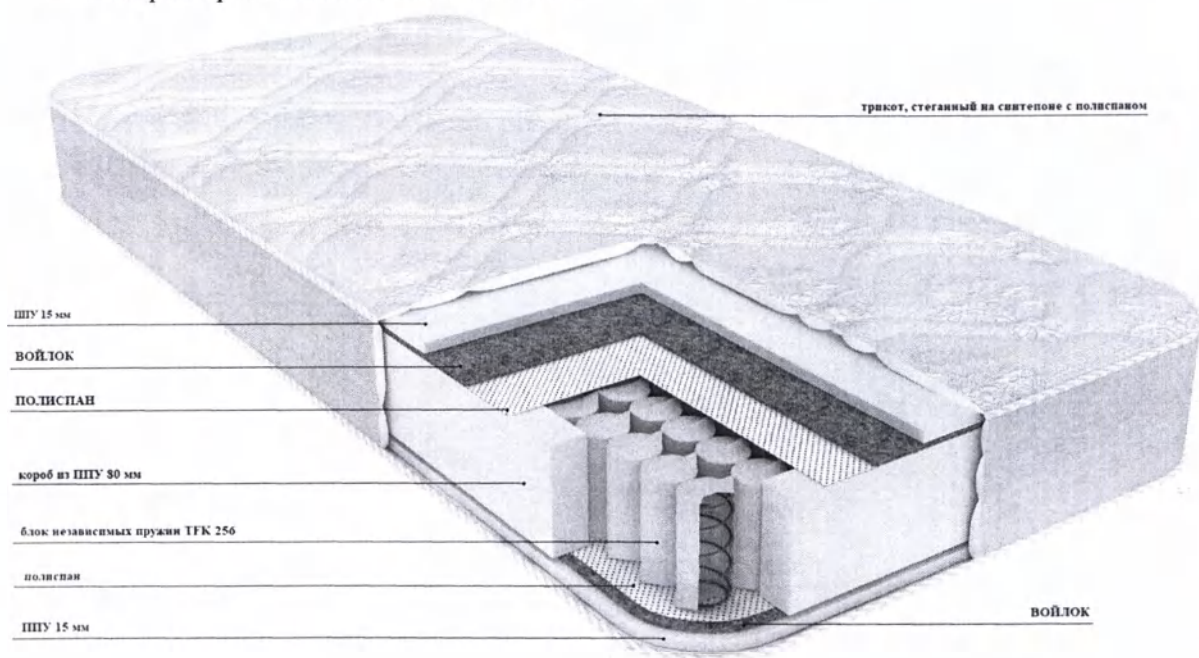


- Матрас ортопедический «Real Relax»

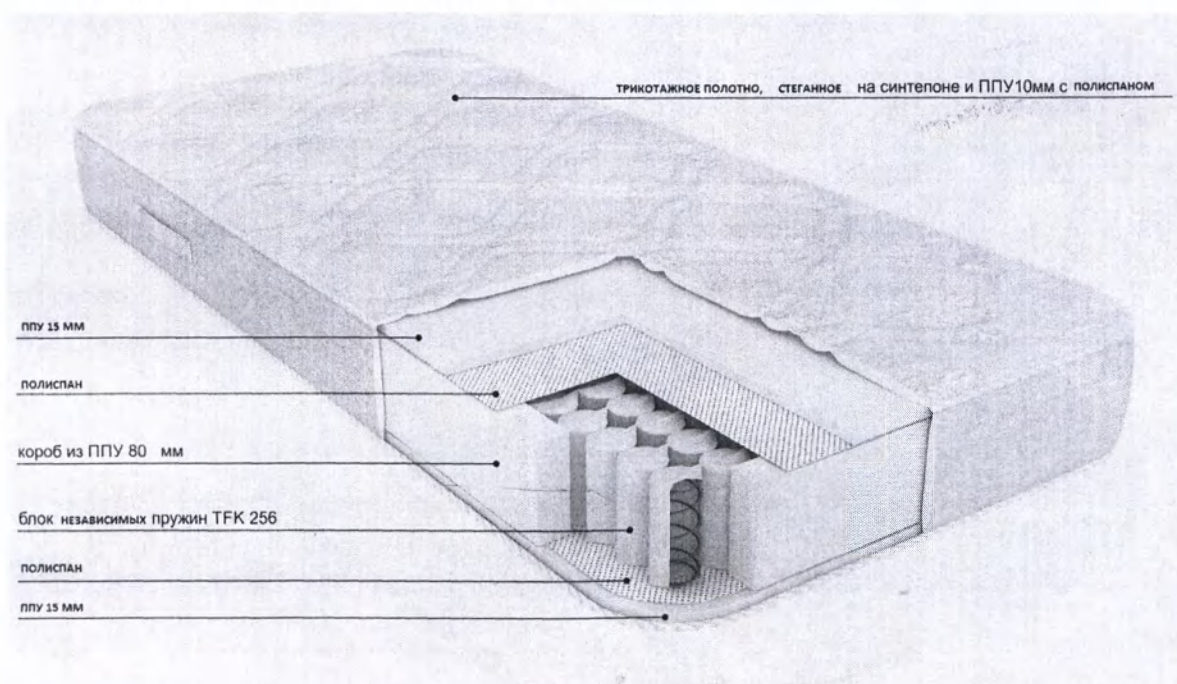


- Матрас ортопедический «Real People»

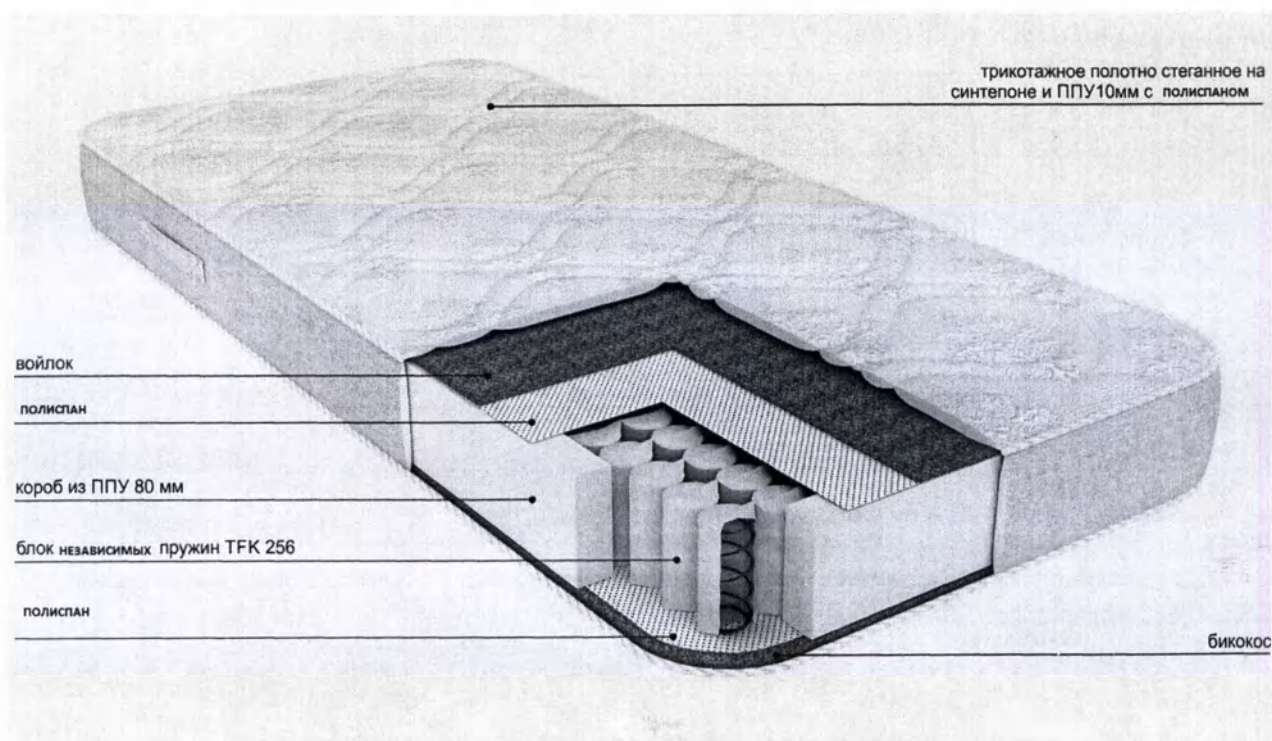


- Матрас ортопедический «Real Beauty»

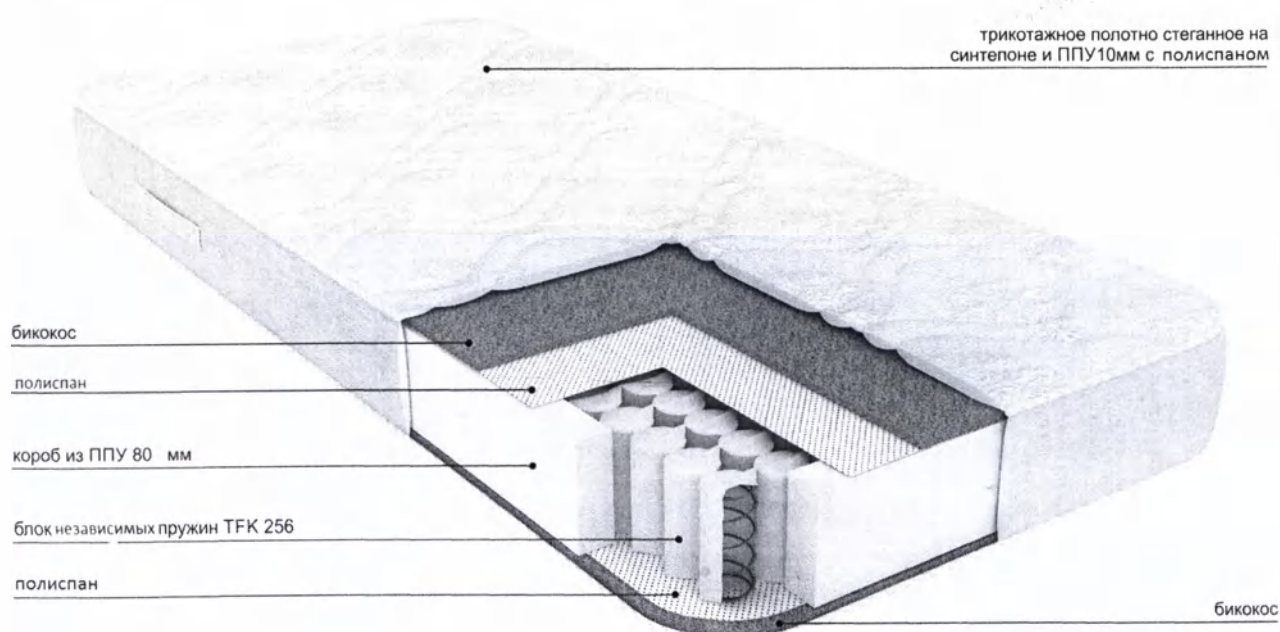


- Матрас ортопедический «Real Beauty+»

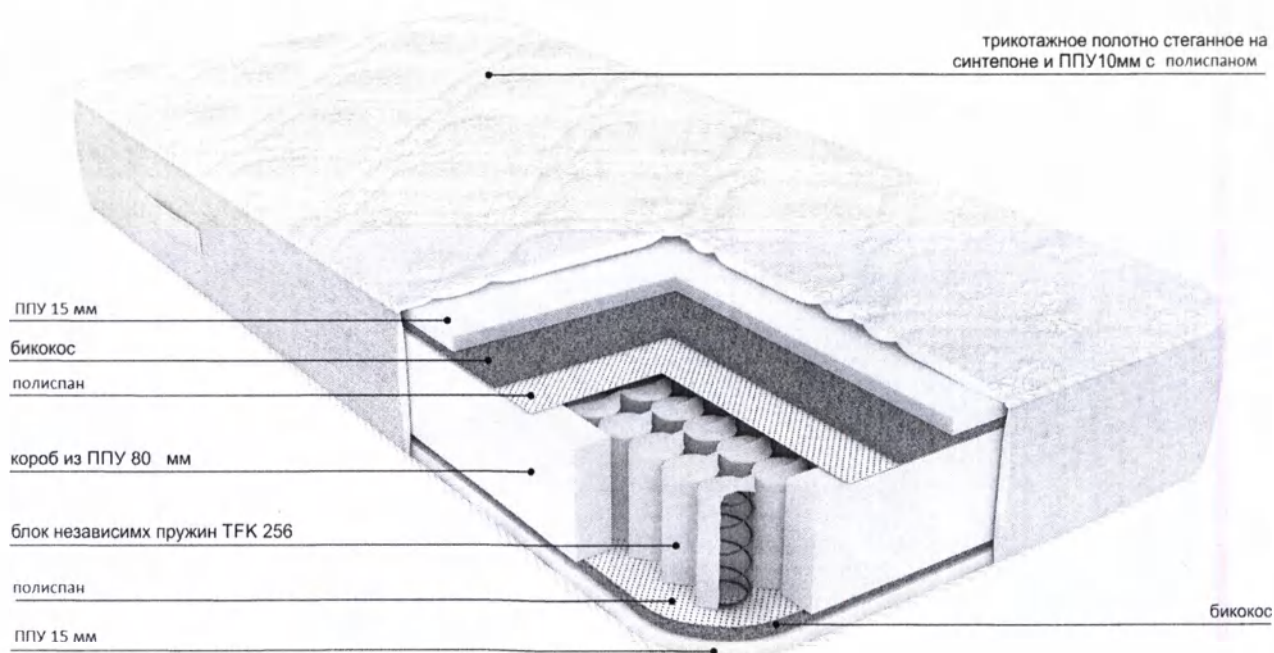


- Матрас ортопедический «Honey Joy» (с блоком независимых пружин: «TFK 256»)

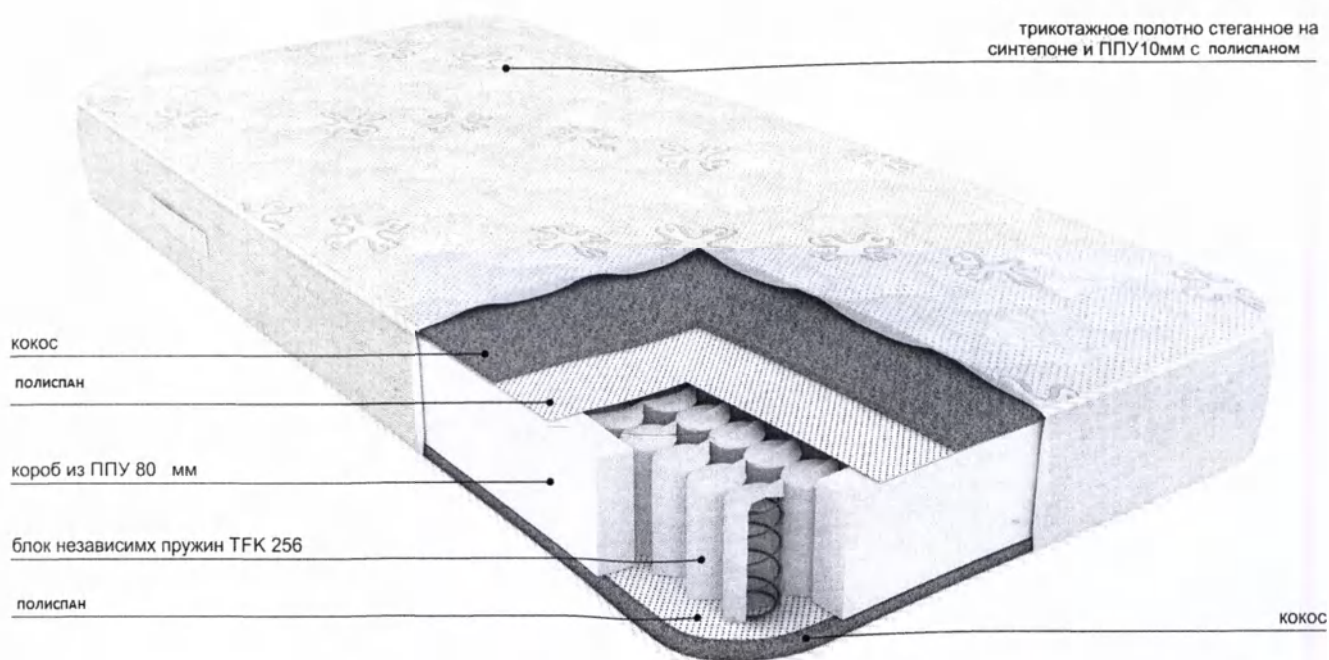


- Матрас ортопедический «Honey Joу» (с блоком независимых пружин: «TFK 500»)

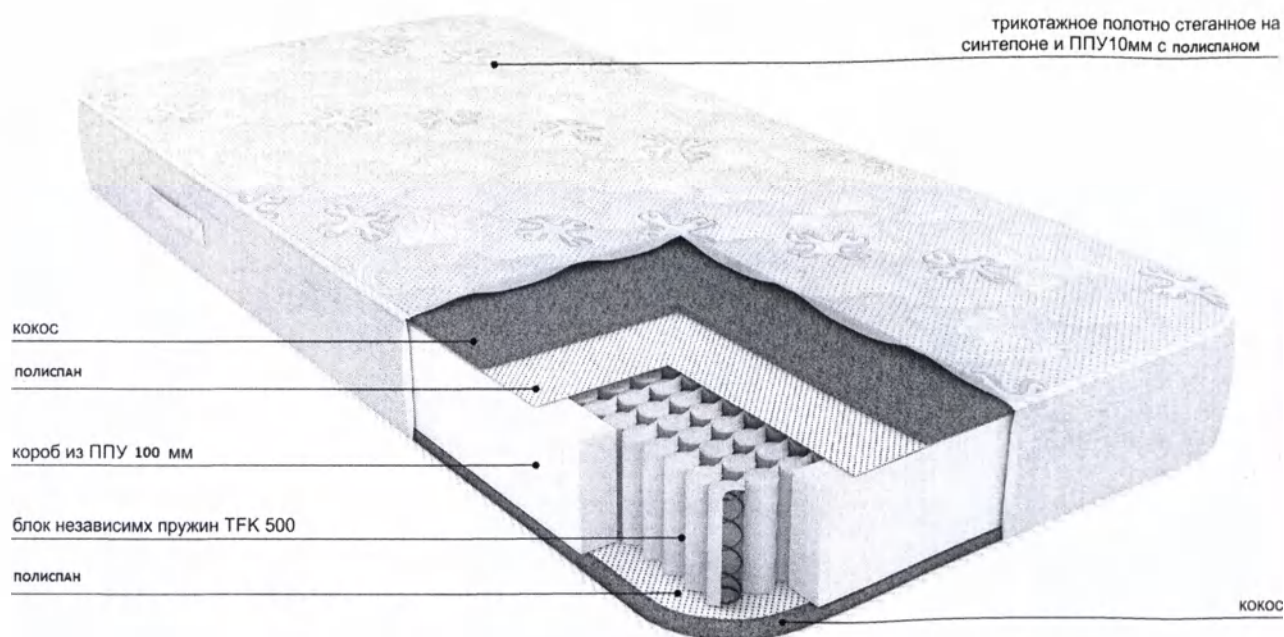


- Матрас ортопедический «Honey Joу» (с блоком независимых пружин: «TFK 1000»)

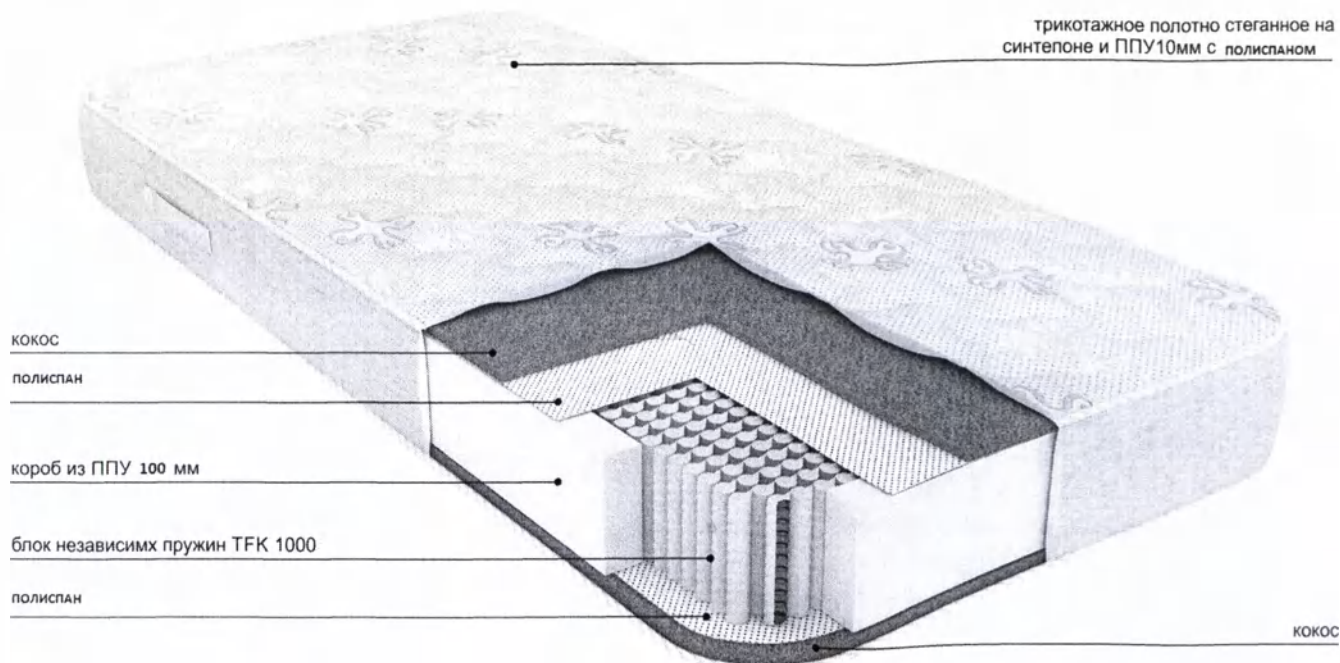


- Матрас ортопедический «Honey Land» (с блоком независимых пружин: «TFK 256»)

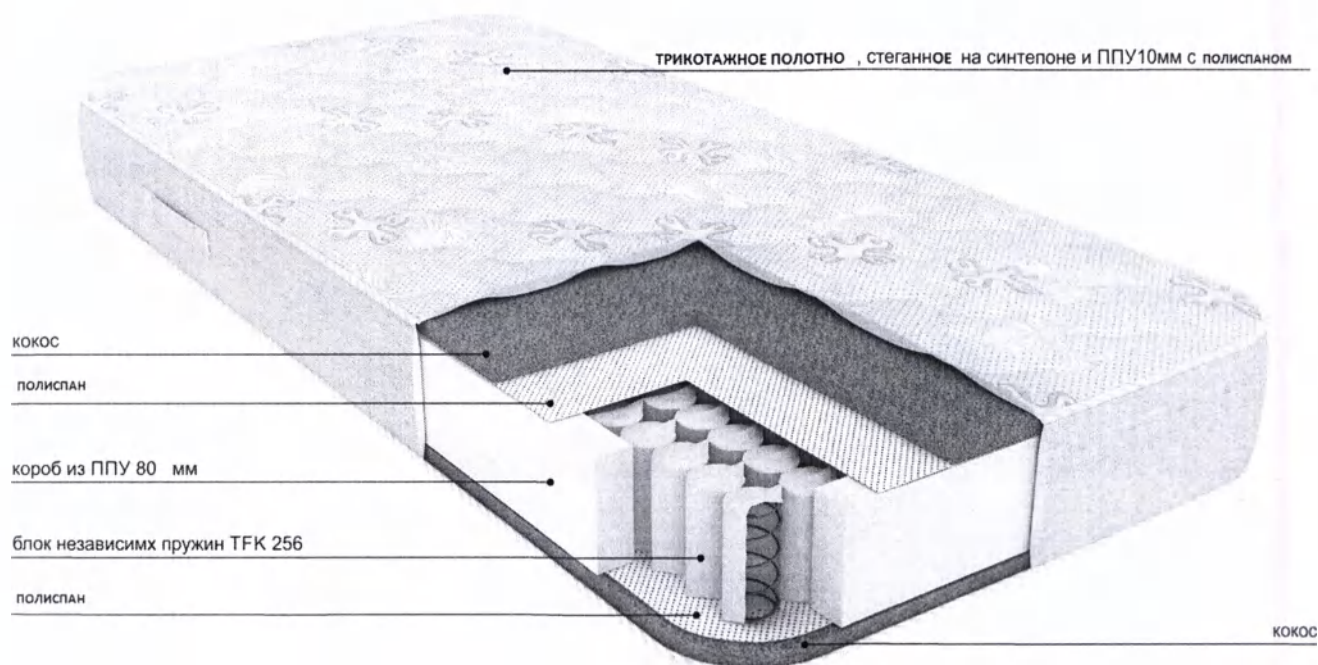


- Матрас ортопедический «Honey Land» (с блоком независимых пружин: «TFK 500»)

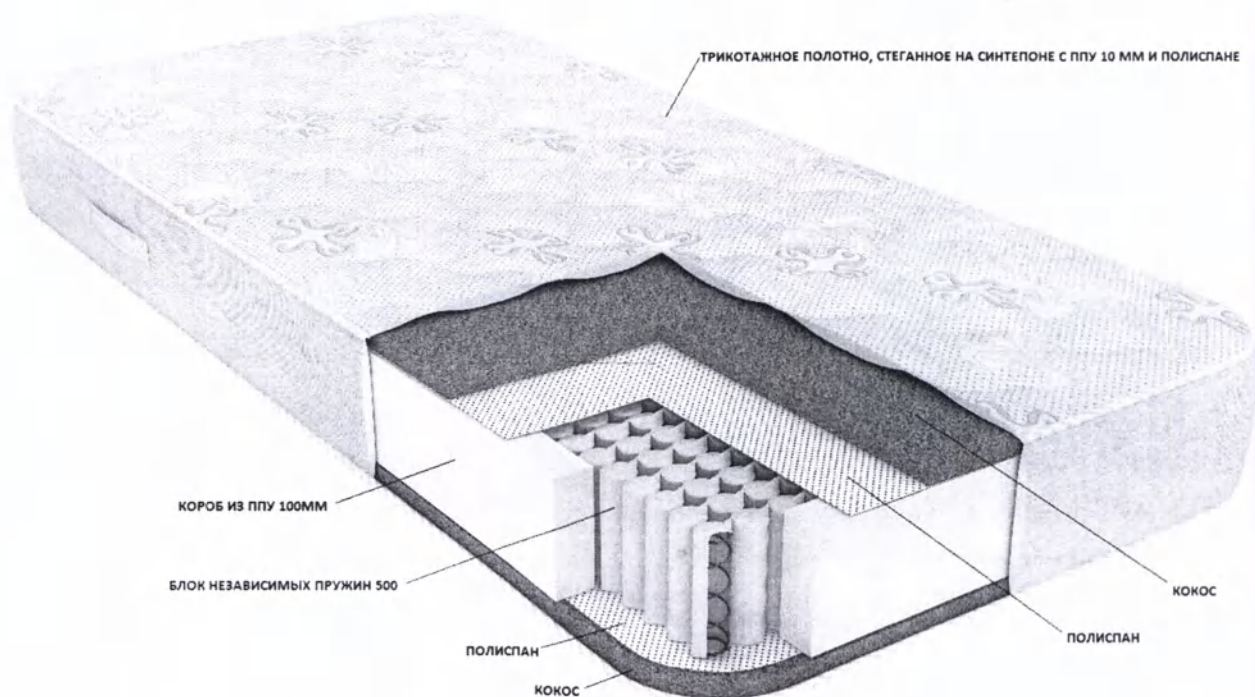


- Матрас ортопедический «Honey Land» (с блоком независимых пружин: «TFK 1000»)

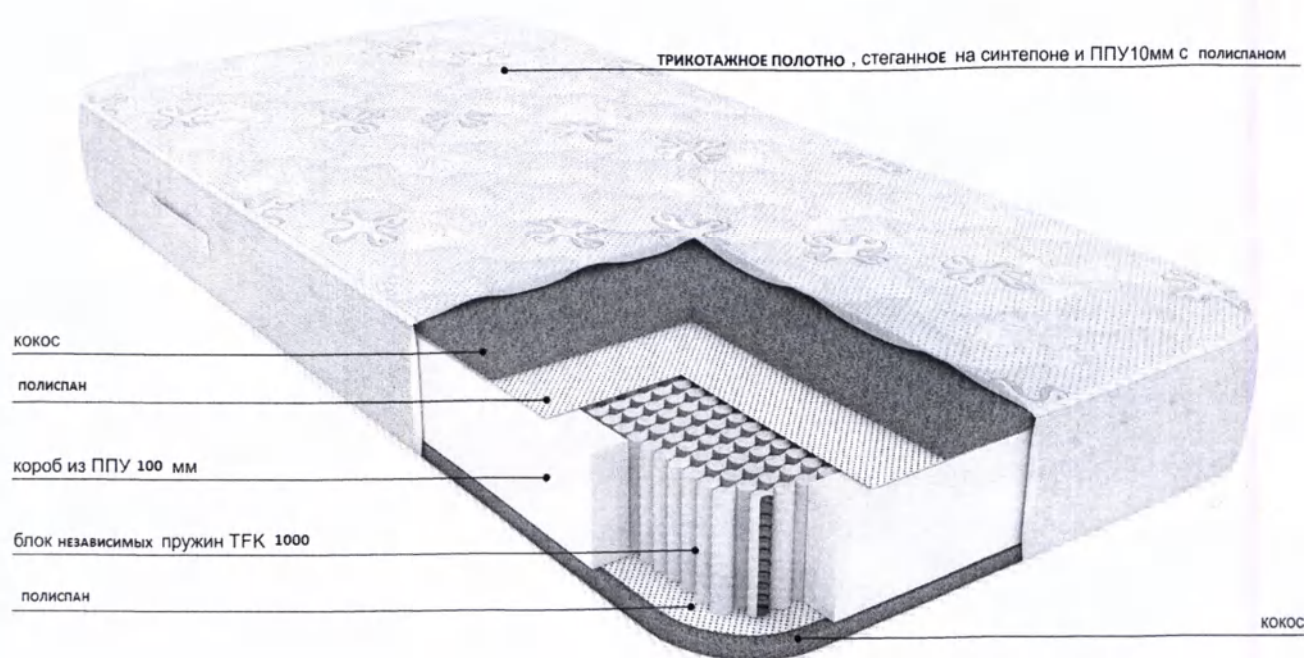


- Матрас ортопедический «Honey Season» (с блоком независимых пружин: «TFK 256»)

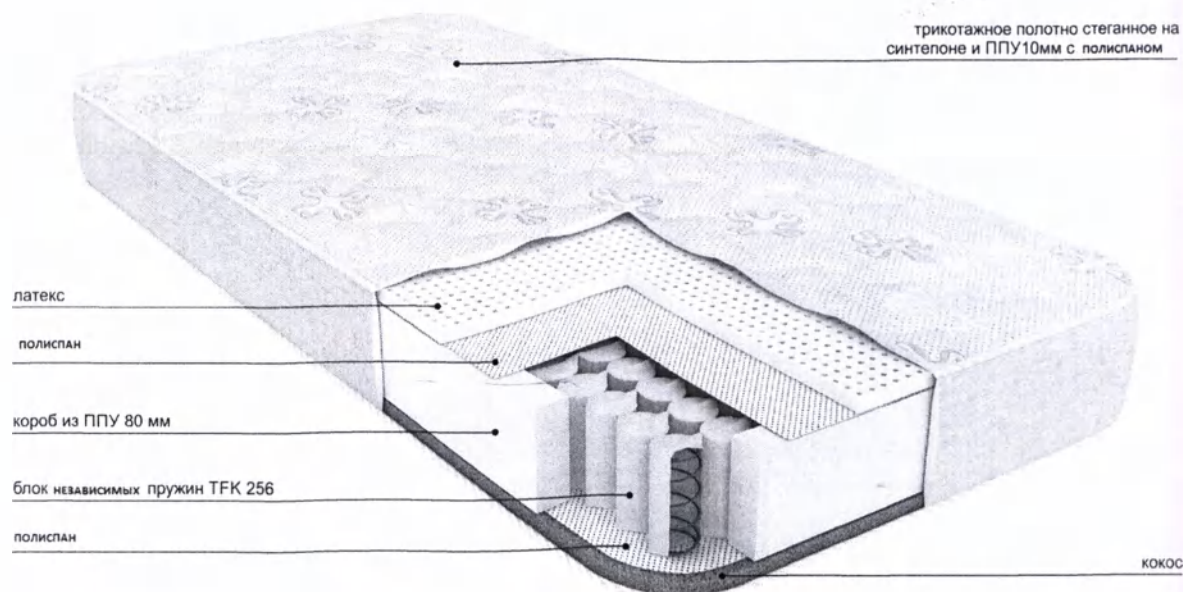


- Матрас ортопедический «Honey Season» (с блоком независимых пружин: «TFK 500»)

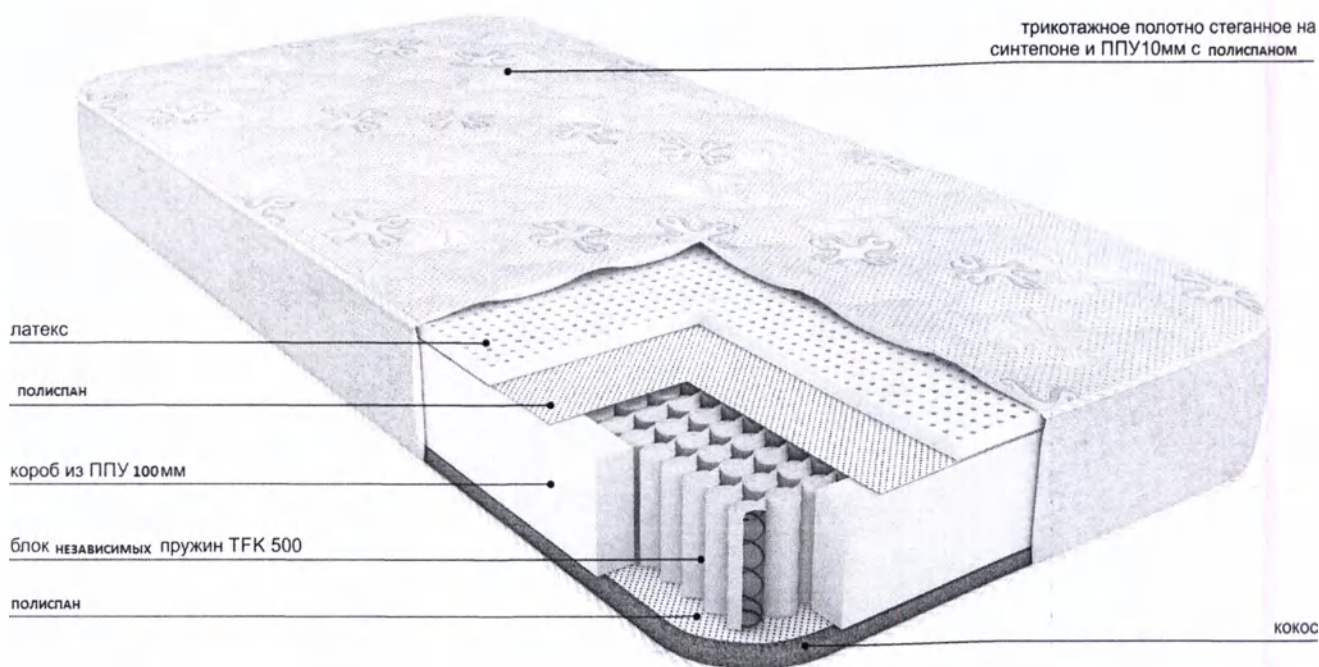


- Матрас ортопедический «Honey Season» (с блоком независимых пружин: «TFK 1000»)

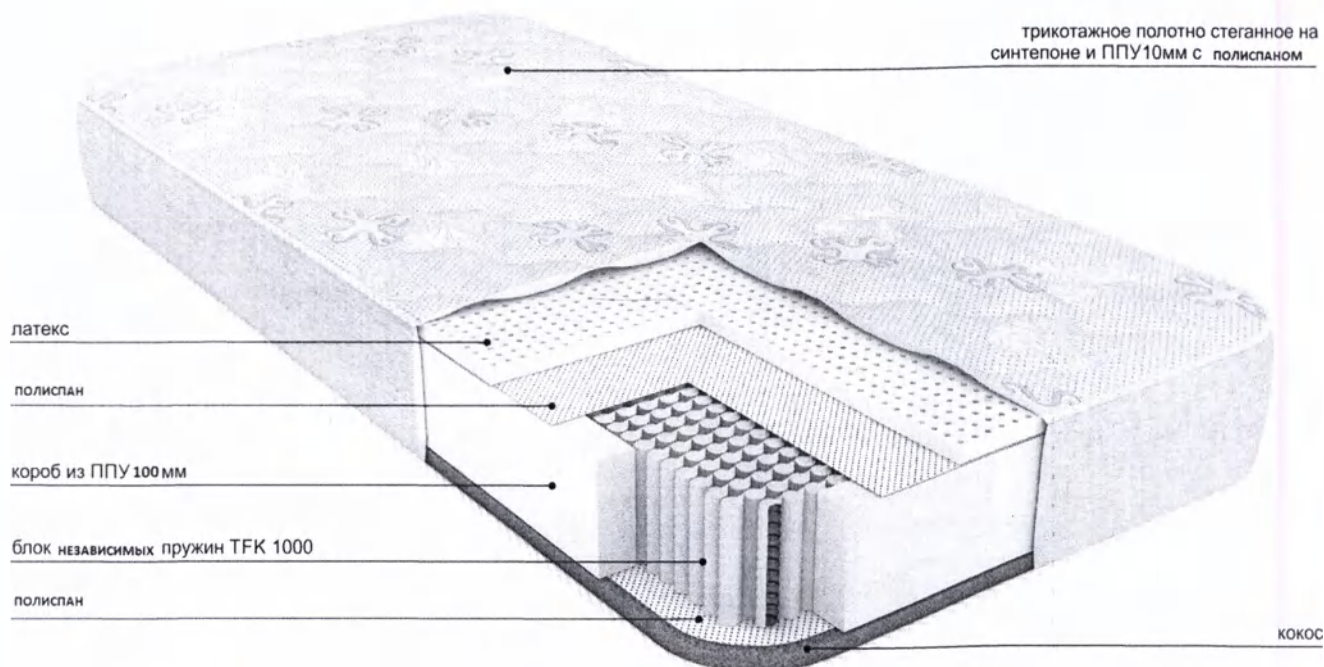

- Матрас ортопедический «Honey Moon» (с блоком независимых пружин: «TFK 256»)

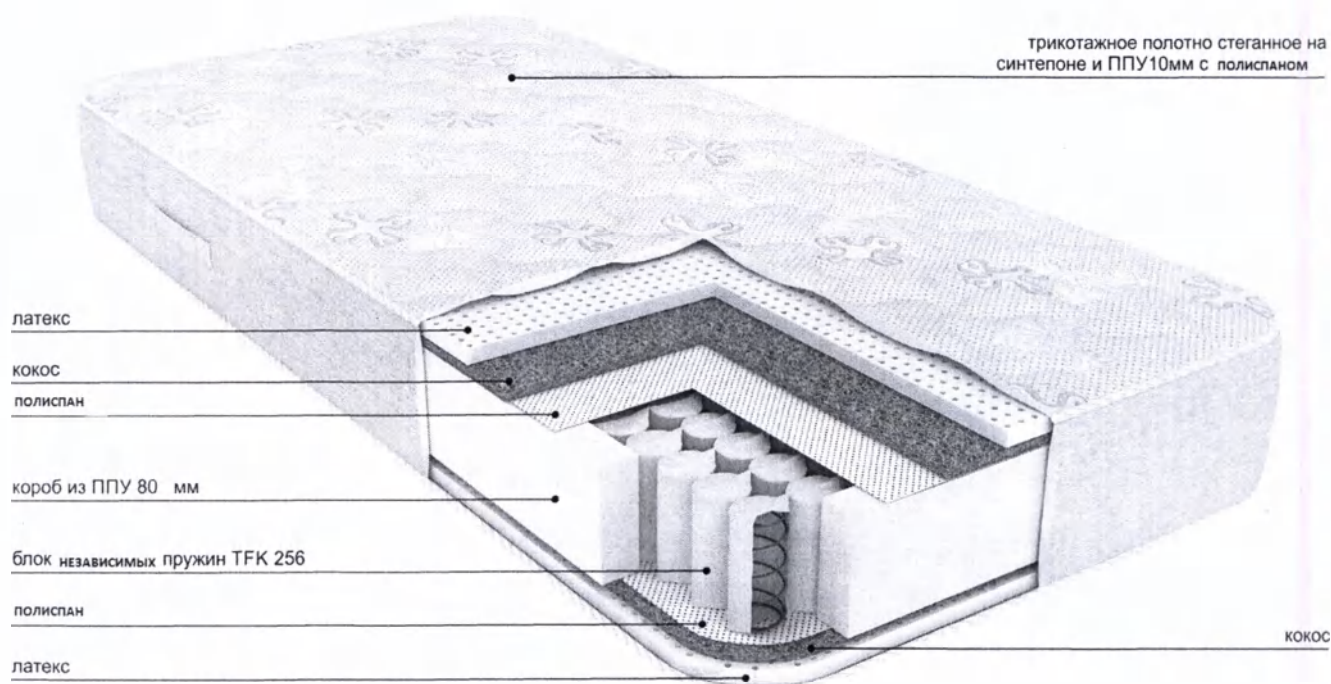


- Матрас ортопедический «Honey Moon» (с блоком независимых пружин: «TFK 500»)

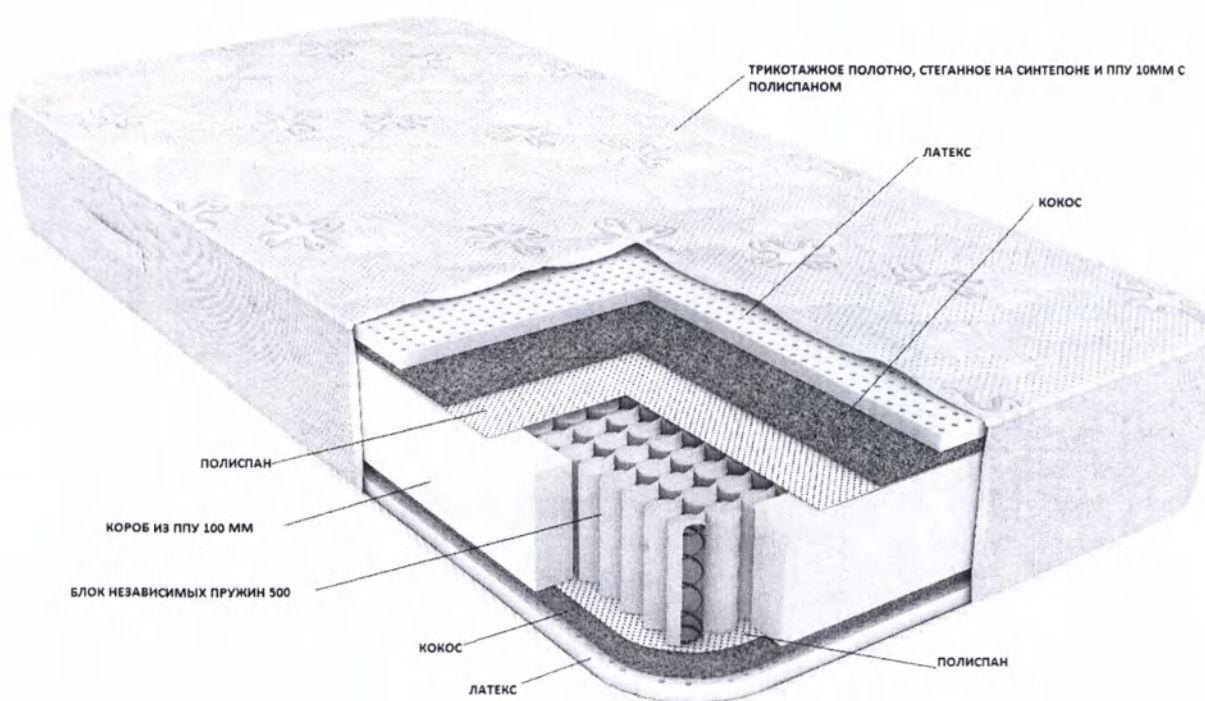


- Матрас ортопедический «Honey Moon» (с блоком независимых пружин: «TFK 1000»)

трикотажное полотно стеганное на синтепоне и ППУ 10мм с войлоком

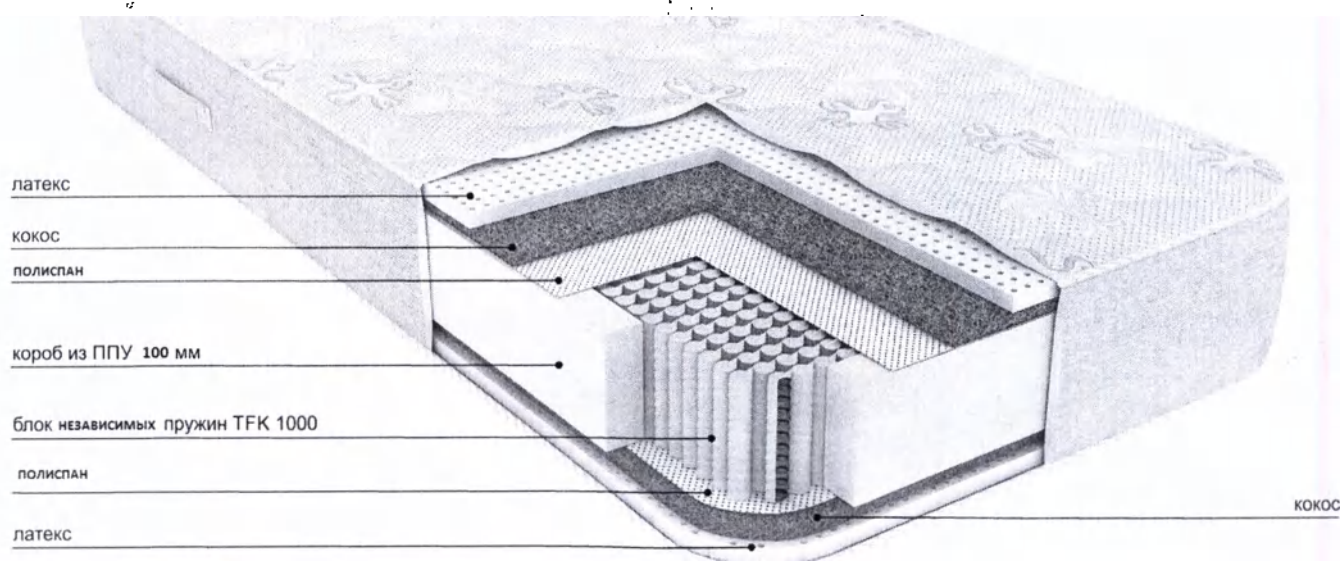


- Матрас ортопедический «Honey Pie» (с блоком независимых пружин: «TFK 256»)


трикотажное полотно стеганное на синтепоне и ППУ 10мм с войлоком

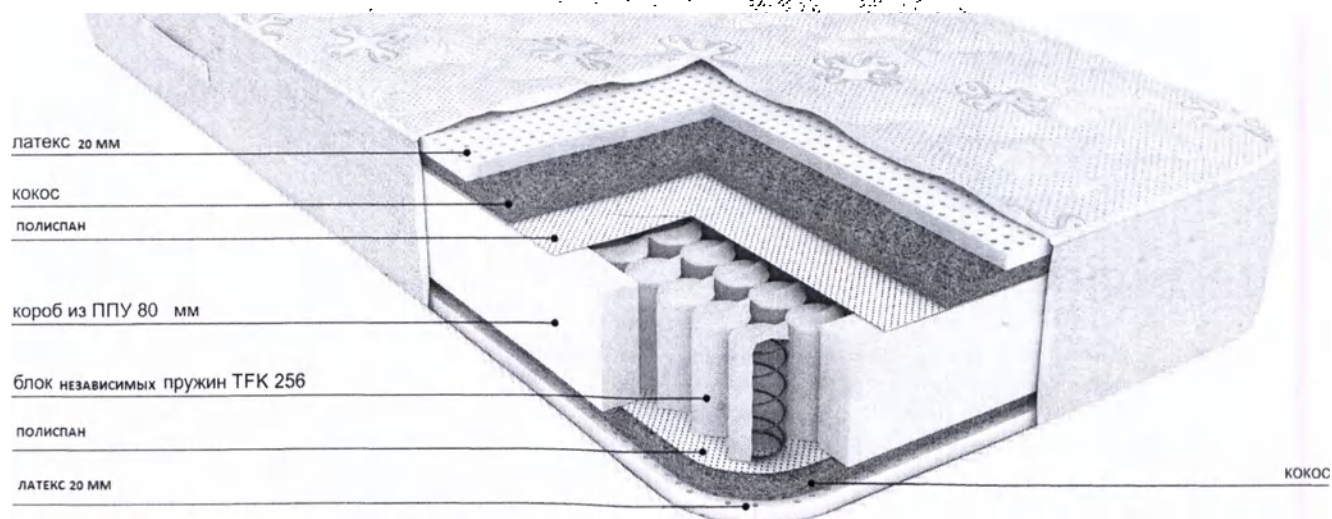


- Матрас ортопедический «Honey Pie» (с блоком независимых пружин: «TFK 500»)

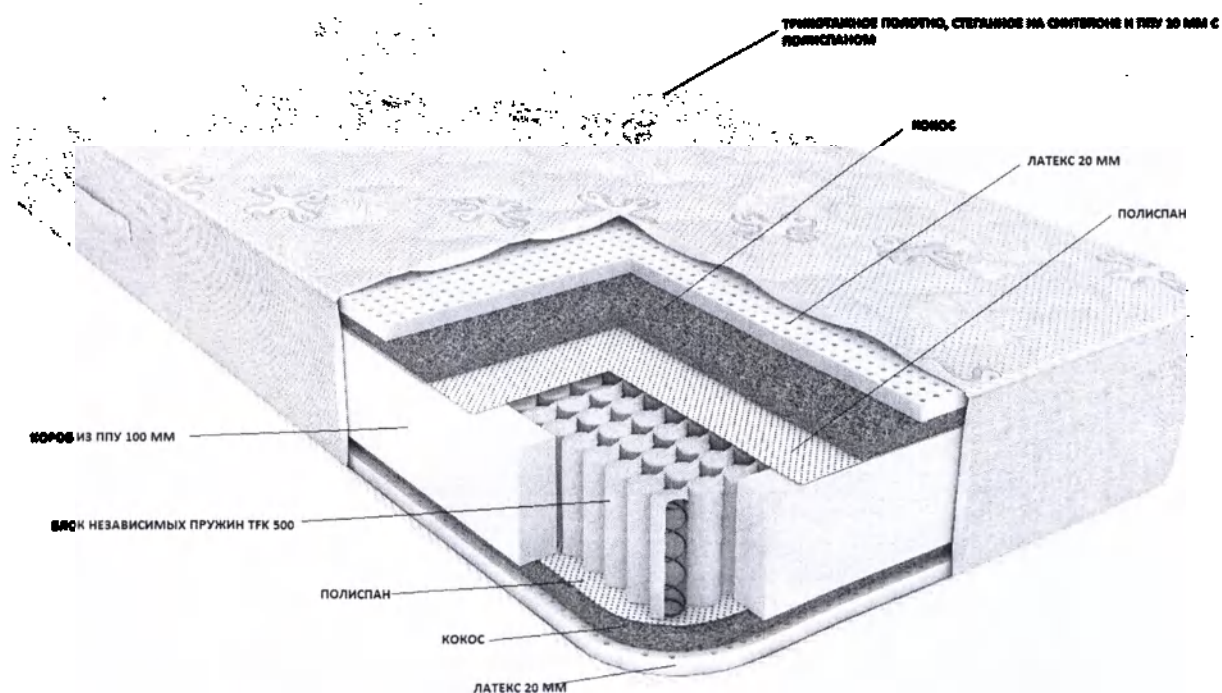


- Матрас ортопедический «Honey Pie» (с блоком независимых пружин: «TFK 1000»)

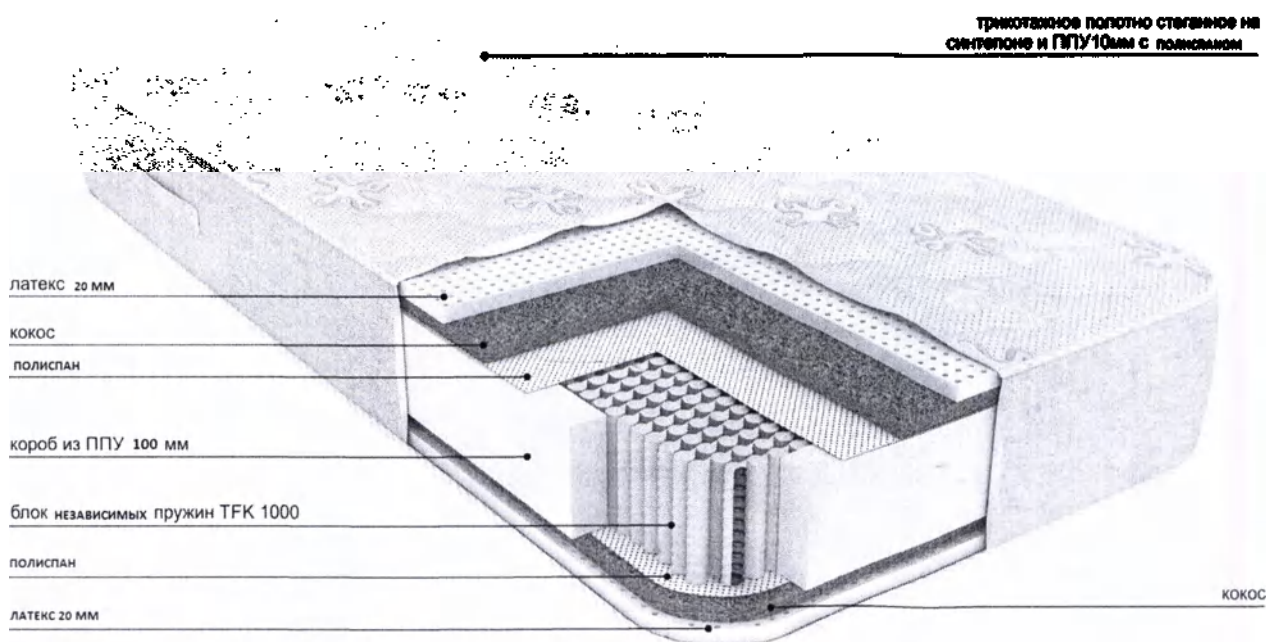


- Матрас ортопедический «Honey Layer 6»

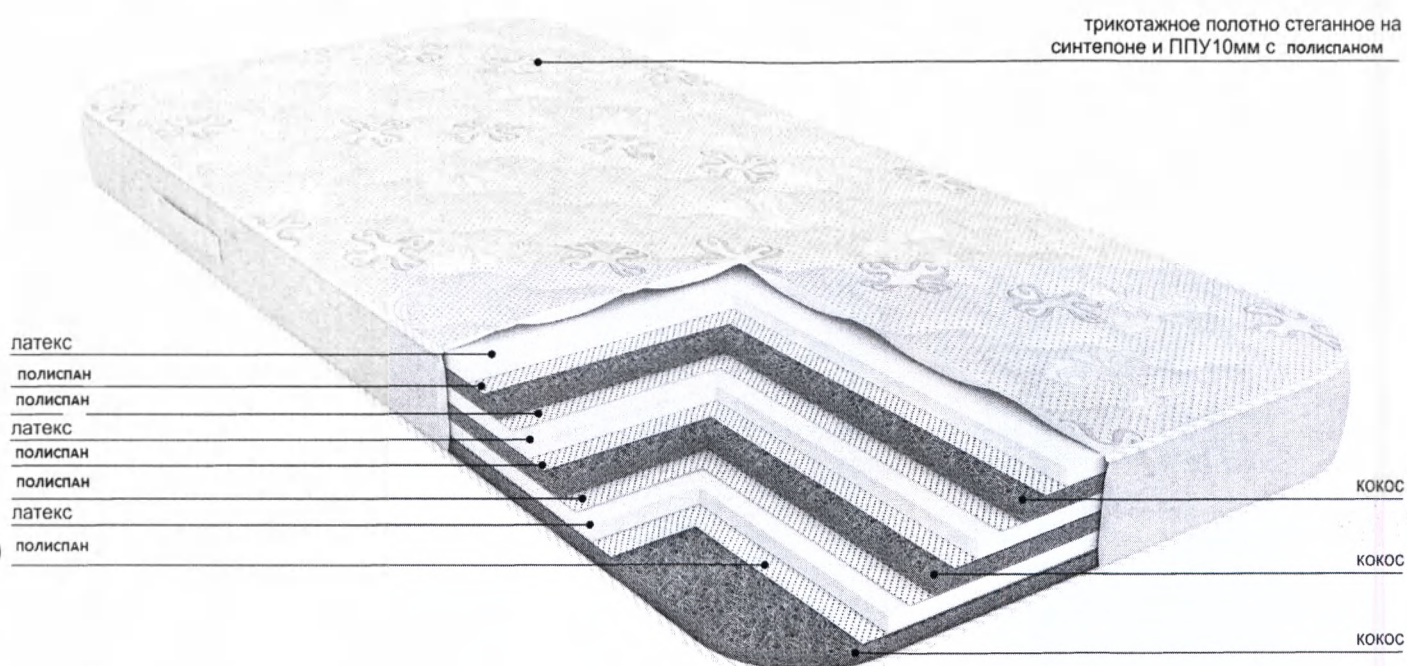


- Матрас ортопедический «BioNative Laguna» (с блоком независимых пружин: «TFK 256»)

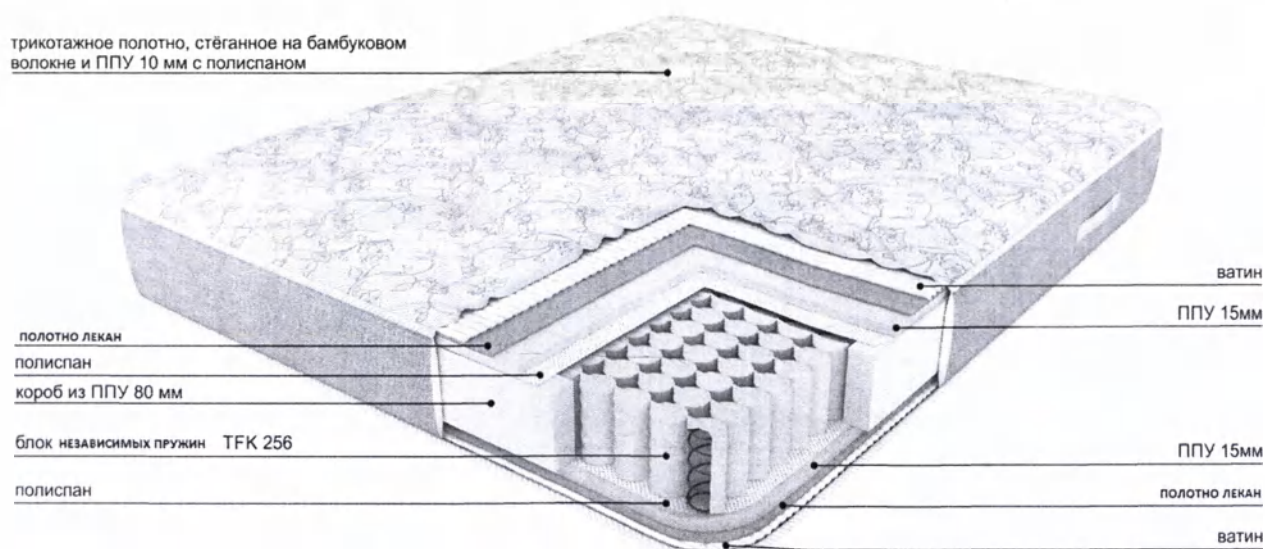


- Матрас ортопедический «BioNative Laguna» (с блоком независимых пружин: «TFK 500»)

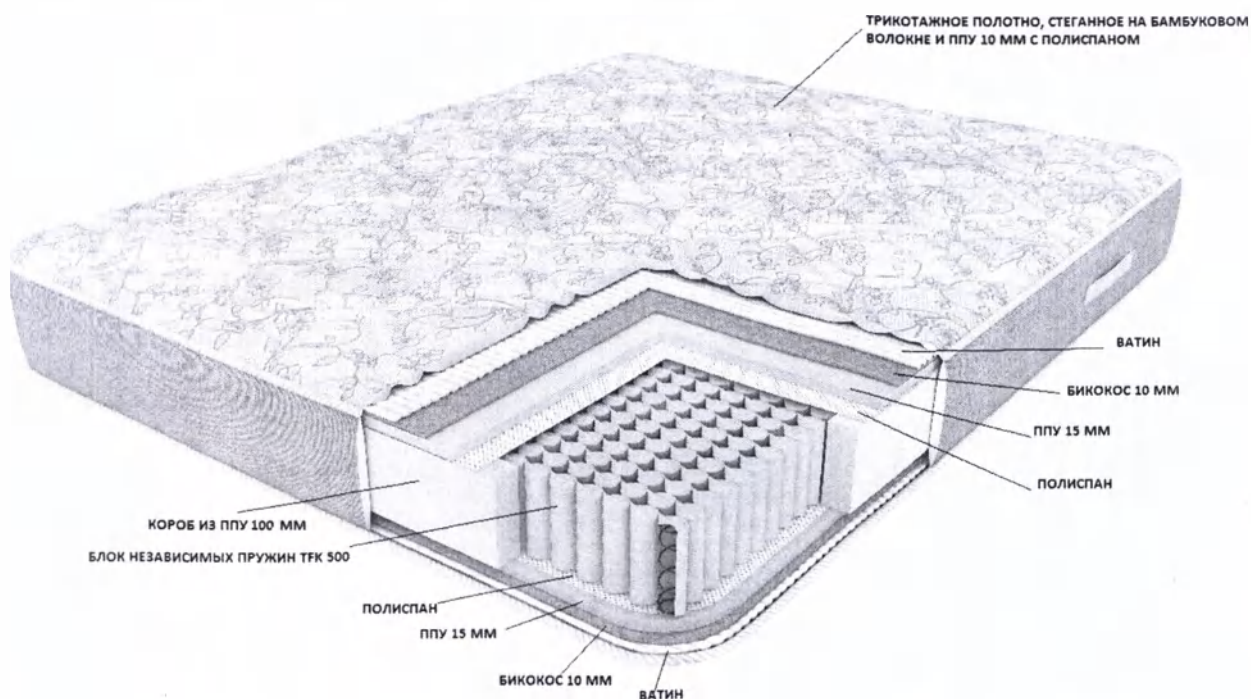


- Матрас ортопедический «BioNative Laguna» (с блоком независимых пружин: «TFK 1000»)

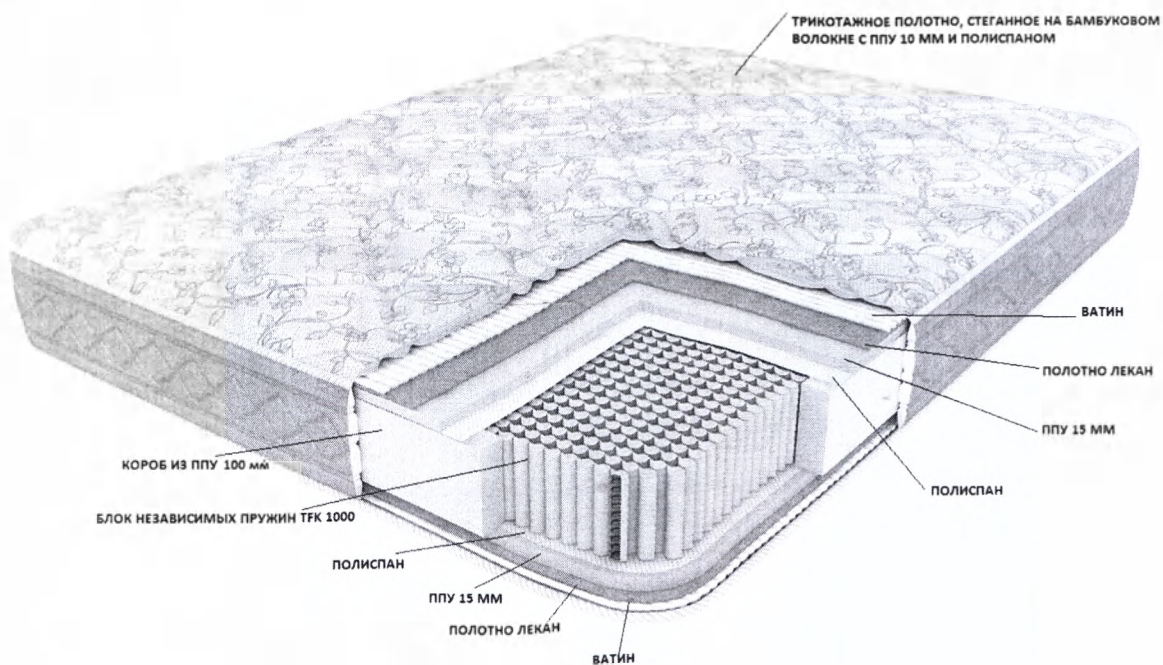


- Матрас ортопедический «BioNative Spring» (с блоком независимых пружин: «TFK 256»)

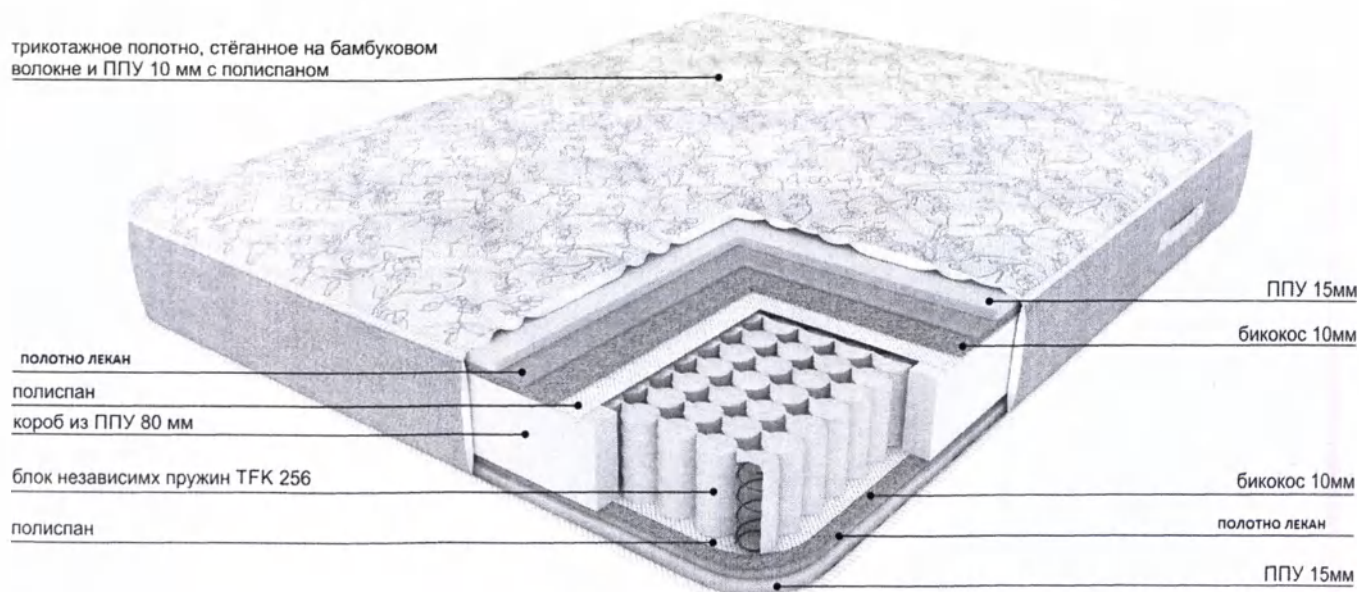

- Матрас ортопедический «BioNative Spring» (с блоком независимых пружин: «TFK 500»)

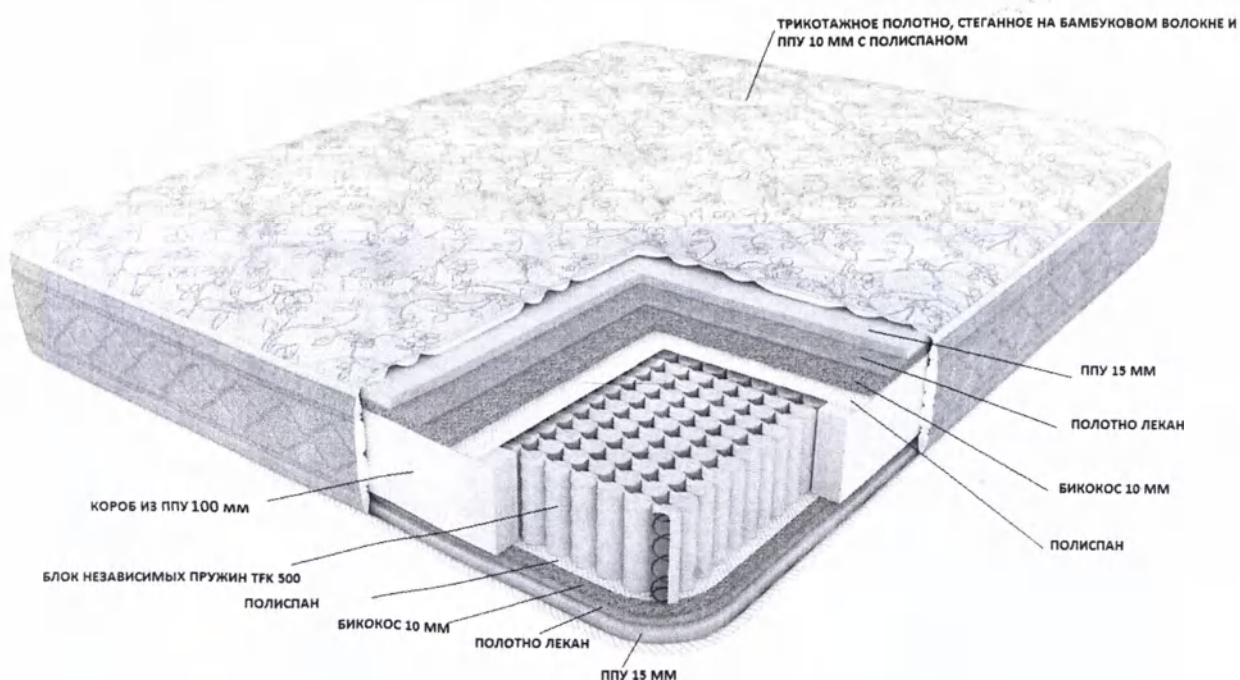


- Матрас ортопедический «BioNative Spring» (с блоком независимых пружин: «TFK 1000»)

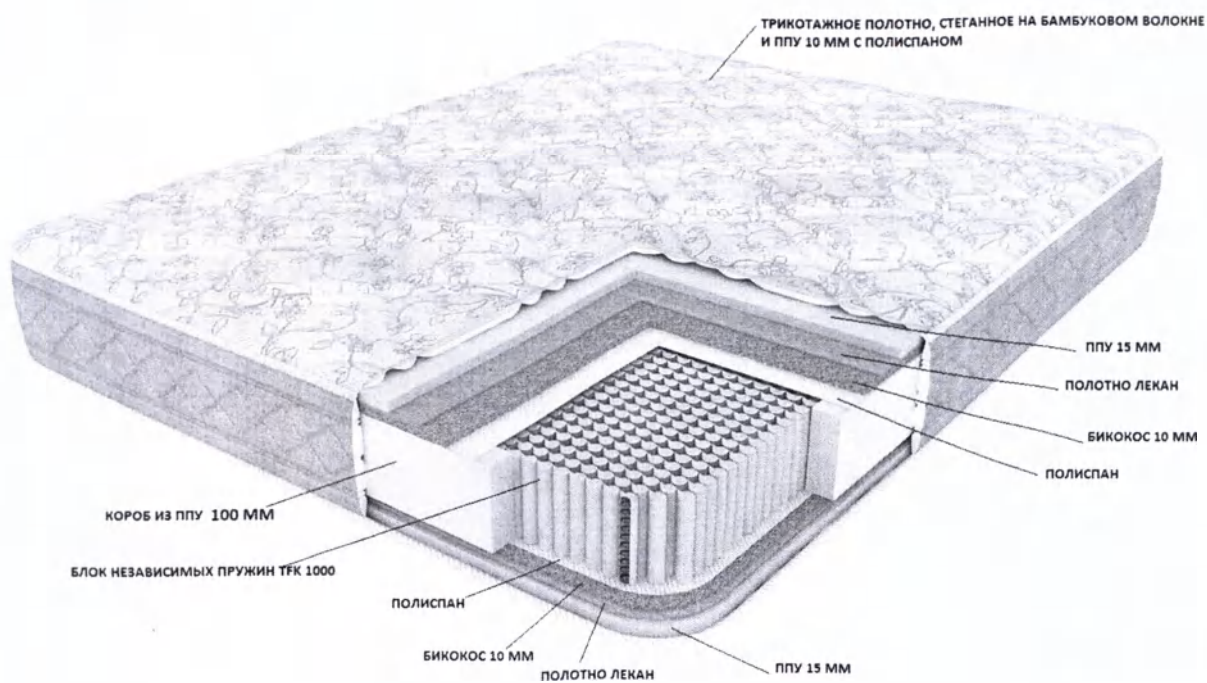


- Матрас ортопедический «BioNative City» (с блоком независимых пружин: «TFK 256»)

трикотажное полотно, стёганное на бамбуковом
волокне и ППУ 10 мм с полиспаном

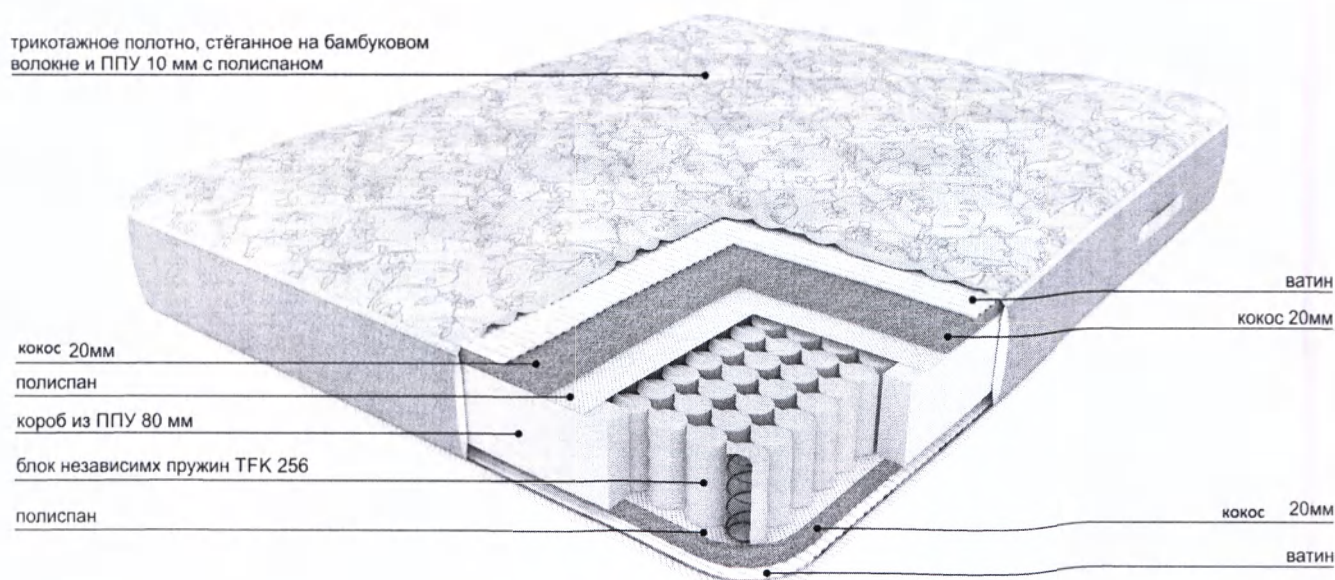


- Матрас ортопедический «BioNative City» (с блоком независимых пружин: «TFK 500»)

трикотажное полотно, стёганное на бамбуковом
волокне и ППУ 10 мм с полиспаном

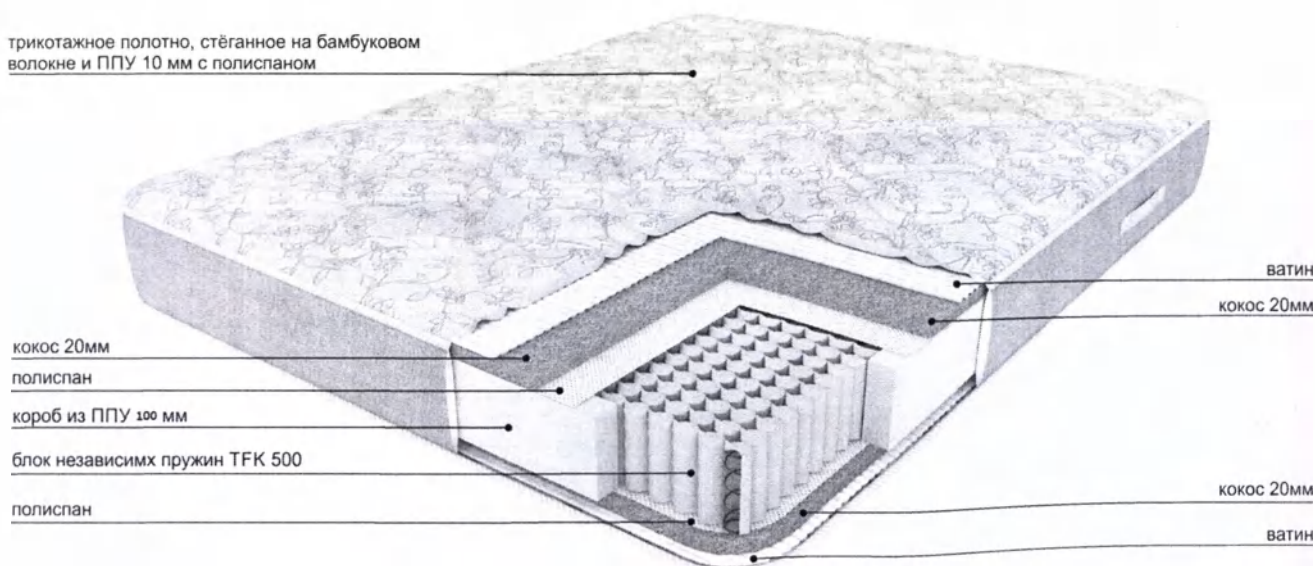


- Матрас ортопедический «BioNative City» (с блоком независимых пружин: «TFK 1000»)


трикотажное полотно, стёганное на бамбуковом
волокне и ППУ 10 мм с полиспаном

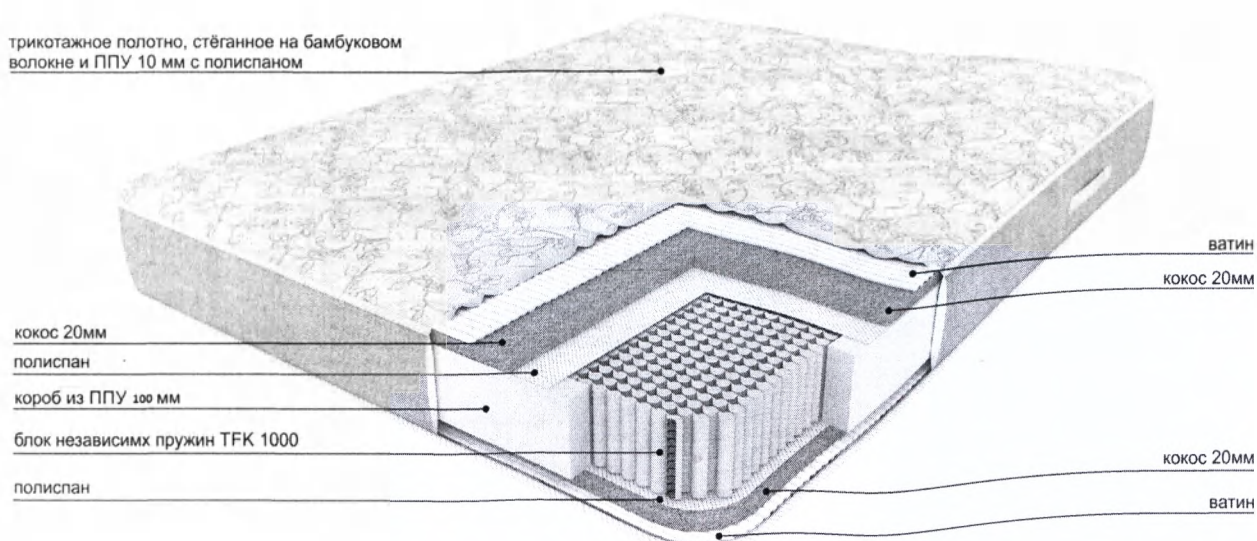


- Матрас ортопедический «BioNative Selva» (с блоком независимых пружин: «TFK 256»)

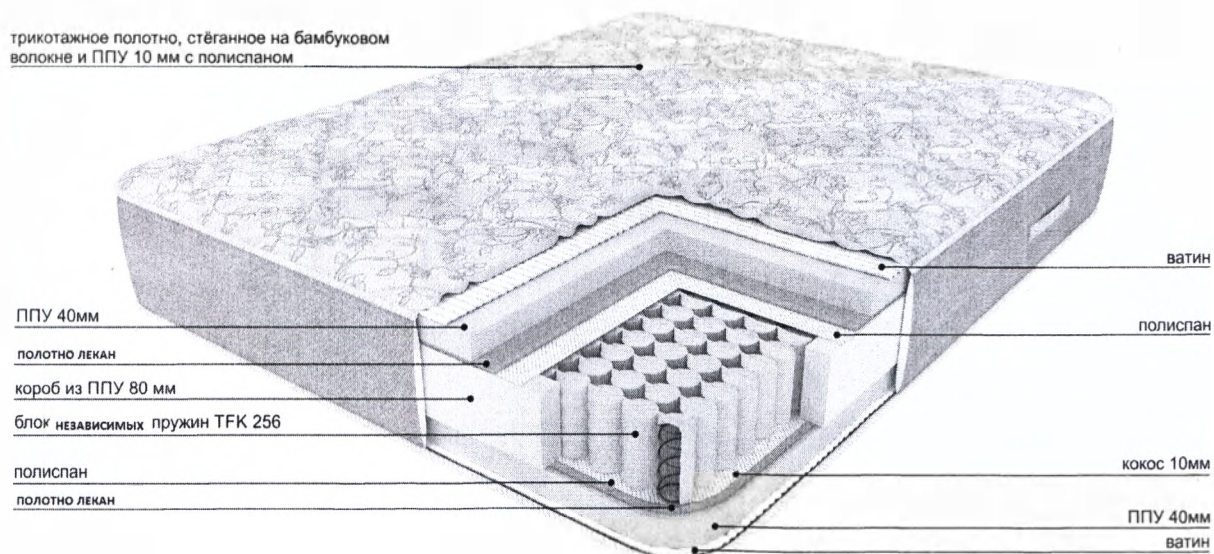


- Матрас ортопедический «BioNative Selva» (с блоком независимых пружин: «TFK 500»)

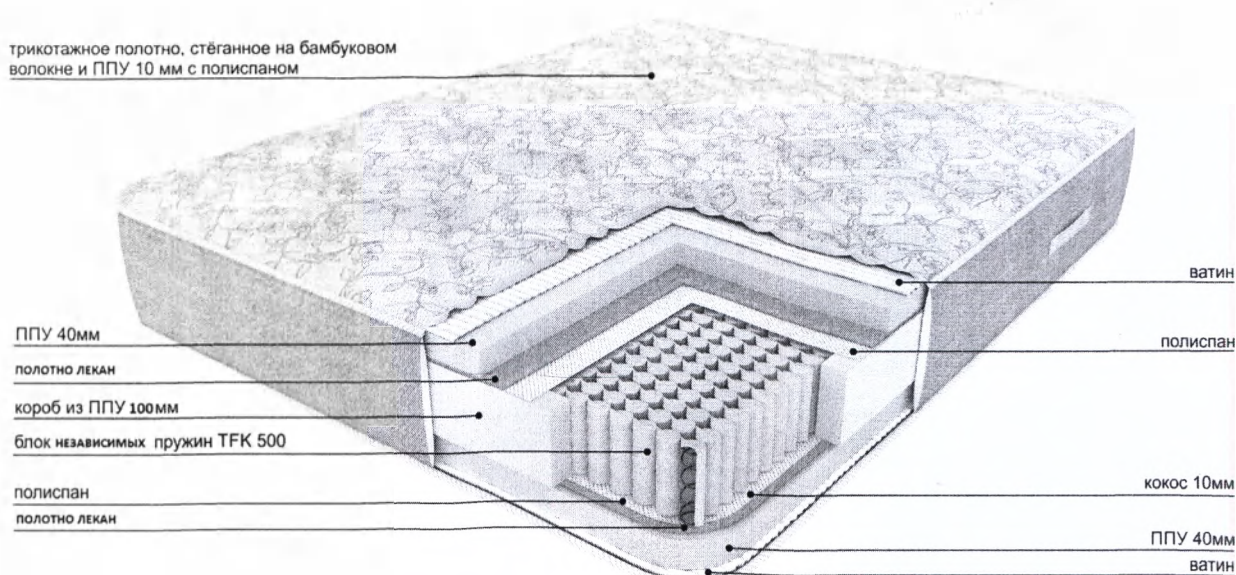

- Матрас ортопедический «BioNative Selva» (с блоком независимых пружин: «TFK 1000»)

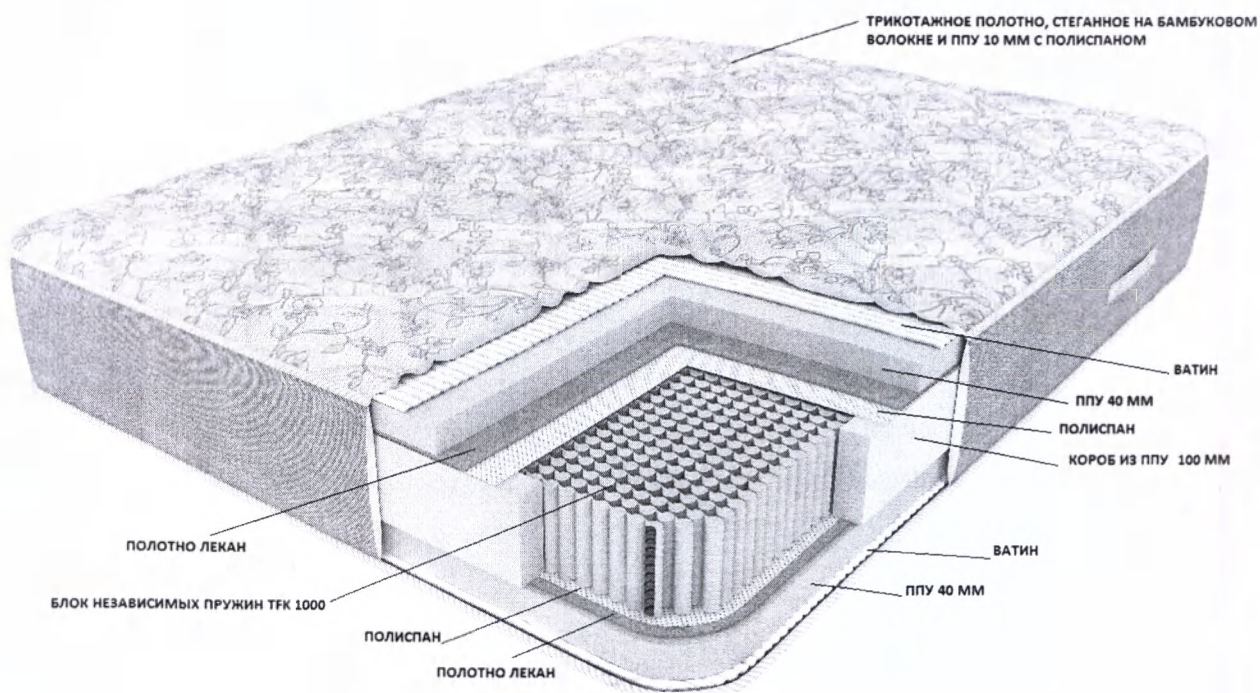


- Матрас ортопедический «BioNative Family 20» (с блоком независимых пружин: «TFK 256»)

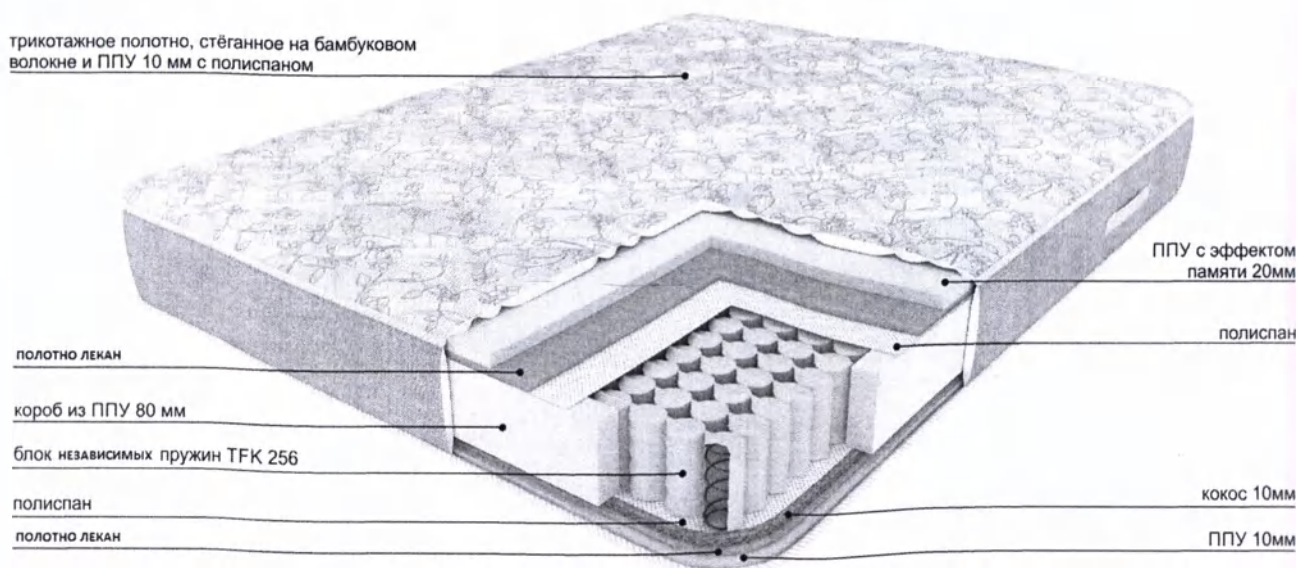


- Матрас ортопедический «BioNative Family 20» (с блоком независимых пружин: «TFK 500»)

трикотажное полотно, стёганное на бамбуковом
волокне и ППУ 10 мм с полиспаном

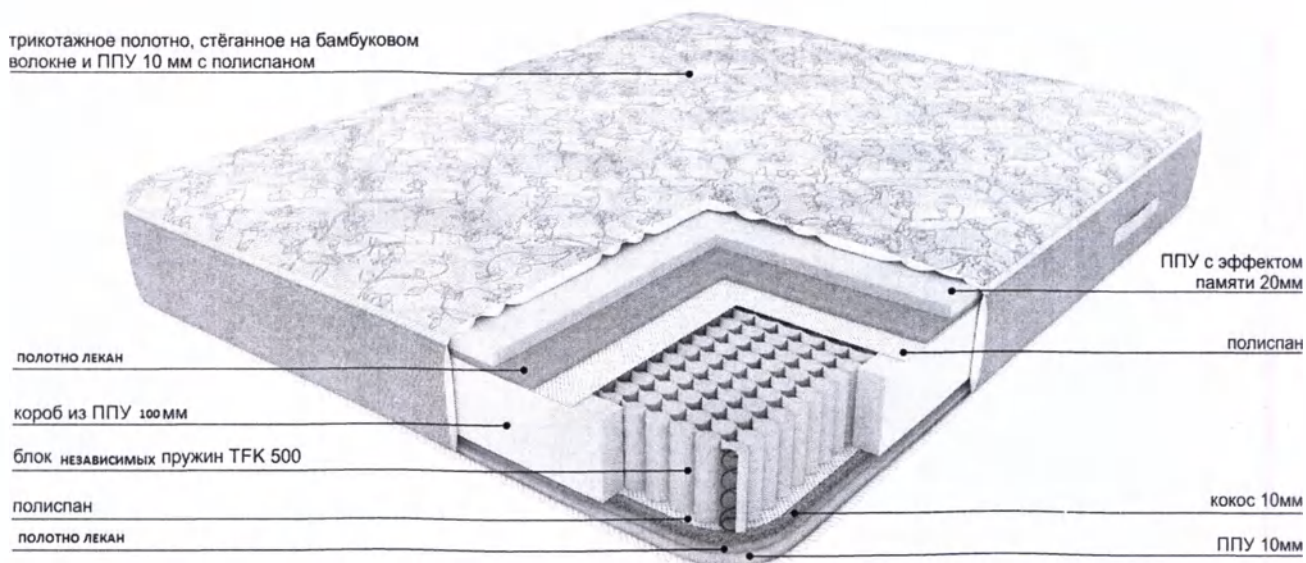


- Матрас ортопедический «BioNative Family 20» (с блоком независимых пружин: «TFK 1000»)

трикотажное полотно, стёганное на бамбуковом
волокне и ППУ 10 мм с полиспаном

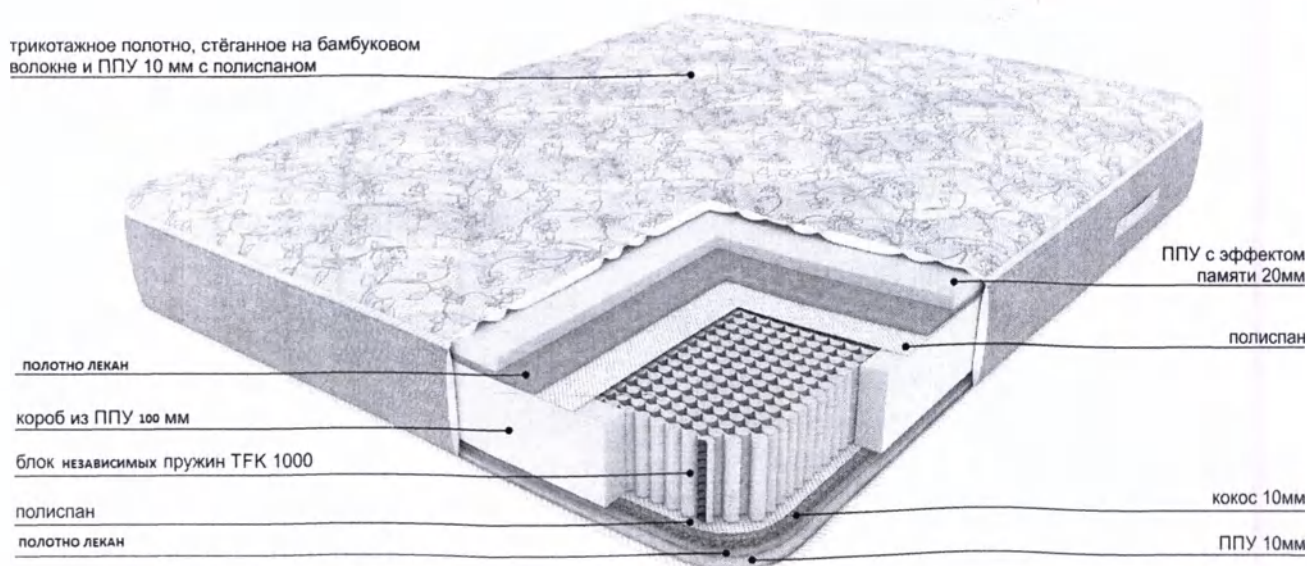


- Матрас ортопедический «BioNative Family 40» (с блоком независимых пружин: «TFK 256»)

трикотажное полотно, стёганное на бамбуковом
волокне и ППУ 10 мм с полиспаном

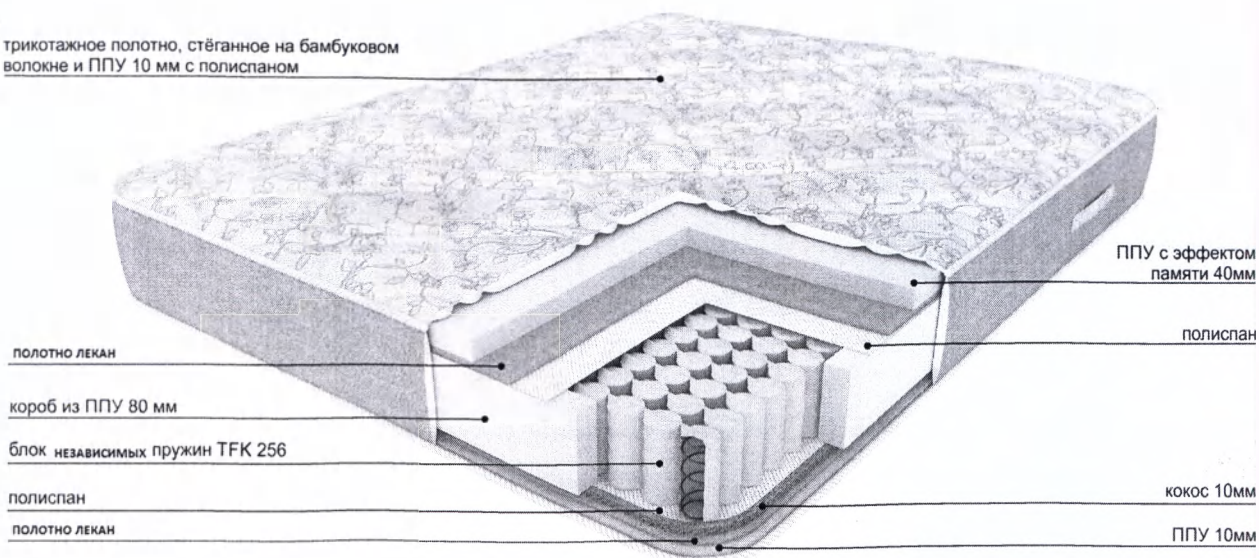


- Матрас ортопедический «BioNative Family 40» (с блоком независимых пружин: «TFK 500»)


трикотажное полотно, стёганное на бамбуковом
волокне и ППУ 10 мм с полиспаном

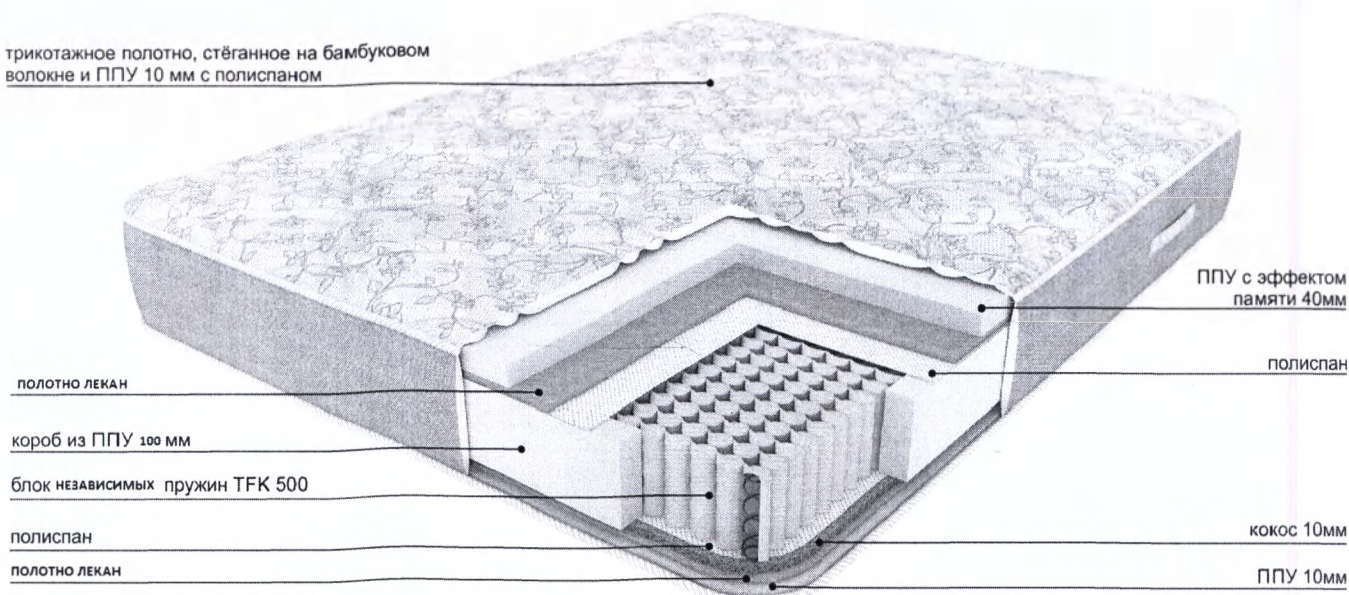

- Матрас ортопедический «BioNative Family 40» (с блоком независимых пружин: «TFK 1000»)

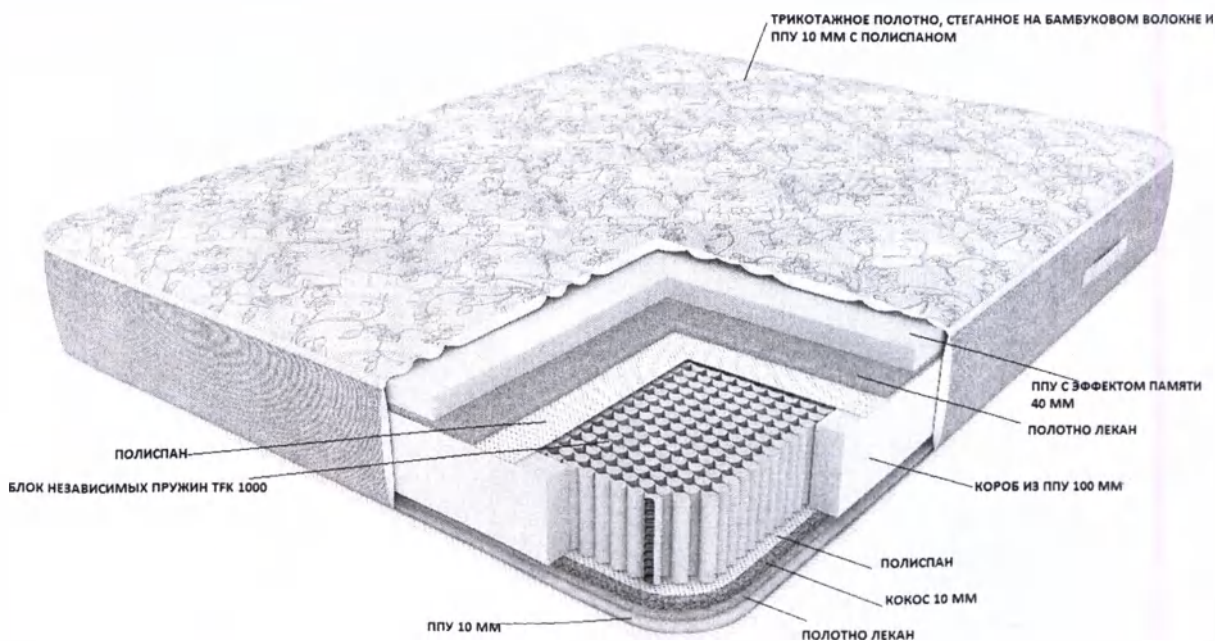


- Матрас ортопедический «BioNative Night» (с блоком независимых пружин: «TFK 256»)

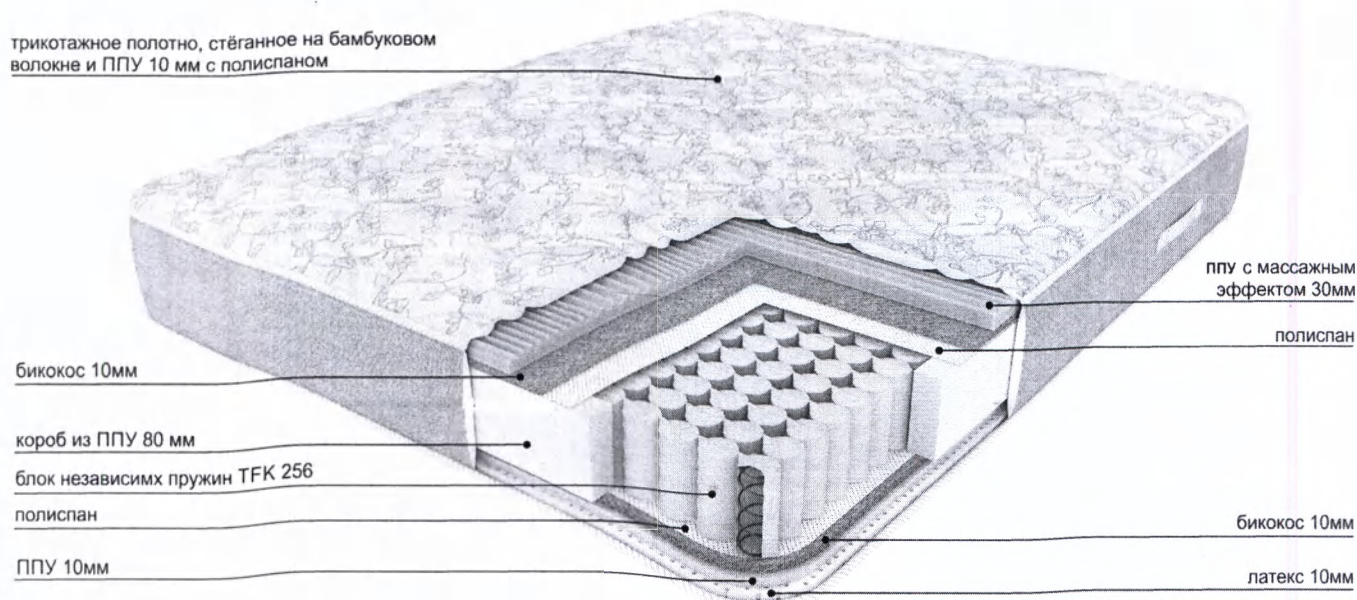


- **Матрас ортопедический «BioNative Night» (с блоком независимых пружин: «TFK 500»)**

трикотажное полотно, стёганное на бамбуковом
волокне и ППУ 10 мм с полиспаном

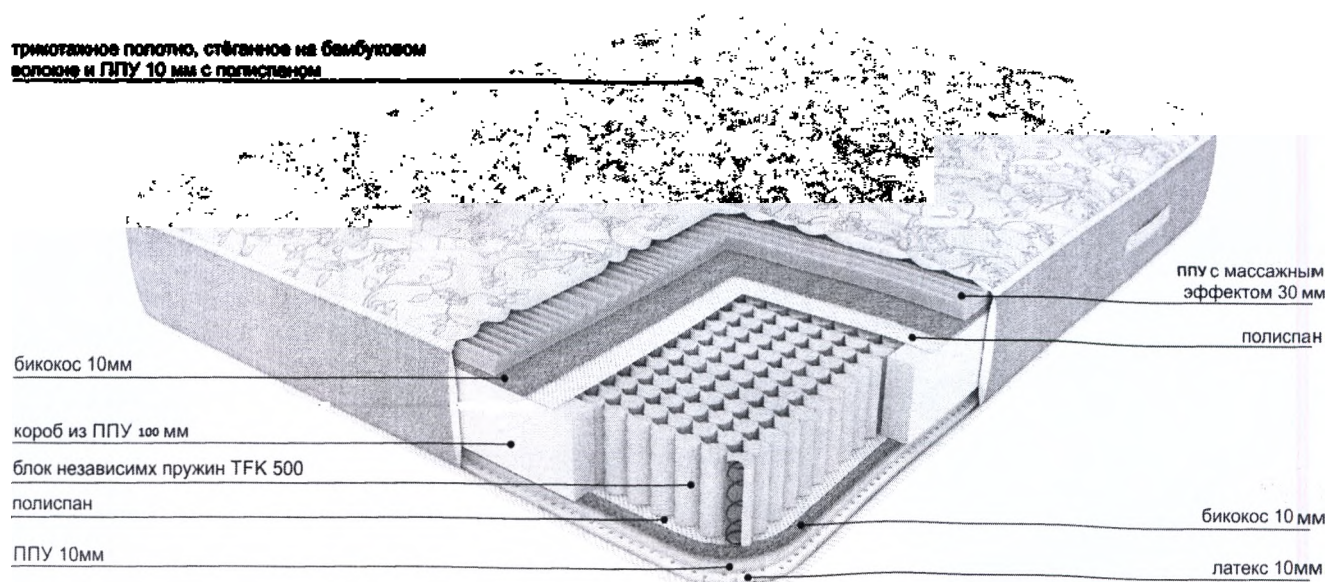


- **Матрас ортопедический «BioNative Night» (с блоком независимых пружин: «TFK 1000»)**


трикотажное полотно, стёганное на бамбуковом
волокне и ППУ 10 мм с полиспаном

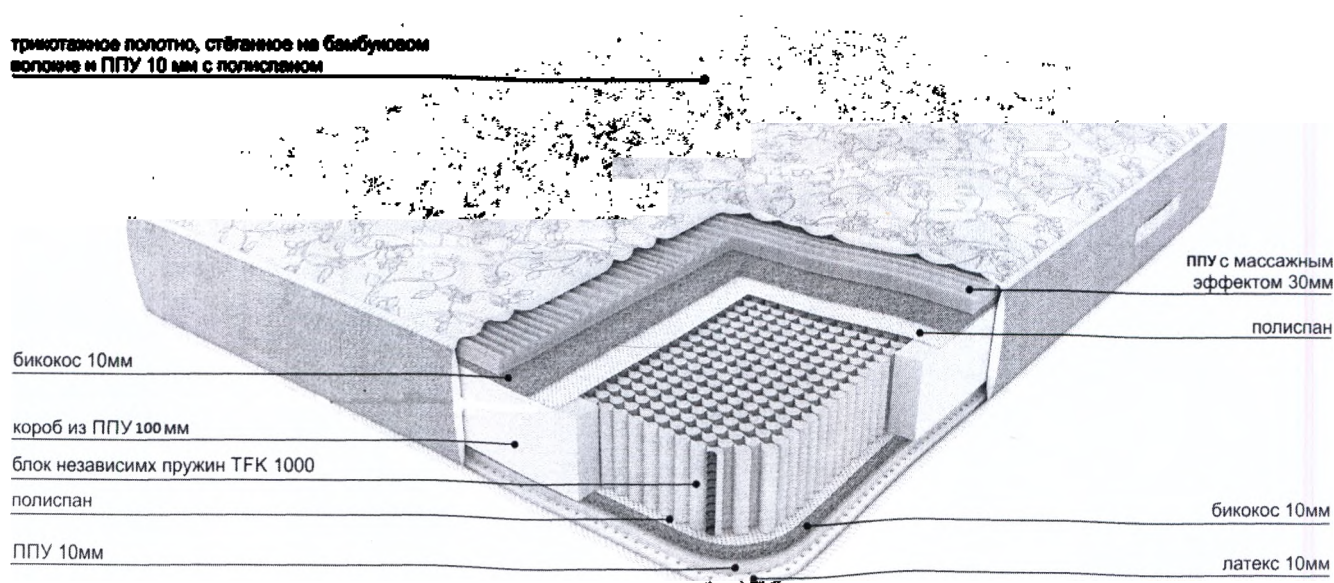

- Матрас ортопедический «Paradise Bahamas»

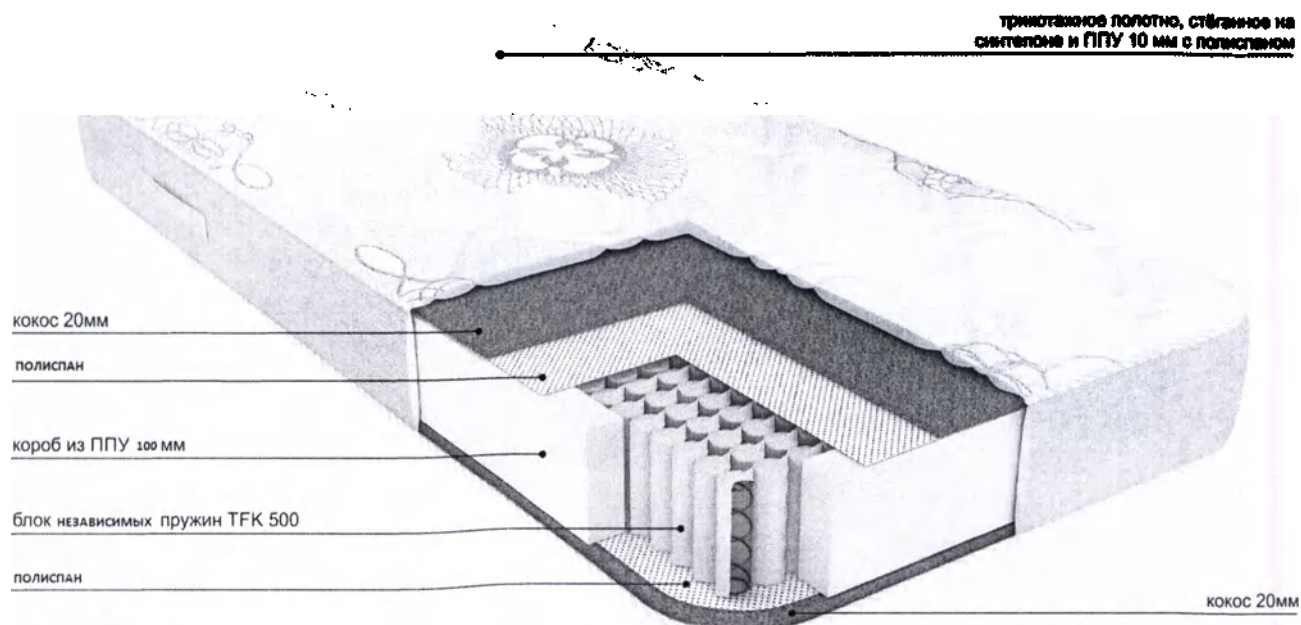


- Матрас ортопедический «Paradise Malibu»

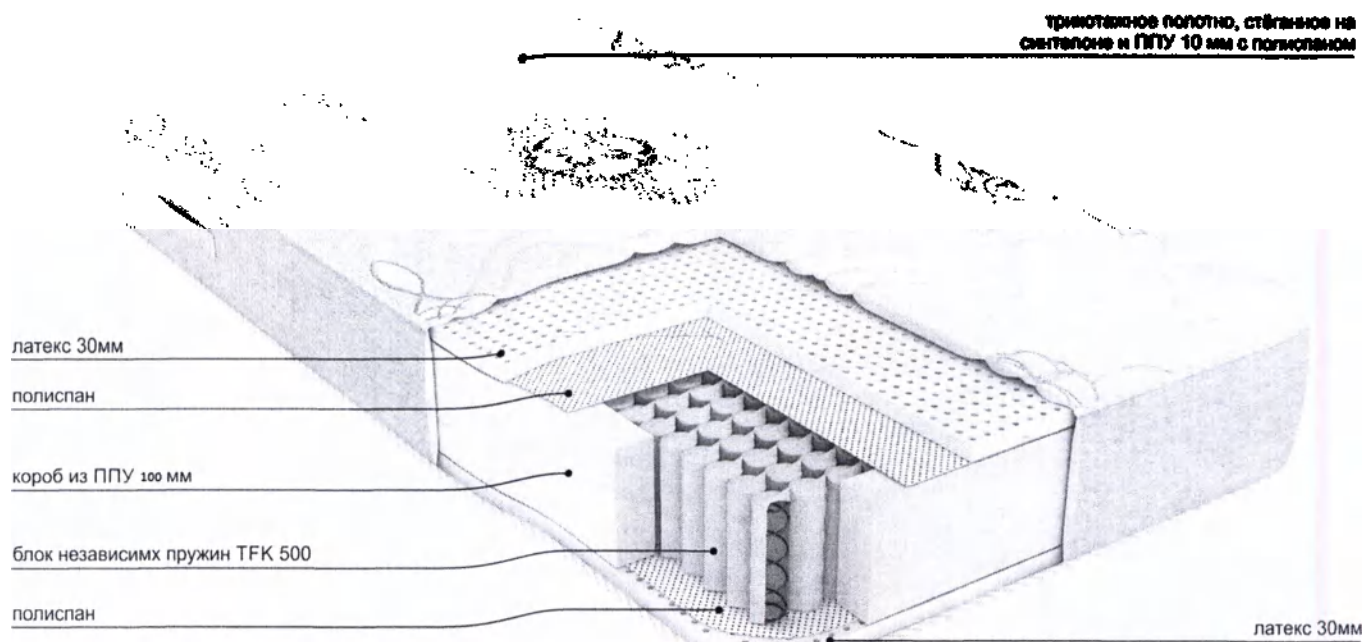


- Матрас ортопедический «Paradise Goa»

трикотажное полотно, стеганное на синтепоне и ППУ 10 мм с полиспаном

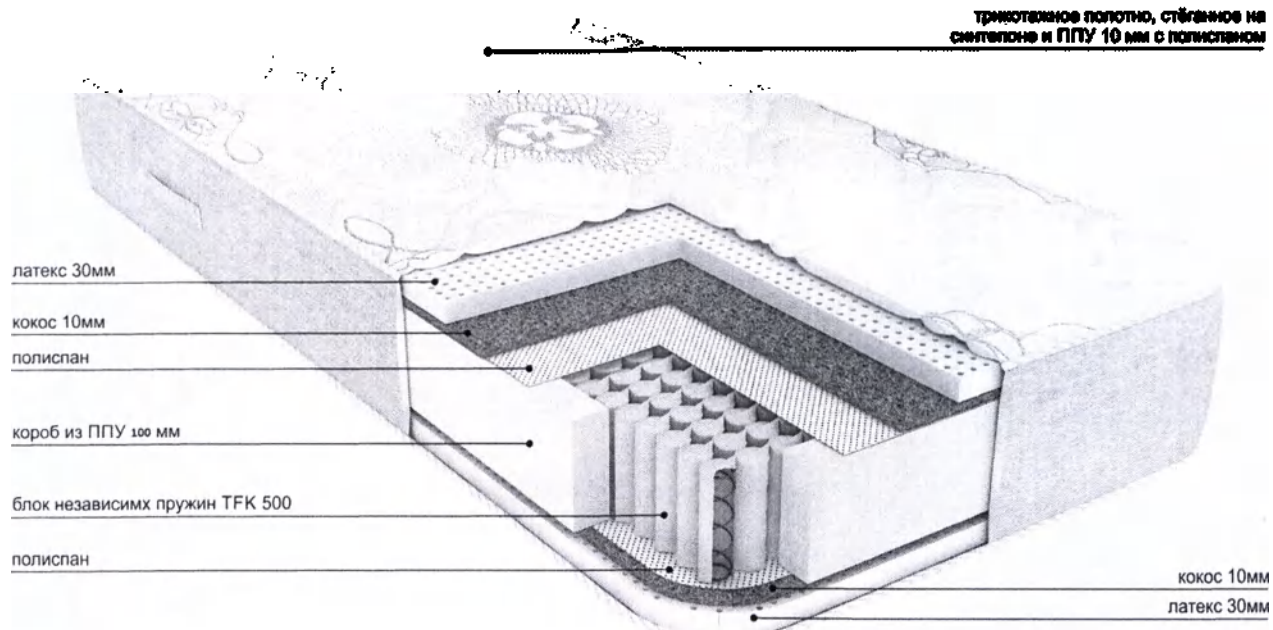


- Матрас ортопедический «Vim Victoria»


трикотажное полотно, стеганное на синтепоне и ППУ 10 мм с полиспаном

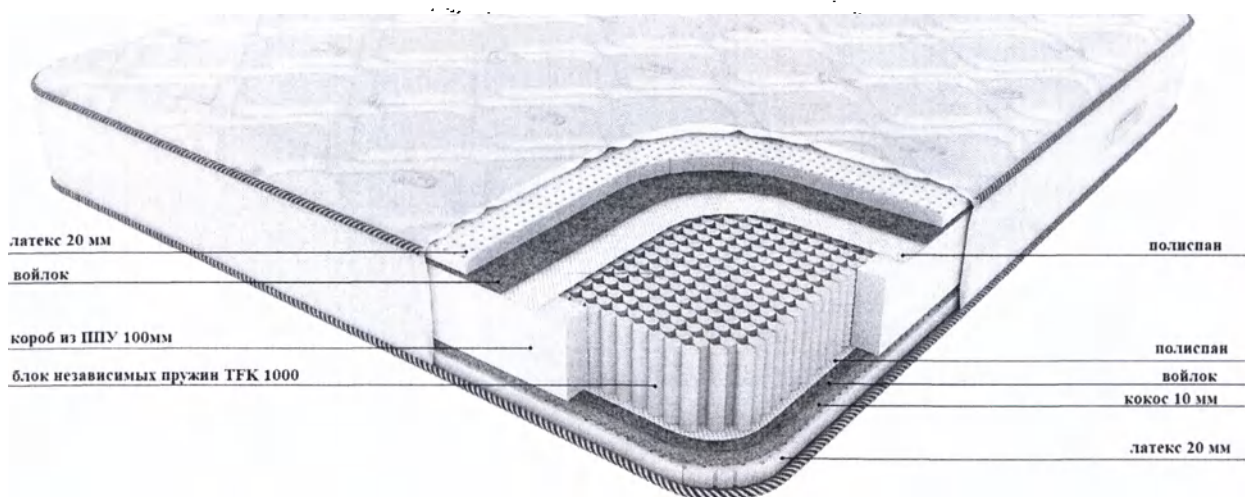


- Матрас ортопедический «Vim Sutherland»

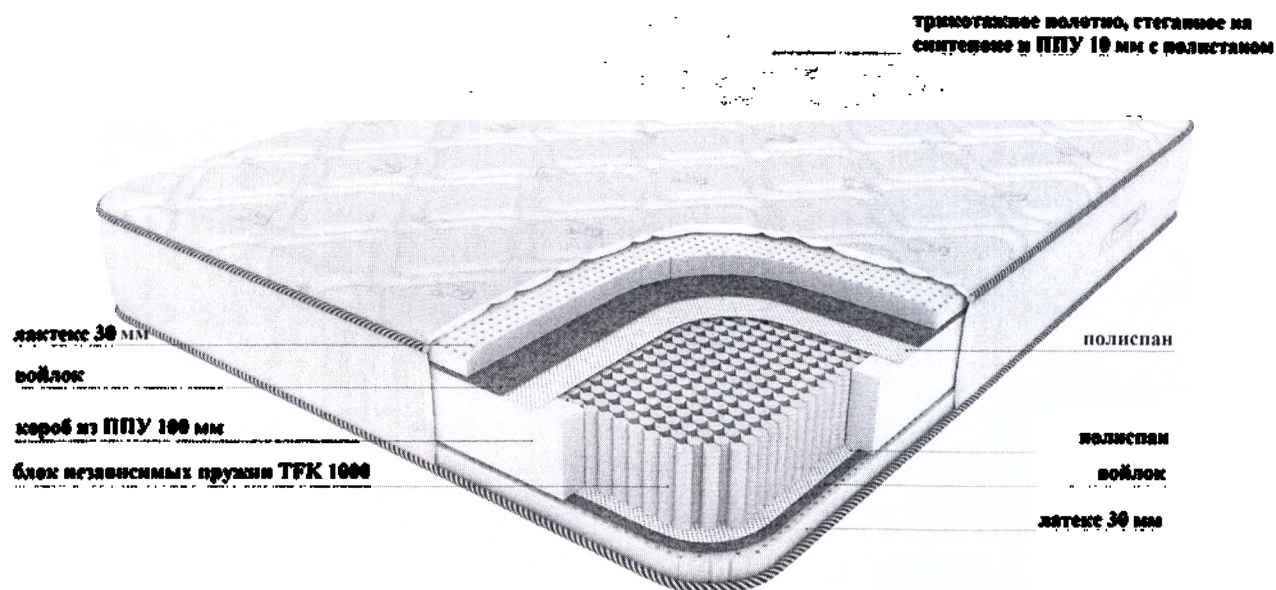

- Матрас ортопедический «Vim Tugela»

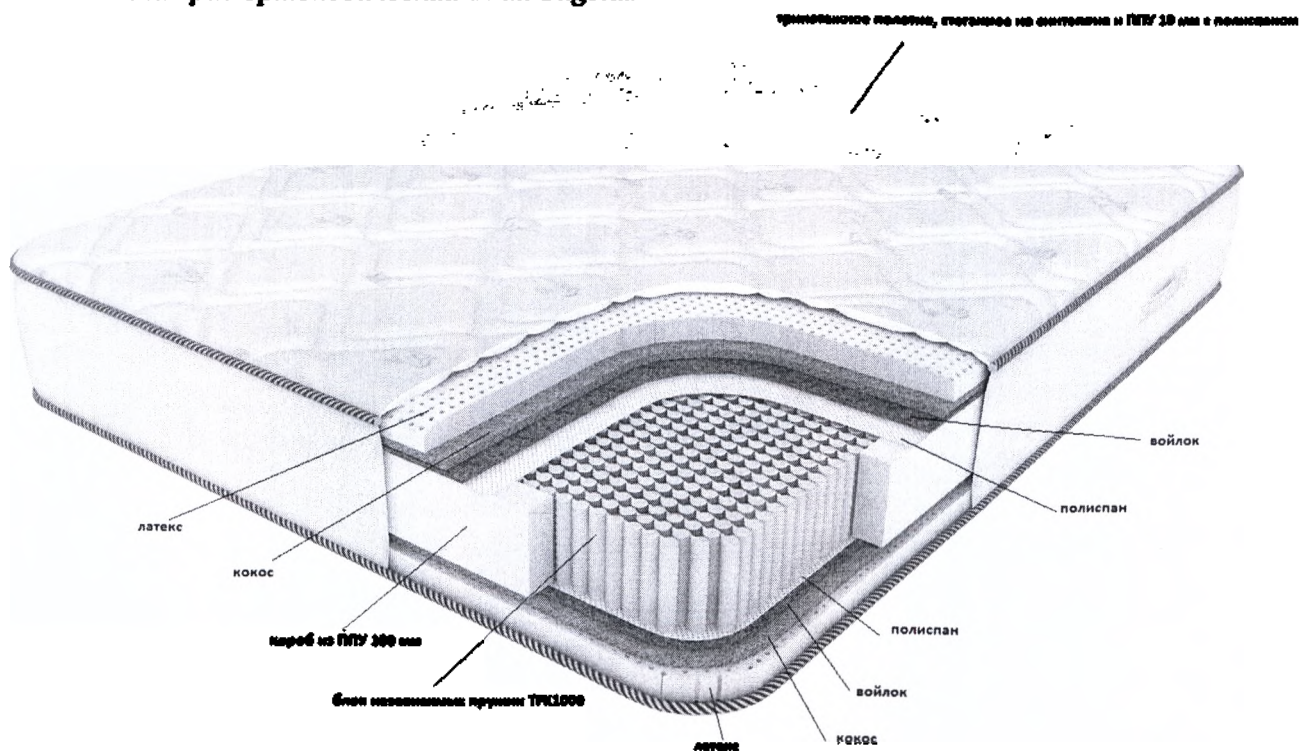

- **Матрас ортопедический «Vim Niagara»**

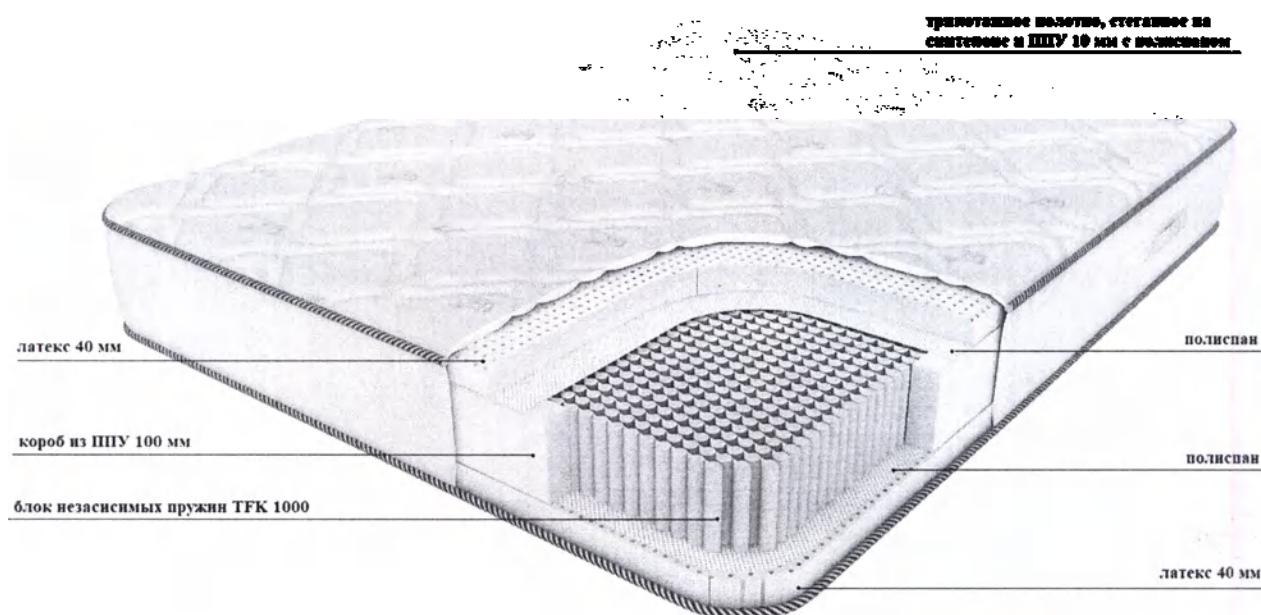

- **Наличие ручек матрасов опционально для всех вариантов исполнения.**

Всего прошито и
и скреплено печатью
35 листов

