

서울시 서초구 남부순환로 2561
106호(서초동, 원효빌딩)

법무법인 센트럴

(직통) 02-733-4813

(팩스) 02-3487-4848

Registered No. 2019 - 7502

NOTARIAL CERTIFICATE



CENTRAL Intellectual Property & Law

Suite 106, 2561, Nambusunhwan-ro

Seocho-gu, Seoul, Korea

210mm X 297mm
보존용지(1종) 70g/m²



BIOCETEC Co., Ltd.

RUSSIA Application Materials

Instruction for Use

Signature, stamp

Sets orthodontic ceramic brackets «Biocetec», variants:

1. Sets orthodontic ceramic brackets «Biocetec» "C-line":

- Set CML22-1117, consists of brackets CML22-1117 – 10 pcs.
Set CML22-2117, consists of brackets CML22-2117 – 10 pcs.
Set CML22-1210, consists of brackets CML22-1210 – 10 pcs.
Set CML22-2210, consists of brackets CML22-2210 – 10 pcs.
Set CML22-1300H, consists of brackets CML22-1300H – 10 pcs.
Set CML22-2300H, consists of brackets CML22-2300H – 10 pcs.
Set CML22-1407, consists of brackets CML22-1407 – 10 pcs.
Set CML22-2407, consists of brackets CML22-2407 – 10 pcs.
Set CML22-4106, consists of brackets CML22-4106 – 10 pcs.
Set CML22-3106, consists of brackets CML22-3106- 10 pcs.
Set CML22-4300H, consists of brackets CML22-4300H – 10 pcs.
Set CML22-3300H, consists of brackets CML22-3300H- 10 pcs.
Set CML22-4412, consists of brackets CML22-4412- 10 pcs.
Set CML22-3412, consists of brackets CML22-3412 – 10 pcs.
Set CML22-4517, consists of brackets CML22-4517 – 10 pcs.
Set CML22-3517, consists of brackets CML22-3517 – 10 pcs.
Set CM22-1117, consists of brackets CM22-1117 – 10 pcs.
Set CM22-2117, consists of brackets CM22-2117-10 pcs.
Set CM22-1210, consists of brackets CM22-1210- 10 pcs.
Set CM22-2210, consists of brackets CM22-2210 – 10 pcs.
Set CM22-1300H, consists of brackets CM22-1300H- 10 pcs.
Set CM22-2300H, consists of brackets CM22-2300H – 10 pcs.
Set CM22-1407, consists of brackets CM22-1407 – 10 pcs.
Set CM22-2407, consists of brackets CM22-2407 – 10 pcs.
Set CM22-1407H, consists of brackets CM22-1407H- 10 pcs.
Set CM22-2407H, consists of brackets CM22-2407H – 10 pcs.
Set CM22-4106, consists of brackets CM22-4106 – 10 pcs.
Set CM22-3106, consists of brackets CM22-3106 – 10 pcs.
Set CM22-4300H, consists of brackets CM22-4300H – 10 pcs.
Set CM22-3300H, consists of brackets CM22-3300H – 10 pcs.
Set CM22-4412, consists of brackets CM22-4412 – 10 pcs.
Set CM22-3412, consists of brackets CM22-3412 – 10 pcs.
Set CM22-4412H, consists of brackets CM22-4412H – 10 pcs.
Set CM22-3412H, consists of brackets CM22-3412H – 10 pcs.
Set CM22-4517, consists of brackets CM22-4517 – 10 pcs.
Set CM22-3517, consists of brackets CM22-3517- 10 pcs.
Set CM22-4517H, consists of brackets CM22-4517H – 10 pcs.
Set CM22-3517H, consists of brackets CM22-3517H – 10 pcs.





BIOCETEC Co., Ltd.

RUSSIA Application Materials

Instruction for Use

Set CR18-2112, consists of brackets CR18-2112 – 10 pcs.
Set CR18-1112, consists of brackets CR18-1112 – 10 pcs.
Set CR18-2208, consists of brackets CR18-2208 – 10 pcs.
Set CR18-1208, consists of brackets CR18-1208 – 10 pcs.
Set CR18-2300H, consists of brackets CR18-2300H – 10 pcs.
Set CR18-1300H, consists of brackets CR18-1300H- 10 pcs.
Set CR18-2407, consists of brackets CR18-2407 – 10 pcs.
Set CR18-1407, consists of brackets CR18-1407- 10 pcs.
Set CR18-2407H, consists of brackets CR18-2407H – 10 pcs.
Set CR18-1407H, consists of brackets CR18-1407H – 10 pcs.
Set CR18-3101, consists of brackets CR18-3101 - 10 pcs.
Set CR18-4101, consists of brackets CR18-4101 – 10 pcs.
Set CR18-3311H, consists of brackets CR18-3311H – 10 pcs.
Set CR18-4311H, consists of brackets CR18-4311H – 10 pcs.
Set CR18-3417, consists of brackets CR18-3417-10 pcs.
Set CR18-4417, consists of brackets CR18-4417 – 10 pcs.
Set CR18-3417H, consists of brackets CR18-3417H-10 pcs.
Set CR18-4417H, consists of brackets CR18-4417H – 10 pcs.
Set CR18-3522, consists of brackets CR18-3522 – 10 pcs.
Set CR18-4522, consists of brackets CR18-4522- 10 pcs.
Set CR18-3522H, consists of brackets CR18-3522H – 10 pcs.
Set CR18-4522H, consists of brackets CR18-4522H – 10 pcs.
Set CR22-2112, consists of brackets CR22-2112– 10 pcs.
Set CR22-1112, consists of brackets CR22-1112 – 10 pcs.
Set CR22-2208, consists of brackets CR22-2208- 10 pcs.
Set p CR22-1208, consists of brackets CR22-1208- 10 pcs.
Set CR22-2300H, consists of brackets CR22-2300H – 10 pcs.
Set CR22-1300H, consists of brackets CR22-1300H- 10 pcs.
Set CR22-3101, consists of brackets CR22-3101- 10 pcs.
Set CR22-4101, consists of brackets CR22-4101- 10 pcs.
Set CR22-3311H, consists of brackets CR22-3311H – 10 pcs.
Set CR22-4311H, consists of brackets CR22-4311H – 10 pcs.
Set CR22-3417, consists of brackets CR22-3417 – 10 pcs.
Set CR22-4417, consists of brackets CR22-4417 – 10 pcs.
Set CR22-3417H, consists of brackets CR22-3417H – 10 pcs.
Set CR22-4417H, consists of brackets CR22-4417H– 10 pcs.
Set CR22-3522, consists of brackets CR22-3522– 10 pcs.
Set CR22-4522, consists of brackets CR22-4522 – 10 pcs.
Set CR22-3522H, consists of brackets CR22-3522H -10 pcs.
Set CR22-4522H, consists of brackets CR22-4522H – 10 pcs.

Set CML22-33H, consists of brackets CML22-1117, CML22-2117, CML22-1210, CML22-2210, CML22-1300H, CML22-2300H, CML22-4106(2), CML22-3106(2), CML22-4300H, CML22-3300H
Set CML22-55H, consists of brackets CML22-1117, CML22-2117, CML22-1210, CML22-2210, CML22-1300H, CML22-2300H, CML22-1407(2), CML22-2407(2), CML22-4106(2), CML22-3106(2), CML22-4300H, CML22-3300H, CML22-4412, CML22-3412, CML-3517, CML-4517



BIOCETEC Co., Ltd.

RUSSIA Application Materials

Instruction for Use

Set CM22-33H, consists of brackets CM22-1117, CM22-2117, CM22-1210, CM22-2210, CM22-1300H, CM22-2300H, CM22-4106(2), CM22-3106(2), CM22-4300H, CM22-3300H

Set CM22-55H, consists of brackets CM22-1117, CM22-2117, CM22-1210, CM22-2210, CM22-1300H, CM22-1407(2), CM22-2300H, CM22-2407(2), CM22-4106(2), CM22-3106(2), CM22-4300H, CM22-3300H, CM22-4412, CM22-3412, CM22-4517, CM22-3517

Set CM22-55H45, consists of brackets CM22-1117, CM22-2117, CM22-1210, CM22-2210, CM22-1300H, CM22-1407H(2), CM22-2300H, CM22-2407H(2), CM22-4106(2), CM22-3106(2), CM22-4300H, CM22-3300H, CM22-4412H, CM22-3412H, CM22-4517H, CM22-3517H

Set CR18-33H, consists of brackets CR18-1112, CR18-2112, CR18-1208, CR18-2208, CR18-1300H, CR18-2300H, CR18-4101(2), CR18-3101(2), CR18-3311H, CR18-4311H

Set CR18-55H, consists of brackets CR18-1112, CR18-2112, CR18-1208, CR18-2208, CR18-1300H, CR18-2300H, CR18-1407(2), CR18-2407(2), CR18-4101(2), CR18-3101(2), CR18-3311H, CR18-4311H, CR18-3417, CR18-4417, CR18-3522, CR18-4522

Set CR18-55H45, consists of brackets CR18-1112, CR18-2112, CR18-1208, CR18-2208, CR18-1300H, CR18-2300H, CR18-1407H(2), CR18-2407H(2), CR18-4101(2), CR18-3101(2), CR18-3311H, CR18-4311H, CR18-3417H, CR18-4417H, CR18-3522H, CR18-4522H

Set CR22-33H, consists of brackets CR22-1112, CR22-2112, CR22-1208, CR22-2208, CR22-1300H, CR22-2300H, CR22-4101(2), CR22-3101(2), CR22-3311H, CR22-4311H

Set CR22-55H, consists of brackets CR22-1112, CR22-2112, CR22-1208, CR22-2208, CR22-1300H, CR22-2300H, CM22-1407(2), CM22-2407(2), CR22-4101(2), CR22-3101(2), CR22-3311H, CR22-4311H, CR22-3417, CR22-4417, CR22-3522, CR22-4522

Set CR22-55H45, consists of brackets CR22-1112, CR22-2112, CR22-1208, CR22-2208, CR22-1300H, CR22-2300H, CM22-1407H(2), CM22-2407H(2), CR22-4101(2), CR22-3101(2), CR22-3311H, CR22-4311H, CR22-3417H, CR22-4417H, CR22-3522H, CR22-4522H

Sets orthodontic ceramic brackets «Biocetec» "S-line":

Set SR22-1112, consists of brackets SR22-1112-10 pcs.

Set SR22-2112, consists of brackets SR22-2112- 10 pcs.

Set SR22-1208, consists of brackets SR22-1208 – 10 pcs.

Set SR22-2208, consists of brackets SR22-2208 – 10 pcs.

Set SR22-1300H, consists of brackets SR22-1300H – 10 pcs.

Set SR22-2300H, consists of brackets SR22-2300H – 10 pcs.

Set SR22-1407, consists of brackets SR22-1407 – 10 pcs.

Set SR22-1407H, consists of brackets SR22-1407H – 10 pcs.

Set SR22-2407, consists of brackets SR22-2407 -10 pcs.

Set SR22-2407H, consists of brackets SR22-2407H -10 pcs.

Set SR22-3101, consists of brackets SR22-3101 – 10 pcs.

Set SR22-4101, consists of brackets SR22-4101 – 10 pcs.

Set SR22-3101R, consists of brackets SR22-3101R – 10 pcs.

Set SR22-4101R, consists of brackets SR22-4101R – 10 pcs.

Set SR22-3311H, consists of brackets SR22-3311H – 10 pcs.

Set SR22-4311H, consists of brackets SR22-4311H – 10 pcs.

Set SR22-3311R, consists of brackets SR22-3311R – 10 pcs.

Set SR22-4311R, consists of brackets SR22-4311R – 10 pcs.

Set SR22-3417, consists of brackets SR22-3417 – 10 pcs.

Set SR22-3417H, consists of brackets SR22-3417H – 10 pcs.

Set SR22-4417, consists of brackets SR22-4417 – 10 pcs.

Set SR22-4417H, consists of brackets SR22-4417H – 10 pcs.

Set SR22-3522, consists of brackets SR22-3522 – 10 pcs.

Set SR22-3522H, consists of brackets SR22-3522H – 10 pcs.

Set SR22-4522, consists of brackets SR22-4522 – 10 pcs.

Set SR22-4522H, consists of brackets SR22-4522H – 10 pcs.

Set SR18-1112, consists of brackets SR18-1112 – 10 pcs.
Set SR18-2112, consists of brackets SR18-2112 – 10 pcs.
Set SR18-1208, consists of brackets SR18-1208 – 10 pcs.
Set SR18-2208, consists of brackets SR18-2208 – 10 pcs.
Set SR18-1300H, consists of brackets SR18-1300H – 10 pcs.
Set SR18-2300H, consists of brackets SR18-2300H – 10 pcs.
Set SR18-1407, consists of brackets SR18-1407 – 10 pcs.
Set SR18-1407H, consists of brackets SR18-1407H – 10 pcs.
Set SR18-2407, consists of brackets SR18-2407 – 10 pcs.
Set SR18-2407H, consists of brackets SR18-2407H – 10 pcs.
Set SR18-3101, consists of brackets SR18-3101 – 10 pcs.
Set SR18-4101, consists of brackets SR18-4101 – 10 pcs.
Set SR18-3101R, consists of brackets SR18-3101R – 10 pcs.
Set SR18-4101R, consists of brackets SR18-4101R – 10 pcs.
Set SR18-3311H, consists of brackets SR18-3311H – 10 pcs.
Set SR18-4311H, consists of brackets SR18-4311H – 10 pcs.
Set SR18-3311R, consists of brackets SR18-3311R – 10 pcs.
Set SR18-4311R, consists of brackets SR18-4311R – 10 pcs.
Set SR18-3417, consists of brackets SR18-3417 – 10 pcs.
Set SR18-3417H, consists of brackets SR18-3417H – 10 pcs.
Set SR18-4417, consists of brackets SR18-4417 – 10 pcs.
Set SR18-4417H, consists of brackets SR18-4417H – 10 pcs.
Set SR18-3522, consists of brackets SR18-3522 – 10 pcs.
Set SR18-3522H, consists of brackets SR18-3522H – 10 pcs.
Set SR18-4522, consists of brackets SR18-4522 – 10 pcs.
Set SR18-4522H, consists of brackets SR18-4522H – 10 pcs.
Set SM22-1117, consists of brackets SM22-1117 -10 pcs.
Set SM22-2117, consists of brackets SM22-2117 – 10 pcs.
Set SM22-1210, consists of brackets SM22-1210 – 10 pcs.
Set SM22-2210, consists of brackets SM22-2210 -10 pcs.
Set SM22-1300H, consists of brackets SM22-1300H – 10 pcs.
Set SM22-2300H, consists of brackets SM22-2300H – 10 pcs.
Set SM22-1407, consists of brackets SM22-1407 – 10 pcs.
Set SM22-1407H, consists of brackets SM22-1407H – 10 pcs.
Set SM22-2407, consists of brackets SM22-2407 – 10 pcs.
Set SM22-2407H, consists of brackets SM22-2407H – 10 pcs.
Set SM22-3106, consists of brackets SM22-3106 – 10 pcs.
Set SM22-4106, consists of brackets SM22-4106 – 10 pcs.
Set SM22-3106R, consists of brackets SM22-3106R – 10 pcs.
Set SM22-4106R, consists of brackets SM22-4106R – 10 pcs.
Set SM22-3300H, consists of brackets SM22-3300H – 10 pcs.
Set SM22-4300H, consists of brackets SM22-4300H – 10 pcs.
Set SM22-3300R, consists of brackets SM22-3300R – 10 pcs.
Set SM22-4300R, consists of brackets SM22-4300R – 10 pcs.
Set SM22-3412, consists of brackets SM22-3412 -10 pcs.
Set SM22-3412H, consists of brackets SM22-3412H -10 pcs.
Set SM22-4412, consists of brackets SM22-4412 – 10 pcs.
Set SM22-4412H, consists of brackets SM22-4412H – 10 pcs.
Set SM22-3517, consists of brackets SM22-3517 – 10 pcs.
Set SM22-3517H, consists of brackets SM22-3517H – 10 pcs.
Set SM22-4517, consists of brackets SM22-4517 – 10 pcs.
Set SM22-4517H, consists of brackets SM22-4517H – 10 pcs.



Set **SR22-55H** : SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-1407(2), SR22-2407(2), SR22-4101(2), SR22-3101(2), SR22-4311H, SR22-3311H, SR22-4417, SR22-3417, SR22-4522, SR22-3522

Set **SR22-55H45** : SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-1407H(2), SR22-2407H(2), SR22-4101(2), SR22-3101(2), SR22-4311H, SR22-3311H, SR22-4417H, SR22-3417H, SR22-4522H, SR22-3522H

Set **SR22-33H** : SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-4101(2), SR22-3101(2), SR22-4311H, SR22-3311H

Set **SR22-33HR** : SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-4101R(2), SR22-3101R(2), SR22-4311R, SR22-3311R

Set **SR22-53H45** : SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-1407H(2), SR22-2407H(2), SR22-4101(2), SR22-3101(2), SR22-4311H, SR22-3311H

Set **SR22-53H45R** : SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-1407H(2), SR22-2407H(2), SR22-4101R(2), SR22-3101R(2), SR22-4311R, SR22-3311R

Set **SR22-53H** : SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-1407(2), SR22-2407(2), SR22-4101(2), SR22-3101(2), SR22-4311H, SR22-3311H

Set **SR22-53HR** : SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-1407(2), SR22-2407(2), SR22-4101R(2), SR22-3101R(2), SR22-4311R, SR22-3311R

Set **SR18-55H** : SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-1407(2), SR18-2407(2), SR18-4101(2), SR18-3101(2), SR18-4311H, SR18-3311H, SR18-4417, SR18-3417, SR18-4522, SR18-3522

Set **SR18-55H45** : SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-1407H(2), SR18-2407H(2), SR18-4101(2), SR18-3101(2), SR18-4311H, SR18-3311H, SR18-4417H, SR18-3417H, SR18-4522H, SR18-3522H

Set **SR18-33H** : SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-4101(2), SR18-3101(2), SR18-4311H, SR18-3311H

Set **SR18-33HR** : SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-4101R(2), SR18-3101R(2), SR18-4311R, SR18-3311R

Set **SR18-53H45** : SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-1407H(2), SR18-2407H(2), SR18-4101(2), SR18-3101(2), SR18-4311H, SR18-3311H

Set **SR18-53H45R** : SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-1407H(2), SR18-2407H(2), SR18-4101R(2), SR18-3101R(2), SR18-4311R, SR18-3311R

Set **SR18-53H** : SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-1407(2), SR18-2407(2), SR18-4101(2), SR18-3101(2), SR18-4311H, SR18-3311H

Set **SR18-53HR** : SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-1407(2), SR18-2407(2), SR18-4101R(2), SR18-3101R(2), SR18-4311R, SR18-3311R

Set **SM22-55H** : SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H, SM22-1407(2), SM22-2407(2), SM22-4106(2), SM22-3106(2), SM22-4300H, SM22-3300H, SM22-4412, SM22-3412, SM22-4517, SM22-3517

Set **SM22-55H45** : SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H, SM22-1407H(2), SM22-2407H(2), SM22-4106(2), SM22-3106(2), SM22-4300H, SM22-3300H, SM22-4412H, SM22-3412H, SM22-4517H, SM22-3517H

Set **SM22-33H** : SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H, SM22-4106(2), SM22-3106(2), SM22-4300H, SM22-3300H

Set **SM22-33HR** : SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H, SM22-4106R(2), SM22-3106R(2), SM22-4300R(2), SM22-3300R(2)

Set **SM22-53H45** : SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H, SM22-1407H(2), SM22-2407H(2), SM22-4106(2), SM22-3106(2), SM22-4300H, SM22-3300H

Set **SM22-53H45R** : SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H, SM22-1407H(2), SM22-2407H(2), SM22-4106R(2), SM22-3106R(2), SM22-4300R, SM22-3300R

Set **SM22-53H** : SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H,



SM22-1407(2), SM22-2407(2), SM22-4106(2), SM22-3106(2), SM22-4300H, SM22-3300H
Set **SM22-53HR** : SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H,
SM22-1407(2), SM22-2407(2), SM22-4106R(2), SM22-3106R(2), SM22-4300R, SM22-3300R

Purpose - The orthodontic bracket is used to correct the bite. It is designed to attach to the patient's tooth surface and connects to orthodontic wire to exert physical pressure on the movement of the tooth


The following is information on the methods of application and precautions in the use of ceramic braces manufactured by Biocetec Co., Ltd. (Biocetec Co., Ltd.). Only operate the product after carefully reviewing the following information, as Biocetec Co., Ltd. is not responsible for any problems or accidents resulting from non-compliance with the recommendations provided.

Product Description


This orthodontic bracket is made of polycrystalline ceramic and is used for the treatment of malocclusion. It is designed to be attached to the surface of patients' teeth and be connected to the orthodontic wire in order to apply physical pressure on the tooth movement.

Each model differs in size and dimension, color identification as they are attached to the tooth surface corresponding to 20 of the 28 permanent teeth.


For "C-line"

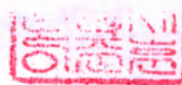

GENERAL MODELS

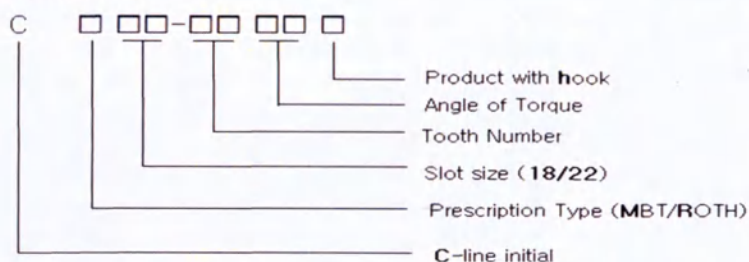


KIT

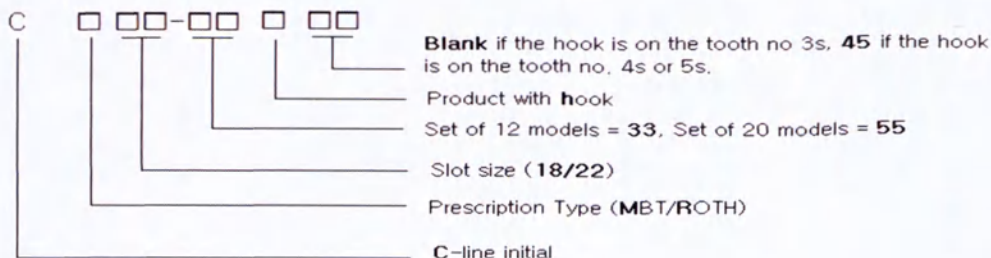


UR : Upper Right

UL : Upper Left

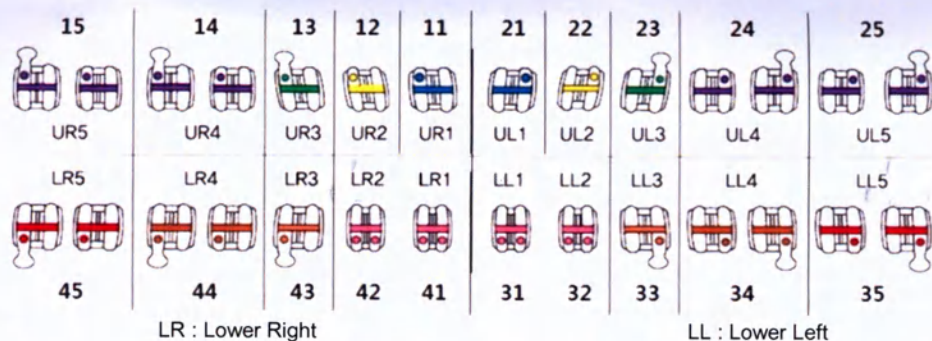


For „S-line“

General models

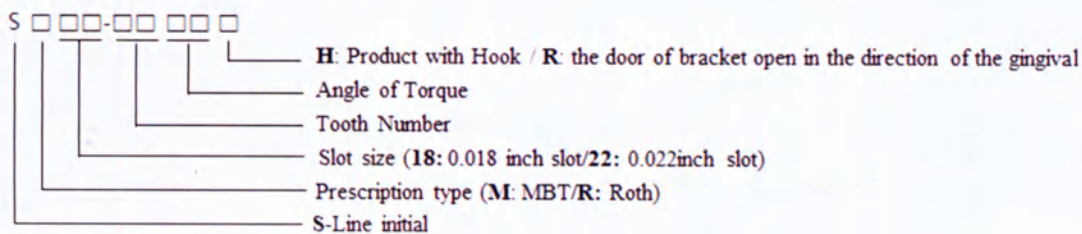

Kit

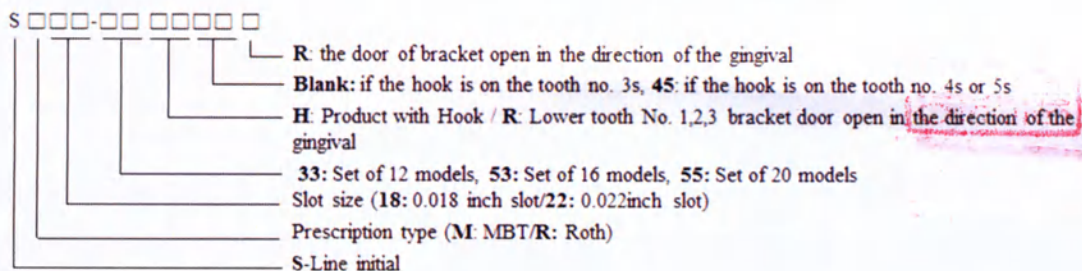

UR: Upper Right

UL: Upper Left



LR: Lower Right

LL: Lower Left

* The mandible has two types of brackets.

Type 1. The doors of the bracket open in the direction of the occlusal.

Type 2. The doors of the bracket open in the direction of the gingival.

-"R" is indicated at the end of the model name for the brackets that open in the direction of the gingival. (Ex: SM22-4106R, SR22-4101R, SM22-4300R, SR22-4311R etc.)

** All ID dots are marked on the disto-lingual side of brackets except Lower Central Incisors which are marked on both mesial and distal side.

UR: Upper right; UL: Upper left; LR: Lower right; LL: Lower left

Color of ID dot of brackets for teeth №15, 14, 24, 25 is Food coloring Gardenia Purple

Color of ID dot of brackets for teeth №13, 23 is Food coloring Gardenia Green

Color of ID dot of brackets for teeth №12, 22 is Food coloring Gardenia Yellow

Color of ID dot of brackets for teeth №11, 21 is Food coloring Blue (Gardenia Blue)

Color of ID dot of brackets for teeth №45, 35 is Food coloring Red

Color of ID dot of brackets for teeth №44, 34 is Food coloring Cacao Chocolate

Color of ID dot of brackets for teeth №43, 33 is Food coloring paprika Orange

Color of ID dot of brackets for teeth №42, 41, 32, 31 is Food coloring Pink

The orthodontic bracket has various specifications such as MBT, Roth, etc. according to the Torque and Angulation dimensions. The dimensions of each bracket are manufactured in accordance with the criteria for normal occlusion provided by MBT and Roth standards.

There are 4 types of models: MBT022 (Lineless), MBT022, ROTH 018, and ROTH 022

Roth and MBT are largely distinguished by the difference between the angulation and the torque of the teeth. Among them, Roth018 and 022 have different slot sizes. Each patient has different angulation and torque of the teeth according to the malocclusion pattern, so the orthodontist can select the appropriate one in accordance

with the description of brackets (see table №1) and treat it.

MBT022 has 20 types of brackets, as it is possible to choose brackets either with Hook or without one in teeth number 14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45, which means that MBT022 equals MBT022 (Lineless) supplied with 4 additional brackets with hooks.

MBT022 and Roth018, 022 are not usually used in combination. However, there is an exception.

The brackets, apart from slot size, another difference between Roth 18 and Roth 22 is that there are no brackets for teeth number 14 and 24 in Roth 22 (MBT022 designed for these teeth is included in Roth018 and Roth022 sets and used instead; this is possible because torque and angulation forRth018, Roth022 and MBT022 for teeth number 14 and 24 are equal).

Table 1.Description of the brackets C-Line

Type	Model Name (Tooth Location)	Torque (°)	Angulation (°)	Slot Glyph (Off set) (°)	ID Dot Color
MBT 022 Lineless	CML22-1117 (U Rt Central) CML22-2117 (U Lt Central) Base size: 3,79;3,45;3,86	17	4°	0°	Gardenia Blue
	CML22-1210 (U Rt Lateral) CML22-2210 (U Lt Lateral) Base size:3,57; 3,49; 3,79	10°	8°	0°	Gardenia Yellow
	CML22-1300H (U Rt Cuspid) CM22-2300H (U Lt Cuspid) Base size: 3,96; 3,69; 4,21	0°	8°	2°	Gardenia Green
	CML22-1407 (U Rt 1 st Bicuspид) CML22-2407 (U Lt 1 st Bicuspид) Base size:3,80; 3,70	-7°	0°	0°	Gardenia Purple
	CML22-4106 (L Rt anterior) CML22-3106 (L Lt anterior) Base size: 3,60; 3,10	-6°	0°	0°	Pink
	CML22-4300H (L Rt Cuspid) CML22-3300H (L Lt Cuspid) Base size: 3,99; 3,69; 4,04	0°	3°	0°	paprika Orange
	CML22-4412 (L Rt 1 st Bicuspид) CML22-3412 (L Lt 1 st Bicuspид) Base size: 3,79; 3,70; 3,81	-12°	2°	0°	Cacao Chocolate
	CML22-4517 (L Rt 2 nd Bicuspид) CML22-3517 (L Lt 2 nd Bicuspид) Base size:3,80; 3,60; 3,81	-17°	2°	0°	Red
	CM22-1117 (U Rt Central) CM22-2117(U Lt Central) Base size: 3,79;3,45;3,86	17°	4°	0°	Gardenia Blue
	CM22-1210(U Rt Lateral) CM22-2210(U Lt Lateral) Base size:3,57; 3,49; 3,79	10°	8°	0°	Gardenia Yellow
	CM22-1300H(U Rt Cuspid) CM22-2300H(U Lt Cuspid) Base size: 3,96; 3,69; 4,21	0°	8°	2°	Gardenia Green
	CM22-1407(U Rt 1 st Bicuspид) CM22-2407(U Lt 1 st Bicuspид) Base size:3,80; 3,70	-7°	0°	0°	Gardenia Purple
	CM22-1407H(U Rt 1st Bicuspид) CM22-2407H(U Lt 1 st Bicuspид) Base size:3,80; 3,70	-7°	0°	2°	Gardenia Purple
MBT022					

	CM22-4106(L Rt anterior) CM22-3106(L Lt anterior) Base size: 3,60; 3,10	-6°	0°	0°	Pink
	CM22-4300H(L Rt Cuspid) CM22-3300H(L Lt Cuspid) Base size:3,99; 3,69; 4,04				
		0°	3°	0°	paprika Orange

Type	Model Name (Tooth Location)	Torque (°)	Angulation (°)	Slot Glyph (Off set) (°)	ID Dot Color
MBT022	CM22-4412(L Rt 1 st Bicuspид) CM22-3412(L Lt 1 st Bicuspид) Base size: 3,79; 3,70; 3,81	-12°	2°	0°	Cacao Chocolate
	CM22-4412H(L Rt 1 st Bicuspид) CM22-3412H(L Lt 1 st Bicuspид) Base size:3,79; 3,70; 3,81	-12°	2°	0°	Cacao Chocolate
	CM22-4517(L Rt 2 nd Biocuspид) CM22-3517(L Lt 2 nd Bicuspид) Base size:3,80; 3,60; 3,81	-17°	2°	0°	Red
	CM22-4517H(L Rt 2 nd Biocuspид) CM22-3517H(L Lt 2 nd Bicuspид) Base size:3,80; 3,60; 3,81	-17°	2°	0°	Red
Roth 018	CR18-2112 (U Lt Central) CR18-1112 (U Rt Central) Base size: 3,79; 3,45; 3,88	12°	5°	0°	Gardenia Blue
	CR18-2208(U Lt Lateral) CR18-1208(U Rt Lateral) Base size: 3,57; 3,49; 3,84	8°	9°	0°	Gardenia Yellow
	CR18-2300H(U Lt Cuspid) CR18-1300H(U RtCuspid) Base size: 3,96; 3,69; 4,38	0°	11°	4°	Gardenia Green
	CR18-2407(U Lt 1 st Bicuspид) CR18-1407(U Rt 1 st Bicuspид) Base size: 3,70; 3,80	-7°	0°	0°	Gardenia Purple
	CR18-2407H(U Lt 1 st Bicuspид) CR18-1407H(U Rt 1 st Bicuspид) Base size: 3,70; 3,80	-7°	0°	2°	Gardenia Purple
	CR18-3101(L Lt anterior) CR18-4101(L Rt anterior) Base size: 3,60; 3,10	-1°	0°	0°	Pink
	CR18-3311H(L Lt Cuspid) CR18-4311H(L Rt Cuspid) Base size: 3,99; 3,69; 4,19	-11°	7°	2°	paprika Orange
	CR18-3417(L Lt 1 st Bicuspид) CR18-4417(L Rt 1 st Bicuspид) Base size: 3,60; 3,80	-17°	0°	4°	Cacao Chocolate
	CR18-3417H(L Lt 1 st Bicuspид) CR18-4417H(L Rt 1 st Bicuspид) Base size: 3,60; 3,80	-17°	0°	4°	Cacao Chocolate
	CR18-3522(L Lt 2 nd Bicuspид) CR18-4522(L Rt 2 nd Biocuspид)	-22°	0°	4°	Red



BIOCETEC Co., Ltd.

RUSSIA Application Materials

Instruction for Use

	Base size: 3,60; 3,80				
	CR18-3522H(L Lt 2 nd Bicuspid) CR18-4522H(L Rt 2 nd Biocuspид)	-22°	0°	4°	Red
	Base size: 3,60; 3,80				
Roth 022	CR22-2112 (U Lt Central) CR22-1112 (U Rt Central)	12°	5°	0°	Gardenia Blue
	Base size: 3,60; 3,80				
	CR22-2208 (U Lt Lateral) CR22-1208 (U Rt Lateral)	8°	9°	0°	Gardenia Yellow
	Base size: 3,57; 3,49; 3,84				
	CR22-2300H (U Lt Cuspid) CR22-1300H (U RtCuspid)	0°	11°	4°	Gardenia Green
	Base size: 3,96; 3,69; 4,38				



Type	Model Name (Tooth Location)	Torque (°)	Angulation (°)	Slot Glyph (Off set) (°)	ID Dot Color
Roth 022	CR22-3101 (L Lt anterior) CR22-4101 (L Rt anterior) Base size: 3,60; 3,10	-1°	0°	0°	Pink
	CR22-3311H (L Lt Cuspid) CR22-4311H (L Rt Cuspid) Base size: 3,99; 3,69; 4,19	-11°	7°	2°	paprika Orange
	CR22-3417 (L Lt 1 st Bicuspid) CR22-4417 (L Rt 1 st Bicuspid) Base size: 3,60; 3,80	-17°	0°	4°	Cacao Chocolate
	CR22-3417H (L Lt 1 st Bicuspid) CR22-4417H (L Rt 1 st Bicuspid) Base size: 3,60; 3,80	-17°	0°	4°	Cacao Chocolate
	CR22-3522 (L Lt 2 nd Bicuspid) CR22-4522 (L Rt 2 nd Bicuspid) Base size: 3,60; 3,80	-22°	0°	4°	Red
	CR22-3522H (L Lt 2 nd Bicuspid) CR22-4522H (L Rt 2 nd Bicuspid)	-22°	0°	4°	Red

Table 2. Description of the brackets S-Line

Type	Model Name	Teeth's position	Torque (°)	Angulation (°)	Off set (°)	Identification dot's color
MBT 022	SM22-2117 SM22-1117	(U Lt Central) (U Rt Central)	17°	4°	0°	Food Blue (Gardenia Blue)
	SM22-2210 SM22-1210	(U Lt Lateral) (U Rt Lateral)	10°	8°	0°	Gardenia Yellow
	SM22-2300H SM22-1300H	(U Lt Cuspid) (U Lt Cuspid)	0°	8°	2°	Gardenia Green
	SM22-2407 SM22-1407	(U Lt 1 st , 2 nd Bicuspid) (U Rt 1 st , 2 nd Bicuspid)	-7°	0°	2°	Gardenia Purple
	SM22-2407H SM22-1407H	(U Lt 1 st , 2 nd Bicuspid) (U Rt 1 st , 2 nd Bicuspid)	-7°	0°	2°	Gardenia Purple
	SM22-3106 SM22-4106	(L Lt anterior) (L Rt anterior)	-6°	0°	0°	Pink
	SM22-3106R SM22-4106R	(L Lt anterior) (L Rt anterior)	-6°	0°	0°	Pink
	SM22-3300H SM22-4300H	(L Lt Cuspid) (L Rt Cuspid)	0°	3°	2°	paprika Orange
	SM22-3300R SM22-4300R	(L Lt Cuspid) (L Rt Cuspid)	0°	3°	2°	paprika Orange
	SM22-3412 SM22-4412	(L Lt 1 st Bicuspid) (L Rt 1 st Bicuspid)	-12°	2°	0°	Cacao Chocolate
	SM22-3412H SM22-4412H	(L Lt 1 st Bicuspid) (L Rt 1 st Bicuspid)	-12°	2°	0°	Cacao Chocolate
	SM22-3517 SM22-4517	(L Lt 2 nd Bicuspid) (L Rt 2 nd Bicuspid)	-17°	2°	0°	Red



BIO CETEC Co., Ltd.

RUSSIA Application Materials**Instruction for Use**

SM22-3517H SM22-4517H	(L Lt 2 nd Bicuspid) (L Rt 2 nd Bicuspid)	-17°	2°	0°	Red
--------------------------	--	------	----	----	-----

Type	Model Name	Teeth's position	Torque (°)	Angulation (°)	Off set (°)	Identification dot's color
Rot h 022	SR22-2112 SR22-1112	(U Lt Central) (U Rt Central)	12°	5°	0°	Food Blue (Gardenia Blue)
	SR22-2208 SR22-1208	(U Lt Lateral) (U Rt Lateral)	8°	9°	0°	Gardenia Yellow
	SR22-2300H SR22-1300H	(U Lt Cuspid) (U Rt Cuspid)	0°	11°	4°	Gardenia Green
	SR22-2407 SR22-1407	(U Lt 1 st , 2 nd Bicuspid) (U Rt 1 st , 2 nd Bicuspid)	-7°	0°	2°	Gardenia Purple
	SR22-2407H SR22-1407H	(U Lt 1 st , 2 nd Bicuspid) (U Rt 1 st , 2 nd Bicuspid)	-7°	0°	2°	Gardenia Purple
	SR22-3101 SR22-4101	(L Lt anterior) (L Rt anterior)	-1°	0°	0°	Pink
	SR22-3101R SR22-4101R	(L Lt anterior) (L Rt anterior)	-1°	0°	0°	Pink
	SR22-3311H SR22-4311H	(L Lt Cuspid) (L Rt Cuspid)	-11°	7°	2°	paprika Orange
	SR22-3311R SR22-4311R	(L Lt Cuspid) (L Rt Cuspid)	-11°	7°	2°	paprika Orange
	SR22-3417 SR22-4417	(L Lt 1stBicuspid) (L Rt 1stBicuspid)	-17°	0°	4°	Cacao Chocolate
	SR22-3417H SR22-4417H	(L Lt 1stBicuspid) (L Rt 1stBicuspid)	-17°	0°	4°	Cacao Chocolate
	SR22-3522 SR22-4522	(L Lt 2ndBicuspid) (L Rt 2ndBicuspid)	-22°	0°	4°	Red
	SR22-3522H SR22-4522H	(L Lt 2ndBicuspid) (L Rt 2ndBicuspid)	-22°	0°	4°	Red
	SR18-2112 SR18-1112	(U Lt Central) (U Rt Central)	12°	5°	0°	Food Blue (Gardenia Blue)
Rot h 018	SR18-2208 SR18-1208	(U Lt Lateral) (U Rt Lateral)	8°	9°	0°	Gardenia Yellow
	SR18-2300H SR18-1300H	(U Lt Cuspid) (U Rt Cuspid)	0°	11°	4°	Gardenia Green
	SR18-2407 SR18-1407	(U Lt 1 st , 2 nd Bicuspid) (U Rt 1 st , 2 nd Bicuspid)	-7°	0°	2°	Gardenia Purple
	SR18-2407H SR18-1407H	(U Lt 1 st , 2 nd Bicuspid) (U Rt 1 st , 2 nd Bicuspid)	-7°	0°	2°	Gardenia Purple
	SR18-3101 SR18-4101	(L Lt anterior) (L Rt anterior)	-1°	0°	0°	Pink
	SR18-3101R SR18-4101R	(L Lt anterior) (L Rt anterior)	-1°	0°	0°	Pink
	SR18-3311H SR18-4311H	(L Lt Cuspid) (L Rt Cuspid)	-11°	7°	2°	paprika Orange

RUSSIA Application Materials

Instruction for Use

SR18-3311R SR18-4311R	(L Lt Cuspid) (L Rt Cuspid)	-11°	7°	2°	paprika Orange
SR18-3417 SR18-4417	(L Lt 1stBicuspid) (L Rt 1stBicuspid)	-17°	0°	4°	Cacao Chocolate
SR18-3417H SR18-4417H	(L Lt 1stBicuspid) (L Rt 1stBicuspid)	-17°	0°	4°	Cacao Chocolate
SR18-3522 SR18-4522	(L Lt 2ndBicuspid) (L Rt 2ndBicuspid)	-22°	0°	4°	Red
SR18-3522H SR18-4522H	(L Lt 2ndBicuspid) (L Rt 2ndBicuspid)	-22°	0°	4°	Red

Permissible error for the technical parameters is:

<1mm: ± 0,05mm,

>1mm: ± 0,1mm,

Angle: ± 5%

C-line is consisted of 33H, 55H, and 55H45 sets for each standard. In the treatment, sometimes the tooth number 4 and 5 are not visible on the oral structure. Therefore, the 33H set is designed for attaching only the visible front part with a ceramic bracket and the rest with a different bracket, such as a metal bracket. And 55Hset is made for attaching the part except the molars to the ceramic bracket. The 55H45 set is basically the same as 55Hset, but it means that there are hooks in tooth numbers 4 and 5.

The S-line consists of 33H, 33HR, 53H, 53HR, 53H45, 53H45R, 55H, 55H45 sets for each standard. The 33H kit is designed to bond ceramic elements to the visible teeth of the anterior part, and other elements, such as metal, to the remaining teeth. Kits 53H, 53HR, 53H45, 53H45R include braces for bonding on the upper jaw with 5 to 5 teeth and on the lower jaw with 3 to 3 teeth, other braces, for example, metal, are bonded to the remaining teeth. The presence of "H" in the indicated set indicates the presence of a hook on the bracket in the teeth No.3. The presence of "R" in the end of the name of the set indicates that the cap (door) of the braces open in the direction of the gingival. And in the remaining sets, the cap (door) of the braces on the lower jaw opens in the direction of the occlusal. Kits 55H and 55H45 are designed to bond ceramic braces on all teeth except molars. "45" after "H" indicate the presence of a hook on the braces in teeth number 4 and 5. The doctor selects the kit in accordance with his technique.

Intended Use

The bracket is made of ceramic material intended to be attached to the surface of the teeth for orthodontic treatment.

Methods of Use


1) Precautions

- Look for any signs of crack, fracture or impurity.
- Choose appropriate brackets for the patient's teeth.
- Remove substances and moisture from the surface of patient's teeth.

2) Procedure

- Look for any signs of abnormal condition or impurities of the packing.

- After opening, handle the product using utensils such as dental forceps designed for braces.
- Check the base of brackets that contact the surface of the teeth. Bracket should not be fractured, cracked or impure. It should be compatible with the tooth that it will be placed to. If the surface of the tooth is contaminated with foreign matter or water, it may be difficult to position it on the correct area, and the bonding strength may also be lowered.
- Apply an appropriate amount of bonding agent following the instruction of the bonding product you choose to use. Bracket is compatible with any adhesive intended for ceramic brackets.
- Before attaching the bracket with bonding agent there is a need to make sure that the FACC line is

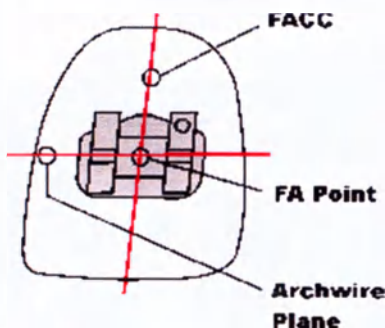


located like in the picture below.

- Correct positioning of the bracket to the facial axis of clinical crowns (FACC) and Facial Axis (FA) points of the tooth enables precise torque and angle adjustment.
- The amount of bonding agent is sufficient to allow the orthodontist to compensate between the patient's tooth surface and the bottom surface of the bracket. Attach the bracket to the tooth surface. After bonding, remove the residual resin from the bracket using the tail part of the bracket holder and perform the photo-curing step.
- After attaching the product to the surface of the teeth, rinse off the food coloring in the slot line and the ID Dot.
- After attaching the bracket to each tooth, ligate the wire to the bracket slot.
- The material and thickness of the wire may vary depending on the preference of the orthodontist at the stage of initial mid-term late orthodontic treatment.
- The material of the wires are Niti, Stainless Steel, Copper-Niti, etc. and the size of the round wires are 0.014, 0.016, 0.018, 0.020 inch and rectangular wires 0.016*0.022, 0.017*0.025, 0.018*0.025, 0.019*0.025, 0.021*0.025 inch etc.
- This product is compatible with an existing O ring and Ligation wires.
- Methods of product use and the process of treatment depend on doctor's instruction.
- The orthodontist periodically treats the patient as once a month to see if treatment is proceeding as the orthodontist intended.

Opening and closing the door of the S-line self-ligating orthodontic bracket


1) The first method

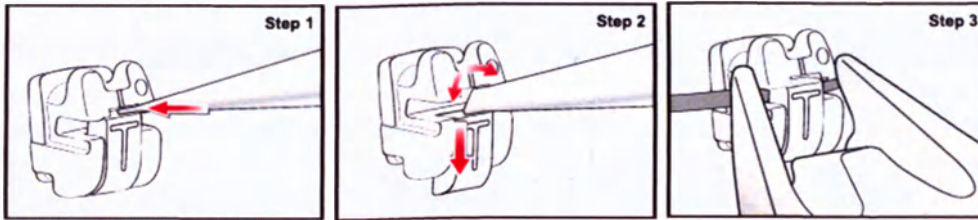

Step


- Step 1: Place the opening of the tool exactly in the hole above the bracket door.
- Step 2: Gently rotate it 90 degrees.
- Step 3: After inserting the wire into the slot, carefully push the wire through the wings of the cover of the tool and lift it up to close the door.

2) The second method

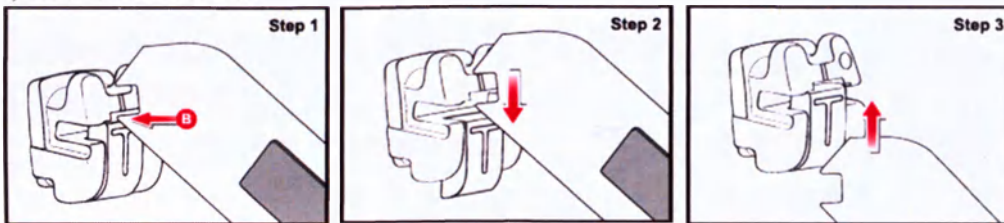

- Step 1: Place tip B of the opening tool exactly in the hole above the bracket door.
- Step 2: Pressing lightly, pull the door down.
- Step 3: To close the door, pull it up or close it with a fingernail.

Bracket Removal Instructions

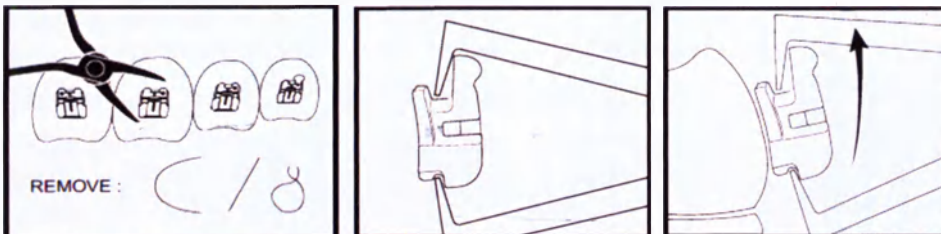

Remove

The following procedure is designed to safely remove S-Line braces using the universal braces removal tool.

- 1) Remove all ligatures and orthodontic arches. Make sure that the patient feels comfortable during the braces removal procedure.
- 2) Using the universal bracket removal tool, grab the bracket under the occlusal gingival bracket hooks. Squeeze the tool handles slightly.
- 3) Turn the tool in the direction of the occlusal / cutting edge, gradually increasing the force until the bracket comes off the tooth. Do not pull, pull or twist the bracket. It is recommended to remove braces in the direction of the occlusal / incisal edge.

3) After use



BIO CETEC Co., Ltd.

RUSSIA Application Materials

Instruction for Use

- The product is not reusable.
- Dispose of products that were taken off intentionally because of treatment completion or unintentionally by some kind of force during the treatment. The product is class A medical waste according to the classification of medical waste and is disposed of in accordance with the standards of utilization for this class of waste.

Cautions

- Brackets are installed by a certified orthodontist.

For the attention of the doctor:

- Use the appropriate bracket for each tooth.
- Check the deformation and hygienic condition of the product before using.
- Keep hands, oil, and moisture out of the bracket base before the bonding process.
- Prevent the fracture by avoiding an excessive force of torque.
- When fractures occur, dispose the bracket and use the new product.
- Do not reuse brackets that were taken off after the treatment or because of the fracture.
- When taking off the bracket, do not apply excessive amount of force as it can cause damage to the patient's teeth.
- The bracket is a conventional type. It can be used directly with applications include wire, bonding agent, and tweezers compatible with ceramic brackets.
- The orthodontic wire that ligates the bracket may be made of a variety of existing materials, sizes and for models: Roth 018 brackets are not compatible with 0.19, 0.22 inch rectangular or round orthodontic wire.
- When the treatment is complete remove the bracket by twisting it in the direction of the occlusal surface or the gingiva with the debonding pliers. Do not apply excessive force to remove the bracket.
- After removing the bracket, discard it and never use it again.

For the attention of the patient:

- In case of any kind of bracket damage immediately see the doctor.
- Do not remove the bracket or wire during the treatment.
- It is not recommended eating chewing gum or any sticky foods.
- Keep the tooth clean after eating foods.

Potential consumers (in connection with age, diagnosis etc.)"

- We can expect the consumers who have malocclusion tooth.
- - The consumers who want to improve their appearance.
- - The consumers who have to treat their handicapping malocclusion.
- - The consumers who have disability of pronounce



BIOCETEC Co., Ltd.

RUSSIA Application Materials

Instruction for Use

- - The consumers who have the teeth are chipped by an accident.
- - There are no limit of the ages. It should be considered the condition of patient's tooth and bone.

Side effects of orthodontic treatment

- Decalcification of the tooth surface
- Periodontal tissue disease
- Tooth root resorption (shortening)
- Pathology of TMJ (temporomandibular joint)
- Relapse
- Duration and interruption of treatment

Transportation conditions

Transportation is carried out using covered vehicles in accordance with the rules for the carriage of goods developed for each type of vehicle at a temperature of -10 to + 70 ° C and a relative humidity of 50.

Sterilization

The product is not sterile medical devices. It can be cleansed with alcohol before using.

Shelf life

10 years; maximum wearing period after installation is 3 years.

Storage Methods

Keep the product out of direct sunlight under the interior room temperature.

T condition for Use

The product has shown no defects at the temperature range from -10°C to + 70°C.

Warranty

"Biocetec Co., Ltd." (Biocetec Co., Ltd.) warrants that all reasonable precautions have been taken in the design and manufacture of the product. This warranty supersedes and excludes any other warranties not expressly provided herein, expressed expressly or implied by law or otherwise, including but not limited to any implied warranties of merchantability or fitness for a particular use. The movement, storage, cleaning and sterilization of the product, as well as other factors related to the patient, as well as diagnostics, treatment, surgical procedures and other issues beyond the scope of the Biocetec control, can directly affect the product itself and on the results of its application. The obligations of Biocetec under this warranty are limited only to replacing the product in cases where the detected malfunction is a constructive defect of the manufacturer (this means that the product does not meet the technical parameters specified in table No. 1). Biocetec is not responsible for



BIOCETEC Co., Ltd.

RUSSIA Application Materials

Instruction for Use

any incidental or consequential loss, damage or expense directly or indirectly associated with the use of this product. Biocetec does not accept or authorize any other person to accept any other or additional obligations or responsibilities in connection with this product. Biocetec assumes no liability with respect to products undergoing reuse or recycling, and makes no warranties, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for the intended use with respect to such products.

Utilization

The product is disposable and should not be reused at any time. Used products should be thrown away as general waste. The product is class A medical waste according to the classification of medical waste and is disposed of in accordance with the standards of utilization for this class of waste.

Packaging

Sets of orthodontic ceramic braces in the amount of 10 pieces are packed in plastic bags and wrapped in silver packing foil.

Products in sets (12, 16 or 20 pieces) are packed in rigid containers made of ABS plastic.

Revision Information

Release Date - 08/08/2019

Manufacturer

Company Name: "BIOCETEC CO., LTD." (BIOCETEC CO., LTD.)

Company address: RM 1001-1002, Newtikasl, 108 Kasan Digital 2-ro, Gimcheon-gu, Seoul, South Korea

Contact Information:

TEL.: +82 2 704 2876, +82 70 8856 2890 FAX: +82 2 704 2877

Authorized representative

Name of the company: INTELLEC-T JSC

Company address: 117279, Russian Federation, Moscow, ul. Miklukho-Maklaya, 34, room IV, room 37, office 33

Contact information: 8-981-849-03-43 info@intellec-t.com



Signature, stamp

등부 2019년 제 7502호

Registered No. 2019-7502

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 사용설명서 ----- 에
기재된 주식회사 바이오세텍 -----
대표이사 윤성희 -----

HEE SUE JIN -----

attorney-in-fact of
BIOCETEC Co.,Ltd. -----
SUNG HEE YOON/ CEO -----

의 대리인 진희수 ----- 은
본 공증인의 면전에서 위 본인이 ---
기명날인한 것임을 확인하였다.

appeared before me and admitted
said principal's subscription to
the attached Instruction for Use ---

2019년 09월 17일

이 사무소에서 위 인증한다.

This is hereby attested on this
17th day of Sep. 2019 at this office.

법무법인 센트럴

CENTRAL Intellectual Property & Law

소 속 서울중앙지방검찰청

Belong to Seoul Central

주 소 서울시 서초구 남부순환로 2561

District Prosecutor's Office

106호(서초동, 원효빌딩)

Suite 106, 2561, Nambusunhwan-ro

Seocho-gu, Seoul, Korea

공증담당변호사

이 준 훈

Attorney-at-Law

JOON HOON LEE

본 사무소는 인가번호 제16호에 의거하여
2009년 05월 07일 법무부 장관으로부터
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
7, May. 2009 Under Law No.16.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Republic of Korea

This public document

2. has been signed by JOON HOON LEE

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of CENTRAL Intellectual Property and Law

Certified

5. at Seoul

6. 17/09/2019

7. by The Ministry of Justice

8. No. XXA2019I6ZB39R

9. Seal/ stamp

10. Signature

Kim Jae-il

Kim Jae-il



Офис 106, 2561,
Намбусунхван-ро
Сеохо-гу, Сеул, Корея
(Suite 106, 2561,
Nambusunhwan-ro
Seocho-gu, Seoul, Korea)

/Штамп/ /Герб/

Тел. 02-733-4813
Факс 02-3487-4848

ЦЕНТРАЛЬНОЕ бюро по вопросам
интеллектуальной собственности и
права
(CENTRAL Intellectual Property &
Law)

Регистрационный № 2019 – 7502

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЦЕНТРАЛЬНОЕ бюро по вопросам интеллектуальной собственности и права
(CENTRAL Intellectual Property & Law)

Офис 106, 2561, Намбусунхван-ро
Сеохо-гу, Сеул, Корея
(Suite 106, 2561, Nambusunhwan-ro
Seocho-gu, Seoul, Korea)

/Круглая рифленая печать:

ЦЕНТРАЛЬНОЕ бюро по вопросам интеллектуальной собственности и права (CENTRAL Intellectual
Property & Law) * НОТАРИУС/

210 мм x 297 мм
Стандартный лист (1-й сорт) 70 г/м²

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

Подпись, печать

/подпись/ /Круглая печать/

Наименование –

Наборы ортодонтических керамических брекетов «Биоцетек» (Biocetec), варианты исполнения:

1. Наборы ортодонтических керамических брекетов «Биоцетек» "C-line"» («Biocetec» "C-line"»):

Набор CML22-1117, в составе брекет CML22-1117 – 10 шт.
Набор CML22-2117, в составе брекет CML22-2117 – 10 шт.
Набор CML22-1210, в составе брекет CML22-1210 – 10 шт.
Набор CML22-2210, в составе брекет CML22-2210 – 10 шт.
Набор CML22-1300H, в составе брекет CML22-1300H – 10 шт.
Набор CML22-2300H, в составе брекет CML22-2300H – 10 шт.
Набор CML22-1407, в составе брекет CML22-1407 – 10 шт.
Набор CML22-2407, в составе брекет CML22-2407 – 10 шт.
Набор CML22-4106, в составе брекет CML22-4106 – 10 шт.
Набор CML22-3106, в составе брекет CML22-3106 – 10 шт.
Набор CML22-4300H, в составе брекет CML22-4300H – 10 шт.
Набор CML22-3300H, в составе брекет CML22-3300H – 10 шт.
Набор CML22-4412, в составе брекет CML22-4412 – 10 шт.
Набор CML22-3412, в составе брекет CML22-3412 – 10 шт.
Набор CML22-4517, в составе брекет CML22-4517 – 10 шт.
Набор CML22-3517, в составе брекет CML22-3517 – 10 шт.
Набор CM22-1117, в составе брекет CM22-1117 – 10 шт.
Набор CM22-2117, в составе брекет CM22-2117 – 10 шт.
Набор CM22-1210, в составе брекет CM22-1210 – 10 шт.
Набор CM22-2210, в составе брекет CM22-2210 – 10 шт.
Набор CM22-1300H, в составе брекет CM22-1300H – 10 шт.
Набор CM22-2300H, в составе брекет CM22-2300H – 10 шт.
Набор CM22-1407, в составе брекет CM22-1407 – 10 шт.
Набор CM22-2407, в составе брекет CM22-2407 – 10 шт.
Набор CM22-1407H, в составе брекет CM22-1407H – 10 шт.
Набор CM22-2407H, в составе брекет CM22-2407H – 10 шт.
Набор CM22-4106, в составе брекет CM22-4106 – 10 шт.
Набор CM22-3106, в составе брекет CM22-3106 – 10 шт.
Набор CM22-4300H, в составе брекет CM22-4300H – 10 шт.
Набор CM22-3300H, в составе брекет CM22-3300H – 10 шт.
Набор CM22-4412, в составе брекет CM22-4412 – 10 шт.
Набор CM22-3412, в составе брекет CM22-3412 – 10 шт.

/Штамп/

Набор СМ22-4412Н, в составе брекеты СМ22-4412Н – 10 шт.
Набор СМ22-3412Н, в составе брекеты СМ22-3412Н – 10 шт.
Набор СМ22-4517, в составе брекеты СМ22-4517 – 10 шт.
Набор СМ22-3517, в составе брекеты СМ22-3517- 10 шт.
Набор СМ22-4517Н, в составе брекеты СМ22-4517Н – 10 шт.
Набор СМ22-3517Н, в составе брекеты СМ22-3517Н – 10 шт.

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

Набор CR18-2112, в составе брекетты CR18-2112 – 10 шт.
 Набор CR18-1112, в составе брекетты CR18-1112 – 10 шт.
 Набор CR18-2208, в составе брекетты CR18-2208 – 10 шт.
 Набор CR18-1208, в составе брекетты CR18-1208 – 10 шт.
 Набор CR18-2300Н, в составе брекетты CR18-2300Н – 10 шт.
 Набор CR18-1300Н, в составе брекетты CR18-1300Н- 10 шт.
 Набор CR18-2407, в составе брекетты CR18-2407 – 10шт.
 Набор CR18-1407, в составе брекетты CR18-1407 – 10 шт.
 Набор CR18-2407Н, в составе брекетты CR18-2407Н – 10 шт.
 Набор CR18-1407Н, в составе брекетты CR18-1407Н – 10 шт.
 Набор CR18-3101, в составе брекетты CR18-3101 – 10 шт.
 Набор CR18-4101, в составе брекетты CR18-4101 – 10 шт.
 Набор CR18-3311Н, в составе брекетты CR18-3311Н – 10 шт.
 Набор CR18-4311Н, в составе брекетты CR18-4311Н – 10 шт.
 Набор CR18-3417, в составе брекетты CR18-3417-10 шт.
 Набор CR18-4417, в составе брекетты CR18-4417 – 10 шт.
 Набор CR18-3417Н, в составе брекетты CR18-3417Н-10 шт.
 Набор CR18-4417Н, в составе брекетты CR18-4417Н – 10 шт.
 Набор CR18-3522, в составе брекетты CR18-3522 – 10 шт.
 Набор CR18-4522, в составе брекетты CR18-4522- 10 шт.
 Набор CR18-3522Н, в составе брекетты CR18-3522Н – 10 шт.
 Набор CR18-4522Н, в составе брекетты CR18-4522Н – 10 шт.
 Набор CR22-2112, в составе брекетты CR22-2112– 10 шт.
 Набор CR22-1112, в составе брекетты CR22-1112 – 10 шт.
 Набор CR22-2208, в составе брекетты CR22-2208- 10 шт.
 Набор CR22-1208, в составе брекетты CR22-1208- 10 шт.
 Набор CR22-2300Н, в составе брекетты CR22-2300Н – 10 шт.
 Набор CR22-1300Н, в составе брекетты CR22-1300Н- 10 шт.
 Набор CR22-3101, в составе брекетты CR22-3101- 10 шт.
 Набор CR22-4101, в составе брекетты CR22-4101- 10 шт.
 Набор CR22-3311Н, в составе брекетты CR22-3311Н – 10шт.
 Набор CR22-4311Н, в составе брекетты CR22-4311Н – 10 шт.
 Набор CR22-3417, в составе брекетты CR22-3417 – 10 шт.
 Набор CR22-4417, в составе брекетты CR22-4417 – 10 шт.
 Набор CR22-3417Н, в составе брекетты CR22-3417Н – 10 шт.
 Набор CR22-4417Н, в составе брекетты CR22-4417Н– 10 шт.
 Набор CR22-3522, в составе брекетты CR22-3522– 10 шт.
 Набор CR22-4522, в составе брекетты CR22-4522 – 10 шт.
 Набор CR22-3522Н, в составе брекетты CR22-3522Н -10 шт.
 Набор CR22-4522Н, в составе брекетты CR22-4522Н – 10 шт.

/Штамп/

Набор CML22-33H, в составе брекеты CML22-1117, CML22-2117, CML22-1210, CML22-2210, CML22-1300H, CML22-2300H, CML22-4106(2), CML22-3106(2), CML22-4300H, CML22-3300H

Набор CML22-55H, в составе брекеты CML22-1117, CML22-2117, CML22-1210, CML22-2210, CML22-1300H, CML22-2300H, CML22-1407(2), CML22-2407(2), CML22-4106(2), CML22-3106(2), CML22-4300H, CML22-3300H, CML22-4412, CML22-3412, CML-3517, CML-4517

Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы Инструкция по применению
--	---

Набор CM22-33H, в составе брекететы CM22-1117, CM22-2117, CM22-1210, CM22-2210, CM22-1300H, CM22-2300H, CM22-4106(2), CM22-3106(2), CM22-4300H, CM22-3300H

Набор CM22-55H, в составе брекететы CM22-1117, CM22-2117, CM22-1210, CM22-2210, CM22-1300H, CM22-1407(2), CM22-2300H, CM22-2407(2), CM22-4106(2), CM22-3106(2), CM22-4300H, CM22-3300H, CM22-4412, CM22-3412, CM22-4517, CM22-3517

Набор CM22-55H45, в составе брекететы CM22-1117, CM22-2117, CM22-1210, CM22-2210, CM22-1300H, CM22-1407H(2), CM22-2300H, CM22-2407H(2), CM22-4106(2), CM22-3106(2), CM22-4300H, CM22-3300H, CM22-4412H, CM22-3412H, CM22-4517H, CM22-3517H

Набор CR18-33H, в составе брекететы CR18-1112, CR18-2112, CR18-1208, CR18-2208, CR18-1300H, CR18-2300H, CR18-4101(2), CR18-3101(2), CR18-3311H, CR18-4311H

Набор CR18-55H, в составе брекететы CR18-1112, CR18-2112, CR18-1208, CR18-2208, CR18-1300H, CR18-2300H, CR18-1407(2), CR18-2407(2), CR18-4101(2), CR18-3101(2), CR18-3311H, CR18-4311H CR18-3417, CR18-4417, CR18-3522, CR18-4522

/Штамп/

Набор CR18-55H45, в составе брекететы CR18-1112, CR18-2112, CR18-1208, CR18-2208, CR18-1300H, CR18-2300H, CR18-1407H(2), CR18-2407H(2), CR18-4101(2), CR18-3101(2), CR18-3311H, CR18-4311H, CR18-3417H, CR18-4417H, CR18-3522H, CR18-4522H

Набор CR22-33H, в составе CR22-1112, CR22-2112, CR22-1208, CR22-2208, CR22-1300H, CR22-2300H, CR22-4101(2), CR22-3101(2), CR22-3311H, CR22-4311H

Набор CR22-55H, в составе брекететы CR22-1112, CR22-2112, CR22-1208, CR22-2208, CR22-1300H, CR22-2300H, CM22-1407(2), CM22-2407(2), CR22-4101(2), CR22-3101(2), CR22-3311H, CR22-4311H CR22-3417, CR22-4417, CR22-3522, CR22-4522

Набор CR22-55H45, в составе брекететы CR22-1112, CR22-2112, CR22-1208, CR22-2208, CR22-1300H, CR22-2300H, CM22-1407H(2), CM22-2407H(2), CR22-4101(2), CR22-3101(2), CR22-3311H, CR22-4311H CR22-3417H, CR22-4417H, CR22-3522H, CR22-4522H

Наборы ортодонтических керамических брекетов «Биоцетек» "S-line"» («Biocetec» "S-line"»):

Набор SR22-1112, в составе брекететы SR22-1112 – 10 шт

Набор SR22-2112, в составе брекететы SR22-2112 – 10 шт

Набор SR22-1208, в составе брекететы SR22-1208 – 10 шт

Набор SR22-2208, в составе брекететы SR22-2208 – 10 шт

Набор SR22-1300H, в составе брекететы SR22-1300H – 10 шт

Набор SR22-2300H, в составе брекететы SR22-2300H – 10 шт

Набор SR22-1407, в составе брекететы SR22-1407 – 10 шт

Набор SR22-1407H, в составе брекететы SR22-1407H – 10 шт

Набор SR22-2407, в составе брекететы SR22-2407 – 10 шт

Набор SR22-2407H, в составе брекететы SR22-2407H – 10 шт

Набор SR22-3101, в составе брекететы SR22-3101 – 10 шт

Набор SR22-4101, в составе брекететы SR22-4101 – 10 шт

Набор SR22-3101R, в составе брекететы SR22-3101R – 10 шт

Набор SR22-4101R, в составе брекететы SR22-4101R – 10 шт

Набор SR22-3311H, в составе брекететы SR22-3311H – 10 шт

Набор SR22-4311H, в составе брекететы SR22-4311H – 10 шт

Набор SR22-3311R, в составе брекететы SR22-3311R – 10 шт

Набор SR22-4311R, в составе брекететы SR22-4311R – 10 шт

Набор SR22-3417, в составе брекететы SR22-3417 – 10 шт

Набор SR22-3417H, в составе брекететы SR22-3417H – 10 шт

Набор SR22-4417, в составе брекететы SR22-4417 – 10 шт

Набор SR22-4417H, в составе брекеты SR22-4417H – 10 шт
Набор SR22-3522, в составе брекеты SR22-3522 – 10 шт
Набор SR22-3522H, в составе брекеты SR22-3522H – 10 шт
Набор SR22-4522, в составе брекеты SR22-4522 – 10 шт
Набор SR22-4522H, в составе брекеты SR22-4522H – 10 шт

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

Набор SR18-1112, в составе брекететы SR18-1112 – 10 шт
Набор SR18-2112, в составе брекететы SR18-2112 – 10 шт
Набор SR18-1208, в составе брекететы SR18-1208 – 10 шт
Набор SR18-2208, в составе брекететы SR18-2208 – 10 шт
Набор SR18-1300H, в составе брекететы SR18-1300H – 10 шт
Набор SR18-2300H, в составе брекететы SR18-2300H – 10 шт
Набор SR18-1407, в составе брекететы SR18-1407 – 10 шт
Набор SR18-1407H, в составе брекететы SR18-1407H – 10 шт
Набор SR18-2407, в составе брекететы SR18-2407 – 10 шт
Набор SR18-2407H, в составе брекететы SR18-2407H – 10 шт
Набор SR18-3101, в составе брекететы SR18-3101 – 10 шт
Набор SR18-4101, в составе брекететы SR18-4101 – 10 шт
Набор SR18-3101R, в составе брекететы SR18-3101R – 10 шт
Набор SR18-4101R, в составе брекететы SR18-4101R – 10 шт
Набор SR18-3311H, в составе брекететы SR18-3311H – 10 шт.
Набор SR18-4311H, в составе брекететы SR18-4311H – 10 шт
Набор SR18-3311R, в составе брекететы SR18-3311R – 10 шт
Набор SR18-4311R, в составе брекететы SR18-4311R – 10 шт
Набор SR18-3417, в составе брекететы SR18-3417 – 10 шт
Набор SR18-3417H, в составе брекететы SR18-3417H – 10 шт
Набор SR18-4417, в составе брекететы SR18-4417 – 10 шт
Набор SR18-4417H, в составе брекететы SR18-4417H – 10 шт
Набор SR18-3522, в составе брекететы SR18-3522 – 10 шт
Набор SR18-3522H, в составе брекететы SR18-3522H – 10 шт
Набор SR18-4522, в составе брекететы SR18-4522 – 10 шт
Набор SR18-4522H, в составе брекететы SR18-4522H – 10 шт
Набор SM22-1117, в составе брекететы SM22-1117 -10 шт
Набор SM22-2117, в составе брекететы SM22-2117 – 10 шт
Набор SM22-1210, в составе брекететы SM22-1210 – 10 шт
Набор SM22-2210, в составе брекететы SM22-2210 -10 шт
Набор SM22-1300H, в составе брекететы SM22-1300H – 10 шт
Набор SM22-2300H, в составе брекететы SM22-2300H – 10 шт
Набор SM22-1407, в составе брекететы SM22-1407 – 10 шт
Набор SM22-1407H, в составе брекететы SM22-1407H – 10 шт
Набор SM22-2407, в составе брекететы SM22-2407 – 10 шт
Набор SM22-2407H, в составе брекететы SM22-2407H – 10 шт
Набор SM22-3106, в составе брекететы SM22-3106 – 10 шт
Набор SM22-4106, в составе брекететы SM22-4106 – 10 шт
Набор SM22-3106R, в составе брекететы SM22-3106R – 10 шт
Набор SM22-4106R, в составе брекететы SM22-4106R – 10 шт
Набор SM22-3300H, в составе брекететы SM22-3300H – 10 шт
Набор SM22-4300H, в составе брекететы SM22-4300H – 10 шт
Набор SM22-3300R, в составе брекететы SM22-3300R – 10 шт
Набор SM22-4300R, в составе брекететы SM22-4300R – 10 шт
Набор SM22-3412, в составе брекететы SM22-3412 -10 шт
Набор SM22-3412H, в составе брекететы SM22-3412H -10 шт
Набор SM22-4412, в составе брекететы SM22-4412 – 10 шт

/Штамп/

Набор SM22-4412H, в составе брекеты SM22-4412H – 10 шт
Набор SM22-3517, в составе брекеты SM22-3517 – 10 шт
Набор SM22-3517H, в составе брекеты SM22-3517H – 10 шт
Набор SM22-4517, в составе брекеты SM22-4517 – 10 шт
Набор SM22-4517H, в составе брекеты SM22-4517H – 10 шт

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

SR22-55H: SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-1407(2), SR22-2407(2), SR22-4101(2), SR22-3101(2), SR22-4311H, SR22-3311H, SR22-4417, SR22-3417, SR22-4522, SR22-3522

SR22-55H45: SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-1407H(2), SR22-2407H(2), SR22-4101(2), SR22-3101(2), SR22-4311H, SR22-3311H, SR22-4417H, SR22-3417H, SR22-4522H, SR22-3522H

SR22-33H: SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-4101(2), SR22-3101(2), SR22-4311H, SR22-3311H

SR22-33HR: SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-4101R(2), SR22-3101R(2), SR22-4311R, SR22-3311R

SR22-53H45: SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-1407H(2), SR22-2407H(2), SR22-4101(2), SR22-3101(2), SR22-4311H, SR22-3311H

SR22-53H45R: SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-1407H(2), SR22-2407H(2), SR22-4101R(2), SR22-3101R(2), SR22-4311R, SR22-3311R

SR22-53H: SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-1407(2), SR22-2407(2), SR22-4101(2), SR22-3101(2), SR22-4311H, SR22-3311H

SR22-53HR: SR22-1112, SR22-2112, SR22-1208, SR22-2208, SR22-1300H, SR22-2300H, SR22-1407(2), SR22-2407(2), SR22-4101R(2), SR22-3101R(2), SR22-4311R, SR22-3311R

SR18-55H: SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-1407(2), SR18-2407(2), SR18-4101(2), SR18-3101(2), SR18-4311H, SR18-3311H, SR18-4417, SR18-3417, SR18-4522, SR18-3522

/Штамп/

SR18-55H45: SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-1407H(2), SR18-2407H(2), SR18-4101(2), SR18-3101(2), SR18-4311H, SR18-3311H, SR18-4417H, SR18-3417H, SR18-4522H, SR18-3522H

SR18-33H: SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-4101(2), SR18-3101(2), SR18-4311H, SR18-3311H

SR18-33HR: SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-4101R(2), SR18-3101R(2), SR18-4311R, SR18-3311R

SR18-53H45: SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-1407H(2), SR18-2407H(2), SR18-4101(2), SR18-3101(2), SR18-4311H, SR18-3311H

SR18-53H45R: SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-1407H(2), SR18-2407H(2), SR18-4101R(2), SR18-3101R(2), SR18-4311R, SR18-3311R

SR18-53H: SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-1407(2), SR18-2407(2), SR18-4101(2), SR18-3101(2), SR18-4311H, SR18-3311H

SR18-53HR: SR18-1112, SR18-2112, SR18-1208, SR18-2208, SR18-1300H, SR18-2300H, SR18-1407(2), SR18-2407(2), SR18-4101R(2), SR18-3101R(2), SR18-4311R, SR18-3311R

SM22-55H: SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H, SM22-1407(2), SM22-2407(2), SM22-4106(2), SM22-3106(2), SM22-4300H, SM22-3300H, SM22-4412, SM22-3412, SM22-4517, SM22-3517

SM22-55H45: SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H, SM22-1407H(2), SM22-2407H(2), SM22-4106(2), SM22-3106(2), SM22-4300H, SM22-3300H, SM22-4412H, SM22-3412H, SM22-4517H, SM22-3517H

SM22-33H: SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H, SM22-4106(2), SM22-3106(2), SM22-4300H, SM22-3300H

SM22-33HR: SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H, SM22-4106R(2), SM22-3106R(2), SM22-4300R(2), SM22-3300R(2)

SM22-53H45: SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H,

SM22-1407H(2), SM22-2407H(2), SM22-4106(2), SM22-3106(2), SM22-4300H, SM22-3300H
SM22-53H45R: SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H,
SM22-1407H(2), SM22-2407H(2), SM22-4106R(2), SM22-3106R(2), SM22-4300R, SM22-3300R
SM22-53H: SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H,

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

SM22-1407(2), SM22-2407(2), SM22-4106(2), SM22-3106(2), SM22-4300H, SM22-3300H
SM22-53HR: SM22-1117, SM22-2117, SM22-1210, SM22-2210, SM22-1300H, SM22-2300H,
 SM22-1407(2), SM22-2407(2), SM22-4106R(2), SM22-3106R(2), SM22-4300R, SM22-3300R

Назначение – Ортодонтический брекет используется для исправления прикуса. Он предназначен для прикрепления к поверхности зубов пациента и соединяется с ортодонтической проволокой для оказания физического давления на движение зуба.

Ниже приводится информация о способах применения и мерах предосторожности в процессе использования керамических брекетов производства компании «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd.). Приступайте к эксплуатации изделия только после тщательного изучения нижеследующей информации, поскольку компания «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd.) не несет ответственности за любые проблемы или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения предоставленных рекомендаций.

Описание изделия


Этот ортодонтический брекет изготовлен из поликристаллической керамики и используется для исправления патологического прикуса. Он предназначен для прикрепления к поверхности зубов пациента и соединяется с ортодонтической проволокой для оказания физического давления на движение зуба.

Каждая модель отличается по величине, размеру и цветовой идентификации, поскольку они прикрепляются к поверхности зубов, соответственно, к 20 из 28 постоянных зубов.

/Штамп/


Для «C-line»

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ

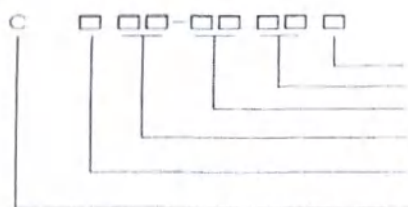

Изделие с крючком
 Угол кручения
 Номер зуба
 Размер паза (слота) (18/22)
 Тип прописи для брекета (MBT/ROTH)
 Первоначальная линия C

НАБОР

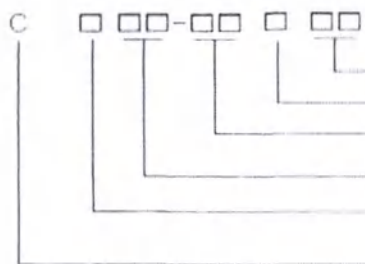


Не заполнено, если крючок на зубе № 3; 4,5,
 если крючок на зубе № 4 или 5.
 Изделие с крючком
 Комплект из 12 моделей = 33, комплект из 16
 моделей = 53, комплект из 20 моделей = 55
 Размер паза (слота) (18/22)
 Тип прописи для брекета (MBT/ROTH)
 Первоначальная линия C

UR: Вверху справа

UL: Вверху слева

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

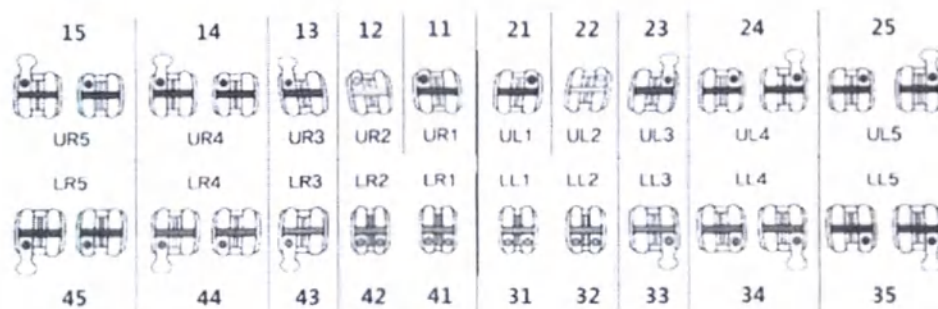


LR: Внизу справа


LL: Внизу слева

Для «S-line»

Основные модели

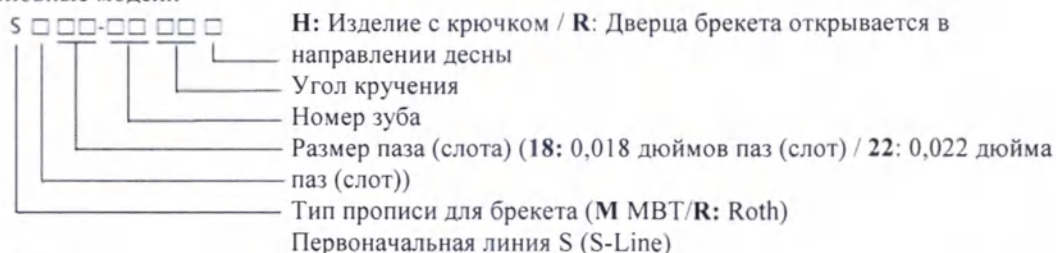

Набор

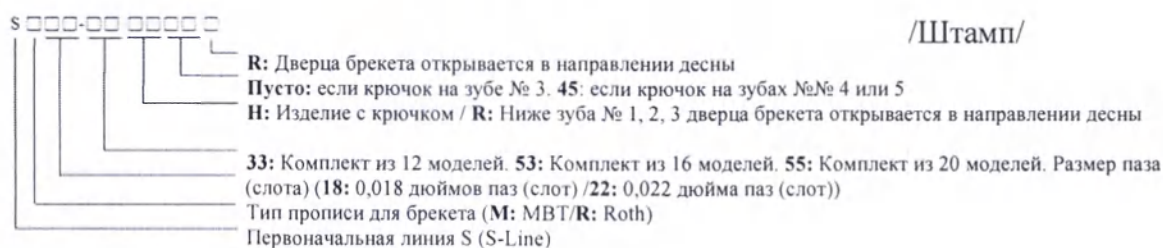

/Штамп/

Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы	
	Инструкция по применению	

15		14		13	12	11	21	22	23	24		25	
2-й премоляр (с крючком)		1-й премоляр (с крючком)		Клык с крючком	Боковой	Центральный	Центральный	Боковой	Клык с крючком	1-й премоляр (с крючком)		2-й премоляр (с крючком)	
2-й премоляр (с крючком)		1-й премоляр (с крючком)		Клык с крючком	Передний	Передний	Передний	Передний	Клык с крючком	1-й премоляр (с крючком)		2-й премоляр (с крючком)	
45		44		43	42	41	31	32	33	34		35	
				Клык с крючком	Передний	Передний	Передний	Передний	Клык с крючком				
				43	42	41	31	32	33				

LR: Внизу справа

LL: Внизу слева

* Нижняя челюсть имеет два типа брекетов.

Тип 1. Дверца брекета открывается в направлении окклюзии.

Тип 2. Дверца брекета открывается в направлении десны.

-"R" указывается в конце названия моделей брекетов, дверца который открывается в направлении десны (например: SM22-4106R, SR22-4101R, SM22-4300R, SR22-4311R и т.п.).

/Штамп/

** Все цветовые идентификационные точки нанесены с дистально-десневой стороны брекетов, за исключением нижних центральных резцов, цветовые точки на которых нанесены с мезиальной и дистальной стороны.

UR: Вверху справа; UL: Вверху слева; LR: Внизу справа; LL: Внизу слева

Цвет идентификационной цветовой точки брекета для зубов № 15, 14, 24, 25 – Пищевой краситель Гардения фиолетовый (Gardenia Purple)

Цвет идентификационной цветовой точки брекета для зубов № 13, 23 – Пищевой краситель Гардения зеленый (Gardenia Green)

Цвет идентификационной цветовой точки брекета для зубов № 12, 22 – Пищевой краситель Гардения желтый (Gardenia Yellow)

Цвет идентификационной цветовой точки брекета для зубов № 11, 21 – Пищевой краситель Гардения синий (Gardenia Blue)

Цвет идентификационной цветовой точки брекета для зубов № 45, 35 – Пищевой краситель Красный (Red)

Цвет идентификационной цветовой точки брекета для зубов № 44, 34 – Пищевой краситель Какао шоколад (Cacao Chocolate)

Цвет идентификационной цветовой точки брекета для зубов № 43, 33 – Пищевой краситель Паприка оранжевый (paprika Orange)

Цвет идентификационной цветовой точки брекета для зубов № 42, 41, 32, 31 – Пищевой краситель Розовый (Pink)

Ортодонтический брекет имеет ряд спецификаций, например, MBT, Roth и т.д., в соответствии со значениями крутящего момента и угла наклона. Размеры каждого брекета выполняются в соответствии с критериями для нормальной окклюзии, согласно стандартам для MBT и Roth.

Существуют 4 типа модели: MBT022 (без идентификационной линии), MBT022, ROTH 018 и ROTH 022.

Roth и MBT существенно различаются по углу наклона и уровню крутящего момента зубов. Кроме того, Roth018 и 022 различаются размером паза (слота). Зубы каждого пациента имеют разный угол наклона и уровень крутящего момента в соответствии с шаблоном нарушения прикуса, поэтому врач-ортодонт может выбрать подходящий брекет в соответствии

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

с описанием брекетов (см. таблицу № 1) и использовать его.

MBT022 имеет 20 типов брекетов, можно выбрать брекеты с крючком или без крючка, установка на зубы № 14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45. Это означает, что MBT022 является аналогом MBT022 (без идентификационной линии) и поставляется с 4-мя дополнительными брекетами с крючками.

MBT022 и Roth018, 022 не всегда используются в сочетании друг с другом. Однако существует исключение.

В брекетах, помимо размера слота, имеется и другое различие между Roth 18 и Roth 22. Это отсутствие брекетов для зубов № 14 и 24 в модели Roth 22 (MBT22, разработанная для этих зубов, входит в состав комплектов Roth018 и Roth022 и используется взамен; это возможно, поскольку уровень крутящего момента и угол наклона для Roth018, Roth022 и MBT022 для зубов № 14 и 24 являются одинаковыми).

/Штамп/

Таблица 1. Описание брекетов «C-line»

Тип	Наименование модели (расположение зуба)	Крутящий момент (°)	Наклон (°)	Обозначение слота (выступ) (°)	Цветовая идентификация (точка)
MBT 022 (без линии)	CML22-1117 (Верхний правый центральный) CML22-2117 (Верхний левый центральный) Размер основы: 3,79; 3,45; 3,86	17	4°	0°	Гардения синий (Gardenia Blue)
	CML22-1210 (Верхний правый боковой) CML22-2210 (Верхний левый боковой) Размер основы: 3,57; 3,49; 3,79	10°	8°	0°	Гардения желтый (Gardenia Yellow)
	CML22-1300H (Верхний правый клык) CM22-2300H (Верхний левый клык) Размер основы: 3,96; 3,69; 4,21	0°	8°	2°	Гардения зеленый (Gardenia Green)
	CML22-1407 (Верхний правый первый премоляр) CML22-2407 (Верхний левый первый премоляр) Размер основы: 3,80; 3,70	-7°	0°	0°	Гардения фиолетовый (Gardenia Purple)
	CML22-4106 (Нижний правый передний) CML22-3106 (Нижний левый передний) Размер основы: 3,60; 3,10	-6°	0°	0°	Розовый (Pink)
	CML22-4300H (Нижний правый клык) CML22-3300H (Нижний левый клык) Размер основы: 3,99; 3,69; 4,04	0°	3°	0°	Паприка оранжевый (paprika Orange)
	CML22-4412 (Нижний правый первый премоляр) CML22-3412 (Нижний левый первый премоляр) Размер основы: 3,79; 3,70; 3,81	-12°	2°	0°	Какао шоколад (Cacao Chocolate)
	CML22-4517 (Нижний правый второй премоляр) CML22-3517 (Нижний левый второй премоляр) Размер основы: 3,80; 3,60; 3,81	-17°	2°	0°	Красный (Red)
	MBT022 CML22-1117 (Верхний правый центральный) CML22-2117(Верхний	17°	4°	0°	Гардения синий (Gardenia Blue)

	левый центральный)				
	Размер основы: 3,79; 3,45; 3,86				
	СМ22-1210 (Верхний правый боковой)	10°	8°	0°	Гардения желтый (Gardenia Yellow)
	СМ22-2210 (Верхний левый боковой)				
	Размер основы: 3,57; 3,49; 3,79				
	СМ22-1300Н (Верхний правый клык)	0°	8°	2°	Гардения зеленый (Gardenia Green)
	СМ22-2300Н (Верхний левый клык)				
	Размер основы: 3,96; 3,69; 4,21				
	СМ22-1407 (Верхний правый первый премоляр)	-7°	0°	0°	Гардения фиолетовый (Gardenia Purple)
	СМ22-2407 (Верхний левый первый премоляр)				
	Размер основы: 3,80; 3,70				
	СМ22-1407Н (Верхний правый первый премоляр)	-7°	0°	2°	Гардения фиолетовый (Gardenia Purple)
	СМ22-2407Н (Верхний левый первый премоляр)				
	Размер основы: 3,80; 3,70				

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

	СМ22-4106 (Нижний правый передний) СМ22-3106 (Нижний левый передний) Размер основы: 3,60; 3,10	-6°	0°	0°	Розовый (Pink)
	СМ22-4300Н (Нижний правый клык) СМ22-3300Н (Нижний левый клык)				
	Размер основы: 3,99; 3,69; 4,04				

/Штамп/

Тип	Наименование модели (расположение зуба)	Крутящий момент (°)	Наклон (°)	Обозначение слота (выступ) (°)	Цветовая идентификация (точка)
MBT0 22	СМ22-4412 (Нижний правый первый премоляр) СМ22-3412 (Нижний левый первый премоляр) Размер основы: 3,79; 3,70; 3,81	-12°	2°	0°	Какао шоколад (Cacao Chocolate)
	СМ22-4412Н (Нижний правый первый премоляр) СМ22-3412Н (Нижний левый первый премоляр) Размер основы: 3,79; 3,70; 3,81				
	СМ22-4517 (Нижний правый второй премоляр) СМ22-3517 (Нижний левый второй премоляр) Размер основы: 3,80; 3,60; 3,81	-17°	2°	0°	Красный (Red)
	СМ22-4517Н (Нижний правый второй премоляр) СМ22-3517Н (Нижний левый второй премоляр) Размер основы: 3,80; 3,60; 3,81				
Roth 018	CR18-2112 (Верхний левый центральный) CR18-1112 (Верхний правый центральный) Размер основы: 3,79; 3,45; 3,88	12°	5°	0°	Гардения синий (Gardenia Blue)
	CR18-2208 (Верхний левый боковой) CR18-1208 (Верхний правый боковой) Размер основы: 3,57; 3,49; 3,84				
	CR18-2300Н (Верхний левый клык) CR18-1300Н (Верхний правый клык) Размер основы: 3,96; 3,69; 4,38	0°	11°	4°	Гардения зеленый (Gardenia Green)
	CR18-2407 (Верхний левый первый премоляр) CR18-1407 (Верхний правый первый премоляр) Размер основы: 3,70; 3,80				
	CR18-2407Н (Верхний левый первый)				
		-7°	0°	0°	Гардения фиолетовый (Gardenia Purple)
		-7°	0°	2°	Гардения фиолетовый (Gardenia)

	премоляр) CR18-1407H (Верхний правый первый премоляр)				Purple)
	Размер основы: 3,70; 3,80				
	CR18-3101 (Нижний левый передний) CR 18-4101 (Нижний правый передний) Размер основы: 3,60; 3,10	-1°	0°	0°	Розовый (Pink)
	CR18-3311H (Нижний левый клык) CR18-4311H (Нижний правый клык) Размер основы: 3,99; 3,69; 4,19	-11°	7°	2°	Паприка оранжевый (paprika Orange)
	CR18-3417 (Нижний левый первый премоляр) CR18-4417 (Нижний правый первый премоляр) Размер основы: 3,60; 3,80	-17°	0°	4°	Какао шоколад (Cacao Chocolate)
	CR18-3417H (Нижний левый первый премоляр) CR18-4417H (Нижний правый первый премоляр) Размер основы: 3,60; 3,80	-17°	0°	4°	Какао шоколад (Cacao Chocolate)
	CR18-3522 (Нижний левый второй премоляр) CR18-4522 (Нижний правый второй премоляр)	-22°	0°	4°	Красный (Red)

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы				
	Инструкция по применению				

Roth 022	Размер основы: 3,60; 3,80 CR18-3522Н (Нижний левый второй премоляр) CR18-4522Н (Нижний правый второй премоляр) Размер основы: 3,60; 3,80	-22°	0°	4°	Красный (Red)
	CR22-2112 (Верхний левый центральный) CR22-1112 (Верхний правый центральный) Размер основы: 3,60; 3,80	12°	5°	0°	Гардения синий (Gardenia Blue)
	CR22-2208 (Верхний левый боковой) CR22-1208 (Верхний правый боковой) Размер основы: 3,57; 3,49; 3,84	8°	9°	0°	Гардения желтый (Gardenia Yellow)
	CR22-2300Н (Верхний левый клык) CR22-1300Н (Верхний правый клык) Размер основы: 3,96; 3,69; 4,38	0°	11°	4°	Гардения зеленый (Gardenia Green)

/Штамп/

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

Тип	Наименование модели (расположение зуба)	Крутящий момент (°)	Наклон (°)	Обозначение слота (выступ) (°)	Цветовая идентификация (точка)
Roth 022	CR22-3101 (Нижний левый передний) CR22-4101 (Нижний правый передний) Размер основы: 3,60; 3,10	-1°	0°	0°	Розовый (Pink)
	CR22-3311H (Нижний левый клык) CR22-4311H (Нижний правый клык) Размер основы: 3,99; 3,69; 4,19	-11°	7°	2°	Паприка оранжевый (paprika Orange)
	CR22-3417 (Нижний левый первый премоляр) CR22-4417 (Нижний правый первый премоляр) Размер основы: 3,60; 3,80	-17°	0°	4°	Какао шоколад (Cacao Chocolate)
	CR22-3417H (Нижний левый первый премоляр) CR22-4417H (Нижний правый первый премоляр) Размер основы: 3,60; 3,80	-17°	0°	4°	Какао шоколад (Cacao Chocolate)
	CR22-3522 (Нижний левый второй премоляр) CR22-4522 (Нижний правый второй премоляр) Размер основы: 3,60; 3,80	-22°	0°	4°	Красный (Red)
	CR22-3522H (Нижний левый второй премоляр) CR22-4522H (Нижний правый второй премоляр) Размер основы: 3,60; 3,80	-22°	0°	4°	Красный (Red)

/Штамп/

Таблица 2. Описание брекетов «S-line»

Тип	Наименование модели	Расположение зуба	Крутящий момент (°)	Наклон (°)	Обозначение слота (выступ) (°)	Цветовая идентификация (точка)
MBT 022	SM22-2117 SM22-1117	(верхний левый центральный) (верхний правый центральный)	17°	4°	0°	Пищевой синий (Гардения синий) (Food Blue (Gardenia Blue))
	SM22-2210 SM22-1210	(верхний левый боковой) (верхний правый боковой)	10°	8°	0°	Гардения желтый (Gardenia Yellow)
	SM22-2300H SM22-1300H	(верхний левый клык) (верхний правый клык)	0°	8°	2°	Гардения зеленый (Gardenia Green)
	SM22-2407 SM22-1407	(верхний левый первый, второй премоляр)	- 7°	0°	2°	Гардения фиолетовый (Gardenia Purple)

	(верхний правый первый, второй премоляр)				
SM22-2407H SM22-1407H	(верхний левый первый, второй премоляр) (верхний правый первый, второй премоляр)	-7°	0°	2°	Гардения фиолетовый (Gardenia Purple)
SM22-3106 SM22-4106	(нижний левый передний) (Нижний правый передний)	-6°	0°	0°	Розовый (Pink)
SM22-3106R SM22-4106R	(нижний левый передний) (нижний правый передний)	-6°	0°	0°	Розовый (Pink)
SM22-3300H SM22-4300H	(нижний левый клык) (нижний правый клык)	0°	3°	2°	Паприка оранжевый (paprika Orange)
SM22-3300R SM22-4300R	(нижний левый клык) (нижний правый клык)	0°	3°	2°	Паприка оранжевый (paprika Orange)
SM22-3412 SM22-4412	(нижний левый первый премоляр) (нижний правый первый премоляр)	-12°	2°	0°	Какао шоколад (Cacao Chocolate)
SM22-3412H SM22-4412H	(нижний левый первый премоляр) (нижний правый первый премоляр)	-12°	2°	0°	Какао шоколад (Cacao Chocolate)
SM22-3517 SM22-4517	(нижний левый второй премоляр) (нижний правый второй премоляр)	-17°	2°	0°	Красный (Red)
SM22-3517H SM22-4517H	(нижний левый второй премоляр) (нижний правый второй премоляр)	-17°	2°	0°	Красный (Red)

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы					
	Инструкция по применению					

	SM22-3517H SM22-4517H	(нижний левый второй премоляр) (нижний правый второй премоляр)	-17°	2°	0°	Красный (Red)
--	--------------------------	---	------	----	----	---------------

/Штамп/

тип	Наименование модели	Расположение зуба	Крутящий момент (°)	Наклон (°)	Обозначение слота (выступ) (°)	Цветовая идентификация (точка)
Roth 022	SR22-2112 SR22-1112	(верхний левый центральный) (верхний правый центральный)	12°	5°	0°	Пищевой синий (Гардения синий) (Food Blue (Gardenia Blue))
	SR22-2208 SR22-1208	(верхний левый боковой) (верхний правый боковой)	8°	9°	0°	Гардения желтый (Gardenia Yellow)
	SR22-2300H SR22-1300H	(верхний левый клык) (верхний правый клык)	0°	11°	4°	Гардения зеленый (Gardenia Green)
	SR22-2407 SR22-1407	(верхний левый первый, второй премоляр) (верхний правый первый, второй премоляр)	-7°	0°	2°	Гардения фиолетовый (Gardenia Purple)
	SR22-2407H SR22-1407H	(верхний левый первый, второй премоляр) (верхний правый первый, второй премоляр)	-7°	0°	2°	Гардения фиолетовый (Gardenia Purple)
	SR22-3101 SR22-4101	(нижний левый передний) (нижний правый передний)	-1°	0°	0°	Розовый (Pink)
	SR22-3101R SR22-4101R	(нижний левый передний) (нижний правый передний)	-1°	0°	0°	Розовый (Pink)
	SR22-3311H SR22-4311H	(нижний левый клык) (нижний правый клык)	-11°	7°	2°	Паприка оранжевый (paprika Orange)
	SR22-3311R SR22-4311R	(нижний левый клык) (нижний правый клык)	-11°	7°	2°	Паприка оранжевый (paprika Orange)
	SR22-3417 SR22-4417	(нижний левый первый премоляр) (нижний правый первый премоляр)	-17°	0°	4°	Какао шоколад (Cacao Chocolate)
	SR22-3417H SR22-4417H	(нижний левый первый премоляр) (нижний правый первый премоляр)	-17°	0°	4°	Какао шоколад (Cacao Chocolate)
	SR22-3522 SR22-4522	(нижний левый второй премоляр) (нижний правый второй премоляр)	-22°	0°	4°	Красный (Red)
	SR22-3522H SR22-4522H	(нижний левый второй премоляр) (нижний правый второй премоляр)	-22°	0°	4°	Красный (Red)
Roth 018	SR18-2112 SR18-1112	(верхний левый центральный) (верхний правый центральный)	12°	5°	0°	Пищевой синий (Гардения синий) (Food Blue (Gardenia Blue))
	SR18-2208 SR18-1208	(верхний левый боковой) (верхний правый боковой)	8°	9°	0°	Гардения желтый (Gardenia Yellow)
	SR18-2300H SR18-1300H	(верхний левый клык) (верхний правый клык)	0°	11°	4°	Гардения зеленый (Gardenia Green)

SR18-2407 SR18-1407	(верхний левый первый, второй премоляр) (верхний правый первый, второй премоляр)	-7°	0°	2°	Гардения фиолетовый (Gardenia Purple)
SR18-2407H SR18-1407H	(верхний левый первый, второй премоляр) (верхний правый первый, второй премоляр)	-7°	0°	2°	Гардения фиолетовый (Gardenia Purple)
SR18-3101 SR18-4101	(нижний левый передний) (Нижний правый передний)	-1°	0°	0°	Розовый (Pink)
SR18-3101R SR18-4101R	(нижний левый передний) (нижний правый передний)	-1°	0°	0°	Розовый (Pink)
SR18-3311H SR18-4311H	(нижний левый клык) (нижний правый клык)	-11°	7°	2°	Паприка оранжевый (paprika Orange)

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы				
	Инструкция по применению				

SR18-3311R SR18-4311R	(нижний левый клык) (нижний правый клык)	-11°	7°	2°	Паприка оранжевый (paprika Orange)
SR18-3417 SR18-4417	(нижний левый первый премоляр) (нижний правый первый премоляр)	-17°	0°	4°	Какао шоколад (Cacao Chocolate)
SR18-3417H SR18-4417H	(нижний левый первый премоляр) (нижний правый первый премоляр)	-17°	0°	4°	Какао шоколад (Cacao Chocolate)
SR18-3522 SR18-4522	(нижний левый второй премоляр) (нижний правый второй премоляр)	-22°	0°	4°	Красный (Red)
SR18-3522H SR18-4522H	(нижний левый второй премоляр) (нижний правый второй премоляр)	-22°	0°	4°	Красный (Red)

Допустимая погрешность для технических параметров:

<1 мм: ± 0,05 мм,

>1 мм: ± 0,1 мм,

Угол: ± 5%

Линия C-line состоит из комплектов 33Н, 55Н и 55Н45 для каждого стандарта. Строение полости рта иногда не позволяет во время лечения увидеть зубы № 4 и 5. Поэтому комплект 33Н разработан для прикрепления керамических брекетов только к видимым зубам передней части, а к остальным зубам прикрепляют другие брекеты, например, металлические. Комплект 55Н предназначен для установки керамических брекетов на все зубы, кроме моляров. Комплект 55Н45 в основном сходен с комплектом 55Н, но в нем брекеты для зубов № 4 и 5 снабжены крючками.

/Штамп/

Линия S-line состоит из комплектов 33Н, 33НР, 53Н, 53НР, 53Н45, 53Н45R, 55Н, 55Н45 для каждого стандарта. Набор 33Н разработан для прикрепления керамических брекетов к видимым зубам передней части, а к остальным зубам прикрепляют другие брекеты, например, металлические. Наборы 53Н, 53НР, 53Н45, 53Н45R включают в себя брекеты для установки на верхнюю челюсть с 5 по 5 зубы и на нижнюю челюсть с 3 по 3 зубы, к остальным зубам прикрепляют другие брекеты, например, металлические. Наличие буквы «Н» в наименовании комплекта указывает на наличие крючка на брекете для зуба № 3. Наличие буквы «R» в конце наименования комплекта указывает на то, что брекеты на нижнюю челюсть открываются в направлении десны. В остальных комплектах брекеты на нижнюю челюсть открываются в направлении окклюзии. Наборы 55Н и 55Н45 предназначены для установки керамических брекетов на все зубы, кроме моляров. «45» после «Н» указывают на наличие крючка на брекетах для 4 и 5 зубов.

Врач подбирает набор в соответствии со своей техникой.

Предусмотренное применение

Брекет выполнен из керамического материала, предназначенного для прикрепления к поверхности зубов для ортодонтического лечения.

Способы применения

- 1) Меры предосторожности


- Проверьте изделие на наличие следов трещин, сколов и посторонних включений.
- Подберите брекеты, подходящие к зубам пациента.
- Очистите поверхность зубов пациента от любых веществ и влаги.

2) Процедура

- Проверьте упаковку на наличие следов повреждений или загрязнений.

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

- После вскрытия упаковки возьмите изделие при помощи специального инструмента, например, стоматологических щипцов, предназначенных для работы с брекетами.
- Осмотрите основание брекета, контактирующее с поверхностью зубов. Брекет не должен иметь трещин, сколов и посторонних включений/загрязнений. Он должен быть совместим с зубом, к которому будет прикрепляться. Если поверхность зуба загрязнена посторонним веществом или влагой, это может усложнить размещение брекета в правильном положении и в правильном месте, а прочность склеивания будет ослаблена.
- Нанесите необходимое количество адгезивного материала, следуя инструкции к адгезивному материалу, выбранному для использования. Брекет совместим с любым адгезивом, предназначенным для керамических брекетов.
- Перед прикреплением брекета адгезивным материалом необходимо убедиться в том, что линия FACC расположена точно так же, как на картинке внизу.

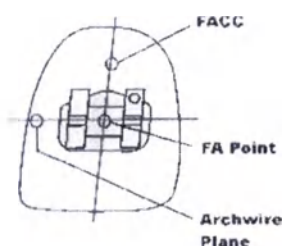

FACC	Лицевая ось клинической коронки (FACC)
FA Point	Точка лицевой оси (FA)
Archwire Plane	Плоскость ортодонтической проволочной дуги

/Штамп/

- Правильное расположение брекета по отношению к точкам лицевой оси клинической коронки (FACC) и точкам лицевой оси (FA) на зубе способствует точной регулировке крутящего момента и угла наклона.
- Количество адгезивного материала должно быть достаточным, чтобы позволить ортодонту компенсировать поверхность зуба пациента и нижнюю поверхность брекета. Прикрепите брекет к поверхности зуба. После склеивания удалите с брекета остатки связующего вещества с помощью задней части держателя брекета и выполните светоотверждение.
- После приклеивания изделий к поверхности зубов смойте пищевой краситель, окрашивающий линию слота (паза), а также цветовую идентификационную точку.
- После приклеивания брекетов на каждый зуб проденьте проволоку в слоты брекетов.
- Материал и толщина проволоки могут различаться в зависимости от предпочтения ортодонта на начальном, промежуточном или конечном этапе ортодонтического лечения.
- Материал проволоки: никель-титановый сплав (Niti), нержавеющая сталь, сплав меди, никеля и титана (Copper-Niti) и т.п., размер проволоки круглого сечения: 0,014, 0,016, 0,018, 0,020 дюймов, размер проволоки прямоугольного сечения: 0,016*0,022, 0,017*0,025, 0,018*0,025, 0,019*0,025, 0,021*0,025 дюймов, и т.д.
- Данное изделие совместимо с имеющимся уплотнительным кольцом и проволочной


лигатурой.

- Способ использования изделия и порядок лечения зависят от предписаний врача.
- Периодически, раз в месяц, ортодонт осматривает пациента, чтобы убедиться в том, что лечение проходит, как запланировано.

Открытие и закрытие дверцы самолигирующего ортодонтического брекета «S-line»

1) Первый способ


/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

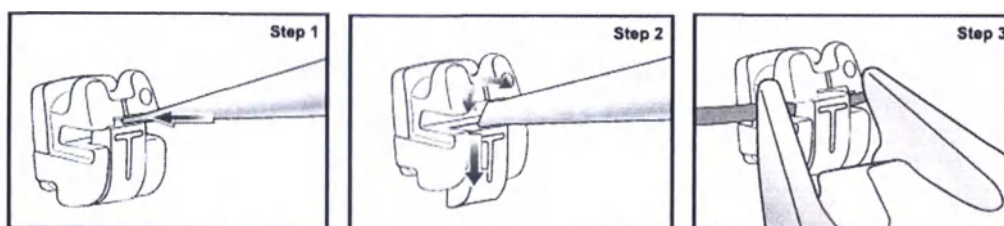

Step	Шар
------	-----

- Шаг 1: Поместите открывающую часть инструмента точно в отверстие над дверцей брекета.
- Шаг 2: Аккуратно поверните его на 90 градусов.
- Шаг 3: Вставив проволоку в слот, с помощью крыльев закрывающей части инструмента осторожно протолкните проволоку и поднимите ее вверх, чтобы закрыть дверцу.


2) Второй способ

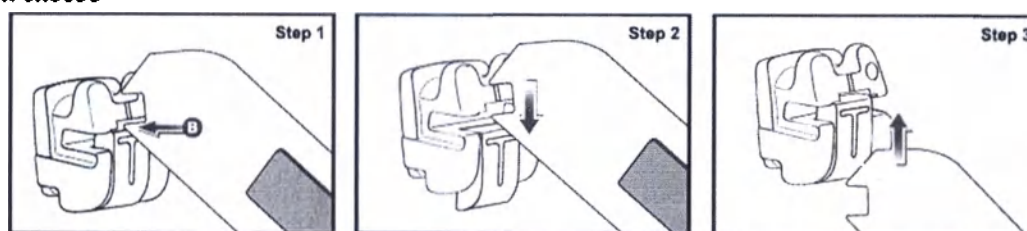

- Шаг 1: Поместите кончик В открывающего инструмента точно в отверстие над дверцей брекета.
- Шаг 2: Слегка надавливая, потяните дверцу вниз.
- Шаг 3: Чтобы закрыть дверцу, потяните ее вверх или закройте с помощью ногтя.

/Штамп/

Инструкция по снятию брекетов

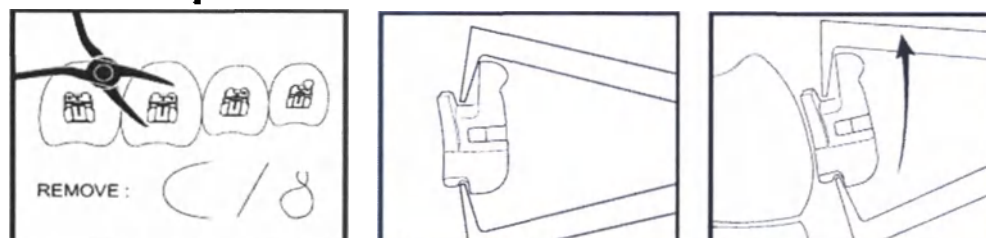

Remove	Удаление
--------	----------

Следующая процедура разработана для безопасного снятия брекетов «С-Лайн» (S-Line) с помощью универсального инструмента для снятия брекетов.

1) Удалите все лигатуры и ортодонтические дуги. Удостоверьтесь, что во время процедуры снятия брекетов пациент чувствует себя комфортно.

2) С помощью универсального инструмента для снятия брекетов захватите брекеты под окклюзионными гингивальными крючками брекета. Слегка сожмите рукоятки инструмента.

3) Поверните инструмент в направлении окклюзионного/режущего края, постепенно увеличивая усилие, пока брекеты не отойдут от зуба. Запрещается дергать, тянуть или скручивать брекеты. Рекомендуется снимать брекеты в направлении окклюзионного/режущего края.

3) После использования

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

- Изделие не подлежит повторному использованию.
- Утилизируйте изделия, снятые намеренно по причине завершения лечения или ненамеренно в результате случайных воздействий во время лечения. Данное изделие относится к категории медицинских изделий класса А в соответствии с классификацией медицинских отходов и утилизируется согласно стандартам утилизации для данного класса отходов.

Меры предосторожности

- Брекеты должен устанавливать квалифицированный врач-ортодонт.

К сведению врача:

- Используйте соответствующий брекет для каждого зуба.
- Проверяйте гигиеническое состояние изделия и наличие повреждений на изделии перед каждым использованием.
- Не прикасайтесь к брекетам руками, не допускайте контакта основания брекетов с маслом или влагой перед нанесением адгезивного материала.
- Во избежание поломки изделия, не допускайте избыточно высокого крутящего момента.
- При поломке брекетов утилизируйте их и используйте новое изделие.
- Не используйте повторно поврежденные брекеты или брекеты, снятые после проведения лечения.
- При снятии брекетов не прикладывайте чрезмерных усилий во избежание повреждения зубов пациента.
- Данное изделие представляет собой брекет стандартного типа. Он может использоваться непосредственно с другими применимыми компонентами, включая проволоку, адгезивный материал и пинцет, предназначенными для применения с керамическими брекетами.
- Ортодонтическая проволока для лигирования брекета может быть изготовлена из различных материалов и быть различных размеров. Брекеты модели Roth 018 не совместимы с ортодонтической проволокой прямоугольного или круглого сечения размером 0,19 и 0,22 дюйма.

/Штамп/

- После завершения лечения удалите брекеты, скручивая их в направлении окклюзионной поверхности или десны с помощью специальных щипцов для снятия брекетов. Не прикладывайте чрезмерных усилий для снятия брекета.
- После удаления брекета утилизируйте его и никогда не используйте повторно.

К сведению пациента:

- При любом повреждении брекета немедленно обратитесь к врачу.
- Не удаляйте брекет или проволоку во время лечения.
- Не рекомендуется употреблять жевательную резинку или любые вязкие/клейкие продукты питания.
- Чистите зубы после еды.

Потенциальные потребители (в отношении возраста, диагноза и т.п.)”

- Наши потенциальные потребители – пациенты с аномалией прикуса.
- Потребители, желающие улучшить свою внешность.
- Потребители, желающие излечить мешающую аномалию прикуса.
- Потребители с нарушением артикуляции.

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

- Пациенты с повреждениями/сколами зубов в результате несчастного случая.
- Возрастных ограничений нет. Учитывается состояние зубов и кости пациента.

Побочные эффекты ортодонтического лечения

- Декальцинация поверхности зуба
- Заболевание тканей пародонта
- Резорбция корня зуба (укорочение)
- Патологии ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава)
- Рецидив
- Продолжительность и прерывание лечения

Условия транспортировки изделий

Транспортировка осуществляется при помощи крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, разработанными для каждого типа транспортного средства, при температуре от -10 до + 70 ° С и относительной влажности 50.

Стерилизация

Изделие является нестерильным. Его можно очистить спиртом перед использованием

Срок годности

10 лет; максимальный период использования после установки – 3 года.

/Штамп/

Условия хранения

Храните изделие при комнатной температуре в помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Применимый температурный режим

Температура от -10° до +70° не вызывает повреждения изделия.

Гарантия

Компания «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd.) гарантирует, что при разработке и производстве изделия соблюдались все разумные меры предосторожности. Настоящая гарантия заменяет собой и исключает любые другие гарантии, прямо не указанные в настоящем документе, выраженные прямо или подразумеваемые законодательством или иным образом, включая, помимо прочего, любые подразумеваемые гарантии товарного качества или пригодности изделия для конкретного использования. Перемещение, хранение, очистка и стерилизация изделия, так же, как и другие факторы, связанные с пациентом, а также диагностика, лечение, хирургические процедуры и прочие вопросы, выходящие за рамки контроля «Биоцетек» (Biocetec), могут напрямую влиять на само изделие и на результаты его применения. Обязательства «Биоцетек» (Biocetec) по настоящей гарантии ограничиваются только заменой изделия в тех случаях, когда выявленная неисправность является конструктивным браком производителя (это означает, что изделие не соответствует техническим параметрам, указанным в таблице № 1). «Биоцетек» (Biocetec) не несет ответственности за

/Логотип: «Биоцетек» (Biocetec) / «Биоцетек Ко., Лтд.» (Biocetec Co., Ltd)	РОССИЯ Используемые материалы
	Инструкция по применению

любые случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного изделия. «Биоцетек» (Biocetec) не принимает на себя и не уполномочивает какое-либо другое лицо принимать на себя какие-либо другие или дополнительные обязательства либо ответственность в связи с данным изделием. «Биоцетек» (Biocetec) не несет никакой ответственности в отношении изделий, подвергающихся повторному использованию или переработке, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарного качества или пригодности для предполагаемого использования, в отношении таких изделий.

Утилизация

Изделие предназначено для однократного использования. Любое повторное использование запрещено. Использованные изделия подлежат утилизации совместно с обычными отходами. Данное изделие относится к категории медицинских изделий класса А в соответствии с классификацией медицинских отходов и утилизируется согласно стандартам утилизации для данного класса отходов.

Упаковка

Комплекты ортодонтических керамических брекетов в количестве 10 штук упаковываются в пластиковые пакеты и обертываются в упаковочную серебристую фольгу. Изделия в комплектах (по 12, 16 или 20 штук) упаковываются в жесткие контейнеры из АБС-пластика.

Информация о пересмотре Дата выпуска – 08.08.2019

Производитель

Наименование компании: «БИОЦЕТЕК КО., ЛТД.» (BIOCETEC CO., LTD.)

Адрес компании: РМ 1001-1002, Ньютикасл, 108 Касан Диджитал 2-ро, Кымчхон -гу, Сеул, Южная Корея (RM 1001, 1002, New T Castle, 108 Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, South Korea)

Контактная информация:

ТЕЛ.: +82 2 704 2876, +82 70 8856 2890 ФАКС: +82 2 704 2877

Уполномоченный представитель

Наименование компании: АО «ИНТЕЛЛЕК-Т»

Адрес компании: 117279, Российская Федерация, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 34, помещение IV, комната 37, офис 33

Контактная информация: 8-981-849-03-43 info@intellec-t.com

/Штамп/

Подпись, печать /подпись/ /Круглая печать/

Офис 106, 2561,
Намбусунхван-ро
Сеохо-гу, Сеул, Корея
(Suite 106, 2561,
Nambusunhwan-ro
Seocho-gu, Seoul, Korea)

/Штамп/

ЦЕНТРАЛЬНОЕ бюро по вопросам
интеллектуальной собственности и
права (CENTRAL Intellectual Property
& Law)

Тел. 02-733-4813
Факс 02-3487-4848

Регистрационный № 2019 – 7502

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ХИ СЬЮ ДЖИН (HEE SUE JIN)

доверенное лицо компании
«БИОЦЕТЕК Ко., Лтд.» (BIOCETEC Co., Ltd.)
Юн Сон Хи (SUNG HEE YOON) / Генеральный директор

явился ко мне и признал подпись указанного руководителя в прилагаемой Инструкции по
применению.

Настоящим засвидетельствовано сегодня,
17 сентября 2019 г. по месту нахождения настоящего офиса.

/Штамп/

ЦЕНТРАЛЬНОЕ бюро по вопросам интеллектуальной собственности и права
(CENTRAL Intellectual Property & Law)

Расположено по адресу: Сеульское Центральное
управление окружного обвинителя

Офис 106, 2561, Намбусунхван-ро
Сеохо-гу, Сеул, Корея
(Suite 106, 2561, Nambusunhwan-ro
Seocho-gu, Seoul, Korea)

/Штамп/

/подпись/
Адвокат
ЮН ХУН ЛИ (JOON HOON LEE)

Настоящая контора уполномочена Министром юстиции Республики Корея (Republic of Korea)
осуществлять деятельность в качестве нотариуса, начиная с 7 мая 2009 г. в соответствии с Законом №
16.

210 мм x 297 мм
Стандартный лист (1-й сорт) 70 г/м²

АПОСТИЛЬ
(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: Республика Корея (Republic of Korea)

Настоящий официальный документ

2. был подписан (кем) **ЮН ХУН ЛИ (JOON HOON LEE)**
3. выступающим в качестве **нотариуса**
4. скреплён печатью / штампом **ЦЕНТРАЛЬНОГО** бюро по вопросам интеллектуальной собственности и права (**CENTRAL Intellectual Property & Law**)

Удостоверено

5. в Сеуле (Seoul)
7. (кем) Министерством юстиции
8. за № **ХХА2019І6ZВ39R**

6. 17.09.2019

9. Печать/штамп

10. Подпись
/подпись/
Ким Джае-ил (Kim Jae-il)

/Круглая гербовая печать:
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ *
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/

Перевод документа выполнен переводчиком Куриловой Светланой Леонидовной

Handwritten signature

Российская Федерация

Город Москва.

Седьмого октября две тысячи девятнадцатого года.

Я, Якушенко Евгения Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Куриловой Светланы Леонидовны.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.


Зарегистрировано в реестре: № 77/721-н/77-2019-

Handwritten: 4-22610

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера:

200 руб. 00 коп.

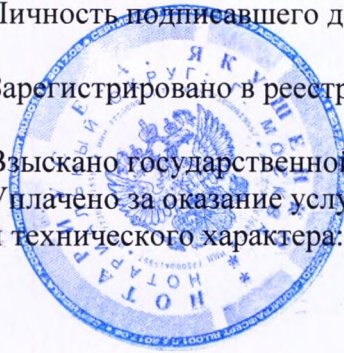

Е.А. Якушенко

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью *56* (в)
Е.А. Якушенко