

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нестерильные хирургические инструменты для сердечно-сосудистой хирургии Pilling

ПОКАЗАНИЯ

Хирургические инструменты Pilling предназначены для применения при открытых операциях на сердечно-сосудистой системы. Хирургические инструменты Pilling предназначены для использования при процедурах, затрагивающих внутренние и наружные структуры сердца, сосудов и структуры окружающих тканей. Хирургу следует определить тип и размер необходимого хирургического инструментария, основываясь на собственном опыте, суждениях и потребностях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Данный продукт не предназначен для использования в других областях хирургии, кроме сердечно-сосудистой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Всегда проверяйте выравнивание браншей инструментов перед началом применения. Если это не сделано, возможно возникновение осложнений в работе инструментария во время операции. Перед началом использования уточните структурный размер необходимого инструмента.

УХОД, ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Соответствующий уход, очистка и хранение очень важны для правильного функционирования хирургического инструментария.

Все хирургические инструменты поставляются нестерильными. Инструмент должен быть очищен и простерилизован перед каждым использованием. Мойте инструменты перед стерилизацией таким же способом как и другие повторно используемые инструменты в соответствии с Вашей больничной практикой.

Для безопасной и эффективной стерилизации инструментария Pilling рекомендуется следующий цикл:

Тип цикла / Температура (°F/C) / Время / Закрытый / Раскрытый

Паровая стерилизация

Превакуум / 270-275 (132-135) / 4 минуты / Закрытый или раскрытый

Превакуум / 273-279 (135-138) / 3 минуты / Раскрытый

Основной / 270-275 (132-135) / 15 минут / Закрытый или раскрытый

Основной / 250-254 (121-124) / 30 минут / Закрытый или раскрытый

Пульсирующая струя пара под давлением / 270-275 (132-135) 4 минуты

Закрытый или раскрытый