



Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО»

111123, Россия, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.20

Тел./факс: (495)380-21-47, 304-74-24

e-mail: info@appolo.ru

http://

www.appolo.ru

Инструкция по применению

изделия медицинского назначения:

Гидрогель с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах и заживления ран стерильный ГТАО-«АППОЛО»

Назначение и область применения

Гидрогель предназначен для оказания первой помощи при ожогах и заживления инфицированных ран различной этиологии.

Гидрогель обеспечивает:

обезболивающее и охлаждающее действие;

антимикробное действие;

противорубцовый эффект.

Гидрогель может применяться в стационарах, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту.

Характеристики.

Состав: полимерный гидрогель, анилокаин, йодовидон или мирамистин.

Гидрогель имеет однородную структуру, без комков и посторонних включений.

Масса гидрогеля составляет 5г и 20 г.

Поглотительная способность – 0,4 г/г геля.

Содержание полимера – (2,4 – 9,4) % масс.

Содержание анилокаина – (5,0±0,5)%.

Антимикробная активность (зона задержки роста по St. aureus.) – не менее 2 мм.

Гидрогель выпускается стерильным в герметичной упаковке из многослойного комбинированного материала (полиэтилентерфталат/ алюминиевая фольга/ полиэтилен) для геля массой 5 г; полимерная труба из ламината с алюминиевым барьерным слоем для геля массой 20 г.

Стерилизация осуществляется радиационным способом в дозе 15 кГр.

Порядок применения.

Вскрыть упаковку. Нанести гель на поврежденную поверхность слоем 1 – 2 мм. Для усиления охлаждающего и обезболивающего эффекта можно не прикрывать.

Противопоказание: индивидуальная непереносимость анилокаина, йодовидона и мирамистина.

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше +25°C.

Гарантийный срок хранения геля – 5 лет с даты стерилизации.

Генеральный директор



А.Н. Пищуров