

Инструкция по применению шприцев инъекционных

1. проверьте целостность потребительской тары и срок годности шприца инъекционного.
2. вскройте потребительскую тару и извлеките шприц инъекционный.
3. оденьте иглу на шприц.
4. снимите колпачок с иглы.
5. обработайте ампулу (емкость с лекарственным средством) асептическим раствором.
6. введите иглу в емкость с лекарственным средством.
7. наберите в инъекционный шприц лекарственное средство.
8. поверните шприц вертикально иглой вверх (для удаления воздуха)
9. обработайте инъекционную поверхность асептическим раствором.
10. введите иглу (в мышцу, под кожу)
11. введите лекарственное средство, согласно рекомендации к каждому лекарственному средству.
12. извлеките шприц
13. обработайте место укола асептическим раствором.

СТЕРИЛЬНО. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО

Утилизацию шприцев проводить в соответствии с национальными требованиями.

Директор ООО «Спектр»
Ермошенко Р.О.

