



Утверждаю

Генеральный директор
ООО «Спектр»
Романенков Д.А.

Инструкция по применению

Устройство для вливаний крови, кровезаменителей, инфузионных растворов с иглой, без иглы CHIRAPLUS-G, CHIRAPLUS-P, CHIRANEM, CHIRANEM-SPIKE
«Хирана Т. Инжекта а.с.» (CHIRANA T. Injecta a.s.) Словацкая Республика

Проверьте пригодность крови, кровезаменителя, инфузионного раствора, к применению.

Перемешайте кровь в бутылке. Обработайте пробку спиртом, йодом или другим антисептиком.

1. проверьте целостность потребительской тары и срок годности устройства.
2. вскройте потребительскую тару и извлеките устройство.
3. закройте зажим. Снимите колпачок с иглы для подключения к бутылке. Введите иглу в пробку бутылки на 2/3 длины иглы.
4. переверните бутылку и закрепите ее на штативе.
5. заполните капельницу до погружения фильтра в трансфузионную среду, периодически надавливая на нижнюю часть ее корпуса.
6. сбросьте избыточное давление из бутылки. Для чего снимите колпачок с иглы инъекционной. Откройте зажим. Заполните трансфузионной средой трубку устройства, при этом игла должна находиться на уровне капельницы.
7. закройте зажим. Наденьте колпачок на иглу.
8. снимите колпачок с иглы воздуховода. Введите иглу в пробку бутылки до упора.
9. Снимите колпачок с иглы инъекционной
10. Откройте зажим и медленно заполните устройство до полного вытеснения воздуха и появления капли из иглы инъекционной. Закройте зажим. Наденьте колпачок на иглу инъекционную.
11. Проверьте отсутствие пузырьков воздуха в трубке устройства.
12. Обработайте место венепункции антисептиком.
13. Снимите колпачок с иглы инъекционной и произведите венепункцию.
14. Откройте зажим и отрегулируйте скорость переливания. 20 капель дистиллированной воды соответствует $(1,0 \pm 0,1)$ г.
15. Вводите дополнительные медикаменты только через инъекционный узел, применяя иглы диаметром не более 0,8 мм при закрытом зажиме.
16. При смене бутылки закройте зажим, не извлекая инъекционную иглу из вены и не допуская опорожнения капельницы, извлеките иглы и из опорожненной бутылки и быстро введите в пробку наполненной бутылки вначале иглу (для раствора), а затем иглу (компенсационную)

СТЕРИЛЬНО. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО

Не применять при нарушении целостности потребительской тары.

Утилизацию устройства проводить в соответствии с национальными требованиями.