

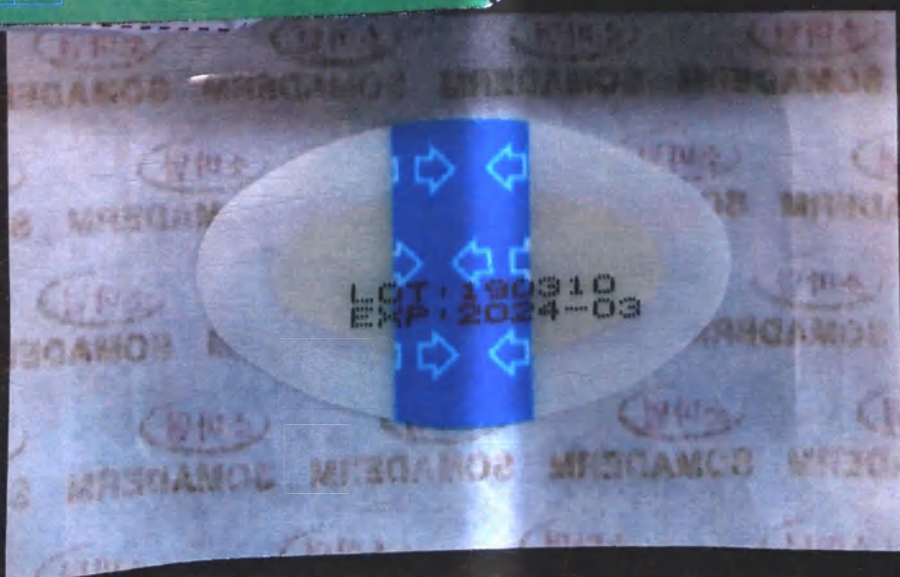
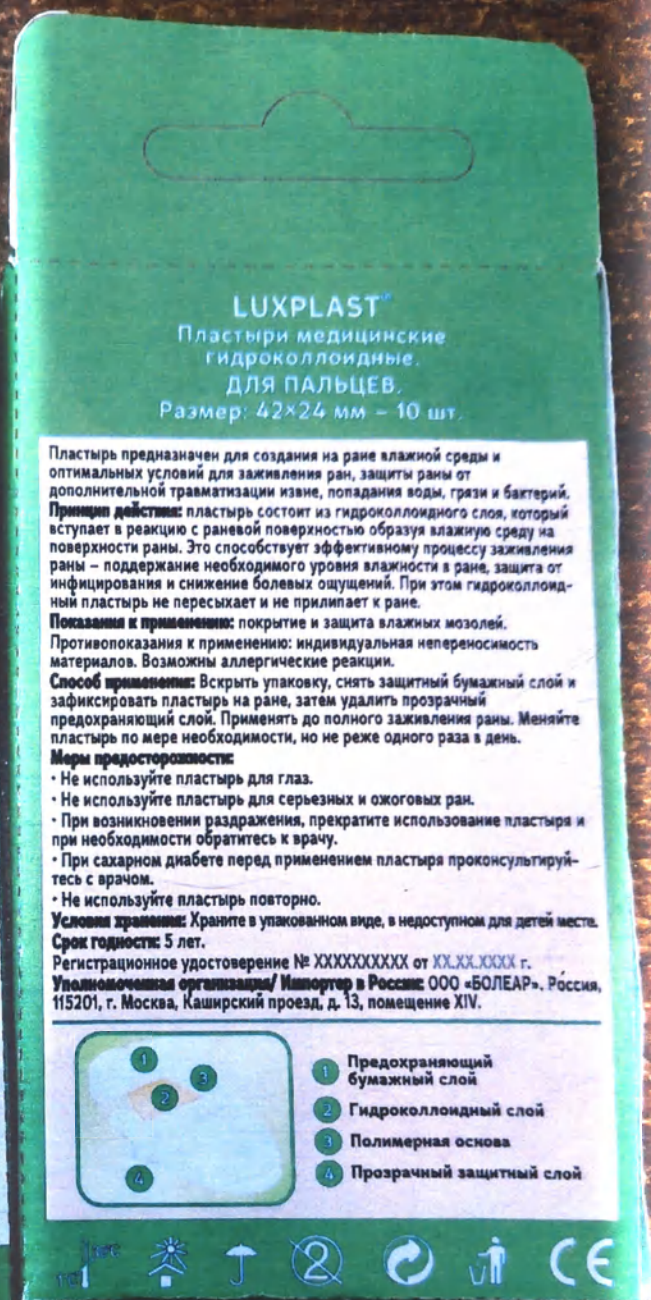


шари медицинские гидроколлоидные LUXPLAST для пальцев

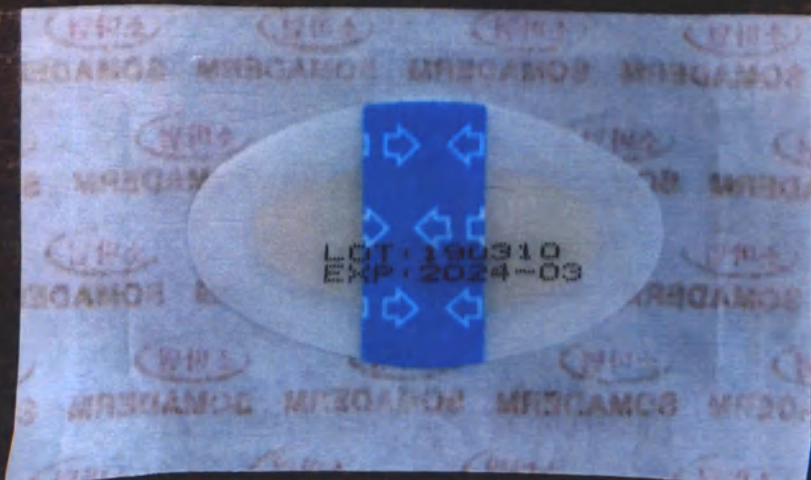

пластыри медицинские гидроколлоидные LUXPLAST на мозоль

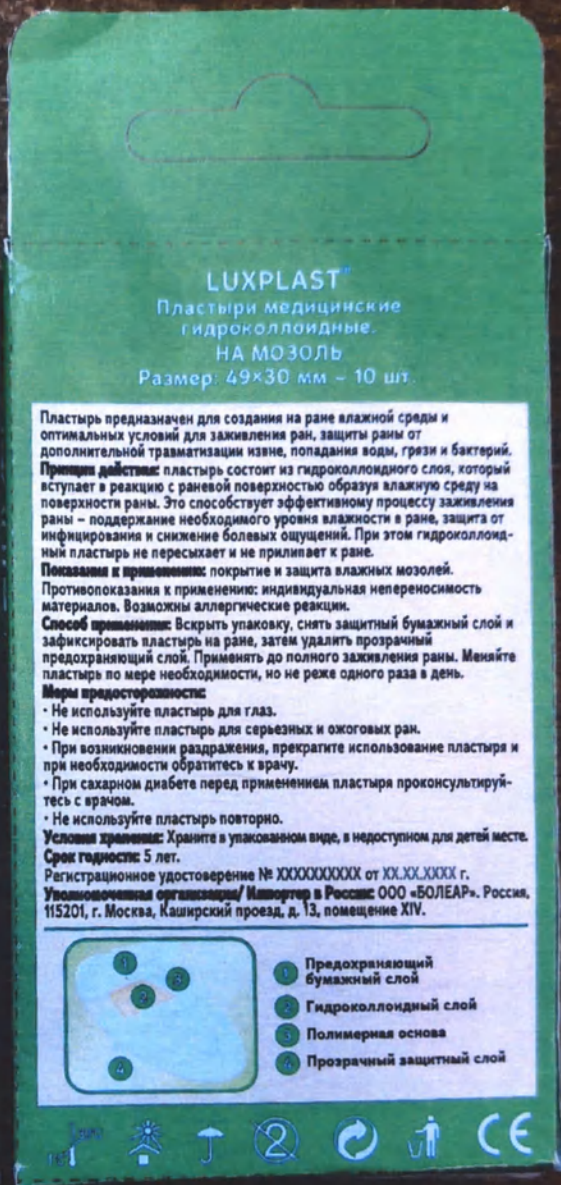

пластыри медицинские гидроколлоидные LUXPLAST от влажных мозолей

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
ГИДРОКОЛЛОИДНЫЕ

10
шт.

ОТ ВЛАЖНЫХ
МОЗОЛЕЙ

LUXPLAST®

59x34 мм

STERILE EO

LUXPLAST®

Пластыри медицинские
гидроколлоидные.
ОТ ВЛАЖНЫХ МОЗОЛЕЙ

Размер: 59x34 мм – 10 шт.

Пластырь предназначен для создания на ране влажной среды и оптимальных условий для заживления ран, защиты раны от дополнительной травматизации извне, попадания воды, грязи и бактерий. **Принцип действия:** пластырь состоит из гидроколлоидного слоя, который вступает в реакцию с раневой поверхностью образуя влажную среду на поверхности раны. Это способствует эффективному процессу заживления раны – поддержание необходимого уровня влажности в ране, защита от инфицирования и снижение болевых ощущений. При этом гидроколлоидный пластырь не пересыхает и не прилипает к ране.

Показания к применению: покрытие и защита влажных мозолей.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Способ применения: Вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на ране, затем удалить прозрачный предохраняющий слой. Применять до полного заживления раны. Менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в день.

Меры предосторожности:

- Не используйте пластырь для глаз.
- Не используйте пластырь для серьезных и ожоговых ран.
- При возникновении раздражения, прекратите использование пластыря и при необходимости обратитесь к врачу.
- При сахарном диабете перед применением пластыря проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте пластырь повторно.

Условия хранения: Храните в упакованном виде, в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, помещение XIV.



- 1 Предохраняющий бумажный слой
- 2 Гидроколлоидный слой
- 3 Полимерная основа
- 4 Прозрачный защитный слой

LOT: 190310
EXP: 2024-03

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

5 (пяти) листа(ов)

Генеральный директор
ООО "БОЛЕАР"

Б.В.Денисов

